

 **Bee** BEE BRAND  
MEDICO DENTAL

## PRODUCTS CATALOG

私たちは、「信頼・新鮮・進歩」を基本として、  
歯科医療現場と家庭とを結ぶ  
信頼の架け橋になりたいと願っています。

ご開業応援グッズ  
Dr.Bee フッ化物応用アイテム ラインナップ  
フッ化物応用年齢別データ  
院内感染対策用品

## MEDICINE&OTHERS

サホライド液 歯科用 38%  
サホライド・RC液 歯科用 3.8%  
サホライドクリーナー  
フッ化ナトリウム洗口液 0.1%「ビーブランド」  
ミラノール顆粒 11%  
フルオール・ゼリー 歯科用 2%  
フルオール液 歯科用 2%  
Fパニッシュ 歯科用 5%  
ビーズカイン 歯科用ゼリー 20%  
オルテクサー 口腔用軟膏 0.1%  
キャナルクリーナー 歯科用液 10%  
歯科用TDゼット液  
歯科用TDゼット・ゼリー  
TDゼット・コード  
キャナルフィルシーラー NDU  
エコザイマー  
ナクロガードG  
エムCAE

## QUASI DRUGS&COSMETICS

ハイザック ベースト/Nリンス/Nスプレー/舌ブラシ  
うるおーら ジェル/リンス  
シロティ&ビーポリッシュ  
BMD ウォーターゲル 950F  
ポリシングペースト 1号/3号  
キャナリーナ 歯磨 900Pw  
キャナリーナ 100S

## TOOTHBRUSHES&OTHERS

Bee QUEEN 95/105  
Bee ROYAL  
Bee KING  
Dr.Bee Young II  
Dr.Bee  
Dr.Bee Young  
Dr.Bee Baby  
Dr.Bee Mamma  
Dr.Bee Kinderin  
Dr.Bee Junior  
Bee Apian  
Dr.Bee Care  
PERITECT V 6M/8M  
Dr.Bee 歯間ブラシ SS/S  
歯ブラシキャップ

# ご開業 応援グッズ

形状・硬さが確認できる  
現物スペース

## Dr.Bee ディスプレイセット

収納に便利でカウンターまわりを美しく演出。

歯ブラシの大きさや種類がわかりやすい。

### セット内容

Dr.Bee ベビー	キャナリーナ 100S
Dr.Bee キンダリン	キャナリーナ 歯磨 900Pw
Dr.Bee マンマ	Dr.Bee 歯間ブラシ SS/S
Dr.Bee ヤング II M	
Bee クイーン 95	
Bee クイーン 105	



サイズ：幅 160mm×高さ 395mm×奥行き 195mm  
参考医院価格：¥8,462(税別)

## ハイザックNディスプレイセット

### セット内容

ハイザックペースト	——	3本
ハイザックNスプレー	——	4本
ハイザックNリンス	——	2本

### サービス品

ハイザック専用リーフレット	——	10枚
ディスプレイケース	——	1台



サイズ：幅 210mm×高さ 265mm×奥行き 128mm  
参考医院価格：¥9,500(税別)

## ハイザックコンプリートセット

### セット内容

ハイザックペースト	——	3本
ハイザックNスプレー	——	4本
ハイザックNリンス	——	2本

### サービス品

ハイザック専用リーフレット	——	10枚
ディスプレイケース	——	1台
ハイザック舌ブラシ	——	6本 (ピンク、ブルー各3本)



サイズ：幅 222mm×高さ 480mm×奥行き 140mm  
参考医院価格：¥9,500円(税別)

## 歯ブラシネーム入れサービス

### 発注要項

Dr.Bee シリーズ (Bee アピアン以外)

1種類 200本(10箱)以上	——	初回版代 5,000円
1種類 400本(20箱)以上	——	初回版代 無料
1種類 200本以上2種類合わせて 400本以上	——	初回版代 無料

※Bee アピアンは以下条件にてネーム入れサービス

150本(5箱)以上	——	初回版代 5,000円
300本(10箱)以上	——	初回版代 無料

ロイヤル、クイーン、キング シリーズ

1種類 200本(10箱)以上	——	初回版代 無料
-----------------	----	---------

【納期】・新規ご注文の場合 → 弊社受注日より約4週間  
・2回目以降 → 弊社受注日より約3週間

※ PERITECT V シリーズへのネーム入れはできません。

新規ご開業の記念品に  
オリジナル歯ブラシを。



◎ 歯みがき指導リーフレット

インフォード  
コンセントに

# フッ化物 応用アイテム ラインナップ

## フッ化物局所応用でいつまでも健康な歯を！

一生涯健康な歯。そのためには継続したう蝕予防が必要です。  
弊社では全てのライフステージにおいて、継続的なフッ化物の局所応用を推奨いたします。

### HOME CARE

医療用医薬品

う蝕予防フッ化物洗口液  
フッ化ナトリウム  
洗口液 0.1%  
「ビーブランド」



フッ化物イオン濃度 (使用時) 250~450ppmF

### HOME CARE PUBLIC CARE

医療用医薬品 劇薬

う蝕予防フッ化物洗口剤  
ミラノール顆粒 11%



フッ化物イオン濃度

毎日法の場合 (200mLの水で溶解)	週1回法の場合 (1.8g 分包を 100mLの水で溶解)
1g 分包: 250ppmF 1.8g 分包: 450ppmF	900ppmF

### HOME CARE

医薬部外品

歯磨剤  
BMD ウォーターゲル 950F



- スカイミント
- ピーチ
- グレープ

フッ化物イオン濃度 950ppmF

医薬部外品

歯磨剤  
キャナリーナ 100S



- マスカットフレーバー
- ストロベリーフレーバー
- アップルフレーバー

フッ化物イオン濃度 100ppmF

医薬部外品

歯磨剤  
キャナリーナ歯磨 900Pw

- ペパーミントフレーバー



フッ化物イオン濃度 900ppmF

### PRO CARE

医療用医薬品

う蝕予防フッ化物歯面塗布剤  
フルオール・ゼリー歯科用 2%

- リン酸酸性フッ化ナトリウム (APF) ゼリー
- 約 pH3.5
- アップルフレーバー



フッ化物イオン濃度 9000ppmF

医療用医薬品

う蝕予防フッ化物歯面塗布剤  
フルオール液歯科用 2%

- リン酸酸性フッ化ナトリウム (APF) 溶液
- 約 pH3.5



フッ化物イオン濃度 9000ppmF

# 乳幼児から高齢者まで、フッ化物応用でう蝕を予防しましょう。

年齢	DMFT	う蝕有病者率	萌出時期	状況	プロケア	ホームケア	フッ化物応用効果データ
1			乳中切歯	乳歯:酸抵抗性が低い 哺乳ビンう蝕			<p>う蝕有病者率</p> <p>一人平均 dmft</p> <p>1歳より歯磨き指導 フッ化物溶液による歯磨きによる歯磨き</p> <p>フッ化物溶液による歯磨きの導入と2歳6ヶ月児の一人平均 dmft の年次推移</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇1986年より幼児のう蝕予防の取り組みを開始</li> <li>→1歳より歯磨き指導とおやつ指導</li> <li>◇フッ化物溶液による歯磨きによるう蝕予防効果</li> <li>→1991年より1分間のフッ化物溶液歯磨き開始</li> <li>・フッ素濃度:100ppm</li> <li>・溶液3ccに歯ブラシの毛を数回浸す</li> </ul> <p>※乳幼児における乳歯う蝕の改善について 田浦勝彦 他:口腔衛生学会誌 Journal of Dental 45, 56-563 (1995)</p>
2			乳側切歯		フッ化物塗布 [年2回~4回] 検診:1才半・3才児	ブクブクうがいができない 時期:1才~3才頃	
3		25%	第1乳臼歯	ブラッシング 慣れる→習慣付けへ			
4		34.8%	乳犬歯	乳歯列 隣接が面接触			
5		50%	第2乳臼歯			フッ化物洗口開始 毎日の予防手段 1日1回の洗口	
6			第1大白歯				<p>弥彦小学校では 保育園から 小学6年間の継続で</p> <p>DMFT 1本以下に</p> <p>小学学習におけるフッ化物洗口法による17年間のう蝕予防効果 横 栴:口腔衛生学会誌・Journal of dental health 38,116-126 (1988)</p> <p>■小学校において6年間フッ化物歯所応用法を実施した 児童の20歳におけるう蝕予防効果</p> <p>DMFTの推移</p> <p>男性</p> <p>75, '81, '87</p> <p>4.18, 11.06</p> <p>フッ化物洗口群</p> <p>対照群</p> <p>可児雅夫 他:口腔衛生学会誌・Journal of dental health 41,738-740 (1991)</p> <p>■日本とスウェーデンにおける19歳のDMFTの推移</p> <p>9.6, 8.5, 9.2</p> <p>3.6</p> <p>WHO公式ホームページより抜粋</p> <p>■成人におけるフッ化物応用によるう蝕予防効果</p> <p>2年間に増えたう蝕面数</p> <p>前歯平滑面 臼歯小窩裂溝 臼歯平滑面</p> <p>対照群 フッ化物洗口群</p> <p>郡司島 由香 口腔衛生学会誌・Journal of Dental Health 47,281-291 (1997)</p>
7			中切歯	混合歯列期 ブラッシングが困難	萌出間もない幼若な 歯質を強化!		
8			側切歯				
9			犬歯				
10			第1小白歯				
11		42.1%	第2小白歯				
12	1.4	45.9%	第2大白歯				
13			萌出完成				
14							
15							
16		63.7% (15~19才)		う蝕が急増する時期	中学→成人:継続的な予防が必要 フッ化物塗布 PMTC	フッ化物洗口	
17							
20	5.9	89.9% (20~24才)					
60	18.1	96.6% (60~64才)		残歯数:22.5本 歯肉退縮-根面う蝕 唾液分泌低下			
80				残歯数:12.2本			

※ DMFT, う蝕有病者率, 残歯数  
平成23年度厚生労働省歯科疾患実態調査より

## 院内感染 対策用品

### 歯科用器具洗浄剤 エコザイマー

#### 成分

タンパク質分解酵素、非イオン界面活性剤、  
陰イオン界面活性剤、防錆剤

#### 容量

4L



### 器具除菌洗浄液 ナクロガード G

#### 成分

次亜塩素酸ナトリウム配合 2400ppm～3000ppm

#### 容量

4L 10L



### 歯科用小器具洗浄液 エム CAE

#### 成分

高級アルコール系界面活性剤  
非イオン系界面活性剤 CAE  
無機塩類

#### 容量

2L 20L



## MEDICINE&OTHERS 医薬品他

### 医薬品

サホライド液 歯科用 38%  
サホライド・RC液 歯科用 3.8%  
サホライドクリーナー  
フッ化ナトリウム洗口液 0.1%「ビーブランド」  
ミラノール顆粒 11%  
フルオール・ゼリー 歯科用 2%  
フルオール液 歯科用 2%  
Fバニッシュ 歯科用 5%  
ビーズカイン 歯科用ゼリー 20%  
オルテクサー 口腔用軟膏 0.1%  
チャンネルクリーナー 歯科用液 10%  
歯科用TDゼット液  
歯科用TDゼット・ゼリー

### その他

TDゼット・コード  
チャンネルフィルシーラー NDU  
エコザイマー  
ナクロガードG  
エムCAE

う蝕進行抑制・象牙質知覚過敏鈍麻剤

## ■ サホライド液歯科用 38% SAFORIDE

※必ず添付文書をお読みのうえ、ご使用ください。

初期う蝕の進行抑制、知覚過敏に



### 効能 効果

初期う蝕の進行抑制、二次う蝕の抑制、象牙質知覚過敏症の抑制。  
(象牙質鈍麻)


### 特長

- 銀による蛋白固定、フッ化物による不溶性塩の生成により、象牙細管を閉塞し、う蝕の進行を抑制します。
- 治療が困難な小児、来院の難しい高齢者の方にもお使いいただけます。
- 支台歯に塗布し二次う蝕の予防に。
- 黒くなることにより、う蝕部位が明瞭になります。

### 使用上の注意

- 1 基本的注意  
本剤の適用により、銀の沈着で象牙質が黒変するので、永久歯の前歯への適用は避けること。
- 2 慎重投与(次の場合には慎重に適用すること)  
深在性う蝕に塗布した場合、歯髄障害をおこすことがあるので、本剤をうすめて塗布するかあるいは塗布を避けること。

### サホライドによる象牙細管封鎖効果

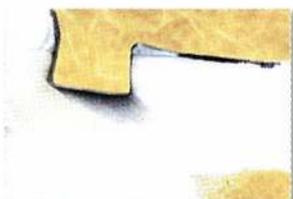

サホライド塗布窩洞



対照側窩洞

### 成分

1mL 中 フッ化ジアンミン銀 380mg

### 包装

5mL

### 参考医院価格(税別)

¥4,370

根管治療剤

■ サホライド・RC 液 歯科用 3.8% SAFORIDE・RC

※必ず添付文書をお読みのうえ、ご使用ください。

殺菌作用と残根の強化に



使用方法

- 1 根管の拡大、清掃後、綿栓又はペーパーポイントに本剤を数滴浸し、根管内に挿入し、仮封を行う。
- 2 根管内細菌培養検査で陰性を得るまで、上記治療を繰り返す。

効能効果

根管治療(根管の消毒)

特長

- 銀の極微動作用による殺菌作用、二次感染の抑制
- 細管・副根管に対する優れた深達性
- 象牙細管の封鎖効果

成分

1mL 中 フッ化ジアンミン銀 38mg

包装

5mL

参考医院価格(税別)


¥2,350

サホライド・現像液・定着液用シミ抜き

■ サホライドクリーナー SAFORIDE CLEANER



サホライドクリーナー使用例

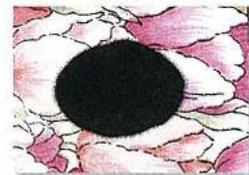

作用

サホライド・現像液・定着液用シミ抜き

特長

- サホライドや現像液・定着液の付着による銀化合物のシミを溶かし出して除去します。
- 時間の経ったシミでもきれいに除去できます。

参考医院価格(税別)

¥2,800

う蝕予防フッ化物洗口液

# ■ フッ化ナトリウム洗口液 0.1% 「ビーブランド」 BEE BRAND

溶かす手間がいない液体タイプ

HOME CARE

※必ず添付文書をお読みのうえ、ご使用ください。



う蝕の予防

特徴

計量カップ  
(目盛り) 付き

患者様の状態に合わせた希釈が可能です。

さわやかな  
リンゴ味

薄いブルーの薬液でさわやかなリンゴ味を採用。




フッ化物イオン濃度 [450ppmF]

## 洗口液の作り方

安全にお使いいただくため、患者さまの洗口に合わせた計量・希釈方法をお示しください。

 原液を5～10mL使用する場合

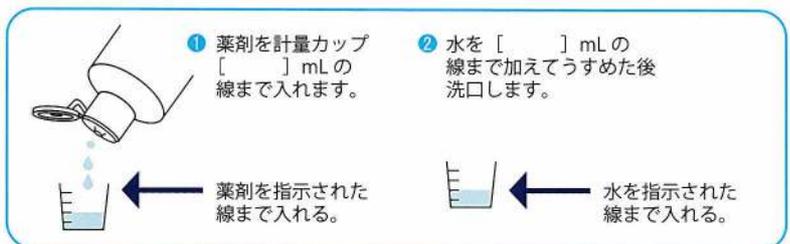 うすめた液を5～10mL使用する場合


個装箱側面に「洗口液の作り方」を載せております。患者さまへ指導される際にご利用ください。

## 洗口方法

-  歯をよく磨き、汚れをおとします
-  うつむいてブクブクうがいを約30秒間おこないます
-  液をはき出します

1日1回、5～10mLを口に含み約30秒間洗口します。

## 保存方法

直射日光をさげ、室温(1℃～30℃)で保管してください。

## 継続しやすい液体タイプのフッ化物洗口剤

フッ化物イオン濃度(使用時) 250～450ppmF

有効成分

100mL中フッ化ナトリウム0.10g

包装

250mL(ポリエチレン製容器)

参考医院価格(税別)

¥648

う蝕予防フッ化物洗口剤

■ **ミラノール顆粒 11%** MIRANOL

低コストかつ手軽に効果的なフッ化物洗口を！

HOME CARE PUBLIC CARE  
※必ず添付文書をお読みのうえ、ご使用ください。



う蝕の予防



フッ素には歯質の強化（フルオロアパタイトの生成）、結晶の質的改善による耐酸性の向上や酸産生の抑制（抗菌作用、抗酵素作用）といった作用のあることが知られています。本剤の洗口液は、歯のすみずみまで素早く行きわたるよう、また、歯へのフッ素の取り込みを促すよう製剤設計されており、う蝕予防を実現します。

洗口液の作り方

毎日法の場合（ご家庭用）  
（250～450ppmF）

週1回法の場合（学校・集団用）  
（900ppmF）

- ① 1包を溶解瓶へ ② 200mLの水で溶解 ③ よく振って溶かす  
1.8g 分包（ピンク）は約 450ppmF、  
1g 分包（黄色）は約 250ppmF の洗口液となります。

- ① 1.8g 分包（ピンク）1包を溶解瓶へ ② 100mLの水で溶解 ③ よく振って溶かす  
1.8g 分包（ピンク）を 100mLの水で溶解すると約 900ppmF の洗口液となります。

用法・用量

ミラノール顆粒 11%の量	用法	水の量	洗口液		
			フッ化ナトリウム濃度	フッ化物イオン濃度	1mL中のフッ化ナトリウムの量
1包 1g (黄色分包)	毎日法	200mL	0.055%	約 250ppm	0.55mg
1包 1.8g (ピンク色分包)	毎日法	200mL	0.099%	約 450ppm	0.99mg
1包 1.8g (ピンク色分包)	週1回法	100mL	0.198%	約 900ppm	1.98mg

【毎日法】  
通常フッ化ナトリウムとして 0.05～0.1% 溶液 5～10mL を用い、1日1回食後又は就寝前に洗口する

【週1回法】  
通常フッ化ナトリウムとして 0.2% 溶液 5～10mL を用い、週1回食後又は就寝前に洗口する

推奨使用法

家庭での洗口	毎日法		
集団での洗口	未就学児	毎日法	
	学齢期	週1回法	毎日法

※家庭内の洗口は【毎日法】が、  
集団応用については【未就学児では毎日法】、【学齢期以上では週1回法及び毎日法】が推奨されています。

有効成分

1g 中 フッ化ナトリウム 110mg

包装						溶解ビン(計量カップ付)	計量カップ	集団洗口専用溶解瓶
参考医院価格(税別)						参考医院価格(税別)	参考医院価格(税別)	参考医院価格(税別)
1g×90包	1g×180包	1.8g×90包	1.8g×180包	1.8g×450包	1.8g×1080包	10本入	1個	1本
¥5,500	¥10,000	¥6,700	¥12,200	¥27,500	¥31,500	¥2,000	¥30	¥500
参考患者価格(税別)						参考患者価格(税別)	参考患者価格(税別)	
						1本	1個	
						¥220	¥35	

フッ化物歯面塗布剤

## ■ フルオール・ゼリー歯科用 2% FLUOR JELLY

PRO CARE

さわやかなリンゴの香りで快適な塗布を！

※必ず添付文書をお読みのうえ、ご使用ください。



効能  
効果

う蝕の予防

特長

- さわやかなリンゴの香り
- 塗布操作が容易なゼリータイプ
- 最後まで使えるラミネートチューブ
- Brudevold 第2処方 APF 溶液のゼリー化

世界的に臨床応用されている Brudevold 第2処方 APF 溶液を日本で初めてゼリー化に成功しました。

リン酸酸性フッ化ナトリウムゼリー フッ化物イオン濃度 9000ppmF pH 約 3.5

有効成分

1g 中 フッ化ナトリウム 20mg

用法・用量

通常、歯面に対し年間 1~2 回実施する。

包装

100g(ポリエチレン製チューブ入り)

参考医院価格(税別)

¥1,680

フッ化物歯面塗布剤

## ■ フルオール液歯科用 2% FLUOR

PRO CARE

※必ず添付文書をお読みのうえ、ご使用ください。



効能  
効果

う蝕の予防

2%NaFのリン酸酸性フッ化ナトリウム(APF)溶液で、年1~2回の塗布でう蝕を防ぐ効果があります。う蝕多発傾向者への適用では、**保険請求**が可能です。

有効成分

1mL 中 フッ化ナトリウム 20mg

包装

100mL(ポリエチレン製容器)

参考医院価格(税別)

¥1,680

劇薬  
医療用医薬品

象牙質知覚過敏鈍麻剤

## ■ F バニッシュ歯科用 5% F VARNISH

知覚過敏症の治療に



効能  
効果

象牙質知覚過敏の抑制  
(知覚鈍麻)

特長

- 薬効成分が象牙細管を封鎖し知覚過敏を抑制する
- 唾液により、NaFを徐々に溶解し象牙細管を封鎖する

有効成分

1g 中フッ化ナトリウム 50mg

包装

3g(アルミチューブ入り)

参考医院価格(税別)

¥2,460

使用方法



患歯を清掃後、簡易防湿を施し、綿花にて清拭する。



スパーテルの先で適量のFバニッシュを取り、患部を覆うように貼布します。



小綿球などで水を滴下し、Fバニッシュの表面を固化させます。この状態で4~6時間付着させ、固形物の摂取やブラッシング、舌による物理的剥離をさけるようにします。  
(※剥離片は吐き出すこと)

※必ず添付文書をお読みのうえ、ご使用ください。

歯科用表面麻酔剤

## ■ ビーゾカイン歯科用ゼリー 20% BEEZOCAINE JELLY

医療用医薬品



効能  
効果

歯科領域における表面麻酔

特長

- 短時間(30秒)で麻酔作用を現し、適度な持続時間(約5分)が得られます
- ゼリー状のため塗布操作及び量の確認が容易です
- 薬剤は青色で塗布部位が確認しやすい
- ベンゼトニウム塩化物配合で、製剤は抗菌作用を有しています
- 小児好みのバナナ風味をつけています
- 適量を取りやすく余すことなく使い切れるノズルタイプのラミネート加工ポリエチレンチューブです

※必ず添付文書をお読みのうえ、ご使用ください。

有効成分

100g 中 日局アミノ安息香酸エチル 20.0g

包装

20g(ポリエチレンチューブ入り)

参考医院価格(税別)

¥2,240

口腔粘膜治療剤

## ■ オルテクサー口腔用軟膏 0.1% ORTEXER

医療用医薬品

淡いレモン風味



効能  
効果

慢性剥離性歯肉炎、  
びらん又は潰瘍を伴う難治性口内炎及び舌炎

特長

- トリアムシノロンアセトニド(合成副腎皮質ホルモン)配合で抗炎症効果に優れています
- 口腔粘膜に対する付着が良好です
- 淡いレモン風味で不快感を和らげます
- 保険請求ができます

※必ず添付文書をお読みのうえ、ご使用ください。

有効成分

100g 中 日局トリアムシノロンアセトニド 100mg

包装

5g(アルミチューブ入り)

根管清掃剤

# ■ キャナルクリーナー 歯科用液 10% CANAL CLEANER

粘性のある次亜塩素酸ナトリウム製剤を実現

医療用医薬品

※必ず添付文書をお読みのうえ、ご使用ください。



力を加えると粘性が低下し、流動性が増加。  
チキソトロピー性を有するペーストです。

**効能  
効果**

齶窩及び根管の清掃、  
消毒及び内容物の溶解

**特長**

- 粘性を有しているため搬送が容易
- 患部からの薬剤流出が軽減
- 潤滑作用の増大
- 上顎歯根管への操作性が向上
- クリアな状況での拡大形成が可能
  1. ペーストに汚れが含まれる
  2. 根尖孔付近に汚れが沈み込みにくい

**有効成分**  
1mL 中次亜塩素酸ナトリウム 100mg

**包装**  
30mL

**参考医院価格 (税別)**  
¥1,680

口腔内局所止血剤

# ■ 歯科用 TD ゼット液 TDZ

抗菌・局麻作用を兼ね備えた局所止血剤

創薬

医療用医薬品

※必ず添付文書をお読みのうえ、ご使用ください。



**有効成分**

100mL 中  
塩化アルミニウム 25g  
セチルピリジニウム塩化物水和物 0.5g  
日局リドカイン 5.25g

**包装**

10mL (ガラス製容器)

**参考医院価格 (税別)**

¥3,700

**効能  
効果**

- 次の場合の止血に用いる
- 歯肉縁下の支台歯形成・窩洞形成時又は印象採得時の歯肉圧排における出血
  - 歯肉整形

**特長**

- 塩化アルミニウム (AlCl<sub>3</sub>) の収斂作用による局所止血剤
- セチルピリジニウム塩化物水和物含有により止血効果を促進
- 血液凝固作用  
本剤の血液凝固時間は60秒以内で、25%塩化アルミニウム水溶液に比較し凝固時間は1/15に短縮された。(動物実験において)
- 止血効果  
1回塗布 1分以内の止血 58.3%  
1回塗布 3分以内の止血 33.3%  
※歯界展望 第57巻第1号「歯科用TDZの臨床成績」P.191 表3より
- TDゼットの止血効果の有効性  
本剤の止血効果は、エピネフリン0.1%含有の対照薬に対し、1%の危険率で有意な差が認められた。
- 抗菌・消毒・局麻作用  
セチルピリジニウム塩化物水和物含有による抗菌作用  
リドカイン含有による局麻作用

表3 処置別有効率  
止血状態

処置 効果	歯肉整形		歯肉圧排		計	
	症例数	%	症例数	%	症例数	%
著効	11	55	3	75	14	58.3
有効	7	35	1	25	8	33.3
やや有効	1	5	0	0	1	4.2
無効	1	5	0	0	1	4.2
悪化	0	0	0	0	0	0
有効率	18/20	90	4/4	100	22/24	91.7

歯界展望 第57巻第1号別刷 歯科用TDZ臨床成績P.191 表3

著効:1回塗布にて即時(約1分程度)に止血 無効:止血しなかった  
有効:1回塗布にて止血(約3分程度) 悪化:出血が増えた  
やや有効:2回以上の塗布で止血

口腔内局所止血剤

■ 歯科用 TD ゼット・ゼリー TDZ JELLY

滞留性のある局所止血剤

※必ず添付文書をお読みのうえ、ご使用ください。



有効成分

100g 中  
塩化アルミニウム 25g  
セチルピリジニウム塩化物水和物 0.5g  
日局リドカイン 5.25g

包装

10g(ポリエチレン製容器)

参考医院価格(税別)

¥3,940

効能  
効果

歯科領域における口腔粘膜損傷の小出血の止血

特長

ゼリー化により操作性がUP

- 使用量の確認が容易
- 適用部以外への流出リスクの軽減
- 塗布操作が容易(上顎患部への塗布が容易に)

甘味・香料を添加。

小児領域での使用がしやすくなりました。

- 酸味・苦みを抑える
- 使用感が良好

歯肉圧排用綿糸

■ TD ゼット・コード TDZ CODE

※必ず添付文書をお読みのうえ、ご使用ください。

医療機器届出番号:25B2X00018000001



使用  
目的

印象採得のために行う歯肉圧排時に用いる

特長

- 綿糸を青緑色に着色し、歯肉との判別が容易
- 滲出液の吸収が速やか

成分・分量

100g 中  
塩化アルミニウム 27.5g  
セチルピリジニウム塩化物水和物 0.55g  
日本工業規格 20 番手 6 本撚り  
または 4 本撚りの青緑色綿糸

包装

S・M 各 1 瓶 200cm  
S:約0.8mmφ(4本撚り) M:約1.2mmφ(6本撚り)

参考医院価格(税別)

¥3,080

器具除菌洗浄液

## ■ ナクロガード G

新配合防錆剤による優れた防錆効果と強力な洗浄 & 除菌作用を実現！



**洗浄効果**

目に見えないタンパクや油脂成分を強力に分解洗浄

**除菌効果**

次亜塩素酸ナトリウム 3000ppm の確かな除菌作用

**防錆効果**

新配合防錆剤（オルトケイ酸 Na）による優れた防錆

**低付着残留性**

防錆剤による器具類への付着物の軽減

**医療器具の除菌と洗浄に**

- タンパク分解作用により血液・唾液を強力洗浄
- 原液使用で希釈の手間なし
- 液の交換は1週間に1度

**4L**

- 開封後はお早めにご使用ください
- 直射日光下の保存は避けてください

**成分**

次亜塩素酸ナトリウム配合  
(2400ppm～3000ppm)

**包装**

4L(幅 19×高さ 26.5×奥行 11.7cm)  
10L(幅 25×高さ 25×奥行 25cm)

**参考医院価格 (税別)**

¥5,520(4L)  
¥11,500(10L)

歯科用小器具洗浄液

## ■ エム CAE



高級アルコール系  
界面活性剤  
+  
CAEで

洗浄力  
UP

防錆力  
UP

**用途**

歯科用小器具の防錆、除菌、洗浄及び保存。  
浸漬洗浄、超音波洗浄兼用（アルミ製品には適しません）

**成分**

高級アルコール系界面活性剤、  
非イオン系界面活性剤、CAE、無機塩類

**包装**

2,000mL | 20L

**参考医院価格 (税別)**

¥4,300 | ¥34,400

歯科用器具洗浄剤

## ■ エコザイマー

弱アルカリ酵素洗浄剤。効果的な滅菌処理を行う前に・・・



性 状 外観：淡黄色透明液体  
液性：pH8.4～9.4(1.0%)

使用期限：常温(15～25°)で2年 ※未開封の状態

### 成分

タンパク質分解酵素、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、防錆剤

### 包装

4L

### 参考医院価格(税別)

¥9,000

- 弱アルカリ性、タンパク質分解酵素で、血液、体液などの汚れを分解除去します。
- 界面活性剤の配合により、汚れの除去を助け再付着を防ぎます。
- 防錆剤の配合により、各種金属を錆や変色から守ります。
- 低発泡性のため、すすぎが簡単です。
- 50倍から200倍希釈使用のため、経済性に優れています。
- 浸漬洗浄、超音波洗浄やブラッシング洗浄に対応しております。

歯科用根管充填シーラ(酸化亜鉛ユージノール系)

管理医療機器

## ■ キャナルフィルシーラー NDU

酸化亜鉛ユージノールシーラーの欠点を解消

※必ず添付文書をお読みのうえ、ご使用ください。

認証番号 第225AFBZX00127000号



散剤

液剤

### 成分

散剤：酸化亜鉛、ロジン、硫酸バリウム  
液剤：チョウジ油、脂肪酸

### 包装

散剤：15g  
液剤：10mL

### 参考医院価格(税別)

散剤：¥4,500  
液剤：¥4,500

特長

### 低ユージノール設計

- ユージノール量の低減により、余剰ユージノールによる組織為害性を抑制
- 良好な操作性と根管充填シーラーに必要な物性を維持

### 硬化時に膨張

- 硬化時にわずかに膨張し、死腔の発生を防止
- 根管内を緻密に塞ぎ、優れた封鎖性を実現

# Information



**QUASI DRUGS&COSMETICS 医薬部外品・化粧品**

ハイザック ベースト/Nリンス/Nスプレー/舌ブラシ  
うるおーら ジェル/リンス  
シロティ&ビーポリッシュ  
BMD ウォーターゲル 950F  
ポリッシングペースト1号/3号  
キャナリーナ歯磨 900Pw  
キャナリーナ 100S

口臭防止アイテム

■ **ハイザック HI-ZAC**

口臭防止・歯周病予防に

気になる口臭にスッキリ快息クイックケア。  
ニオイの原因「VSC」を抑制。



ハイザックペースト

ハイザックNリンス

ハイザックNスプレー

ハイザック舌ブラシ

ハイザックペースト

有効成分

100g中  
セチルピリジニウム塩化物水和物0.05g  
アラントインクロールヒドロキシアルミニウム0.1g  
ε-アミノカブロン酸0.2g

ハイザックNリンス・ハイザックNスプレー

有効成分

100g中  
アラントインクロールヒドロキシアルミニウム100mg

ハイザックペースト (80g)

毎食後のブラッシングに、3つの有効成分が「歯周病」<むし歯><口臭>を予防して、お口の健康を保ちます。歯の明度もアップして輝く歯に！  
(ハーブミント風味)

ハイザックNリンス (300g)

朝のブラッシング後や外出前、就寝前に。スッキリ感がお口に広がります。口臭防止、歯周病予防に。  
(オレンジフレーバー香料配合)

ハイザックNスプレー (10g)

外出先でお口のニオイが気になるときに。人と会うときなどに。サッと使ってクイックケア。携帯に便利です。  
(オレンジフレーバー香料配合)

ハイザック舌ブラシ(ピンク/ブルー)

舌を傷つけにくい微細毛を使用。ブラシ面を舌にのせ、舌の奥から手前へやさしく引き出すようにご使用ください。



ハイザックペースト

包装

80g×5本

参考医院価格(税別)

¥6,500 (1本 ¥1,300)

参考患者価格(税別)

¥1,429



ハイザックNリンス

包装

300g×6本

参考医院価格(税別)

¥8,400 (1本 ¥1,400)

参考患者価格(税別)

¥1,524



ハイザックNスプレー

包装

10g×10本

参考医院価格(税別)

¥7,000 (1本 ¥700)

参考患者価格(税別)

¥857



ハイザック舌ブラシ

包装

1箱12本入(各色6本)

参考医院価格(税別)

1箱¥2,220(1本¥185)

参考患者価格(税別)

¥230 (1本)



ハイザックNディスプレイセット

包装

セット内容: ペースト 80g×3本  
スプレー 10g×4本  
リンス 300g×2本

サービス内容: ディスプレイケース1台  
リーフレット10枚

参考医院価格(税別)

¥9,500 (ペースト1本 ¥1,300×3/スプレー1本 ¥700×4/  
リンス1本 ¥1,400×2)



ハイザックコンプリートセット

包装

セット内容: ペースト 80g×3本  
スプレー 10g×4本  
リンス 300g×2本

サービス内容: ディスプレイケース1台  
リーフレット10枚  
舌ブラシ ×6本  
(ピンク、ブルー各3本)

参考医院価格(税別)

¥9,500 (ペースト1本 ¥1,300×3/スプレー1本 ¥700×4/  
リンス1本 ¥1,400×2)

口腔保湿アイテム

## ■ うるおーら ジェル

口腔乾燥対策に




### トロッとまるやか携帯に便利なジェルタイプ

- 保湿成分：ヒアルロン酸 Na、乳酸ナトリウム配合
- アルコールフリー、パラベンフリー
- ピリピリしないまるやかな梅味

#### 使用方法

適量（容器側面を1プッシュ）をお口に含み、舌で口内にいきわたらせた後吐き出して下さい。

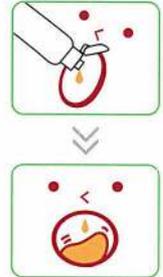

## ■ うるおーら リンス



### お口すっきり洗口液タイプ

- 保湿成分：乳酸ナトリウム配合
- ラクトフェリン、キシリトール配合
- アルコールフリー、パラベンフリー
- ピリピリしないまるやかな梅味

#### 使用方法

適量（5～10mL）をお口に含み、約20～30秒ほどすすいでから吐き出して下さい。



### カラカラお口を、うるうるしっとり。

お口の中が、すぐカラカラ・ネバネバする。だ液が足りない、出にくいあとき。顔やカラダのお肌が乾燥するように、お口の中もさまざまな原因で乾燥します。「うるおーら」は、口腔乾燥をケアする口腔保湿アイテム。うるおいを与えながら、だ液を出やすくし、お口の快適と健康を応援します。

#### こんな方、こんな時におすすめです

- 日常にお口の乾燥を感じている方
- 起床時にお口がネバネバする方
- 乾燥した食べ物が食べにくい方
- デンタルリンスのキツイ味が苦手な方
- 水が飲みたくなくて夜中に目が覚める方
- お薬の副作用でお口が乾燥しているときに
- 要介護者の口腔ケアに



うるおーら ジェル

包装

60g×5本

参考医院価格（税別）

¥6,020（1本 ¥1,204）

参考患者価格（税別）

¥1,505



うるおーら リンス

包装

350g×4本

参考医院価格（税別）

¥6,036（1本 ¥1,509）

参考患者価格（税別）

¥1,886

歯の消しゴム

## ■ シロティ SYLOTEE



### 使用方法



「シロティ」のシリコン部分に「ビーポリッシュ」をつける。



黄ばみや着色汚れが気になる所を、キュキュッと磨きあげます。



歯磨剤が残らないよう、しっかりうがい。白くつるつる、キレイな歯に。

歯の消しゴムペースト (薬用歯磨) 医薬部外品

## ■ ビーポリッシュ BEE POLISH



### 有効成分

100g中 フッ化ナトリウム0.1989g

歯の着色や黄ばみ、スッキリ。プロケア後のホームケアにも。

### こんな方におすすめです

- プロケア後(PTC、ホワイトニングなど)のホームケアとして
- 外因性の着色、黄ばみの除去をしたい方にお茶・コーヒー・紅茶・カレーなど
- お子様の歯の着色や黄ばみの除去などにも



### シロティ&ビーポリッシュセット

#### 包装

10セット入り

#### 参考医院価格(税別)

¥5,700 (1セット ¥570)

#### 参考患者価格(税別)

¥714

フッ素 950ppmF 配合歯磨剤

## ■ BMD ウォーターゲル 950F

口腔内ですぐに溶けて洗口液様になり、隅々までフッ素が行き渡ります

NaF(950ppmF)



スカイミント



ピーチ



グレープ

イエテポリ法  
にも使えます！

すっきりさわやかミント味  
お子さま大好き  
グレープ味とピーチ味



計量カップ付

高分散性

研磨剤・発泡剤無配合

少量の洗口でも違和感なし

効果  
効果

むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎の予防、口臭の防止

特長

POINT

口腔内にジェルが伸びやすく、わずかな時間で液状となるため、隣接部などにもフッ素が広がりやすい。

POINT

残留感が少ないので、少量の水1回洗口でも違和感のない製剤。



有効成分

フッ化ナトリウム、  
塩化セチルピリジニウム

包装

60g×5本

参考医院価格(税別)

¥3,600(5本)

参考患者価格(税別)

¥850(1本)

フッ化ナトリウム配合医薬部外品歯磨類

## ■ ポリッシングペースト 1号(ファイン)・3号(ハード)

PRO CARE

粒度の異なる2種類のペーストを使い分けて歯面を研磨することで、  
審美性の向上とむし歯予防に



フルーツミックスミントフレーバー

- フッ素 900ppmF 配合で歯質強化が期待できます。
- ラミネートチューブ入りのため乾燥しにくく、必要量だけ取り出せます。
- スケーリング、ルートプレーニング後の歯面研磨に。
- 歯冠部の着色の除去に、また補綴充填物の艶だし。

### PMTC用として

青色のポリッシングペースト3号は研磨用に、  
黄色のポリッシングペースト1号は仕上げ用に。

#### 指定成分

プロピレングリコール、パラベン、黄色4号(1号)、  
青色1号(3号)、香料

#### 効能効果

歯を白くする。  
う蝕の発生及び進行の予防。

#### 有効成分


100g中 フッ化ナトリウム 0.1989g

#### 包装

30mL  
(ポリエチレンラミネートチューブ入り)

#### 参考医院価格(税別)

¥1,200

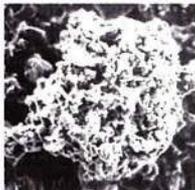

「ポリッシングペースト」の  
研磨剤「ケイソウ土」

ポリッシングペーストの研磨基剤は珪藻土(ケイソウ土)。珪藻の化石からなる堆積岩で、その粒子は丸みを帯びており歯面を傷つけにくく、より滑らかに磨き上げることができます。

#### ポリッシングペースト平均粒子径

	(研磨剤)	( $\mu\text{m}$ )
ポリッシングペースト1号	珪藻土	7.8
ポリッシングペースト3号		50.8

#### ポリッシングペーストのプラーク付着抑制効果



染め出し後



歯ブラシのみで清掃

片顎だけ  
ポリッシング



24時間後のプラークの付着

※ 鈴木克政ら：研磨ペーストを用いたプラーク付着抑制効果について、小児歯科学雑誌 38 巻・3 巻別冊 P538, 図 3 より

フッ素 900ppmF 配合歯磨剤

医薬部外品

## ■ キャナリーナ歯磨 900Pw

HOME CARE



ペパーミントフレーバー

NaF をフッ素濃度として 900ppmF 配合。セチルピリジニウム塩化物水和物の作用とあわせて、う蝕・歯肉炎を予防し、口臭を防止します。

指定成分

セチルピリジニウム塩化物水和物、プロピレングリコール、パラベン、青色 1 号、香料

効能効果

う蝕の発生及び進行の予防。歯肉炎の予防。口臭の防止。

有効成分

100g 中 フッ化ナトリウム 0.1989g  
セチルピリジニウム塩化物水和物 0.05g

包装

40g  
(ポリエチレンラミネートチューブ入り)×10

参考医院価格 (税別)

¥5,000 (10 本)

参考患者価格 (税別)

¥600 (1 本)

フッ素 100ppmF 配合歯磨剤

医薬部外品

## ■ キャナリーナ 100S

HOME CARE

研磨剤無配合、ジェルタイプ

### 3種類の味が歯磨きタイムを楽しく演出!!

NaF とセチルピリジニウム塩化物水和物を配合。甘味料は、キシリトールとソルビトールの併用でう蝕細菌増殖抑制効果を增强。また、お子様にも安心してお使いいただくため、研磨剤無配合、合成着色料無添加にしました。

#### キャナリーナ 100S の特長

う蝕の発生及び進行の予防

フッ素 100ppmF (フッ化ナトリウム) 配合

幼児・小児にも安全性を考慮した必要最小限度のフッ素濃度 100ppmF を配合しました。

歯肉炎の予防、口臭の予防

セチルピリジニウム塩化物水和物配合

歯肉炎は 5~6 歳からすでに始まっています。

セチルピリジニウム塩化物水和物の抗菌力で歯肉炎を予防しましょう。

全甘味料に対して

キシリトール 50% & ソルビトール 50% 配合

ソルビトール併用により、キシリトールのう蝕細菌 (S.mutans) 増殖抑制効果を增强。

指定成分

セチルピリジニウム塩化物水和物、パラベン、香料

効能効果

う蝕の発生及び進行の予防。歯肉炎の予防。口臭の防止。

有効成分

100g 中 フッ化ナトリウム 22.1mg  
セチルピリジニウム塩化物水和物 50mg

包装

45g (ラミネートチューブ入り) × 5

参考医院価格 (税別)

¥2,500 (5 本)

参考患者価格 (税別)

¥600 (1 本)





## Information



## TOOTHBRUSHES&OTHERS 歯ブラシ他

### 歯ブラシ

Bee QUEEN 95/105  
Bee ROYAL  
Bee KING  
Dr.Bee Young II  
Dr.Bee  
Dr.Bee Young  
Dr.Bee Baby  
Dr.Bee Mamma  
Dr.Bee Kinderin  
Dr.Bee Junior  
Bee Apian  
Dr.Bee Care  
PERITECT V 6M/8M

### その他

Dr.Bee 歯間ブラシ SS/S  
歯ブラシキャップ

## ■ Bee QUEEN 95 ビークイーン 95



COLOR 4色



ピンク パープル オレンジ ブルー



## ■ Bee QUEEN 105 ビークイーン 105



COLOR 4色



ピンク パープル オレンジ ブルー



### 健全歯のトラブル予防を しっかりサポートします。

毛長 9.5mm の超極細の毛先で歯頸部、裂溝部、欠損部等のプラークを確実に除去。従来の超極細毛先にはなかったブラッシング効果が実感できます。



Bee QUEEN 95 ブラッシング効果

### 傷んだ歯肉にやさしい感覚でブラッシング 効果を最大限に引き出します。

毛長 10.5mm。ソフト感覚の超極細毛で炎症部位、インプラントの歯間部、矯正装着時のプラークを優しく、そしてしっかりと除去します。



Bee QUEEN 105 ブラッシング効果

インフォームド  
コンセントに

歯力自慢ポスター  
&  
歯力自慢リーフレット

歯力自慢ポスター



歯力自慢  
リーフレット



### Bee QUEEN 95・105

本数	
20本	1本
参考医院価格(税別)	
¥5,400	¥270
参考患者価格(税別)	
----	¥320

	Bee QUEEN 95	Bee QUEEN 105
耐熱温度	100℃	
全長	170mm	
柄の材質(本体)	ポリプロピレン/ホワイトボディ	ポリプロピレン/パール系ボディ
柄の材質(ラバー)	EPDM・ポリプロピレン	
植毛列	2+3×6	
毛の太さ	8ミル	
毛の長さ	9.5mm	10.5mm
毛材質	PBT(ポリブチレンテレフタレート)	
毛の硬さ	ふつう	
内箱入数	20本	
品番	RB-012	RB-011

## ■ Bee ROYAL ビーロイヤル



COLOR 4色



ピンク パープル グリーン ブルー




### 毛先のパワーが違います。

しっかりとしたスーパーテーパー加工の毛先により隣接面、歯頸部、裂溝部のプラーク除去率を格段にアップ。平滑面においても、ストレート毛と同等のプラーク除去力をそなえています。又、毛先はラウンド加工を施すことにより歯肉に対してソフトな感覚です。



歯周ポケット

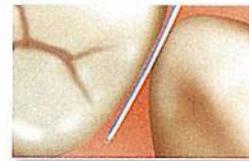

歯間部



## ■ Bee KING ビーキング・ビーキングハード



COLOR 4色



イエロー × ブラウン  
グレー × ダークブルー  
レッド × ブルー  
ダークブルー × イエロー




ビーキング



ビーキングハード

### フィット感に優れたグリップ形状&ラバーにより操作性をUP。

握りやすいラバーグリップにビーシリーズで好評のデュポンタイネックス毛を採用したキングタイプ。硬さは、ミディアムとハードの2種類です。(煮沸消毒が可能です)

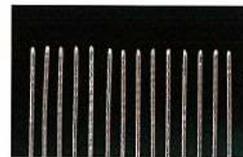

毛先の先端を丸く処理するラウンド加工により、歯肉を傷める心配もありません。


Bee ROYAL		Bee KING・Bee KING Hard	
本数	本数	本数	本数
20本	1本	20本	1本
参考医院価格(税別)		参考医院価格(税別)	
¥5,400	¥270	¥5,000	¥250
参考患者価格(税別)		参考患者価格(税別)	
-----	¥320	-----	¥300

	Bee ROYAL	Bee KING	Bee KING Hard
耐熱温度		100℃	
全長		170mm	
柄の材質(本体)		ポリプロピレン	
柄の材質(ラバー)		EPDM・ポリプロピレン	
極毛列		2+3×8	
毛の太さ		8ミル	10ミル
毛の長さ	10.5mm		10mm
毛材質	PBT(ポリブチレンテレフタレート)	デュポンタイネックス	
毛の硬さ	ふつう		かため
内箱入数		20本	
品番	RB-001	RB-002	RB-003

# ■ Dr.Bee Young II ドクタービーヤングII ミディアム・ソフト・スーパーソフト



COLOR 4色

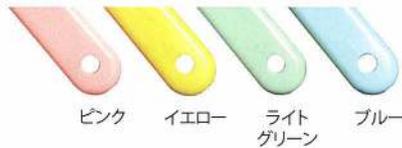

## Dr.Bee Young IIシリーズで 歯肉炎を改善しましょう。

小さな口腔内でも、あらゆる歯面に毛先が届く、コンパクトスリムヘッドタイプ。毛の硬さを3タイプ用意し、歯肉の状態に合わせて幅広い選択が可能になりました。スーパーソフト・ソフト・ミディアムの3タイプを使い分けることにより、ブラッシング時に痛みをあまり感じることなく歯肉の炎症が改善されます。

### STEP1



歯肉が炎症を起こして、赤く腫れています。“スーパーソフト”で歯肉に優しいブラッシングをします。

### STEP2





歯肉の炎症がかなりおさまってきました。このタイミングで“ソフト”にステップアップ。

### STEP3



歯肉の炎症は完全になおりました。これからは“ミディアム”でさらにステップアップ。

症例写真提供：明海大学PDI 歯科診療所

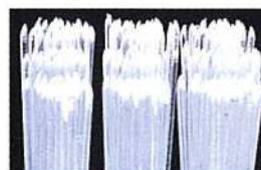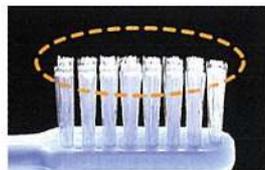

毛先はテーパード加工で、歯頸部、隣接面の歯垢清掃効果にすぐれています。

### Dr. Bee Young II

本数	
20本	1本
参考医院価格(税別)	
¥4,640	¥232
参考患者価格(税別)	
----	¥290

	Medium	Soft	SuperSoft
耐熱温度		100℃	
毛の太さ	8ミル	6ミル	5ミル
植毛列		2+3×7	
毛の長さ	9.5mm	9mm	10mm
毛先		テーパード加工	
毛の硬さ	ふつう	やわらかめ	やわらかめ
ハンドル樹脂		ポリプロピレン	
内箱入数	20本		
品番	BB2-222	BB2-223	BB2-224


■ **Dr.Bee** ドクタービー・ドクタービーソフト



COLOR 4色



ピンク イエロー ライトグリーン ブルー

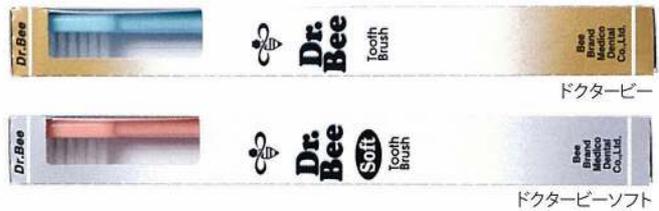

ドクタービー


ドクタービーソフト

歯周病の予防にも適した  
オールラウンドタイプ。  
ソフトは歯肉のデリケートな方に。

■ **Dr.Bee Young** ドクタービーヤング・ヤングソフト・ヤングハード



COLOR 4色

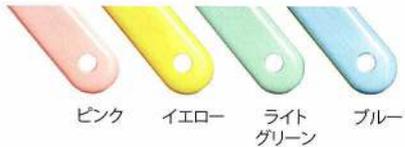

ピンク イエロー ライトグリーン ブルー



ドクタービーヤングハード

ドクタービーヤング

ドクタービーヤングソフト

歯列弓の小さな方や学童、女性向け。  
ソフトは歯肉のデリケートな方に。  
ハードはしっかり磨きたい方に。

Dr. Bee		Dr. Bee Young	
本数	本数	本数	本数
20本	1本	20本	1本
参考医院価格(税別)		参考医院価格(税別)	
¥5,000	¥250	¥4,480	¥224
参考患者価格(税別)		参考患者価格(税別)	
----	¥330	----	¥280

	Dr. Bee	Dr. Bee Soft	Young Hard	Young	Young Soft
耐熱温度			100℃		
毛の長さ	11ミル	8ミル	10ミル	8ミル	6ミル
植毛列	3×8			3×9	
毛の長さ	11.5mm		10mm	9mm	
毛先			ラウンド加工		
毛の硬さ	かため	ふつう	かため	ふつう	やわらかめ
ハンドル樹脂	ポリプロピレン				
内箱入数	20本				
品番	BB-221	BB-222	BB-121	BB-122	BB-123

## ■ Dr.Bee Baby ドクタービーベビー



COLOR 4色



ピンク イエロー ライト  
グリーン ブルー




乳幼児が歯磨きに慣れるよう自分で持つタイプ。

かわいい  
キャラクター  
入り

## ■ Dr.Bee Mamma ドクタービーマンマ



COLOR 4色

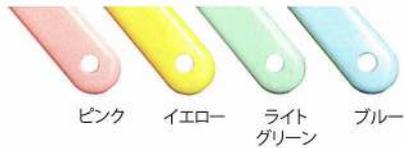

ピンク イエロー ライト  
グリーン ブルー



### お母さん磨き専用

お母さんの手に合わせた安全設計。乳歯1本、1本を仕上げ磨きするための超スモールサイズヘッドと5.5mmの毛長は、しっかり毛先でプラークを落とせます。ネックは細く、また十分に長くとっていますので観察しながら磨けます。

かわいい  
キャラクター  
入り

Dr.Bee Baby		Dr.Bee Mamma	
本数	20本	本数	20本
	1本		1本
参考医院価格(税別)	¥3,800	参考医院価格(税別)	¥3,840
参考患者価格(税別)	¥190	参考患者価格(税別)	¥192
	¥230		¥240

	Dr.Bee Baby	Dr.Bee Mamma
耐熱温度		100℃
毛の太さ		6ミル
植毛列	2+3×4	3×6
毛の長さ		5.5mm
毛先		ラウンド加工
毛の硬さ		やわらかめ
ハンドル樹脂		ポリプロピレン
内箱入数	20本	
品番	BB-140	BB-143

## ■ Dr.Bee Kinderin ドクタービーキンダリン



COLOR 4色



ピンク イエロー ライトグリーン ブルー



乳歯列に合わせたモデル。一人で磨き始めたお子様に。

## ■ Dr.Bee Junior ドクタービージュニア



COLOR 4色



ピンク イエロー ライトグリーン ブルー



乳歯列完成期から混合歯列初期に合わせたモデル。  
一人でしっかり磨けるお子様に。

Dr.Bee Kinderin	
本数	20本
1本	1本
参考医院価格(税別)	¥3,600
参考患者価格(税別)	¥180
----	¥230

Dr.Bee Junior	
本数	20本
1本	1本
参考医院価格(税別)	¥3,600
参考患者価格(税別)	¥180
----	¥230

	Dr.Bee Kinderin	Dr.Bee Junior
耐熱温度	100℃	
毛の太さ	8ミル	
植毛列	3×7	3×8
毛の長さ	7mm	8mm
毛先	ラウンド加工	ふつう
毛の硬さ	かため	ふつう
ハンドル樹脂	ポリプロピレン	
内箱入数	20本	
品番	BB-141	BB-142

## ■ Bee Apian ビーアピアン



COLOR 5色



ピンク イエロー グリーン ブルー ホワイト



やさしいスケルトンカラーと  
歯肉を傷めないラウンドカット。




## ■ Dr. Bee Care ドクタービーケア

乳幼児—成人



COLOR 4色

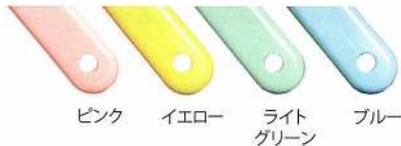

ピンク イエロー ライト  
グリーン ブルー



### 仕上げ磨きのソフトタイプ

ソフトな毛先と18mmの小さなヘッドが、  
口腔軟組織をやさしくケア。指先で磨く  
ようなしなやかタッチ&コントロールを  
実現しました。

萌出途中に見られる  
歯肉炎の改善に



萌出途中の上顎前歯舌側面に  
発赤、腫脹が認められた症例。

毛先が当たりにくい  
部分の清掃に



萌出途中の下顎第1大臼歯。  
咬合面の一部が歯肉に覆われ  
ている症例。

歯根分岐部とコーピングの  
周囲のハイジーンに



下顎左側第2臼歯にコーピング  
を装着しオーバーデン  
チャーとした症例。

症例写真提供：大阪歯科大学付属病院  
臨床研修教育科 / 総合診療部診療科

Bee Apian

本数	
30本	1本
参考医院価格(税別)	
¥4,950	¥165
参考患者価格(税別)	
----	¥220

Dr. Bee Care

本数	
20本	1本
参考医院価格(税別)	
¥3,840	¥192
参考患者価格(税別)	
----	¥240

	Bee Apian	Dr. Bee Care
耐熱温度		100℃
毛の太さ	8ミル	5ミル
穂毛列	3×8	3×6
毛の長さ		8mm
毛先		ラウンド加工
毛の硬さ	ふつう	やわらかめ
ハンドル樹脂		ポリプロピレン
内箱入数	30本	20本
品番	TB-112	BB-144

# PERITECT V 6M ペリテクト V 6M



ブルー グリーン イエロー オレンジ



# PERITECT V 8M ペリテクト V 8M



ブルー グリーン イエロー オレンジ



## 基本的な磨き方

**Toe** Toe部の毛長としっかりとした毛が7番側臼歯部、遠心に適合する。

**Top** 歯間部挿入に無理な圧接が必要ない。

**Heel** HeelからTopにかけて磨くとベクトルが働き、歯面への圧接を必要としない。

**2edges** エッジラインが頸部のくぼんだインプラントに適合する。

**Top&edge** ドームカットの毛先が前歯部舌側にしっかりフィットする。

通常のブラシ

短い毛がしっかりと捉えている。毛が逃げて毛先が歯面を捉えない。

通常のブラシ

Topの長い毛が無理なく歯間部に挿入する。

無理な圧接により歯面から毛が逃げてしまう。

通常のブラシ

短毛のHeelからTopのEdgeが歯頸部歯間部の汚れをスムーズにかき出す。

通常のブラシ

毛先が歯面に届いていない。側にしっかりフィットする。

### PERITECT V 6M/8M

本数	
20本	1本
参考医院価格(税別)	
¥4,400	¥220
参考患者価格(税別)	
---	¥257

	PERITECT V 6M	PERITECT V 8M
耐熱温度		100℃
毛の太さ	6ミル	8ミル
植毛列		3×8
毛の長さ	中央部: 10.5mm	先端部・基端部: 6.0mm
毛先		ラウンド加工
毛の硬さ	やわらかめ	ふつう
ハンドル樹脂		ポリプロピレン
内箱入数		20本
品番	PB-001	PB-002

## ■ Dr.Bee 歯間ブラシ



SS タイプ



S タイプ

20本入りパッケージは、受付カウンターなどに置いてディスプレイとしてご利用いただけます。



使いやすいから効果的。無理なく確実に歯間清掃。

確実な操作を可能にしたフォルム。

- 全長 95mm+コントラアングル
- グリップ面にフィンガーディンプル
- フル植毛ブラシワイヤー
- 矯正装置装着時の清掃

ブラシワイヤー部に樹脂コーティング処理。

ブラシワイヤー部に樹脂コーティング処理を施しました。(Sタイプ)

1本ずつ、ビニール包装。

患者さんが購入しやすいように、1本ずつビニール包装しました。携帯に便利なキャップもついています。



Inter Dental Brush

本数	
20本	1本
参考医院価格(税別)	
¥2,460	¥123
参考患者価格(税別)	
¥2,800	¥140

	SSタイプ	Sタイプ
通過穴径	0.7mm~	1.0mm~
ワイヤー径	0.25mm	0.25mm 樹脂コーティング処理
用毛径	2ミル	2ミル
サイズ	1	3

## ■ 歯ブラシキャップ

S



対象

Dr.Bee ベビー  
Dr.Bee マンマ  
Dr.Bee キンダリン  
Dr.Bee ジュニア  
Dr.Bee ヤングII  
Dr.Bee ケア  
Bee QUEEN 95・105

M



対象

Dr.Bee  
Dr.Bee ヤング  
Bee ROYAL  
BeeKING  
Bee Apian  
PERITECT V 6M/8M

歯ブラシキャップ

個数	
20個	1個
参考医院価格(税別)	
¥500	¥25
参考患者価格(税別)	
----	¥30




**PRODUCTS  
CATALOG**



**PRODUCTS  
CATALOG**



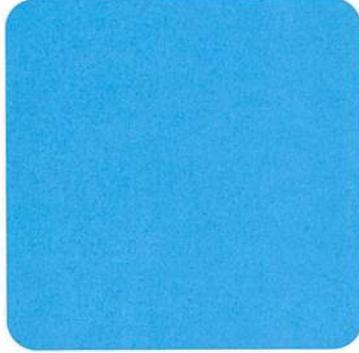

2016

<http://www.bee.co.jp/>