

入れ歯洗浄液
マウスピース・アライナー洗浄液



訪問歯科診療時のお手入れに!

ご家庭での入れ歯のお手入れに!



スパテント



リテーナー・アライナーのお手入れに!

プロポリス & フラボノイド 配合

除菌

脱臭

短時間
洗浄

脱臭効果や除菌効果を持つ天然由来成分のプロポリスと、茶葉のエキスから生まれたフラボノイドが入った入れ歯洗浄液です。

使用用途

- ・レジン床義歯
- ・金属床義歯
- ・脱離ブリッジ
- ・矯正用リテーナー
- ・ナイトガード
- ・スプリント
- ・マウスガード
- ・ティッシュコンディショナー



歯科用 100mL

プロポリスとフラボノイドが入った洗浄液

脱臭効果や除菌効果を持つ天然由来成分のプロポリスと、茶葉のエキスから生まれたフラボノイドが入った入れ歯洗浄液です。短時間で洗浄することができ、洗い流した後すぐに装着していただけます。入れ歯、リテーナー、アライナー、ナイトガード等のマウスピースにも幅広くお使いいただけます。


使用方法

※使用前には注意事項をお読みください。

01 浸漬法

使用容量(1回あたり)

2mL
2回押し

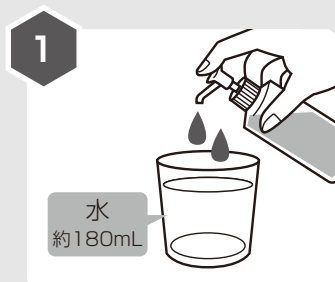

コップ等に水を入れ、スパデント2mL(2回押し)を注ぎます。



コップの中に入れ歯等を浸漬してください。お急ぎの場合は、ぬるま湯を使用しますと約20分で洗浄できます。



一晩浸け置き、水で洗浄液をよく洗い流してから装着してください。

02 歯ブラシ法

使用容量(1回あたり)

1mL
1回押し



容器にスパデント1mL(1回押し)を注ぎます。



歯ブラシにスパデントをつけ、入れ歯等をブラッシングし洗浄してください。



水で洗浄液をよく洗い流してから装着してください。



入れ歯洗浄液、マウスピース・アライナー洗浄液

スパデント

成分: フラボノイド、プロポリス、有機酸、界面活性剤、エタノール、その他
香り: フルーツミントの香り
液性: 弱酸性
正味量: 100mL

■標準価格 950円
希望患者価格 1,240円

おもて面を院内ポスターとしてお使いいただけます。

●仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●価格は、2020年3月現在のものです。標準価格に消費税は含まれておりません。

発売元 **株式会社 ニッシン**

〒621-0001 京都府亀岡市旭町樋ノ口88

☎0120-571939 (平日 10:00 ~ 17:00)

www.nissin-dental.jp

製造元 **ゲンブ株式会社**

