

歯科矯正用粘膜保護材

Orthodontic Wax

オルソプロZ

BSA


ORTHO PRO Z

ORTHO PRO Z is the moderate hardness easy for soft tissue, and it's difficult to come off a bracket.



1 ケースあたり
¥70
の経済性

オルソプロZは透明色の高純度医療用シリコンです。長時間にわたり歯列矯正装置装着時の粘膜を保護し、口腔内の不快感を大幅に低減。矯正中のさまざまな痛みを軽減・緩和します。

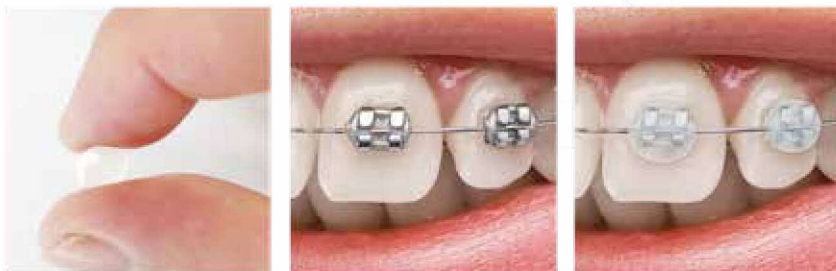

- ノンフレーバーで一日中快適
- 安定のカバー力で長時間長持ち
- クリア(透明)で装着時も目立ちにくい
- 装着・取り外しも簡単

商品名：オルソプロZ


●届出番号：23B2X00017000292

- 1ケース：約5×50mm×4本入り
- 1箱4色アソート
(各色25ケース×4色) 100ケース入

標準価格 1箱 **7,000円**

サンプルとして1ケースでも販売致します。
※ケースのカラーはお任せください。

標準価格 1ケース **100円**

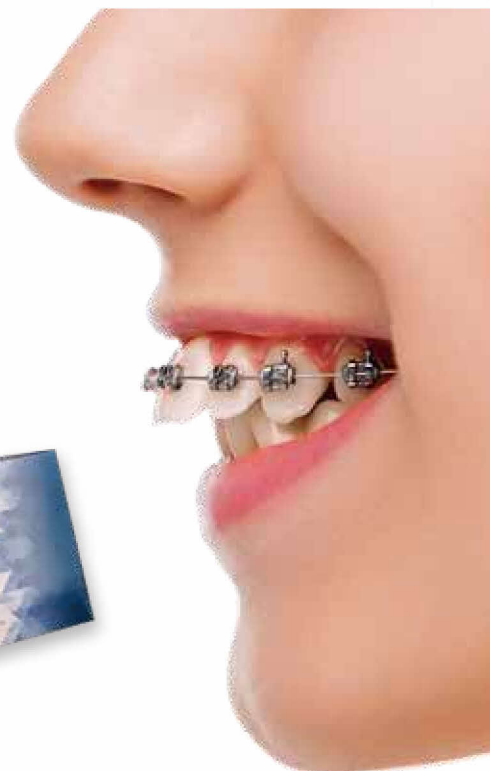

インビザラインなどのマウスピース型矯正装置用

アライナー チューイー

4つのフレーバーをご用意しました。噛むとフワッとほのかな香りがします。



1パック
2ケ入




ミント




グレープ



パイナップル

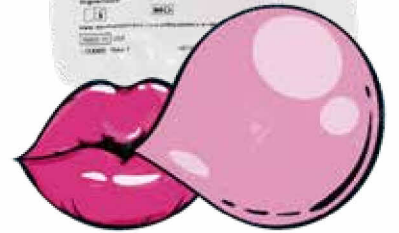


バブルガム

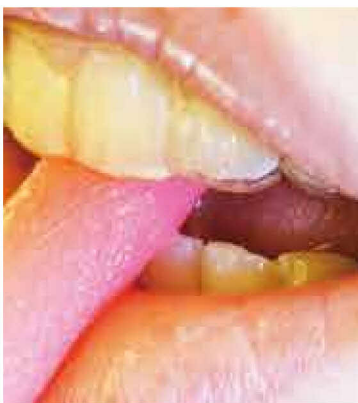

マウスピース・矯正装置装着時に浮いている部分をしっかりとフィットさせます。硬すぎず、柔らかすぎず弾力のあるノンラテックスソフトプラスチックチューブです。

●ご使用方法

- マウスピースを装着した状態でアライナーチューイーを咬んで歯にしっかり装着していきます。
- ①前歯でアライナーチューイーを数回咬み、前歯のマウスピースを押し込みます。
 - ②前歯から隣の歯へ移動させ数回咬み、最後は奥歯で数回咬んでマウスピースを押し込みます。
- 新しいマウスピースに交換の際は、特に歯からマウスピースが浮いてしまいます。アライナーチューイーを1日20分以上噛むことで歯とマウスピースの密着度が上がります。

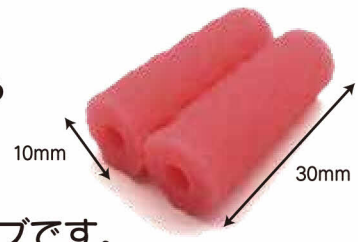

包装	フレーバー	標準価格
2ケ入 1パック	ミント グレープ パイナップル バブルガム	240円
2ケ入 10パックセット		1,920円
2ケ入 100パックセット		16,000円

1パック
当たり
192円

1パック
当たり
160円

