

A dynamic splash of clear water against a light blue background, with numerous bubbles of various sizes scattered throughout. The water flows from the top right towards the bottom left, creating a sense of movement and freshness.

CATALOGUE

Vol.6

総合カタログ

Disinfection Safety

より安心・安全な環境づくりへ・・・
太平化学がお手伝いいたします。

INDEX

手指の殺菌・消毒、皮膚の保湿に

- 01 タイサリート・プラス／タイフレッシュ・ソープ
- 02 ラビングフレッシュ／ピュアハイジーン／
タイハップクリーム

小器具類の洗浄・除菌に

- 03 タイフレッシュONE／タイフレッシュ・エースNEOII／ステンノン／
タイフレッシュ・アルコール液／タイフレッシュ・ファーストクリーナー
- 04 卓上型全自動オートクレーブ

院内設備の衛生管理に

- 05 タイフレッシュ・クリーンαII／スピタン
- 06 タイフレッシュ・ミスト・プラス／タイフレッシュ・ウェットワイパー

印象関連の洗浄・除菌に

- 07 インプロステリンプラス／ニューウルトラトレクリーナー
- 08 ニュートレークリーナーリキッド

リネン類の洗浄・除菌に／歯槽膿漏・歯肉炎の予防に

- 09 タイフレッシュ・ユニプラス／タイフレッシュ・ユニブイ／
クリーンデンタル

太平化学の診療用ディスポマスク

- 10 サージカル・マスク／清風マスク

義歯洗浄剤・除菌洗浄剤／超音波洗浄器

- 11 デンチャーピュア・プロ／ステリテクト
- 12 太平スーパーソニックミニ／太平スーパーソニック

技工関連商品

- 12 ハームレスマスク／ピンキーラボ

太平化学の医薬品

- 13 フタラール消毒液0.55%「メタル」／ステリキット／
タイクロベン0.2%液／消毒用エタノール／
5%クロルヘキシジン液

製品ご使用の際は、説明書をよくお読みください。

手指の殺菌・消毒、皮膚の保湿に

手指の洗浄と殺菌にすぐれた効果を発揮

薬用ハンドソープ



タイサリート・プラス

医薬部外品



NET.4L

詰替用パウチ
NET.480mL

NET.500mL

- 有効成分、サリチル酸配合。
- 詰替用はパウチパックと潰せる減容化容器。500mLボトルも減容化容器になりました。ゴミの削減に貢献します。

細菌に強く、手肌の潤いも保つ

薬用ハンドソープ

TAIFRESH
SOAP

タイフレッシュ・ソープ

医薬部外品

- 洗いあがり良く、臭いが残りません。
- ベンザルコニウム塩化物を含有しています。



NET.4L

※空ボトルは無償で提供致します。

太平化学の薬用ハンドソープは、上記2タイプ。どちらも専用ディスペンサーの使用でムース状にてご使用いただけます。

POINT

タイサリート・プラス、タイフレッシュソープは、ムース状で細部まで薬液が浸透します。また、ワンプッシュが1mLと経済的です。

速乾性アルコール手指消毒剤

Rubbing Fresh

ラビングフレッシュ

手指消毒剤

指定医薬部外品

- 水洗い不要の速乾性手指消毒剤。
- 有効成分クロルヘキシジングルコン酸塩配合により広範囲の微生物に対して短時間で効力を発揮します。
- ヒアルロン酸をはじめ3種類の保湿剤配合により、手指に潤いを残します。



ヒアルロン酸
配合

NET.1L

POINT

- まずタイサリート・プラスなどの抗菌石鹸で手を洗浄後、ペーパータオルなどで完全に水分を取ってから使用してください。
- グローブを着用する前に使用することにより、皮膚上の細菌の増加を抑える作用が期待できます。
- 術中に繰り返し使用する事により、消毒効果の延長に効果的です。

速乾性アルコール手指消毒剤を自動で噴霧

『ラビングフレッシュ』用

自動薬液噴霧供給機(単一乾電池4本使用)

ピュアハイジーン

- 乾電池式なので置き場所を選びません。



さらさらベールでやさしくガード

薬用ハンドクリーム

タイハップクリーム

医薬部外品

- 有効成分の働きで、手肌の荒れを防ぎながら、潤いを与えて手指を健やかに保ちます。
- 外部からの刺激をガードしながら、ゴム手袋の装着もスムーズに心地よくします。
- ヒドロキシアパタイト・ヒアルロン酸ナトリウム・グリチルリチン酸ジカリウム他配合。



NET.400g



NET.60g

小器具類の洗浄・除菌に

予備洗浄

プロテアーゼで血液・タンパクを分解

中性酵素系洗浄剤



タイフレッシュ・ワン

- 高力価タンパク分解酵素(プロテアーゼ)を配合し、特に血液・体液の除去に優れた洗浄力を発揮します。
- 酵素安定性がよく、保存性に優れています。
- 50~200倍希釈で使用します。



NET.2L

成分

- ・タンパク分解酵素(プロテアーゼ)
- ・界面活性剤・安定化剤・防錆剤

一次洗浄

小器具類のサビを防ぎ、しっかりと洗浄

器具防錆清浄液



タイフレッシュ・エースNEO II

- 殺菌成分・サリチル酸、NAP-30配合
- 小器具に優しい防錆剤を配合
- 優れた洗浄効果で血液・タンパクを落とします。
- 浸漬洗浄は10倍希釈液、超音波洗浄は100倍希釈液を使用します。



NET.4L

NET.2L

前処理

血液を固めません

血液凝固防止剤

タイフレッシュ・ファーストクリーナー

- すぐに洗浄が出来ないときに噴霧すると血液の凝固を防ぎます。
- 後行程の洗浄・滅菌を確実に行うことができます。



NET.500mL

一次洗浄

小器具をサビから
守る防錆剤配合

器具防錆清浄液

Stainon

ステンノン



NET.4L

NET.2L

全自動オートクレーブ

卓上型全自動オートクレーブ

TE-241ER

製造承認番号 21800BZX10143000

TE-261ER

製造承認番号 21800BZX10158000

- フルオート運転 ●メンテナンスも簡単
- コンピューターのP.I.D制御による安定した温度管理



TOPICS

1

器具類の滅菌までの手順

使用済みの器具

前処理(すぐに洗浄できないとき)

タイフレッシュ・
ファーストクリーナー

流水で洗浄

インプラント等の靦血処置後は
酵素系洗浄剤にて予備洗浄

タイフレッシュ
ONE

※超音波洗浄または浸漬洗浄
流水で洗浄

滅菌前の一次洗浄

タイフレッシュ・
エースNEO II

タイクロベン
0.2%液

ステンノン

※超音波洗浄または浸漬洗浄

※浸漬洗浄

流水で洗浄

滅菌

オートクレーブ 薬液消毒
フラタル消毒液
ガス滅菌 0.55%[メタル]
薬液滅菌
ステリキット → 廃液
処理

保存

POINT

使用済みの器具類は、血液・タンパク等が付着しています。完全に取り除かないと凝固を起こし消毒剤が器具に触れない状態になってしまいます。

POINT

《器具を錆びさせない注意点》

- ①器具は洗浄剤に全部浸漬する
- ②乾燥を早くする
(濡れたまま放置しない)
- ③洗浄剤の使用方法を守る
(希釈倍率・浸漬時間)

消毒剤・洗浄剤の希釈

希釈して使用する薬剤は、適正な濃度で使用しなければ効果が半減してしまいます。説明書・添付文書などをよく読み、効果のある希釈倍率でご使用ください。

〈希釈例-1〉 1L実用液の作り方

- ・ 2倍希釈液 薬液500mL + 水500mL
- ・ 10倍希釈液 薬液100mL + 水900mL

〈希釈例-2〉 5%クロルヘキシジン液を0.1%に希釈する場合

- $5 \div 0.1 = 50 \dots 50$ 倍希釈液
- 1000mL $\div 50 = 20$ mL
- 薬液20mL + 水980mL

院内設備の衛生管理に

排水パイプ・スピットン・バキュームの水廻りに

爽やかな
ミントの香り

パイプ・バキューム・スピットン清浄液



タイフレッシュ・クリーンαII



NET.4L

NET.2L

- タイフレッシュ・クリーンαIIはNAP-30、植物性天然消臭エキス及び清浄剤等を効果的に配合した優れた除菌・消臭・清浄剤です。
- 排水パイプ、スピットン、バキューム類をいつもクリーンで衛生的に保てます。
- 金属、プラスチック、ゴム等、材質への影響は極めて少ないです。

使用方法

■排水パイプ、スピットン

原液～10倍
希釈液

水

■バキューム



10倍希釈液



水

■バキュームチップ



スピットン等のパイプ廻りに

歯科用スピットン&パイプクリーナー

SPITTAN

スピッタン



NET.1kg

粉末タイプ

- スピットン・パイプに付着した唾液血液等の有機物の汚れを落とし、目詰まりを防止。
- 爽やかな樟脳のような香り。
- スピットン・排水パイプには、診療後、約25gを使用。水又はお湯を200mL注ぎ、翌朝水で流してください。
- バキュームチップは、コップなどに約15g(付属のスプーン約半分)を溶かし、浸漬します。
- バキューム・排唾管等は、診療後溶液に浸漬し、翌朝、充分に水を吸入してください。

院内の衛生管理に

除菌・除臭スプレー

TAIFRESH
MIST+
タイフレッシュ・ミスト・プラス

- NAP-30、アルコール、孟宗竹エキスを配合した除菌・除臭スプレー。
- 対象物にまんべんなく噴霧し、3分以内に拭き取ってください。
- タイフレッシュウェットワイパーとの併用が効果的です。



衛生管理に適したウェットワイパー

簡単除菌・抗菌・除臭効果

TAIFRESH タイフレッシュ・ウェットワイパー
WET WIPER

タイフレッシュ・ウェットワイパー



- 食品添加物のアルコールと孟宗竹の抽出液(タケキノコエキス)が主成分。
- タケキノコエキスには「抗菌・除菌・除臭」効果があり、簡単に拭き取るだけで除菌され、抗菌力が持続します。

TOPICS 2

院内衛生管理のお手伝い

気になる場所を、しっかり清掃・除菌しましょう。

タイフレッシュ・ミスト・プラスは噴霧してから3分以内に拭き取って下さい



※アルコールに侵されやすい材質へのご使用はお控えください。

印象関連の洗浄・除菌に

印象採得後の除菌と固定に

次亜塩素系除菌洗浄剤(固定剤配合)

IMPROSTERIN+ インプロステリン^{プラス}

- 次亜塩素酸ナトリウム・界面活性剤・固定剤を効果的に配合。除菌・洗浄と固定が同時にできます。
- トレーに優しい防錆剤を配合。
- 塩素系ですので、酸性の洗浄剤と混ぜないでください。
- 通常は20倍希釈液に10分以上(3時間以内)浸漬させます。



NET.2L

除菌、防錆性も備えた経済的な粉末タイプ

アルギン酸塩印象材用清掃材

NEW ULTRA TRAY CLEANER

ニューウルトラトレークリーナー

- サリチル酸・防錆剤配合で安心して作業ができます。
- ダストフリーの粉末タイプ。1Lに40g(付属の計量スプーン1杯)使用と経済性にも優れています。



NET.1kg

剥がす・溶かすの2通りに使える液体クリーナー

アルギン酸塩印象材用清掃液

New Tray Cleaner Liquid

ニュートレークリーナーリキッド


- 第四級アンモニウム塩・防錆剤配合で安心して作業ができます。
- 印象材を剥がす場合は、原液～2倍希釈液に1時間浸漬します。お急ぎの場合、トレーが不足している際に便利です。
- 印象材を溶かす場合には10倍～20倍に希釈して浸漬します。



NET.2L

TOPICS 3

印象採得から石膏模型まで

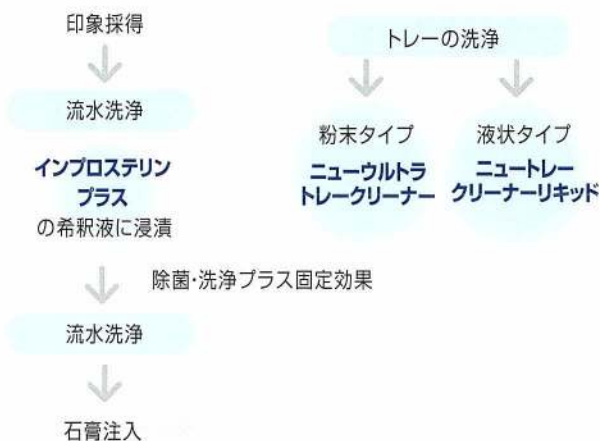

リネン類の洗浄・除菌に

白衣・タオルなどの抗菌洗濯に

衣類用洗浄剤

TAIFRESH Uni+
タイフレッシュ・ユニプラス

- 酸素系漂白剤配合
- 除菌性UPI ● 部屋干し臭を防ぐ! ● 洗濯槽ごとしっかり洗浄!
- 30Lの洗濯槽の水には30mLを使用



NET.2L

白衣・タオルなどの抗菌洗濯に

衣類用洗浄剤

TAIFRESH Uni-V
タイフレッシュ・ユニ・ブイ

- 液体の高級アルコール系洗浄剤にNAP-30を配合。
- 生地を傷めず、しっかり洗濯。洗濯機の槽内も同時に洗浄できます。
- 通常の衣類用洗浄剤の代わりに使用します。他には何も混ぜずにお使いください。
- 1回の使用量は水30Lに対し30mLです。
- 現象液・サホライド等の汚れは、専用の製品をお使いください。



NET.2L

ORAL CARE

歯槽膿漏・歯肉炎の予防に

歯槽膿漏・歯肉炎・歯石沈着の予防に

薬用歯みがき

クリーンデンタル 医薬部外品

トータルケア

スッキリ塩味で歯ぐきを引き締め、歯周病(歯肉炎・歯槽膿漏)から虫歯までトータルケア

口臭ケア

爽やかマイルドなレモンフレーバーで歯周病(歯肉炎・歯槽膿漏)と気になる口臭を予防

しみないケア

スッキリとした塩味で歯ぐきを引き締めながら歯周病(歯肉炎・歯槽膿漏)そして知覚過敏症も予防

くすみケア

スッキリとしたハーブミントフレーバーでステインを浮かせて落とし歯を白くする

10種の
薬用成分
配合10種の
薬用成分
配合11種の
薬用成分
配合11種の
薬用成分
配合トータルケア
NET.50g
NET.100g口臭ケア
NET.50g
NET.100gしみないケア
NET.50g
NET.100gくすみケア
NET.50g
NET.100g

NAP-30について

化学名：N-Alkylaminopropyl Glycine
 欧州での関連法令である殺生物製品指令BPD
 (98/8/EC)に登録されている、唯一の両性殺菌剤
 下記タイプに登録
 PT2：公私医療エリア、殺菌剤・
 食毒剤及びその他殺生物性製品
 PT3：獣医衛生用殺生物性製品
 PT4：食品及び飼料エリア用殺菌剤・消毒剤

洗剤規制
 Detergent Regulation
 (EC648/2004)に準拠
 【主な特徴】
 易分解性(OECD301A-94%)
 低残留性ひと洗した後、表面に残る残留
 物が無い。鉄及び銅鉄を錆びさせにくい。

太平化学の診療用ディスポマスク

驚異の細菌遮断効率を誇る機能的なマスク

高品質マスク

SURGICAL・MASK

サージカル・マスク (ヒモタイプ)



50枚入り



- ヒモタイプの高品質マスク。
- 細菌の遮断効率と通気性を考えた不織布を採用。
- ノーズピース付き。


すぐれた脱臭・防塵効果を発揮

高品質マスク

清風マスク



清風マスク5枚入り
清風マスクフィルター10枚入り

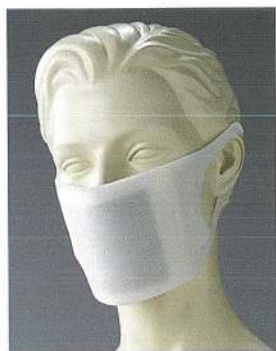

- 活性炭フィルターを採用。(特許登録済)
- 高級ポリウレタンの採用で爽やかなかけ心地。
- 耐久性も抜群です。

※活性炭フィルターのみ販売もしております。

義歯洗浄剤・除菌洗浄剤

歯石・ヌメリなどを短時間で除去。
除菌効果にも優れた義歯洗浄液。

歯科医院・技工所用義歯洗浄液

Denture Pure Pro

デンチャーピュア・プロ **酸性タイプ**

- 特殊界面活性剤と食品添加物のリン酸でヌメリと歯石を除去し、しっかり除菌。
- レジン床やクラスプも傷めず、マウスガード等にも使用できます。
- 着色の除去にはステリテクトをご使用ください。

使用方法

- フタ付きのガラス容器で対象物が漬かるまで原液を入れ、超音波洗浄器で洗浄してください。
- 使用後は十分に流水で洗浄してください。



NET.2L

義歯の歯石もスッキリ除去



あらゆる金属に対応、確実に除菌・洗浄

補綴物専用除菌洗浄剤(次亜塩素酸ナトリウム配合)

STERITECT ステリテクト

- クラウン系・デンチャー系などの完成補綴物や修理義歯試適後の補綴物の除菌洗浄に!
- 義歯などの着色除去に!
- 次亜塩素酸ナトリウム・界面活性剤・防錆剤配合。
- 塩素系ですので、酸性の洗浄剤と混ぜないでください。



NET.2L

使用方法

- 補綴物の除菌洗浄には20倍希釈液に1時間浸漬します(フタ付容器を使用)。浸漬後、充分水洗いしてください。
- 義歯の洗浄+着色除去には3倍希釈液を使用して超音波洗浄器にかけてください(フタ付容器を使用)。(下記参照)

※浸漬時間は3時間以内とし、溶液は用事調整してください。

義歯の着色もスッキリ除去



3倍希釈液に着色などで汚れた義歯を浸漬し(ガラス製のフタ付容器をご使用ください)超音波洗浄します。除菌洗浄と共に、タバコのヤニ・茶渋などの着色もすっきり除去されます。使用後は充分に水洗いしてください。歯石の除去には「デンチャーピュアプロ」をお勧めします。

超音波洗浄器

訪問診療にも最適！

義歯洗浄に最適な超音波洗浄器

太平スーパー
ソニックミニ

製造承認番号 1483X0004000002



一度に複数の処理が可能！

義歯洗浄に最適な超音波洗浄器

太平スーパー
ソニック

※専用洗浄剤、デンチャーピュアフロ(歯石除去用)、ステリテクト(着色除去用)をご使用ください。

TECH
NICIAN

技工関連商品

使い捨て防塵マスク

高品質マスク

HARMLESS MASK

ハームレスマスク DD11-S2-2
国家検定 第TM568号

- 超高性能エレクトレットフィルターを使用。手軽に使用でき、効率の良い防塵効果が得られます。
- 接顔部にポリエステルジャージを採用。しめひもの長さの調節が可能で、良好な装着感が得られます。
- 金属部品を使用しておりませんので、廃棄の際、分別の必要はありません。



研磨後のクリーナー

歯科技工士用クリーナー

ピンキーラボ

- 手荒れの心配もなく、しっかり汚れを落とします。
- 研磨後に付着した汚れ(ルージュなど)の洗浄に最適です。



NET.1L

太平化学の医薬品

化学的殺菌・消毒剤

フタラール消毒液 0.55%「メタル」

医薬品 承認番号 22600AMX00871

- オートクレーブ等を使用できないゴム・プラスチックの消毒に!
- 細菌、真菌、ウイルスに対して5分以内で殺菌・不活化



NET.5L

化学的滅菌・殺菌消毒剤

グルタラール製剤 ステリキット

医薬品 承認番号 2% 21400AMZ00419000
20% 21400AMZ00418000

グルタラール製剤 ステリキット専用
処理剤

NET.1kg
計量スプーン付き



NET.5L

NET.500mL

NET.1L

歯科用小器具消毒剤

タイクロベン0.2%液

医薬品 承認番号 21400AMZ00420000

- ベンゼトニウム塩化物・亜硝酸ジシクロヘキシルアミン・界面活性剤を配合。
- 優れた殺菌力と洗浄作用により安全で確実な消毒処理が可能です。
- 2倍希釈液に10分間以上浸漬してください。



NET.2L

消毒液

消毒用 エタノール

医薬品



消毒液

5%クロル ヘキシジン液

医薬品



PRICE LIST 価格表

■手指用殺菌消毒剤

商品名	摘要	容量	希望小売価格 (税別)	梱包 単位	JAN コード	カタログ 掲載ページ
タイサリート・プラス 500mL	サリチル酸配合 薬用ハンドソープ・医薬部外品	500mL	1,200	12	4991156513000	1
タイサリート・プラス 詰替用パウチ	〃	480mL×4	4,200	6箱	4991156513161	1
タイサリート・プラス	〃	4L	6,600	4	4991156513222	1
タイフレッシュ・ ソープ	ベンザルコニウム塩化物配合 薬用ハンドソープ・医薬部外品	4L	3,200	4	4991156506996	1
ラビングフレッシュ	アルコール速乾性指式手指消毒剤・ 指定医薬部外品	1L	2,300	12	4991156508907	2

■技工用クリーナー

商品名	摘要	容量	希望小売価格 (税別)	梱包 単位	JAN コード	カタログ 掲載ページ
ピンキーラボ	技工士用クリーナー	1L	2,200	6	4991156501854	12

■保湿剤

商品名	摘要	容量	希望小売価格 (税別)	梱包 単位	JAN コード	カタログ 掲載ページ
タイハップクリーム	保湿成分配合 薬用ハンドクリーム 医薬部外品	60g	患者価格 1,480 医院価格 1,230	20	4991156508488	2
タイハップクリームボトル	〃	400g	4,600	6	4991156510849	2

■小器具用清浄液

商品名	摘要	容量	希望小売価格 (税別)	梱包 単位	JAN コード	カタログ 掲載ページ
タイフレッシュ・ ファーストクリーナー	血液凝固防止剤	500mL	1,150	12	4991156509898	3
タイフレッシュ・ワン	中性酵素系洗浄剤	2L	4,900	6	4991156506538	3
タイフレッシュ・エース NEOⅡ	NAP-30 配合 小器具防錆清浄液	2L	6,500	6	4991156512560	3
タイフレッシュ・エース NEOⅡ	〃	4L	12,800	4	4991156512409	3
ステンノン	歯科用小器具 防錆清浄剤	2L	3,700	6	4991156506019	3
ステンノン	歯科用小器具 防錆清浄剤	4L	7,300	4	4991156527717	3
タイフレッシュ・アルコール液	NAP-30・エチルアルコール	2L	5,400	6	4991156514342	3

■パイプクリーナー

商品名	摘要	容量	希望小売価格 (税別)	梱包 単位	JAN コード	カタログ 掲載ページ
タイフレッシュ・ クリーンαⅡ	NAP-30 パイプクリーナー	2L	3,700	6	4991156512799	5
タイフレッシュ・ クリーンαⅡ	〃	4L	6,800	4	4991156512621	5
スピタン	スピットン&パイプクリーナー	1kg	2,600	20	4991156532032	5

■トレークリーナー

商品名	摘要	容量	希望小売価格 (税別)	梱包 単位	JAN コード	カタログ 掲載ページ
ニューウルトラトレク リーナー	アルギン酸塩印象材用清掃材	1kg	2,400	20	4991156514052	7
ニュートレク リーナーリキッド	液体トレークリーナー 2Wayタイプ	2L	2,900	6	4991156500673	8

■衣類用洗浄液

商品名	摘要	容量	希望小売価格 (税別)	梱包 単位	JAN コード	カタログ 掲載ページ
タイフレッシュ・ユニプラス	酸素系漂白剤配合 衣類用洗浄剤	2L	3,800	6	4991156524457	9
タイフレッシュ・ユニブイ	NAP-30 配合 衣類用洗浄剤	2L	3,800	6	4991156513390	9

■補綴物用除菌洗浄剤

商品名	摘要	容量	希望小売価格 (税別)	梱包 単位	JAN コード	カタログ 掲載ページ
ステリテクト	補綴物専用除菌洗浄剤・義歯洗浄剤	2L	3,980	6	4991156506477	11
デンチャービューア・プロ	歯科医院・技工所専用義歯洗浄剤	2L	2,200	6	4991156500512	11

PRICE LIST 価格表

■印象材除菌洗浄剤

商品名	摘要	容量	希望小売価格 (税別)	梱包 単位	JAN コード	カタログ 掲載ページ
インプロステリンプラス	次亜塩素系印象材 固定剤配合除菌洗浄剤	2L	5,600	6	4991156506316	7

■院内の衛生管理に

商品名	摘要	容量	希望小売価格 (税別)	梱包 単位	JAN コード	カタログ 掲載ページ
タイフレッシュ・ミスト・プラス	除菌・除臭スプレー	350mL	1,400	12	4991156513451	6
タイフレッシュ・ミスト・プラス	除菌・除臭スプレー	2L	3,400	6	4991156513512	6
タイフレッシュ・ ウェットワイパー	除菌・抗菌・消臭ウェットワイパー	30枚	580	24	4991156504756	6

■マスク

商品名	摘要	容量	希望小売価格 (税別)	梱包 単位	JAN コード	カタログ 掲載ページ
サージカルマスク	サージカルマスク	50枚	3,400	10	4991156502394	10
清風マスク	活性炭フィルター採用 ポリウレタンマスク	5枚	1,200	20	4991156501915	10
清風マスクフィルター	清風マスク用フィルター	10枚	1,200	10	4991156502004	10
ハームレスマスク DD11-52-2	国家検定防塵マスク	1個	880	10	4959382135465	12

■歯磨剤 (医薬部外品)

商品名	摘要	容量	希望小売価格 (税別)	梱包 単位	JAN コード	カタログ 掲載ページ
クリーンデンタル	薬用歯磨き ・トータルケア ・口臭ケア ・しみないケア ・くすみケア	50g	患者価格 920 医院価格 800	10×10	トータルケア 4987107622860 口臭ケア 4987107622969 しみないケア 4987107623034 くすみケア 4987107623102	9
クリーンデンタル	薬用歯磨き ・トータルケア ・口臭ケア ・しみないケア ・くすみケア	100g	患者価格 1,680 医院価格 1,460	10×5	トータルケア 4987107622907 口臭ケア 4987107622976 しみないケア 4987107623041 くすみケア 4987107623119	9

■医薬品

商品名	摘要	容量	希望小売価格 (税別)	梱包 単位	JAN コード	カタログ 掲載ページ
フタルール消毒液 0.55%「メタル」	フタルール製剤 承認番号・22600AMX00871	5L	8,000	3	4991156510610	13
ステリキット 2%	グルタラール製剤 承認番号・21400AMZ00419000	1L	1,200	12	4991156503926	13
ステリキット 2%	グルタラール製剤 承認番号・21400AMZ00419000	5L	3,700	3	4991156504015	13
ステリキット 20%	グルタラール製剤 承認番号・21400AMZ00418000	500mL	3,300	10	4991156504176	13
タイクロペン 0.2%液	小器具消毒剤 承認番号・21400AMZ00420000	2L	3,750	6	4991156501403	13
消毒用エタノール		500mL		20	4991156503704	13
5%クロロヘキシジン液		500mL		10	4991156503865	13

■ステリキット専用廃棄処理剤

商品名	摘要	容量	希望小売価格 (税別)	梱包 単位	JAN コード	カタログ 掲載ページ
ステリキット専用廃棄処理剤	グルタラール製剤廃棄処理剤	1kg	2,400	6	4991156507139	13


■機器類

商品名	摘要	希望小売価格 (税別)	カタログ 掲載ページ	
ビューハイジーン	自動薬液噴霧器	オープン	4571221240804	2
サーボクレーブ TE-241ER	卓上型全自動オートクレーブ	450,000		4
サーボクレーブ TE-261ER	卓上型全自動オートクレーブ	500,000		4
太平スーパーソニックミニ	超音波洗浄機	29,800	4560287790309	12
太平スーパーソニック	超音波洗浄機	98,000	4560287790316	12

※この他、各種医薬品があります。直接お問い合わせ下さい。

※薬価のある商品の価格は変動しますので、お問い合わせ下さい。

High Technology & Sincerity

 **太平化学産業株式会社**

本 社 〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋1-19

TEL.06(6942)7241

支 店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル5階 TEL.03(6206)2203

URL<http://www.taihei-chem.co.jp>