


新発売

TAIHEI CHEMICAL

業務用

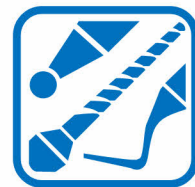

酵素の力で
血液汚れを素早く除去！



豊かな泡立ちで
擦り洗いを徹底サポート！

※専用ボトル(500mL)は数量限定にて無償でご提供致します。

歯科器具・用手洗浄剤

折りたたんで捨てられる減容ボトルを採用。


TAI
FRESH

DA・MONDE

酵素の力で血液汚れをしっかり除去!

TAI
FRESH
DA・MONDE

洗浄力

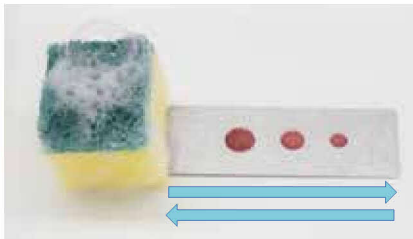

方法

ピュアチェックに300g～400gの圧力をかけながら、それぞれ13%に希釈^{*}した洗浄液を含ませたスポンジで左右に5回こすりました。洗浄剤を水ですすぎ、乾燥後、残留タンパク質をアミドブラックで染色しました。

※20mLの水道水を含ませたスポンジに3mLの洗浄剤を滴下して使用することを想定

	試験前	試験後	残留タンパク質
タイフレッシュ・ダ・モンデ			
台所用洗剤 (濃縮タイプ)			

泡立ち

方法

20mLの水道水を含ませたスポンジに3mLの洗浄剤を滴下（13%希釈）し、40回揉みました。

タイフレッシュ・ダ・モンデ	台所用洗剤 (濃縮タイプ)

防錆力

方法

7種類の金属テストピースを、13%に希釈^{*}した洗浄液に、室温で24時間浸漬し防錆効果を評価しました。台所用洗剤は、製品使用方法に合わせて5%希釈で使用しました。

※20mLの水道水を含ませたスポンジに3mLの洗浄剤を滴下して使用することを想定

	スチールバー	鉄	銅	アルミ	真鍮	SUS304	SUS430
タイフレッシュ・ダ・モンデ							
台所用洗剤 (濃縮タイプ)							

表は24時間後の結果を示した
評価：++：著しい腐食あり +：腐食あり ±：僅かな腐食あり -：腐食なし

【使用方法】

1. 適量の水を含んだスポンジなどに洗浄剤(原液)を適量(3～5mL)吐出してください。(炊事用などの厚手の手袋を着用してください)
2. 軽く泡立て、医療器具をスポンジなどで手洗いしてください。
3. 洗浄後は流水でじゅうぶんにすすいでください。

※使用前には製品の注意事項をよくお読みください。



《発売元》

High Technology & Sincerity

⊕ 太平化学産業株式会社

本社 〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋1-19 TEL.06-6942-7241
支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2

MFPR日本橋本町ビル5階 TEL.03-6206-2203

URL <http://www.taihei-chem.co.jp>

●お問い合わせは