

デュールデンタルハイジーンシステム Dürr Dental Hygiene System

歯科医院の感染予防システム

4×エリアに 4×カラーで合理的&安心



Made in Germany
ドイツ製の安心・安全

 **DÜRR
DENTAL**

感染予防をシステム化

デュールデンタルハイジーンシステムは、来院される患者さんや、医院スタッフにとって安全で安心できる空間を整えるお手伝いを致します。そのためには感染予防対策が必須となり、院内を見落としなく完璧にケアすることが求められます。デュールデンタルハイジーンシステムは、感染予防が必要なエリアを4つに色分けし、各エリアに最適な方法で歯科医院内をトータルに衛生管理するシステムです。

確実性

洗浄力や効果が高く、バクテリア、真菌、ウイルスなどに幅広い除菌効果（ドイツ/ヨーロッパ規格認定品、ドイツ衛生微生物学協会「VAH」認証、ドイツ応用衛生協会「DGfHM」認定）

やさしい

アルデヒド、フェノール、塩素非含有の材質にやさしい成分構成です。大手ユニットメーカーに採用されています。

製品ラインナップ

FD 366 sensitive
センシティブ
表面のクイック除菌

FD 360
レザーケア
合成皮革清掃保護

HD 435
クレンジングローション

FD multi wipes
マルチワイプ 不織布クロス

FD 333
フォルテ
表面のクイック除菌

FD 350
除菌ワイプ 表面の除菌

FD 312
エコ 表面の除菌

表面

手指

表面

ハンドピース類

快適

色分けされた作業表や計量が簡単なボトルキャップなど、使いやすさにこだわりました。


即効性

短時間で除菌でき、速乾性があるので作業がスムーズ&スピーディー



4つのエリアに4色のカラー

- ブルーは器具 P4
- グリーンは表面 P6
- イエローは2つのエリア
吸引システム P10
印象体・技工物 P12
- ピンクは手指 P14

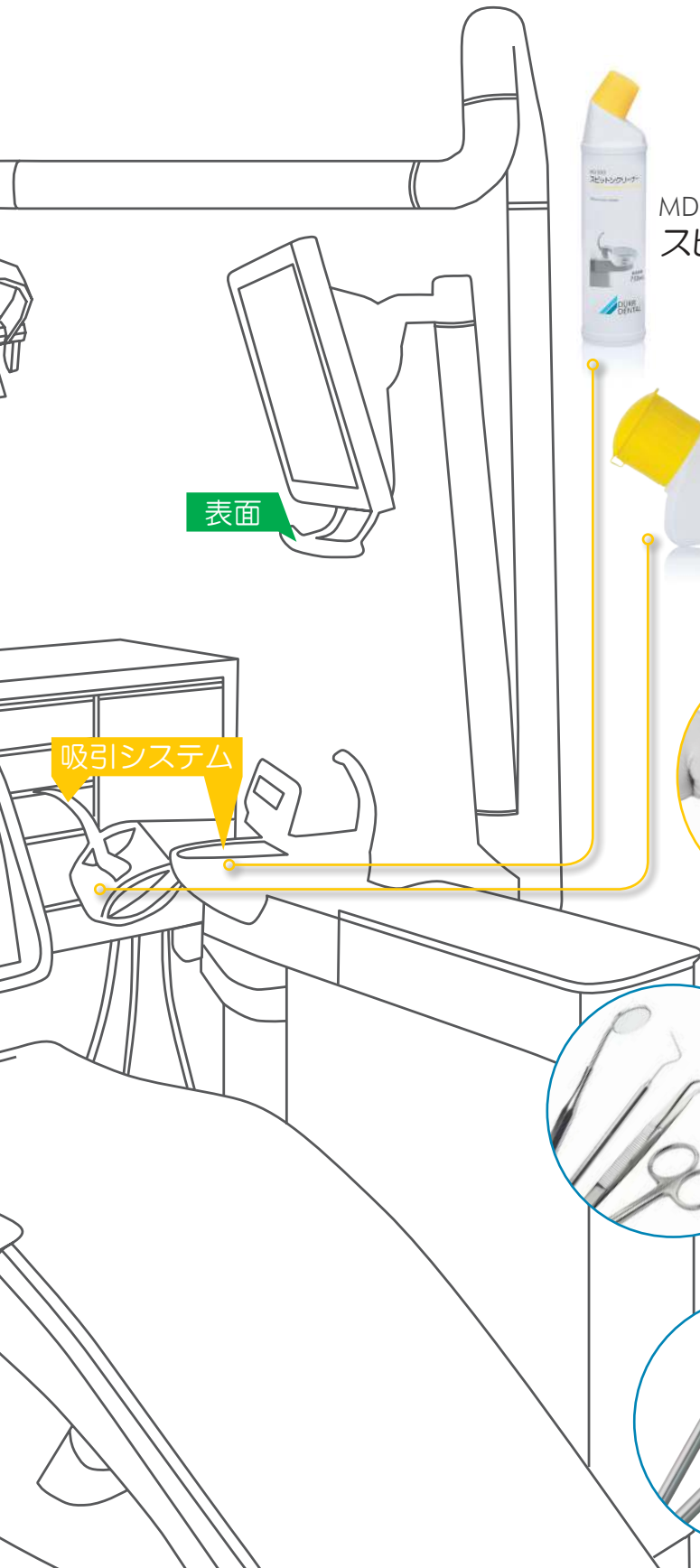

MD 550
スピットクリーナー




Orotol plus®
オロトルプラス
吸引システムの除菌
MD 555 cleaner
フロークリーナー
吸引システムの洗浄




印象体・技工物

MD 520
インプレッション
印象体・技工物の除菌

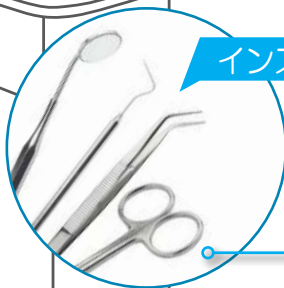

インスツルメント

ID 212
インスツルメント
器具の除菌

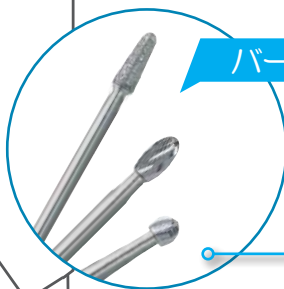

バー/リーマー

ID 220
バー/リーマー
回転器具の除菌





器具の再生処理サイクル

▶▶▶ 使用

診察や治療で器具を使用

保管

器具を無菌の状態に保管

ドキュメント作成


感染予防作業を記録

滅菌

スチームステリライザー

滅菌バッグ包装

器具をバッグに密封

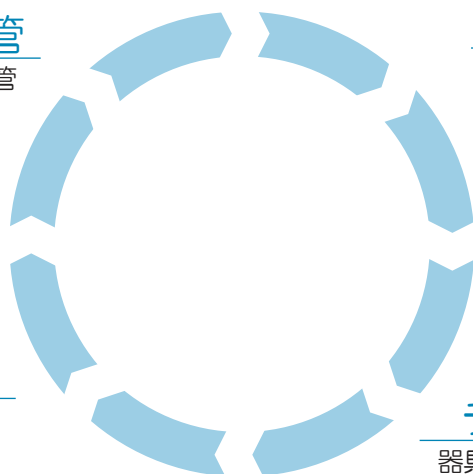

除菌

- 器具は「ID212インスツルメント」で除菌（ハイゴボックスに浸漬、または超音波洗浄器を使用）
- 回転器具は「ID220バー/リーマー」で除菌（蓋付きの小さい容器に浸漬、または超音波洗浄器を使用）
- 使用済みの器具の運搬や一時保管にはハイゴボックスを使用



チェックとお手入れ

器具の機能を確認、水洗、乾燥



ID212 instrument disinfection

■ インスツルメント | 器具の除菌



徹底
除菌

ミラーやスケーラーなどの器具、回転器具の洗浄除菌に使用します。

有効成分：第四級アンモニウム化合物

商品： ID212インスツルメント 容量2.5L濃縮液 (DF-DRID212) 価格13,000円



- 優れた洗浄力で頑固な汚れも落とします。
- 50倍希釈で浸漬する場合は5分間、超音波洗浄器では2分間の作用時間です。
- アルデヒド、フェノール、塩素非含有で環境にやさしい生分解性。
- 容器に希釈液を入れてから使用頻度に応じ最長1週間まで洗浄除菌でき、経済的。
- 腐食防止成分を配合しているため器具の材質にやさしいのが特長です。
- 専用容器「ハイゴボックス」でのご使用をお勧めします。

ID220 rotary instrument disinfection

■ バー/リーマー | 回転器具の除菌



徹底
除菌

鋼鉄やステンレス製のバー、リーマーなどの回転器具の蛋白質に強い除菌です。

有効成分：アルカリ溶液、アルコール

商品： ID220バー/リーマー 容量2.5L (DF-DRID220) 価格8,750円



- 優れた洗浄力で繊細な器具に付着した汚れも落とします。
- 作用時間は1分間です。超音波洗浄器に入れてご使用の場合は30秒間です。
- アルデヒド、フェノール、塩素非含有で環境にやさしい生分解性。
- 原液を容器に入れてから、汚れ具合に応じ最長1週間まで洗浄除菌できます。
- 腐食防止成分を配合しており器具の材質にやさしい洗浄除菌液です。

Hygobox

■ ハイゴボックス | 洗浄・除菌・消毒専用容器 (ブルー)



器具と印象体などの除菌、持ち運び、一時保管するための専用容器です。

容量：3L

外寸：幅32,5×奥行21×高さ13cm

カゴ内寸：幅24×奥行15×高さ10,5cm

商品： ハイゴボックス DF-DRBOXBL (蓋ブルー) / DF-DRBOXCG (蓋チャコールグレー) / DF-DRBOXPI (蓋ピンク) / DF-DRBOXTQ (蓋ターコイズ) / DF-DRBOXYY (蓋イエロー) (全て内カゴ白) / DF-DRBOX (蓋チャコールグレー、内カゴ青) 価格9,800円

- かごを上げた状態で固定でき、ボックス内で水切りができます。
- 水切り孔は、インスツルメントが引っかからないように考慮されています。
- 人間工学に基づいた持ち運びがしやすいデザインです。
- 蓋はブルー、イエロー、ターコイズ、チャコールグレー、ピンクの5色からお選びいただけます。用途によって使い分けていただくことができ、大変便利です。



NEW

FD multi wipes non-woven cloth

■ マルチワイプ | 不織布クロス



- このワイプは、FDシリーズの表面の除菌液と共に多目的に使用することが可能です。
- ワイプに優れた吸水性がある為、除菌液が表面にいきわたります。
- ユニットチェア、キャビネット、テーブルなどの様々な用途に対応します。
- 拭いた後のホコリも残らず、汚れをしっかりキャッチ出来ます。
- ワイプはとても丈夫で破れにくくできています。サイズも大きく、お使いの床ワイパーに使用することができます。ワイプは詰めかえ用もあります。
- 「FD333フォルテ」、「FD366センシティブ」、「FD312エコ」を容器に入れて使用します。

使いやすい容器に入った乾燥状態の大判ワイプ。容器に洗浄除菌液を入れて湿らして使
用します。ワイプサイズ：29×30cm

商品： マルチワイプ 容器+ワイプ60枚入 (DF-DRFDMW) 価格5,800円
 マルチワイプのリフィルロール ワイプ60枚入 (DF-DRFDMWR) 価格2,800円



NEW

FD333 quick-acting surface disinfection

■ フォルテ | 表面のクイック除菌



1分で
徹底除菌



ハンドピース類



- ハンドピース、ユニットテーブル、ライトのハンドルなどに使用します。除菌力も強いいため汚れをしっかり落とします。速乾性があり、拭き跡が残りません。
- 1分で素早く徹底除菌し、効果が長く続きます。爽やかなレモンの香りです。
- 清潔な布やペーパータオルに付けて拭き取りしてください。「スプレー容器」「マルチワイプ」でもご使用いただけます。

表面用の効果が高い除菌です。

有効成分：アルコール、第四級アンモニウム化合物

商品： FD333フォルテ 容量1L (DF-DRFD333B) 価格3,750円 / 容量2.5L (DF-DRFD333) 価格9,000円
スプレー容器 (DF-DR0003) 価格3,000円

FD366 sensitive quick-acting surface disinfection

■ センシティブ | 表面のクイック除菌



1分で
除菌



- ユニットチェア、ライトのハンドル、合成皮革などの除菌に使用します。
- アルコール含有量が少ないため、材質にやさしくアクリルガラスなどにも使用できます。敏感な表面の除菌に1分で素早く作用。
- 清潔な布やペーパータオルに付けて拭き取りしてください。「スプレー容器」「マルチワイプ」でもご使用いただけます。
- チェアレーザーには「FD360レーザーケア」と共に使用するのが、理想的。

材質に配慮した表面用の除菌です。

有効成分：アルコール、第四級アンモニウム化合物

商品： FD366センシティブ 容量1L (DF-DRFD366BW) ... 価格3,570円 / 容量2.5L (DF-DRFD366) ... 価格9,000円

FD350 disinfection wipes

■ 除菌ワイプ | 表面の除菌



15秒で
除菌



ハンドピース類



- ユニットテーブル、ハンドピース、イメージングプレートの保護カバーなどに使用。優れた洗浄除菌力、たった15秒で作用。短時間に確実な除菌が必要な箇所に使います。
- 乾燥後も拭き跡が残りません。
- レモンのフレッシュな香りや、フラワーの爽やかな香りから選べます。
- 袋入りのリフィルもご用意しております。

除菌効果が速いアルコールワイプ。器具などにお使い下さい。ワイプサイズ：14×22cm

有効成分：アルコール

商品： FD350除菌ワイプ 容器+ワイプ110枚入 (DF-DRFD350L:レモン/F:フラワー) 価格2,000円
FD350リフィルパック ワイプ110枚入 (DF-DRFD350RL:レモン/F:フラワー) 価格1,300円

専門的技術力で、お客様からの信頼にお応えする



デュールデンタルハイジーンシステムの30周年

世界中の歯科医からの信頼を集めているデュールデンタル社の研究者によって、最初のバキュームシステムの洗浄除菌液「オロトル」がドイツにて生み出されたのが1966年。それ以後デュールデンタル社は欧州のみならず日本を含む全世界で歯科の感染対策の分野に携わってきました。そしてその経験に基づいて製品の改善を行っており、常に製品ラインナップの拡大を図っております。デュールデンタルハイジーンは日々の感染予防対策を容易にするだけでなく、取扱いを常に安全かつ簡単にし、そのうえ論理的に実践いただくことを可能にします。


デュールデンタルハイジーンを正しい手順で正しくご活用いただくことで、歯科医院内での感染リスクから患者さんやスタッフを守ります。日々多くの患者さんが出入りをする歯科医院だからこそ、30年たっても変わらぬ安全と安心に対する考えをデュールデンタルハイジーンシステムで“かたち”にしてください。製品の効果については、あらゆる試験を実施しており、また実際の歯科医院での使用実績によって証明されておりますので、どうぞ安心してご使用ください。

またデュールデンタル社では、より高い品質基準を確保するために全製品をドイツ本社工場にて、厳しい規格のもと製造しています。さらに、独立機関※1からの認証を受け、定期的に検査を実施することでより良い品質の製品をお客様にお届けしています。

長期の経験があるからこそ、我々はデュールハイジーンシステムを自信を持ってお勧めしています。



※1 ドイツ/ヨーロッパ規格認定品、ドイツ衛生微生物学協会「VAH」認証、ドイツ応用衛生協会「DGHM」認定、ご希望があれば、実験結果の資料をご提供いたします。

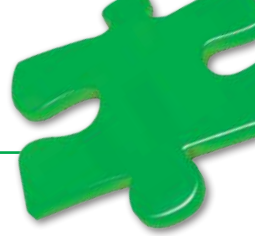

FD360 cleaning and care of vinyl upholstery

■ レザーケア | 合成皮革清掃保護



ユニットチェアの合成皮革（レザー）の清掃と保護の専用クリーナーです。

成分：界面活性剤、シリコン化合物、アボカドオイル

- レザーにスプレーして清掃・保護ができる材質に優しい洗浄液です。
- アボカドオイル配合でレザーをしなやかに保ちます。
- シリコン化合物が表面に光沢を与え、ケアします。
- 付属の専用スポンジを使えば頑固な汚れも落とせます。
- 大手ユニットメーカーの製品で材質耐性テストをクリア。
- 「FD366センシティブ」で除菌後に本製品をご使用になることをお勧めします。

商品： FD360レザーケア 容量500mL スプレーボトル+専用スポンジ10個 (DF-DRFD360) 価格6,000円

FD312 surface disinfection

■ エコ | 表面の除菌




床、キャビネット、デンタルチェア、機器や備品等の表面の拭き掃除と除菌に使用します。

有効成分：第四級アンモニウム化合物

- 優れた洗浄力で頑固な汚れも落とします。心地よい香り。
- 100倍希釈の作用時間は15分間、50倍希釈では5分間です。
- アルデヒド、フェノール、塩素非含有で環境にやさしい生分解性。
- 1本で250Lの希釈液が作れますので、経済的「エコ」です。
- 材質に優しい成分を配合しています。

商品： FD312エコ 容量2.5L濃縮液 (DF-DRFD312) 価格8,750円

吸引システムの除菌 | Disinfection of suction system

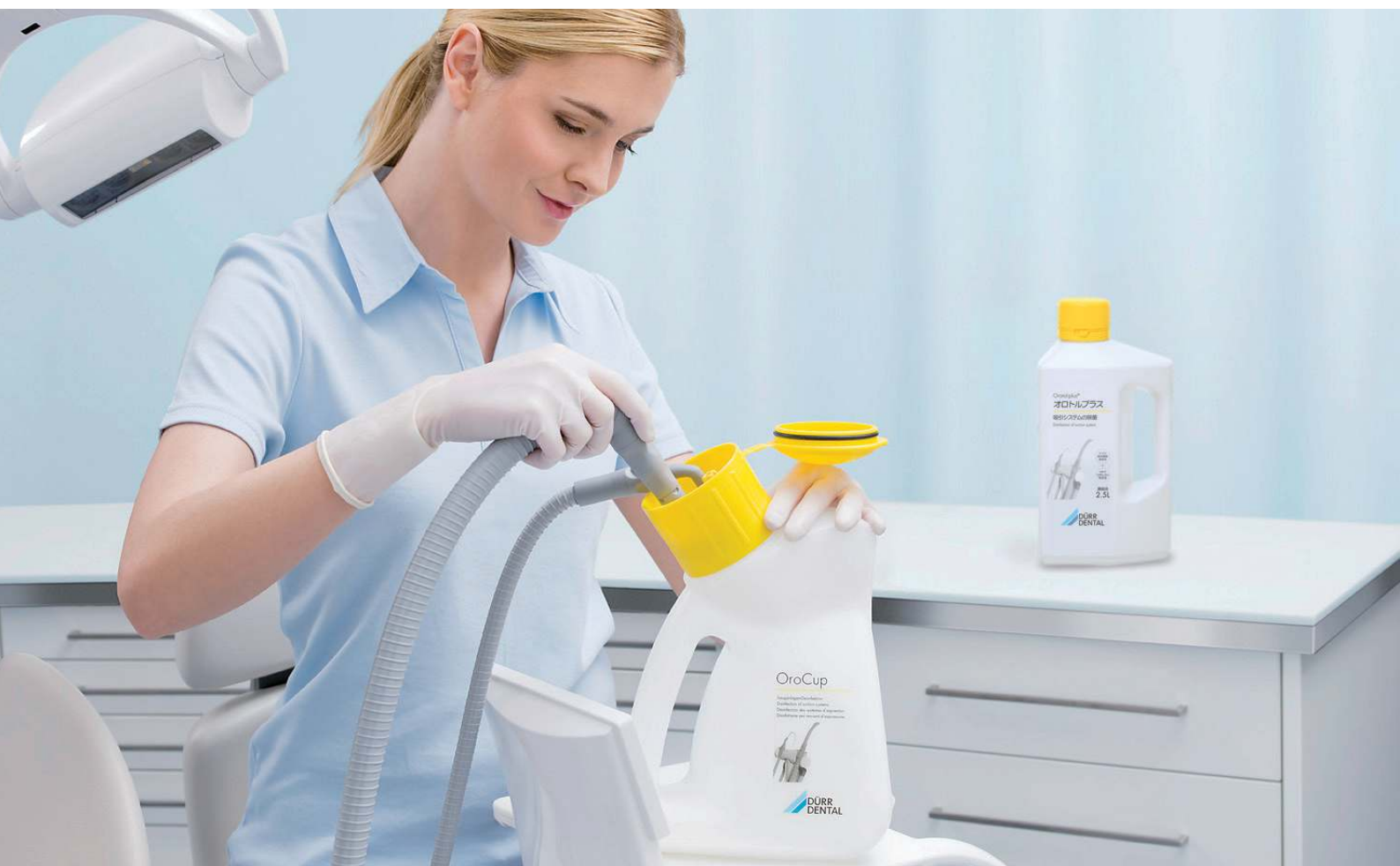

Orotol plus® disinfection of suction system

■ オロトルプラス | 吸引システムの除菌



デンタルチェアの吸引システムやスピットの排水管及び分離器の除菌、脱臭、洗浄とメンテナンスが同時にできます。無泡性でアルデヒド、フェノール、塩素は非含有の洗浄除菌剤です。

有効成分：第四級アンモニウム化合物

商品： オロトルプラス 容量2.5L濃縮液 (DF-DRO01N) 価格12,000円

- タンパク質、血液、バイオフィルム除去に優れた洗浄力を発揮。
- 除菌効果が高く、作用が長く続きます。菌に耐性を持たせない成分構成。
- アルデヒド、フェノール、塩素非含有で、材質と環境にやさしい洗浄除菌液です。
- 大手ユニットメーカーの製品で材質耐久性テストを実施。
- ご使用の際は、専用容器「オロカップ」で希釈液を作ります（ユニット1台に対して水1Lにキャップ1杯）。ユニットのホースを「オロカップ」に差して吸引させます。
- スピットンボウルとシンク等の排水の除菌・消臭にもご使用になれます。
- 無発泡性で、セパレーター分離器付きのユニットにも対応可能。

通常、各ユニットに毎日1~2回のご使用をお勧めします。各ユニットの毎日のお手入れには「オロトルプラス」、さらに週1回「MD555フロークリーナー」のご使用をお勧めします。



MD550 spittoon bowl cleaner

■ スピットンクリーナー



いつも
清潔



- 血液、水垢、歯垢染色剤、印象材などの付着物を取り除き、雑菌の増殖を抑えます。
- 洗浄、消臭、メンテナンスが同時にできます。
- 研磨剤を使用していないのでスピットンボウル内に傷や磨き跡が残りません。

スピットンボウルを洗浄するクリーナー
有効成分：アルコール、界面活性剤、有機酸

商品： MD550スピットンクリーナー 容量750mL (DF-DRMD550) 価格2,900円

MD555 cleaner special cleaner for suction system

■ フロークリーナー | 吸引システム強力洗浄



配管内
徹底洗浄



専用容器「オロカップ」に水2Lとキャップ5杯の「MD555フロークリーナー」を入れ、20倍希釈液を作り、吸引させます。各ユニットの毎日のお手入れには「オロトルプラス」、さらに週1回「MD555フロークリーナー」のご使用をお勧めします。

吸引システム、排水管及び分離器の内部を徹底洗浄します。
有効成分：有機酸、界面活性剤

- ユニットと配管内の汚れの固着を解消し、徹底洗浄するスペシャルクリーナーです。定期的にご使用いただくことで配管の詰まりを防ぎますので、歯面清掃用パウダーや粒子の噴射機器を頻繁にご使用の医院へお勧めします。
- 優れた洗浄力で固着した汚れや配管内の沈泥も落とします。無発泡性でセパレーター分離器付きのユニットに対応。

商品： MD555フロークリーナー 容量2.5L濃縮液 (DF-DRMD555) 価格8,000円

OroCup

■ オロカップ | 活用容器



ユニット
2台対応



吸引システム、排水管、分離器の洗浄除菌ケアに使用する容器です。この容器に「オロトルプラス」と「MD555フロークリーナー」の希釈液を作り、吸引させます。

- 一度にユニット2台分にあたる2Lの希釈液を作成できます。1台目のユニットには容器を立てた状態で1Lを吸引させ、2台目は容器を寝かせた状態で残りの1Lを吸引させることができます。
- 容器で希釈液を作り、蓋の部分にバキュームホースやエジェクターを差し込んで、洗浄除菌液を吸引させます。差し込み口は、各社のバキュームホースに対応するアダプタをご用意しております。
- 洗浄液と空気を混ぜて吸引させることで洗浄除菌効果を高めます。

商品： オロカップ (DF-DRCUP) 価格6,000円



Hygojet

■ ハイゴジェット | 印象体の洗浄除菌システム



システマティックな洗浄除菌

- 印象体、補綴物、対象物を遮蔽された状態で、変形させることなく洗浄除菌できます。
- 院内感染や悪臭を防止。印象体を除菌することで模型も汚染されません。
- 洗浄・除菌・乾燥を3つのボタン：除菌スプレー/エア-/ウォーターコントロールで操作します。
- 効果的な洗浄で印象精度を高めます。
- 10分間で除菌ができます。
- 印象体や義歯が6個入ります。
- ハイゴジェットは「MD520インプレッション」の印象体・技工物の除菌液を使用します。

12分間で6個の印象体を除菌できます

1. ガラスの蓋を開け、上から除菌する物を入れて蓋を閉めます。アーム差し込み口からゴム手袋をした手を入れます。
2. 対象物を水で10秒ほど予備洗浄します。エア-とウォーターのボタンを同時に押し、スプレー状の水 flow でパワー洗浄ができます。

除菌スプレーボタンを押して、印象体全体に行き渡るようにスプレーをかけると黄色いインジケーターが現れます(1個あたり約10秒=10mL)。

3. 付属のタイマーをセットし、10分間放置すると印象体が除菌されます。
4. ウォーターコントロールボタンを押して流水ですすぎます。エア-コントロールボタンを押し、エア-で乾燥させます。






MD520 impression disinfection

■ インプレッション | 印象体・技工物の除菌



各種印象体と補綴物の除菌液です。
有効成分：有機酸、界面活性剤

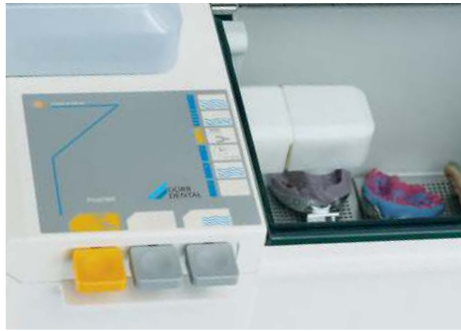

- ハイゴジェット印象体の洗浄除菌システムやハイゴボックスでご使用いただけます。ハイゴボックスでご使用の場合、対象物を5分間浸漬させます。ハイゴジェットでの除菌での作用時間は10分間です。
- アルジネート、シリコン、ポリエチレンゴム、親水コロイド、ポリサルファイド、各補綴物に使用できます。また印象体はトレーと一緒に除菌できます。
- ハイゴジェットご使用の場合、対象物1個あたりのコストは約31円です。

商品： MD520インプレッション 容量2.5L (DF-DRMD520) 価格7,700円

Hygobox

■ ハイゴボックス | 洗浄・除菌・消毒専用容器 (イエロー)



印象体などと器具を除菌、運搬、一時保管するための専用容器です。

サイズ：3L

外寸：幅32,5×奥行21×高さ13cm

カゴ内寸：幅24×奥行15×高さ10,5cm

- かごを上げた状態で固定でき、ボックス内で水切りができます。
- 水切り孔は、インスツルメントが引っかからないように考慮されています。
- 人間工学に基づいた持ち運びがしやすいデザインです。
- 蓋はブルー、イエロー、ターコイズ、チャコールグレー、ピンクの5色からお選びいただけます。用途によって使い分けていただくことができ、大変便利です。

商品： ハイゴボックス DF-DRBOXYY (蓋イエロー) / DF-DRBOXCG (蓋チャコールグレー) / DF-DRBOXPI (蓋ピンク) / DF-DRBOXTQ (蓋ターコイズ) / DF-DRBOXBL (蓋ブルー) (全て内カゴ白) / DF-DRBOX (蓋チャコールグレー、内カゴ青)

価格9,800円



HD435 cleansing lotion

■ クレンジングローション



抗菌効果あるマイルドなクレンジングローション
 配合成分：界面活性剤、抗菌剤、アラントイン、他
 内容量：1L

- 頻繁に手を洗う方のために開発されたハンドソープです。
- アルカリと石鹼成分を配合していないので、必要な皮脂を取り過ぎません。
- 手肌と同じ弱酸性が肌の常在菌（フローラ）を守ります。
- 保湿成分アラントインを配合しています。
- マイルドでありながら洗浄能力に優れています。
- 専用ポンプと壁付けディスペンサーもご用意しています。
- ご好評につき1リットルも近日販売予定。

商品： HD435クレンジングローション 容量1000mL (DF-DR435-1) 価格4,500円
 ポンプディスペンサー (DF-DR006) 価格1,900円



Manual dispenser

■ マニュアル・ディスペンサー



- 場所を取らず、使いやすい固定ディスペンサー
- アルミ、ステンレス製のシンプルデザイン
- ポンプ部分はオートクレーブ滅菌が可能
- 外寸：幅8,2×高さ24,5×奥行8,2cm

HDシリーズの壁取り付け用マニュアル・ディスペンサー

機種： マニュアル・ディスペンサー（1Lボトル用）＜手用、壁取り付け＞（DF-DR435-MDH）	価格17,400円
マニュアル・ディスペンサー（1Lボトル用）＜腕用、壁取り付け＞（DF-DR435-MDA）	価格17,400円

Touchless dispenser

■ タッチレス・ディスペンサー



- 場所を取らず、使いやすい固定ディスペンサー
- アルミ、ステンレス製のシンプルデザイン
- ポンプ部分はオートクレーブ滅菌が可能
- ノズルの下に手を添えるとセンサーが感知して1回分（約1.5mL）が出ます。ノズルの上下に手を添える（上記写真参照）と上の手によって、量を調整できます。
- 外寸：幅9,2×高さ33×奥行21cm（ドリフトレイ付：幅15×高さ41×奥行31cm）

HDシリーズの壁取り付け用タッチレス・ディスペンサー

機種： タッチレス・ディスペンサー（1Lボトル用）＜センサー付、壁取り付け＞（DF-DR435-TD）	価格46,200円
ドリフトレイー壁取り付け時の受け皿（DF-DR435-TDT1）	価格12,100円
テーブルスタンドー卓上使用時のスタンド（DF-DR435-TDT2）	価格2,900円

製品の作用範囲 | Product Application

器具	容量	Disinfection 除菌	Cleaning 洗浄	Bactericidal 細菌	Tuberculocide 結核菌	Fungicidal ※2 真菌	※1 エンベロープウイルス HBV/HCV/HIV Limited virucidal (enveloped viruses incl. HBV/HCV/HIV)	全ウイルスに有効 virucide (effective against all viruses)	生分解性 Biodegradable	アルデヒド非含有 Aldehyde-free	Use concentration 希釈率	Reaction time 作用時間	超音波洗浄器の作用時間 Reaction time in in ultra-sonic bath	Holding time 使用可能期間	ドイツ応用衛生協会認定 Meets German standard
ID212 instrument disinfection インストルメント 器具の除菌	2.5L	○	○	○	○	○	○		○	○	50倍	5分*3	2分*3	7日	○
ID220 rotary instrument disinfection パー/リーマー 回転器具の除菌	2.5L	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	原液	1分*4	30秒*4	7日	○
表面															
FD333 quick-acting surface disinfection フォルテ 表面のクイック除菌	1L 2.5L	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	原液	1分*4 *5			○
FD366 sensitive quick-acting surface disinfection センシティブ 表面のクイック除菌	1L 2.5L	○	○	○	○	○	○		○	○	原液	1分*6			○
FD350 disinfection wipes 除菌ワイプ 表面の除菌	110枚	○	○	○	○	○	○		○	○	原液	15秒*4			○
FD360 cleaning and care of vinyl upholstery レザーケア 合成皮革清掃保護	500mL		◎						○	○	原液				
FD312 surface disinfection エコ 表面の除菌	2.5L	○	○	○	○	○	○		○	○	100倍	15分*7			○
吸引システム															
Orotol plus® disinfection of suction system オロトルプラス 吸引システムの除菌	2.5L	○	○	○	○	○	○		○	○	50倍	60分*4			○
MD550 spittoon bowl cleaner スピットクリーナー	750mL		○	○		○			○	○	原液				
MD555 cleaner special cleaner for suction system フロークリーナー 吸引システム強力洗浄	2.5L		◎						○	○	20倍	30~ 120分			
印象体・技工物															
MD520 impression disinfection インプレッション 印象体・技工物の除菌	2.5L	○	○	○	○	○	○		○		原液	5分*4 10分*8			○
手指															
HD435 cleansing lotion クレンジングローション (pH 5.4)*9	500mL 1L		○						○	○	原液				

※1 ドイツのロベルト・コッホ研究所による推奨(ドイツ健康白書 47, 62- 66, 2004)

※2 カンジダアルビカンス菌での実験結果

※3 ID212: 結核菌は超音波洗浄器で50倍希釈で60分間、
ノロウイルスは25倍希釈で60分間

※4 結核菌を含む時間

※5 ノロウイルスには1分間

※6 結核菌は2分間

※7 結核菌は60分間

※8 ハイゴジェットでの作用時間は10分です

※9 HD435: 保湿成分配合、ドイツのロベルト・コッホ研究所により認定

上記データはドイツの外部研究機関、およびデュールデンタル社の研究所にて調査した結果です。
実験結果の資料はデュールデンタルのホームページよりダウンロードしていただけます。

輸入先国名: ドイツ

タカラベルモント株式会社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 <http://www.takara-dental.jp>

札幌 (011)863-2007 盛岡 (019)652-9744 仙台 (022)232-4480 郡山 (024)925-0742
新潟 (025)268-0333 さいたま (048)640-5900 千葉 (043)302-0267 東京 (03)3405-6877
横浜 (045)681-6241 名古屋 (052)932-6251 金沢 (076)221-8412 京都 (075)241-3425
大阪 (06)6212-3602 神戸 (078)231-6751 岡山 (086)233-8825 広島 (082)278-2411
徳島 (088)652-1701 福岡 (092)411-2746 鹿児島 (099)226-9481

総合サービスセンター
(修理および点検受付窓口)

ベルモントコミュニケーションズ(株) コールセンター
TEL (0120) 194-222 [フリーダイヤル]
FAX (072) 344-7985

デュールデンタル
DÜRR DENTAL SE
74321 Bietigheim-Bissingen
Höpfigheimer Strasse 17
Germany
www.duerr.co.jp

