



CAD/CAM用高透光性セミシンタージルコニアディスク
松風ディスクZR ルーセント スープラ

S-WAVE

SHOFU DISK ZR
Lucent
Supra



SHOFU INC.

Case



写真提供：西山 敦先生 (医療法人 Natural Smile)
枝川 智之先生 (有限会社 パシャデンタルラボラトリー 代表取締役)



写真提供：野村 聖一先生 (秋葉原総合歯科クリニック院長)
枝川 智之先生 (有限会社 パシャデンタルラボラトリー 代表取締役)

「ディスク1枚」で幅広い症例に対応可能

「松風ディスク ZR ルーセント スープラ」は、松風独自のトリプルグラデーション技術により、『強度』×『透光性』×『色調』を機能的にディスク内に配置しました。「ディスク1枚」でインレー、ラミネートベニアからロングスパンブリッジまで幅広い症例に対応可能になりました。

◆ ディスク層




エナメル層

前歯部にも対応可能な高い透光性

3点曲げ強さ^{※1} (代表値) 1034MPa
可視光透過率^{※2} (代表値) 44%

各層の拡大イメージ (×20,000)


→: 入射光 ⇨: 散乱光

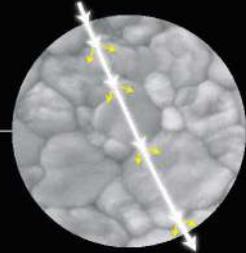

ボディ層

層の界面が識別されにくい、すぐれたグラデーション機能


3点曲げ強さ^{※1} (代表値) 1163MPa
可視光透過率^{※2} (代表値) 40%

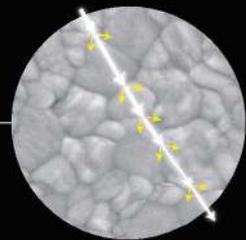

サービカル層

歯頸部の遮蔽性向上と、ロングスパンブリッジにも対応可能な高い強度

3点曲げ強さ^{※1} (代表値) 1454MPa
可視光透過率^{※2} (代表値) 37%

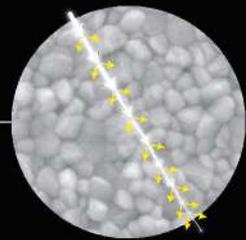

粒子の組成と形状の違いにより各層の透光性と物性をコントロール

※1 3点曲げ強さ (ISO 6872:2015に準ずる)

※2 可視光透過率 (JIS R 3106:2019に準ずる、色調:A2、試験体厚さ:0.5mm)

ロングスパンブリッジの症例にも使用可能



優れた色調再現性

- 「松風ディスク ZR ルーセント FA」と同じ『5層マルチレイヤリング構造』を継承しております。
- ステイニングテクニックによりVITAクラシカルシェードを容易に再現可能でありかつ、様々な支台歯にも対応可能な明度設計を採用しております。

Plain

W2

A1

A2

A3

A3.5

B1



※印刷のため実際の色調とは異なる場合があります。

推奨焼結スケジュール

開始温度	昇温速度	焼成温度	係留時間	降温
室温	5°C/分~10°C/分	1450°C	120分	炉内放冷又は5°C/分~10°C/分

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ディスク ZR ルーセント スーブラ	歯科切削加工用セラミックス	管理医療機器 医療機器認証番号 229AGBZX00044A05

包装・価格



松風ディスク ZR ルーセント スーブラ

14mm … ¥39,000
18mm … ¥44,000
22mm … ¥48,000

【サイズ】3種類: φ98×14, φ98×18, φ98×22(mm)
【色調】7色: Plain, W2, A1, A2, A3, A3.5, B1

関連製品

ヴィンテージ アート ユニバーサル



ベーシックセット … ¥49,000



グレース 15g
GP … ¥4,500 GP-F … ¥6,000



ステイン 2g … ¥2,800



山本リキッド 50mL … ¥8,000
専用液 50mL … ¥4,000



ヴィンテージ ZR
イントロセット … ¥25,000
他各種セット、単品有り



ジルコシャイン
セレクトキット … ¥5,600



松風ビトリファイドダイヤ HP
No.28,29,42,43 3本入 … ¥2,900
No.11 2本入 … ¥2,900
No.20 3本入 … ¥4,500
No.10,70 2本入 … ¥4,500
※CA、FGもあります



ジルコシャイン HP
No.10,11 3本入 … ¥3,300
No.28 4本入 … ¥3,300
ホイール5 1枚入 … ¥2,150
※CAもあります



ジルグロス
20g … ¥10,500
40g … ¥14,000

このカタログに記載の価格は2021年2月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6963/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

www.shofu.co.jp

2102JEJSI