

3M Science.
Applied to Life.™

スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブ

歯科用象牙質接着材 / 歯科セラミックス用接着材料 / 歯科金属用接着材料 / 歯科用知覚過敏抑制材料 / 歯科用シーリング・コーティング材

Scotchbond™ Universal Plus Adhesive





シンプルな術式を可能にする 1ステップユニバーサルボンディング

3M独自の「VMSテクノロジー」が正当進化。スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーシブのもつ「汎用性」をそのまま継承しています。スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブは歯質・各種材料に接着可能なので、前処理材はこれ1本。各種専用プライマーが不要です。

3M独自のVMSテクノロジー




症例や被着体に合わせて使用する材料や術式を変える必要がなく、在庫管理が容易です。



この
1本だけ!

エナメル質にも象牙質にも安定した高い接着力を発揮


エナメル質、象牙質に対する引っ張り接着強さ

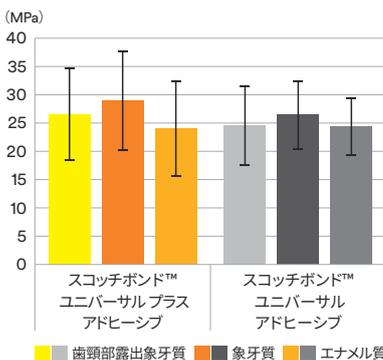

日本歯科大学 生命歯学部 接着歯科学講座


MDPとシランカップリング剤の配合で多くの被着体に高い接着力を発揮

12%パラ合金への剪断接着強さ

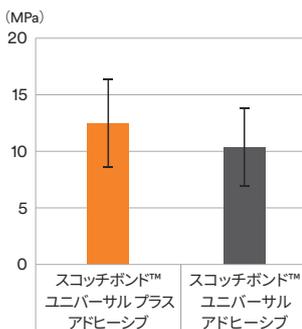

日本大学 歯学部 保存学修復学講座


ジルコニアへの剪断接着強さ

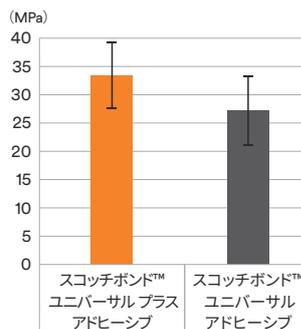

3M社内データ

シランカップリング剤の配合最適化でガラスセラミックスへの接着力が向上

ガラスセラミックスへの剪断接着強さ

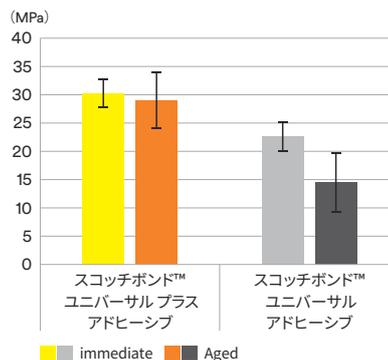

3M社内データ

基本術式 (コンポジットレジン充填修復)

写真提供: 日本大学歯学部 宮崎 真至 教授



1 アドヒーシブを20秒塗布。



2 弱いエアでアドヒーシブが動かなくなるまで約5秒間乾燥。



3 10秒間光照射。
(ハロゲンランプ照射器の場合)



4 レジン充填、形態修正・術後。

対応可能な被着体


エナメル質 | 象牙質 | コンポジットレジン | ジルコニア | アルミナ | ガラスセラミックス | 金属




これまでの汎用性に、新たな付加価値をプラス

+ 優れた“ぬれ性”と“歯質浸透性”

粘度の低減による優れたぬれ性と歯質浸透性によって、窩壁部や複雑な窩洞にも塗り広げやすく、塗りムラや液だまりなどの発生リスクを抑えます。均一な被膜（約 5μm）は審美修復にも適します。

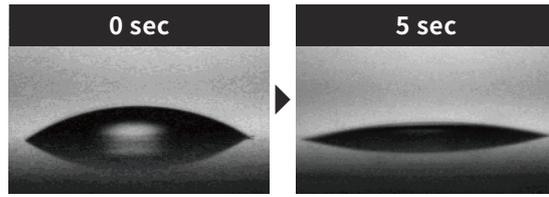

3M 社内データ

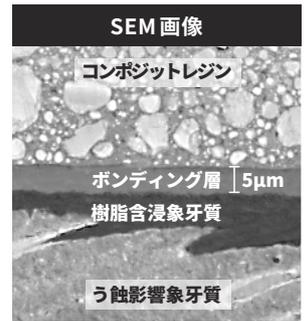


3M 社内データ


+ 湿潤環境下でも安定した接着力

ビトラボンド コポリマーの配合最適化によって、乾燥が難しい歯面においても安定した接着力を発揮します。う蝕影響象牙質へもしっかり浸透し、健全象牙質と同等の接着力を発揮します。

湿潤環境下：ヒト抜去歯象牙質に対するせん断接着強さ

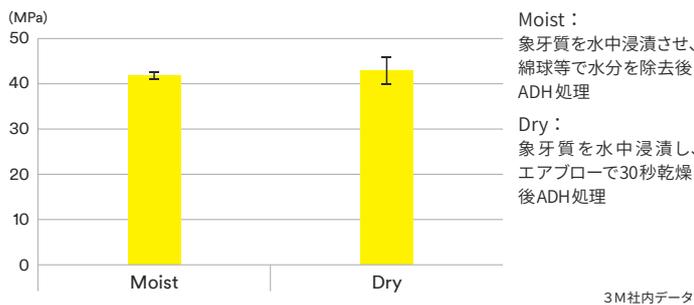


う蝕影響象牙質：ヒト抜去歯象牙質に対するせん断接着強さ

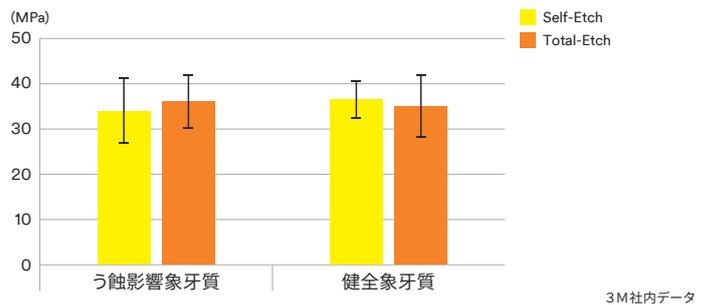

+ 象牙質と同等の X 線造影性付与


業界初* 象牙質と同等の X 線造影性を有しており、二次う蝕の診断や経過観察を助けます。

*一液性のユニバーサルボンディング材として、業界ではじめて製品化しました (3M 社内調べ 2021年1月時点)

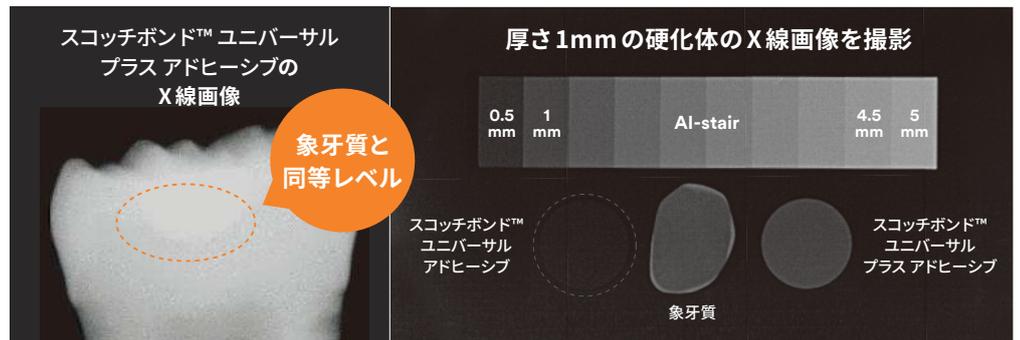

知覚過敏処置も、窩洞・支台歯のシーリング材としても使用可能 保険適用

ボンディング材が象牙細管に浸透し、レジンタグを形成。象牙細管を封鎖します。

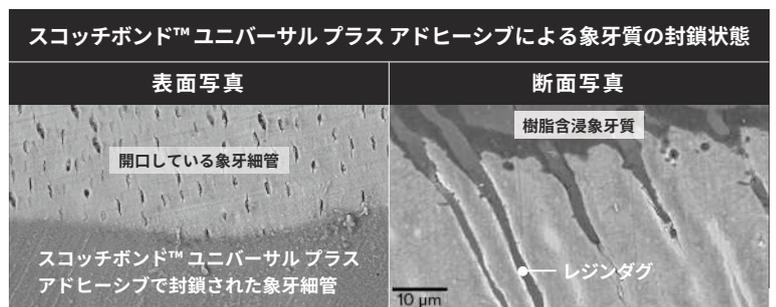

1本で多用途

CR 充填用接着材のほかリライエックス™ ユニバーサルレジンセメントの前処理剤、知覚過敏抑制材料、窩洞・支台歯のシーリング剤としてご利用いただけます。



使用可能時間 30分 (遮光下)

揮発性の低い、水とエタノールを溶媒としているため、滴下後約 30分使用可能。複数窩洞の処置にも余裕をもって対応できます。



常温保管できるので、いつも手元に

品質管理の煩わしさがなく、いつでも安心して使用でき、ケアタイムも短縮できます。




NEW ボトルデザイン

キレがよく液だれしにくいボトルデザインです。個包装のユニドースタイプも準備しています。

スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブ

新発売キャンペーン

キャンペーン期間：2021年2月22日(月)～5月31日(月)

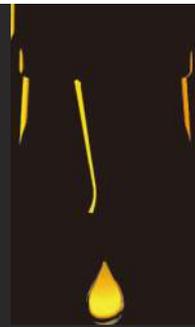

ボトルタイプ

内容：

- ・ボトル(5mL)×1本
- ・ボトル(1.5mL)×1本

製品番号：

41294JSP



+



ボトル(1.5mL)
×1本

内容：

- ・ユニドース×100本
- ・ユニドース×10本

製品番号：

41298JSP



+



ユニドース
×10本

キャンペーン希望医院価格

12,600円

キャンペーン希望医院価格

12,600円

通常品 (近日発売予定)



スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブ イントロキット

内容：

- ・ボトル(5mL)×1本
- ・ディスポーザブル アプリケーターブラシ (XSサイズ)×50本
- ・ディスポーザブル 混和皿×48枚

製品番号：**41293J**

希望医院価格：15,800円



スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブ ボトルタイプ

補充品

内容：ボトル(5mL)×1本
製品番号：**41294J**
希望医院価格：12,600円

ダブルパック

内容：ボトル(5mL)×2本
製品番号：**41294W**
希望医院価格：22,700円



スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブ ユニドースタイプ

100本入(11mL)

内容：ユニドース×100本
製品番号：**41298J**
希望医院価格：12,600円

50本入(5.5mL)

内容：ユニドース×50本
製品番号：**41297J**
希望医院価格：6,800円

スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブ ユニドースタイプの正しい使い方



STEP 1 丸い部分を押しつぶします。

中でボンディング材が移動



STEP 2 ブラシを引き抜いてすぐ使えます。

ボンディング材はこの部分に溜まるので混和皿が不要です



適量がブラシにつきます
(細かい処理に適したXSブラシ)

販売名：スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーシブ
販売名：スコッチボンド ユニバーサル アドヒーシブ

認証番号：302AKBZX00043000 / 認証番号：224AKBZX00054000

販売名：リライエックス ユニバーサル レジン セメント

認証番号：302AKBZX00044000

※掲載の内容および希望医院価格は、2021年1月現在のものです。希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。

3M、Scotchbond、スコッチボンド、リライエックスは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社

歯科用製品事業部

<https://www.3mcompany.jp/dental>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
DEN-1699-AJ (012180) PN/e.

Web

3M 歯科



3M コールセンター

0120-332-329

9:00～17:00 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)