



ホームホワイトニング材  
松風ハイライト ホーム

Official partner



# HiLite HOME

患者さまを笑顔にする  
輝く白い歯へ。



*Renewal*

松風の従来製品  
「HiLite Shade Up」が  
「HiLite HOME」として  
リニューアル  
さらに使いやすくなりました



プロモーション  
動画はコチラ



SHOFU INC.



患者さまの負担が少なく、手軽に行えるホームホワイトニング材で健康的な白い歯へ。  
 充実した関連製品がホワイトニング治療をトータルでサポートします。

垂れにくい  
粘性の高いジェル

粘性の高いジェルなので  
歯面にしっかり滞留。  
トレーから漏れでる  
不快感も軽減します。

刺激が少ない  
「過酸化尿素10%」

オフィスホワイトニング材で使われる  
薬剤(過酸化水素35%)より  
刺激が少なく安心して  
患者さまにお渡しできます。

スッパリ爽快な  
使用感

爽やかなミントフレーバー。  
使用後はスッパリとした  
爽快感が得られます。

製造後3年間  
使用可能

使用期限は製造後3年間。  
ゆとりをもって  
お使いいただけます。





口腔全体の診査

1日2時間  
ホワイトニング材を塗布

経過観察(2週間後)

## シンプルな処置で歯科医院さま、患者さまの負担を軽減

### 歯科医院での処置

**1 診査・診断**

口腔内全体の診査、適応症の確認、注意事項の説明を十分に行います。

**2 シェードテイキング**

シェードを確認し、口腔内を撮影、キットに同梱されているシェードメモに記録します。

**3 歯面清掃**

歯面研磨ペーストを用いて歯面清掃を行います。

**4 印象採得、マウストレーの製作**

キットに同梱されているエバシートを用いてマウストレーを製作します。

**5 マウストレーの調整、使用方法の説明**

患者さまにマウストレーを試着していただき必要に応じて調整します。また、使用方法の説明を行います。

**ビューティフィル ユニシェード  
ビューティフィル ユニシェード ブロッカー**

周辺歯質の色調と調和するコンボジットレジン。充填修復した箇所がホワイトニング前後の歯牙どちらとも調和します。

**アイススペシャルC-IV**

ホワイトニングモード搭載の歯科専用デジタル口腔撮影装置。

**プレサージュ**

フッ素無配合。水洗性にすぐれた歯面研磨ペースト。

**モデルキャブチャートライ**

吸引・加圧により精度の高いマウストレーの製作が可能な成型器。

**松風技工用カーバイドパー  
キャブチャーカーバHP**

目詰まりを最小限に抑え、効率的にマウストレーの調整が可能な技工用カーバイドパー。

充実した  
関連製品が処置を  
バックアップ

### 患者さまが自宅で行う処置

**1 清掃**

歯ブラシなどで歯面の清掃を行い、十分に水ですすぎます。

**2 ジェルの注入**

6歯合計でシリンジの1/3量(最大でも1/2量)を目安として注入します。

**3 マウストレーの装着**

1日2時間以内を目安として装着します。

**4 終了後のお手入れ**

マウストレーを外し、口腔内を水で十分にすすぎます。マウストレーは、歯ブラシ、水で洗浄します。終了後、シリンジは冷蔵庫で保管します。(保管温度2~8℃)

**予後観察**

定期的に来院いただき経過を観察します。処置期間終了後も半年から1年後に予後観察を行い、必要があれば再度ホワイトニングを促します。

### ホワイトニング後のケアにおすすめ

知覚過敏予防や症状の緩和に



**メルサージュ ヒスケア**  
フッ素1,450ppm配合

ヤニヤステインを落とす成分を配合しており、ホワイトニング後の白さを保ちたい方におすすめです。

---



**メルサージュ ヒスケア ジェル**  
フッ素1,450ppm配合

知覚過敏症状の強い方におすすめです。研磨剤無配合、歯面に成分が残りやすいジェルタイプです。マウストレーに注入し、装着するなどしてホームホワイトニング期間中にお使いいただくのもおすすめです。



## 注意事項（使用前の注意事項）

### 【禁忌症例（次に示す症例への使用は禁忌）】

- 1) 健全でない歯
- ①う蝕やエナメル質に亀裂が認められる歯。
- ②形成不全など実質欠損の大きい歯。
- ③露出象牙質およびその周辺部（くさび状欠損、咬耗症等）、歯冠修復物の不適な部分や二次う蝕の可能性がある部位。
- 2) 無力タラーゼ症の患者  
カタラーゼ酵素は一般健常者の体内に存在し、本材の処置により生成した過酸化水素水が身体に接触した場合、この酵素により分解されます。しかし、無力タラーゼ症の患者に本材で処置を施した場合、過酸化水素水が何かの形で体内に蓄積される恐れがあります。
- 3) 知覚過敏症の患者 4) 重度の歯肉炎や歯周炎
- 5) 未成年者 6) 妊娠中、授乳期の女性 7) 就寝中の装着

### 【一般的な注意事項】

- 1) 機械的歯面清掃を十分行い、更に清掃が必要な場合に本材を用いること。
- 2) 治療計画を立てる前に適応症か禁忌症かを診断すること。

- 3) 処置前に必ずインフォームドコンセントを行い、適応症の場合でも生体や変色原因の個人差があるために、着色の改善の程度が異なること、および一時的に歯面の着色が改善されるが恒久的でないことを十分に説明すること。
- 4) 適応部位  
成人の健全な前歯のみで、くさび状欠損を含む修復処置が必要でない歯面または処置が行われていない歯面。

### 【適応症例】

- ①加齢による変色歯（黄ばみなど）
  - ②コーヒー、茶、タバコなどによる変色歯（歯面研磨材で除去できない歯）
  - ③色素生成細菌による変色歯（歯面研磨材で除去できない歯）
  - ④全身疾患による変色歯（着色が軽度で形成不全を伴わない歯）
- ※全身疾患による変色歯とは、テトラサイクリンによる変色歯（F1、F2程度）、フッ素、ヘマトポルフィリン症などによる変色歯が該当します。

### 変色度合（Feinman5の分類）



F1（第1度）：  
淡い黄色、褐色、灰色で歯冠全体が一樣に着色されていて、縞模様が見られないもの。



F2（第2度）：  
第1度よりも濃く歯冠全体が一樣に着色されていて、縞模様が見られないもの。



F3（第3度）：  
濃い灰色、青味がかかった灰色で縞模様を伴うもの。



F4（第4度）：  
着色が強く、縞模様の著明なもの。

## 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ハイライト ホーム	医薬品含有歯科用歯面清掃補助材	高度管理医療機器 医療機器承認番号 21800BZG10006A01

## 包装・価格



### 松風ハイライト ホーム セット ¥6,800

【内容】  
ジェル 1.2mL 8  
エバシート 2  
トレーケース 1  
シェードメモ 1  
患者さま用説明書 1  
患者さま用説明（ご自宅での使用方法） 1



ジェル  
1.2mL 4本 ¥2,900  
(患者さま用説明書 1入)



エバシート  
12枚 ¥2,600  
寸法：130×130mm  
厚み：0.9mm

## 関連製品



歯科専用デジタルカメラ  
アイススペシャル C-1V  
一式 ¥270,000



ノンフッ素歯面研磨ペースト  
プレスアージュ  
40g ¥1,600



歯科技工用成型器  
モデルキャプチャー トライ  
一式 ¥300,000



知覚過敏予防はみがき剤  
メルサーージュ ヒスケア (80g)  
6本1箱 ¥4,680  
1本 ¥780(標準患者価格 ¥980)  
香味：ソフトミント、グレープフルーツミント



知覚過敏予防はみがき剤  
メルサーージュ ヒスケアジェル (60g)  
6本1箱 ¥4,680  
1本 ¥780(標準患者価格 ¥980)  
香味：ソフトミント



歯科充填用コンポジットレジン  
ビューティフィル  
ユニシールド  
2.1mL(4.5g) ¥3,600



歯科充填用コンポジットレジン  
ビューティフィル  
ユニシールド ブロッカー  
2.1mL(4.5g) ¥3,600



歯科技工用カーバイド切削器具  
松風技工用カーバイドパー  
キャプチャーカーバHP  
1本 ¥3,200  
(Sクラスは1本 ¥2,700)

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

価格は2021年2月現在の標準医院価格および標準患者価格(消費税抜き)です。

取扱店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社：〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社：東京(03)3832-4366 ●営業所：札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

www.shofu.co.jp

2101GJSi