

premium<sup>TM</sup>  
plus JAPAN

→ Piece by Piece with pleasure ←

## アクアスプリント サーモ



- 約10分のチェアタイムで完成！その日のうちにお渡しできる顎関節症疼痛緩和用スプリント。
- 熱可塑サーマルパッドを患者様の下顎に圧接してフィットさせます。手軽に個人スプリントが完成します。
- 口腔内に挿入すると左右のウォーターパッドにより咬合圧が左右均等に分散され、顎関節周辺の筋肉をリラックスさせることができます。



AQUASPLINT<sup>classic</sup>  
SABBAGH TMD/CMD Universal Therapy

アメリカ矯正歯科学会 in Chicago 2011

にてアクアスプリントの臨床結果が発表されています。詳細はお問合わせください。

### 使用方法



80℃のお湯に2～3分浸漬しサーマルパッドが透明になるのを待つ。



透明になったサーマルパッドを冷水で10秒間冷却する。



下顎に圧接し5分間保持する。冷水で口腔内をすすぎ、口腔内を冷却する。



サーマルパッドが白くなり凝固したことを確認し撤去する。(1～5は繰り返し行うことができます。)



サーマルパッドの余剰部分はハサミ等で除去する。

・装着時間 1日10時間以内(就寝時8時間、日中2時間) ・4週間使用しても症状改善が見られない場合は咬合以外の疼痛原因を検討する。



#### セット内容

- ・スプリント台
- ・リテーナーボックス×1
- ・取扱説明書×1

### アクアスプリント サーモ

Aquasplint Thermo

商品コード	入数	価格
AQ2	1セット	12,000円

販売名: アクアスプリント サーモ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00107

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター (製造販売) : 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5

※商品は税別価格となります。

担当販売店

premium<sup>TM</sup>  
plus JAPAN

→ Piece by Piece with pleasure ←

## AFRミニレグ


Dentrade e.K.



- 下顎の限界運動を記録し、水平的顎間関係を定めるためにご利用いただけるゴシックアーチ描記装置です。
- 一つのサイズでどの顎形状にも装着でき、事前準備も最小限で大幅時間短縮。
- 記録の保管も可能なスケールラベル付き。  
※バウシュ8μアルティフォルと一緒にご利用ください。



### 使用方法

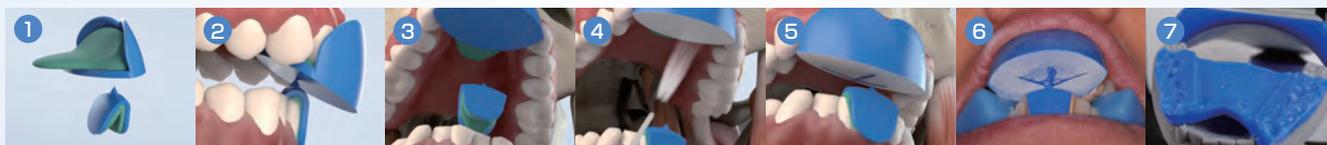

1 描記板と描記針を除菌後、パテ、シリコンバイト材等を描記板に盛り、口腔内に装着する。  
※推奨製品 ソールバイト

2 描記針も同じ要領で口腔内に装着する。  
※推奨製品 ソールバイト

3 タッピングを何度か行い、顎のストレスを解消する。

4 バウシュアルティスプレーを描記板に塗布する。

5 ゴシックアーチの描記を行う。

6 描記針をCRに合わせ、CRバイトワックスで咬合位置を記録する。

7 CRバイトワックスを使用し、上下顎の位置関係を咬合器上で合わせる。

※スケールラベルを使用の際、記録を必要とする際はスケールラベルを両面シールで描記板に貼付し、バウシュアルティフォル8μを描記針と描記板の接点にあて、記録する。

### セット内容



① ゴシックアーチトレーサー  
・描記板×5  
・描記針×5  
・CRバイトワックス×5  
・スケールラベル×10  
・両面シール×10



② ゴシックアーチ スターターセット  
・描記板×1  
・描記針×1  
・CRバイトワックス×2  
・スケールラベル×2  
・両面シール×2



③ CRバイトワックス  
・CRバイトワックス×10

### AFRミニレグ

AFR-Mini-Reg

ディスプレイ

商品コード	種類	入数	価格
① AFR100	ゴシックアーチトレーサー		8,000円
② AFR101	ゴシックアーチ スターターセット	1セット	
③ AFR102	ゴシックアーチ CRバイトワックス		4,000円

販売名：AFR ミニレグ 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000007