

YOSHIDA



歯科用シリコーン印象材

Speedex[®]

スピーデックス

 **COLTENE**



Speedex®

Aシリコン品質のCシリコン

ポリシロキサンを主材とした歯科用シリコン印象材


- 7日の寸法安定性
- コントロール可能な作業時間
- 親水性
- 高精度
- 優れた流動性

スピーデックスは硬化時に止血剤や麻酔やラテックスグローブの影響を受けません。

7日間の寸法安定性

寸法安定性が良いので、印象採得後7日以内であれば印象面に悪影響を与えることなく石膏を注ぐことができます。

高い寸法安定性 (%)

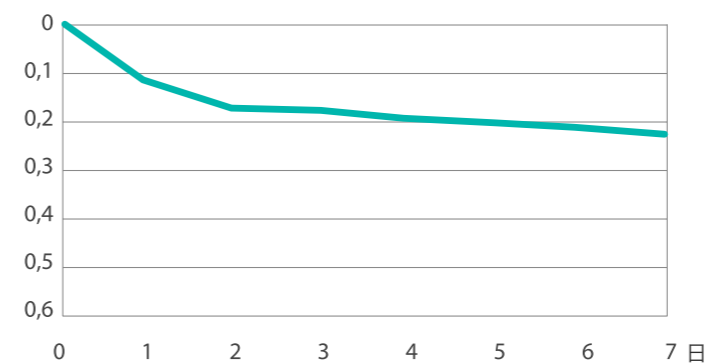


■ スピーデックス

コントロール可能な作業時間

アクチベーターを使用することで、テクニックに合わせて作業時間を調整できます。

調整可能な作業時間 (%)

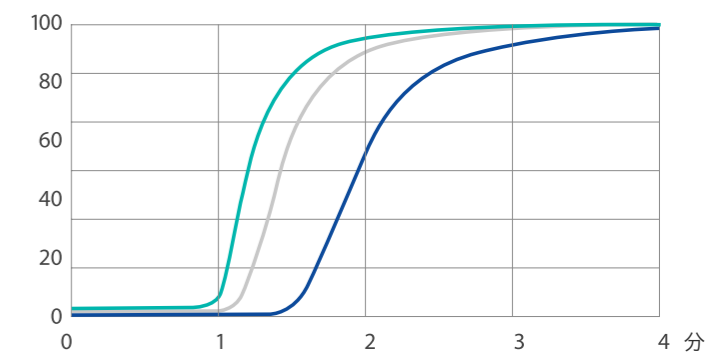


■ 標準量 ■ 20% 増量 ■ 20% 減量

親水性

優れた親水性により、口腔内の滲出液に影響されにくいいため、細部までシリコン印象材が行き渡ること、より精密な印象採得が可能です。


Grade in °

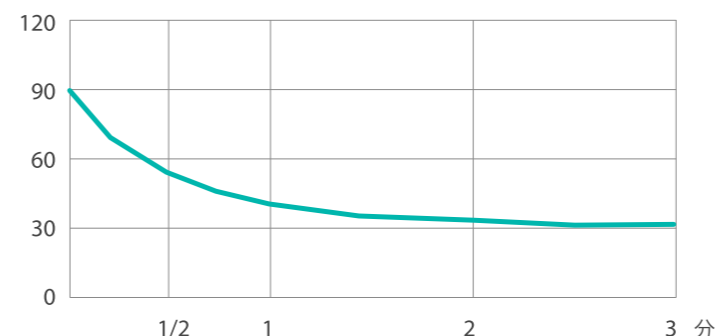

■ スピーデックス

優れたスナップセット

アクチベーター量を増減することで、印象採得法に応じて操作時間の調整ができます。スピーデックスは「スナップ」セット(急硬化)により、常に初期硬化の段階から寸法安定性が得られます。

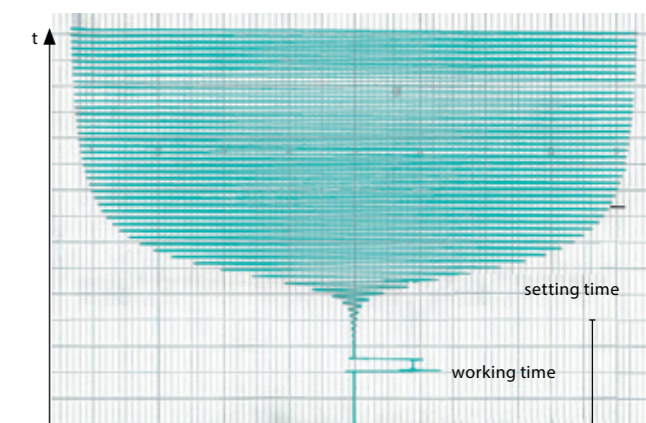

スピーデックス物質変形図式において、硬化までにかかる時間が急勾配な曲線を示しています。(スナップセット特性)

※上記4つの試験はゲオルゲアサチ工科大学にて測定しています。(測定日：2011年10月)

操作の目安時間 (23°Cにおいて)

スピーデックス ライト | 最大5分

練和	操作	口腔内保持
30秒	1分30秒	3分

スピーデックス ミディアム | 最大4分30秒

練和	操作	口腔内保持
30秒	1分	3分

スピーデックス パテソフト | 最大4分30秒

練和	操作	口腔内保持
30秒	1分	3分

スピーデックス パテ | 最大5分

練和	操作	口腔内保持
45秒	1分15秒	3分

最終硬度

24時間経過後のショアA硬度

スピーデックス	ショアA硬度
ライト	48-52
ミディアム	51-53
パテ ソフト	57-59
パテ	65-67

Source: internal data


高い

流動性

低い


Double-Mix Technique

Total Time
4:30 min

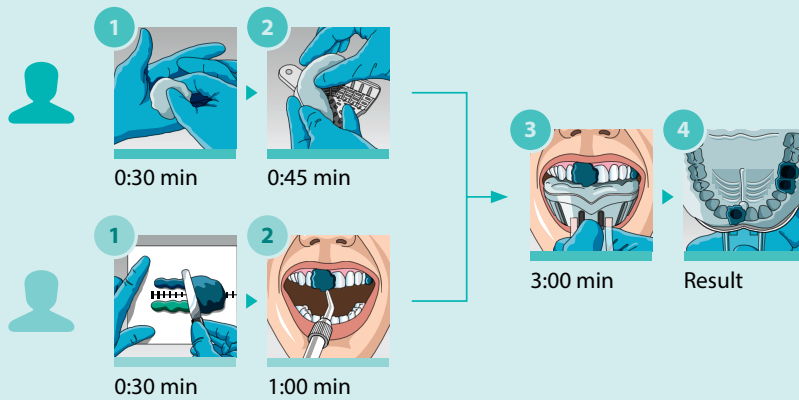

Correction Impression Technique

Total Time
8:45 min

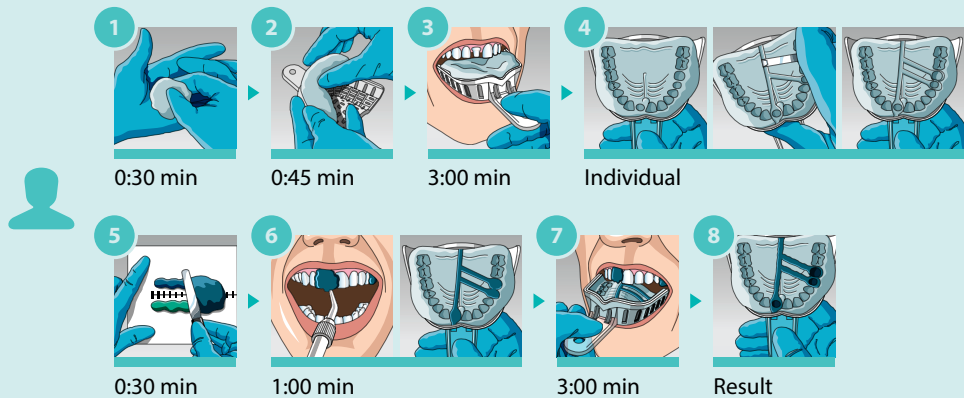

STEP BY STEP

ORDER INFORMATION

インジェクション用

スピーデックス ライトボディ

内容量：140mL
標準価格：7,420円(税別) 402522

スピーデックス ミディアム

内容量：140mL
標準価格：7,420円(税別) 402530

トレー用

スピーデックス パテ ソフト

内容量：910mL
標準価格：14,560円(税別) 402547

スピーデックス パテ

内容量：910mL
標準価格：14,560円(税別) 402554

スピーデックス アクチベーター

内容量：60mL
標準価格：6,180円(税別) 402561



販売名：スピーデックス 一般名：歯科用シリコーン印象材 認証番号：302AKBZI00068000 (管理) 製造販売元：AJMD 株式会社 東京都中央区東日本橋 2-4-5

*仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 *価格は2021年7月現在の税別価格です。

禁無断転載

◎販売元：株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野 7-6-9
<https://www.yoshida-dental.co.jp>

●お問い合わせは下記まで

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～19:00 土 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937018705

C02299/2021年6月/30/@40/新