



酵素洗淨剤

サイドザイム®

100 since 1922 2022 SHOFU  
100年先にも輝く笑顔を  
Bright smiles for another 100 years

CIDEZYME®



SHOFU INC.

サイdezaim® 酵素洗剤は、酵素が配合されたマイルドな洗剤です。  
 ディスオーパ® 消毒液0.55%で高水準消毒を行う前にご使用下さい。  
 サidezaim® 酵素洗剤は、手術器具などに付着した有機物に浸透し、  
 汚れを取り除く働きがあります。



**特 長**

- タンパク分解酵素入りなので、器具等に付着した蛋白質・有機物を分解します。
- 浸漬後、約1分で効果があらわれます。
- 室温で有効ですので、温水を使用する必要がありません。
- 素材に影響を与えにくいマイルドな洗剤です。
- ミントの香りがします。

**使用方法**

1. サidezaim®は単体でご使用下さい。サイdezaim®に漂白剤やその他の化学薬品を加えて使用しないで下さい。

サイdezaim® 1Lボトルの場合：  
 専用ポンプで1プッシュ(8mL)のサイdezaim®を、1Lの水で希釈します。

サイdezaim® 5Lボトルの場合：  
 ・専用ポンプで1プッシュ(27.5mL)を、約3.4Lの水で希釈します。  
 ・乾燥した有機物が付着している場合には、専用ポンプで1プッシュ(27.5mL)を約1.7Lの水もしくはお湯で希釈します。

2. 使用後の器具はただちにサイdezaim®に浸漬し、すべての有機物が溶解あるいは取り除かれるようにして下さい。浸漬後、約1分で効果があらわれます。乾燥した有機物が付着したものは、浸漬時間を延長して下さい。また、すべての器具にサイdezaim®が行き渡るようにして下さい。
3. サidezaim®が行き渡ったすべての器具を水で十分に洗浄し、水切りを行なって下さい。
4. これで高水準消毒あるいは滅菌の準備ができました。

※専用ポンプは、製品には含まれておりません。専用ポンプをご希望の方は、お出入りの歯科商社にお申し出ください。



[包装・価格]  
 1L…¥3,785 5L…¥12,235

ご使用の際は、製品に添付されている取扱説明書をよく読んでお使いください。

価格は2021年5月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店

お問合せ先: ASP Japan 合同会社 03-6712-1011

製造販売元



Advanced Sterilization Products

ASP Japan 合同会社

〒108-6106 東京都港区港南2丁目15番2号 品川インターシティB棟6階 ☎0120-306-580

販売元



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社: 〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社: 東京(03)3832-4366 ●営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

www.shofu.co.jp