

お口の汚れを
逃さずサッと

吸いとる吸引管。



誤嚥の心配がある患者さんに

ジェルと吸引管で
水を使わない
口腔ケア

口腔ケア用汚染物回収ツール

口腔ケア用吸引管

管理医療機器 医療機器認証番号：303ADBZX00005000 一般的名称：歯科用吸引管 製造販売元：日本歯科薬品株式会社

口腔ケア用吸引管は、適度に細い吸引口(一箇所)で、
口腔内全体にアプローチしやすい形状を有した
汚れを効率よく回収できるツールです。


製品特長

汚れを吸いとりやすく、詰まりにくい吸引口

14Fr.(内径Φ2.9mm、外径Φ4.7mm)

届きにくい箇所も
ピンポイントで狙える長さ・角度

(原寸大)

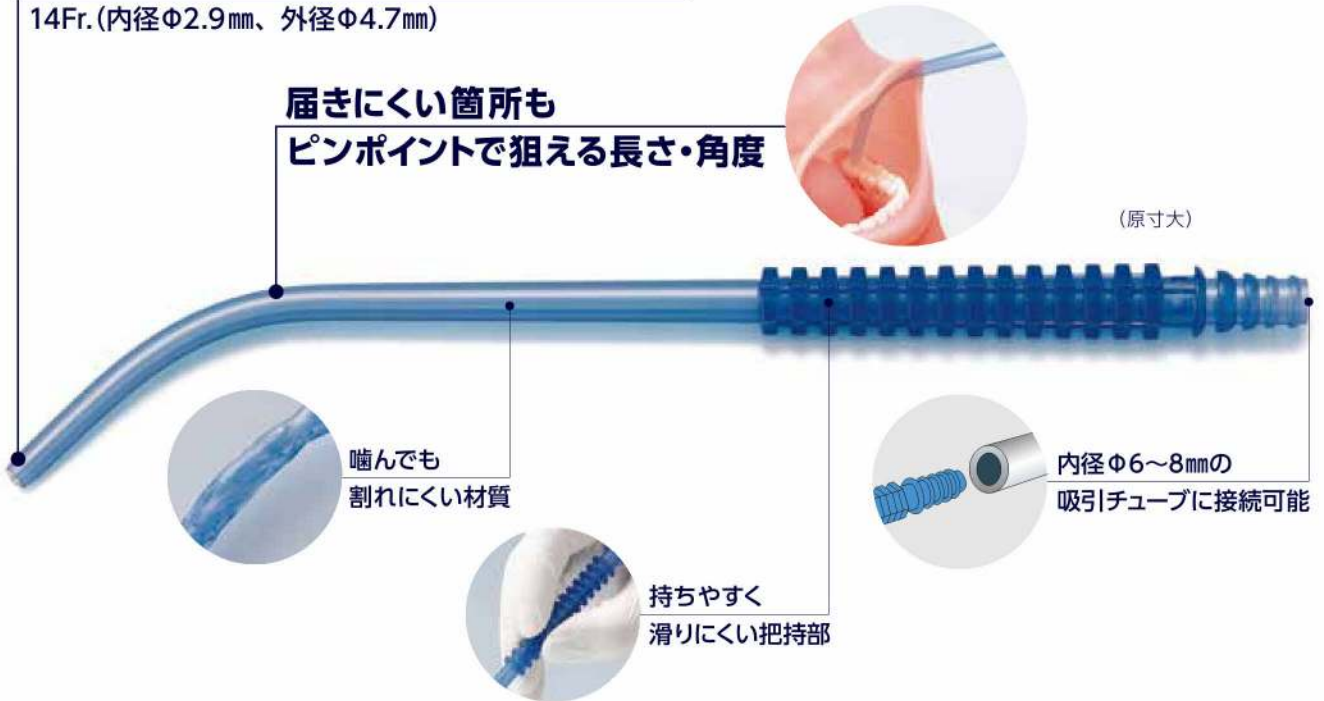

噛んでも
割れにくい材質

持ちやすく
滑りにくい把持部

内径Φ6~8mmの
吸引チューブに接続可能

水を使わない口腔ケア (例)

塗り広げやすくてたれにくい「お口を洗うジェル」と一緒にご使用いただくことで、誤嚥の心配がある患者さんに「水を使わない口腔ケア」をおこなうことができます。

1

口腔内全体に「お口を洗うジェル」を適量塗布し、乾燥した汚れを軟化させます。

2

汚れをからめとりながら、「口腔ケア用吸引管」を用いて吸いとります。

3

ブラシ等で全体を清拭し、「お口を洗うジェル」を薄く塗布して保湿と粘膜ケアをおこないます。



包装	標準価格
20本入	2,900円(税別)

関連製品

口腔ケア用ジェル

お口を洗うジェル ORAL CARE WASHING GEL

	希望小売価格
25g	680円(税別)
80g	1,500円(税別)

動画はこちらから



●販売店名

Nippon Shika Yakuhin Co., Ltd.