


歯科用隣在歯隔離用テープ TDV アイソテープ

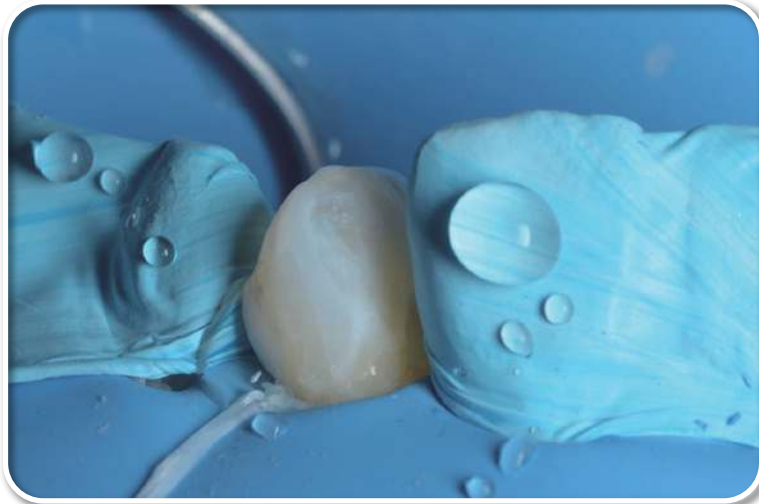

臨床写真ご提供：YOKOTA DENTAL OFFICE 横田 真一 先生

撥水性に優れた歯科用テフロンテープです。



材質：テフロン
サイズ：幅 18mm、厚さ 0.07mm、長さ 5m
カラー：ライトブルー

歯科医院様参考価格 **¥1,400**

- エッチング材、接着材、コンポジットレジンなどの適用時に、患歯と隣在歯とを隔離し、侵襲を避けたい部位を保護します。
- 耐薬品性に優れた材質で、口腔内使用を目的として設計開発しています。
- 歯間部への挿入が容易な厚さで、柔軟性があり、操作中のテープ同士の粘着を防止し、隣在歯にしっかりと適合します。

アイソテープ 使用方法



テープを必要な長さにカットします。



テープを歯間部に挿入し、舌側と唇側からテープの両端を引っ張り、しわを伸ばしながら隣在歯に貼り付けます。

アイソテープ ご使用例



術前。
コンポジットレジン修復による上顎中切歯間の空隙閉鎖を計画。



ラバーダム（Nie Tone ラバーダムラテックスシート：ミディアム・ブラック）を装着して、アイソテープで隣在歯を保護し、右上1の接着操作に移行。



バイオクリアーブラックトリアングルキット（上顎前歯ピンクS）設置後、フロアブルレジン充填。



反対側も同様の操作を行う。術後。

臨床写真ご提供：田代歯科医院 田代 浩史 先生

本紙に掲載されている価格は2021年3月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製造業者：TDV DENTAL LTDA（ティーディーブイ デンタル エルティーディーイー社）
製造国：ブラジル

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは
お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020