

ceraMotion®



ceraMotion® Press LiSi
ceraMotion® Press Invest
ceraMotion® One Touch
ceraMotion® Universal Stains



写真提供：若竹哲也先生（デンタルラボ GROW）



Concept

セラモーションは滑らかな表面を生み出す埋没材、高審美性と高強度を併せ持つプレスセラミック、多彩な色調を自由に表現できるステイン材の3製品から構成するプレスセラミックシステムです。120年以上の歴史をもつドイツの歯科材料メーカー デントウラム社がプレステクニックを追求し、開発しました。

さあ、セラモーションでスマートに美しく強いセラミックを。

ceraMotion®

*Efficient,
Beautiful and Strong
Press ceramic*






歯科加圧成形用セラミックス ジルコニア強化型リチウムシリケート

ceraMotion[®] Press LiSi

セラモーション プレス リジ

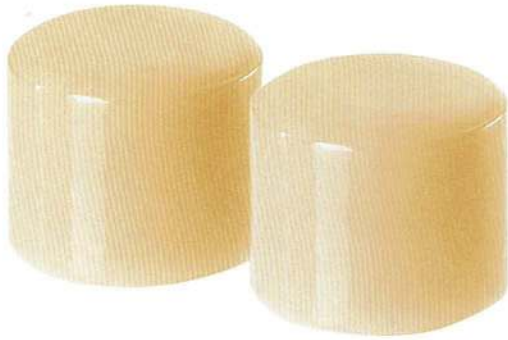

優れた審美性と強度を兼ね備えた
二ケイ酸リチウムプレスインゴット

- ・Vita Classical shadeとVita 3D-Master shadeに対応
- ・450MPaの高い曲げ強度
- ・HTとLTのシンプルな使い分けで多彩な色調に対応

LT・・・クラウン・ブリッジ(対応エリア第二小臼歯まで)

HT・・・ベニア・インレー・オンレー

2つのインゴットを重ねて使用可 ※200gリングを使用

物性値

プレス焼成温度	900℃
熱膨張係数	10.25X 10 ⁻⁶ K ⁻¹
ガラス転移温度	565℃
曲げ強度	450MPa
溶解量	25 μm
インゴットの重さ	3g

プレス スケジュール

	開始温度 (℃)	昇温速度 (℃/min)	最終温度 (℃)	係留時間 (min)	最大プレス 時間(min)	プレス圧	真空
100g	800	60	900	20	2	最大	有
200g	800	60	905	20	2	最大	有

※プレススケジュールは各機種により微調整する必要があります。

シェード (Vita classical)

	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
LT	LT A1	LT A2	LT A3	LT A3.5	LT A4	LT B1	LT B2	LT B3	LT B3	LT C1	LT C2	LT C3	LT C3	LT D2	LT D3	LT D3
HT	HT 1	HT 1	HT 2	HT 2	-	HT 1	HT 1	HT 2	-	HT 1	HT 1	HT 2	-	HT 1	HT 2	-
Stain	-	-	-	-	-	Paste 2D B	-	-	Paste 2D B	Paste 2D C	-	-	Paste 2D C	Paste 2D White	-	Paste 2D B

※ステインはセラモーション ワンタッチを使用

製品

容量	カラー	オーダーNo.	価格
LT (3g×5個)	LT A1	255-001-05	各11,600円
	LT A2	255-002-05	
	LT A3	255-003-05	
	LT A3.5	255-035-05	
	LT A4	255-004-05	
	LT B2	255-012-05	
	LT B3	255-013-05	
	LT C2	255-022-05	
	LT C3	255-023-05	
	LT D3	255-033-05	
HT (3g×5個)	HT 1	255-041-05	各11,600円
	HT 2	255-042-05	

容量	カラー	3D-Master	オーダーNo.	価格
LT Vita 3D Master (3g×5個)	LT 02	0M2	255-102-05	各11,600円
	LT 11	1M1	255-111-05	
	LT 12	1M2	255-112-05	
	LT 21	2M1	255-121-05	
	LT 22	2M2	255-122-05	
	LT 23	2M3	255-123-05	
	LT 31	3M1	255-131-05	
	LT 32	3M2	255-132-05	
	LT 33	3M3	255-133-05	
	LT 41	4M1	255-141-05	
	LT 42	4M2	255-142-05	

医療機器認証番号 302AGBZX00017000



プレスセラミックス用急速加熱型リン酸塩系埋没材

ceraMotion[®] Press Invest


セラモーション プレス インベスト



低反応層の実現

滑沢な表面と精密な適合性を
実現するプレスセラミックス用
急速加熱型リン酸塩系埋没材

- ・液の希釈濃度を調整することで膨張をコントロール
- ・急速加熱に対応
- ・粒子が細かく、滑らかな表面を獲得
- ・反応層を付着しづらい特性

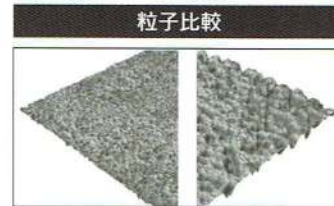

セラモーション
プレス インベスト

従来品



セラモーション
プレス インベスト

操作性能

混液比(粉/液)	100g / 26mL
攪拌回転数	360rpm
攪拌時間	2分
操作時間	6分~7分
完全硬化時間	60分

製品

容量	オーダーNo.	価格
粉末 2.5kg (100g×25袋)	275-010-00	17,000円
液 1000mL	275-015-00	4,400円

医療機器届出番号 27B1X00020301009

プレス用プランジャー



・ディスクボールプレス プランジャー


- ・使い切りタイプのプランジャー
- ・セラモーション プレスインベストと同素材なので冷却時の応力を緩和します。

製品

容量	オーダーNo.	価格
φ 13mm 20本	260-365-13	8,700円



歯科セラミックス用ステイン材
ceraMotion® One Touch
 セラモーション ワンタッチ

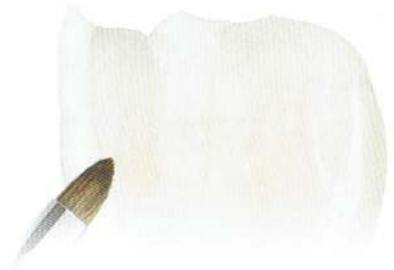

Liquid	Glaze
2D Paste	3D Paste

for press ceramic
and zirconia

ビルドアップ対応

テクニシヤンのニーズに応えるペーストタイプステイン


- ・ニケイ酸リチウムとジルコニアフレームに使用可能
- ・陶材と同じ強度115MPaで、ビルドアップが可能
- ・焼成温度を統一することにより、少ない焼成回数で完成
- ・ユニバーサルステインと併用することで多彩な色調を表現

Easy!
Quick!
Aesthetic!

使用方法

2Dペーストは従来のステイン材と同様にセラミック材の色調調整として、3Dペーストはエナメルやコンタクトのビルドアップ(最大0.5mmまで)に使用します。2D、3Dともにペースト同士を混和させて色を調整できます。

2Dペースト 3Dペースト

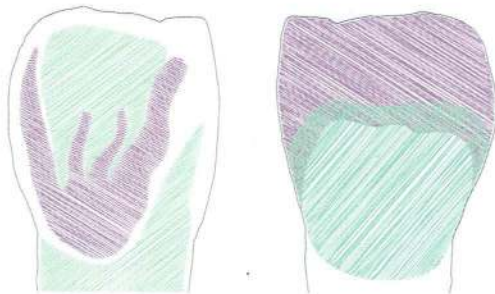

ファーンズ スケジュール(2D/3D/グレース)

	開始温度 (°C)	乾燥時間 (min)	昇温速度 (°C/min)	真空開始温度 (°C)	真空停止温度 (°C)	焼成温度 (°C)	係留時間 (min)
1次焼成	450	8	55	450	730	730	1
2次焼成	450	8	55	450	720	720	1

※スケジュールは各機種により微調整する必要があります。

Products Line-up 01

ceraMotion® One Touch Liquid

セラモーション ワンタッチ リキッド



2D ティルティング リキッド

2Dペースト・グレース用

- ・粘性が低い
- ・セラミックの表面を均一にステイニング

容量	オーダーNo.
10mL	254-012-01

単品価格 1,900円



3D リフレッシュング リキッド

3Dペースト・グレース用

- ・粘性が高い
- ・ステインが垂れにくく、ビルドアップしやすい

容量	オーダーNo.
10mL	254-014-01

単品価格 1,900円

Products Line-up 02

ceraMotion® One Touch Brush 2D・3D Paste

セラモーション ワンタッチ ブラシ

2D用



3D用



種類	容量	オーダーNo.	価格
2D用ブラシ	1本	260-905-20	1,500円
3D用ブラシ		260-906-20	1,700円

Products Line-up 03

ceraMotion® One Touch Glaze

セラモーション ワンタッチ グレース

- Basic Set
- No Limits Set

コーティング力、光沢性、蛍光性に優れたグレース材。
ブライトはより強い光沢性と蛍光性を有します。



グレース ブライト

容量	オーダーNo.
3g	250-272-03

単品価格 5,200円



グレース トランスパ


容量	オーダーNo.
3g	250-271-03

単品価格 4,000円


グレース ブライト グレース トランスパ

表面の変化


塗布することでコーティングされ表面が滑かになります。

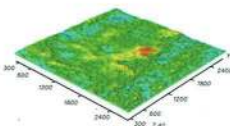

ミリング後

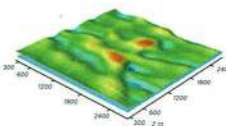

研磨後

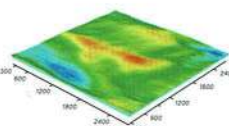


グレース後

効果

天然歯に近い光沢性と蛍光性を付与します。



光沢性

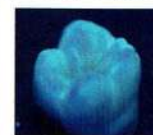

蛍光性

Products Line-up 04

ceraMotion® One Touch 2D Paste

Basic Set
No Limits Set

セラモーション ワンタッチ 2D ペースト

セラミック表面のステイニング用ペーストです。ペーストグレーズや他のペースト同士を混和させることで、様々な色調の再現を可能にします。



2Dペースト ボディーA	
容量	オーダーNo.
3g	250-306-03



2Dペースト グレー	
容量	オーダーNo.
3g	250-311-03



2Dペースト I3	
容量	オーダーNo.
3g	250-316-03



2Dペースト ボディーB	
容量	オーダーNo.
3g	250-307-03



2Dペースト ハニー	
容量	オーダーNo.
3g	250-312-03



2Dペースト ボディーR	
容量	オーダーNo.
3g	250-317-03



2Dペースト ボディーC	
容量	オーダーNo.
3g	250-308-03



2Dペースト ブルー	
容量	オーダーNo.
3g	250-313-03



2Dペースト ボディーL	
容量	オーダーNo.
3g	250-318-03



2Dペースト ボディーD	
容量	オーダーNo.
3g	250-309-03



2Dペースト バイオレット	
容量	オーダーNo.
3g	250-314-03



2Dペースト ボディーR+	
容量	オーダーNo.
3g	250-319-03



2Dペースト ホワイト	
容量	オーダーNo.
3g	250-310-03



2Dペースト I2	
容量	オーダーNo.
3g	250-315-03



2Dペースト ボディーオレンジ	
容量	オーダーNo.
3g	250-320-03

■ 単品価格 各4,800円
■ 単品価格 各5,200円

Products
Line-up 05


ceraMotion® One Touch

3D Paste

セラモーション ワンタッチ 3D ペースト

- Basic Set
- No Limits Set
- Pink Set

ビルドアップ用ペーストです(最大0.5mmまで)。カットバックテクニックに対応します。
ピンクセット(歯肉色)のペーストに蛍光性はありません。

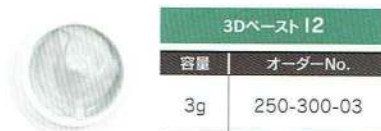

■ ■ ■ 単品価格 各6,500円

Products Line-up 06

ceraMotion®
One Touch



ceraMotion® One Touch Basic Set

セラモーション ワンタッチ ベーシック セット

セラモーションワンタッチの基本セット。
表面の色調調整と切端のビルドアップに対応します。

内容	容量	内容	容量	内容	容量		
2D	3g	2Dペースト ボディーA	3D	3Dペースト I2	ブラシ	2D ブラシ	1本
		2Dペースト ボディーB		3Dペースト ルーミン		3D ブラシ	
		2Dペースト ボディーC		3Dペースト ニュートラル		リキッド	
		2Dペースト ボディーD		3Dペースト オパールブルー	3D リフレッシングリキッド		
		2Dペースト ホワイト		3Dペースト オパールグレー	グレース	グレース トランスパ	3g
		2Dペースト グレー		3Dペースト オパールハニー			
		2Dペースト ハニー					
		2Dペースト ブルー					
		2Dペースト バイオレット					

オーダーNo.250-800-70 セット価格 75,000円

Products Line-up 07

ceraMotion®
One Touch No Limits



ceraMotion® One Touch No Limits Set

セラモーション ワンタッチ ノーリミッツ セット

3Dマスターシェードに対応するボディーペーストと、
デンチンペーストによる歯冠形態の修正に対応します。

内容	容量	内容	容量	内容	容量		
2D	3g	2Dペースト I2	3D	3Dペースト デンチン プリーチ	ブラシ	2D ブラシ	1本
		2Dペースト I3		3Dペースト デンチン ライト		3D ブラシ	
		2Dペースト ボディーR		3Dペースト デンチン ミディアム		リキッド	
		2Dペースト ボディーL		3Dペースト デンチン ダーク	3D リフレッシングリキッド		
		2Dペースト ボディーR+		3Dペースト トランスパ	グレース	グレース プライト	3g
		2Dペースト ボディーオレンジ		3Dペースト インサイズオパール プライト		ユニバーサル ステイン	
				3Dペースト I3	ST レッドブラウン		

オーダーNo.250-801-70 セット価格 77,000円

Products Line-up 08

ceraMotion®
One Touch Pink



ceraMotion® One Touch Pink Set

セラモーション ワンタッチ ピンク セット

4種類のピンクペースト、モディファイヤー、トランスペーストの
組み合わせで様々な歯肉色に対応します。蛍光性は含みません。

内容	容量	内容	容量		
3D	3g	3Dペースト ジンジバル 1	ブラシ	3D ブラシ	1本
		3Dペースト ジンジバル 2		リキッド	
		3Dペースト ジンジバル 3	3D リフレッシングリキッド		
		3Dペースト ジンジバル 4			
		3Dペースト ジンジバル ホワイト			
		3Dペースト ジンジバル トランスパ			
		3Dペースト ジンジバル モディファイヤー			

オーダーNo.250-803-70 セット価格 41,000円

キャラクターライズ用ステイン材

ceraMotion® Universal Stains

セラモーション ユニバーサル ステイン



色調を多彩に広げる
パウダータイプの
ユニバーサルステイン

クラックラインや白歯部の裂溝等に便利なステイン材。
ワンタッチペーストと混ぜてご使用いただけます。

製品セット

	内容	容量
16色 セット	ステインパウダー	16色(各2g)
	リキッド	1本(20mL)
	シェードガイド	1個

オーダーNo.254-800-30 セット価格 39,000円

医療機器認証番号 302AGBZX0018000

単品ラインナップ

ホワイト

容量	オーダーNo.
2g	254-201-02

ピンク

容量	オーダーNo.
2g	254-205-02

オリーブ グリーン

容量	オーダーNo.
2g	254-209-02

ブラック

容量	オーダーNo.
2g	254-213-02

バニラ

容量	オーダーNo.
2g	254-202-02

パープル

容量	オーダーNo.
2g	254-206-02

オリーブ イエロー

容量	オーダーNo.
2g	254-210-02

ボディーステイン A

容量	オーダーNo.
2g	254-220-02

イエロー

容量	オーダーNo.
2g	254-203-02

ブルー

容量	オーダーNo.
2g	254-207-02

ミディアム ブラウン

容量	オーダーNo.
2g	254-211-02

ボディーステイン B

容量	オーダーNo.
2g	254-221-02

オレンジ

容量	オーダーNo.
2g	254-204-02

グレー

容量	オーダーNo.
2g	254-208-02

レッド ブラウン

容量	オーダーNo.
2g	254-212-02

ボディーステイン C

容量	オーダーNo.
2g	254-222-02

単品価格 各2,800円



ステイン リキッド

容量	オーダーNo.
20mL	254-010-02

単品価格 1,900円



ステイン シェードガイド

容量	オーダーNo.
1個	254-105-00

単品価格 5,300円

FAX オーダーシート

ファクシミリでのご注文も承ります。必要事項をご記入の上、送信してください。

24時間 お や く に

FAX 0120-24-0892

年 月 日

お名前	フリガナ	TEL	-	-
		FAX	-	-

※新規のお客様のみご記入ください。

ご住所	フリガナ
	〒

ご注文商品 記入欄

製品名	オーダー No.	数量
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	

通信欄 ご意見・ご希望がございましたらお書きください。

印刷のため色調は実物と異なります。また、仕様および外観、価格は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

お問合せ先



株式会社 デンタリード

本 社 / 大阪市淀川区新高 1-1-15

TEL: 06(6396)4448 フリー-FAX: ☎ **0120(24)0892**

東京営業所 / 東京都千代田区神田小川町 1-11 千代田小川町クロス 12F

TEL: 03(5217)0353 FAX: 03(5217)0366

製造販売業者 **白水貿易株式会社**

<https://www.dentalead.co.jp>

