

IPS Style®

メタル築盛用陶材 IPS スタイル

MAKE IT YOUR! STYLE YOUR!

“ハツ” とする “鮮やか” な発色

今までにない 美しさ



ivoclar
vivadent

MAKE IT YOUR STYLE.

Ivoclar Vivadentのメタルセラミックスの歴史は、1976年から始まりました。それから40年、製品開発により技工の材料、技術も大きく進歩しています。常にその変化にチャレンジし続ける技工の世界において、変わらないメタルセラミックスの技術工程を、Ivoclar Vivadentがより簡便にし、日々の作業効率向上をお手伝いします！増えた時間は、あなたの新しいチャレンジに！

MAKE IT FAST.

高いぬれ性と低収縮。だから焼成回数を最低限に。

従来のPFM陶材



IPSスタイル



Ivoclar Vivadent R&D, Schaan, 2015

オペークと築盛陶材の化学組成をマッチさせ、ぬれ性を向上させました。そのため焼成後、安定した結果が得られるとともにガラスセラミックスの配合、粒子サイズの分布により焼成後の収縮を抑え、築盛時の形態を保ちます。その結果、焼成回数も抑えられます。

時短陶材

IPS スタイル セラム One



たった一層で最終デザインまで。少量の補足築盛とIPS イボカラーによるステイン焼成で仕上げます。

選べる2種類のおペーカー

IPS スタイル セラム Powder/ Paste オペーカー



オペーカーの種類が、今までのパウダーに加え、ペーストが新しく追加されました。自分好みのオペーカーを選択できます。870℃で焼成するオペーカーは、短時間での焼成が可能です。高密度に含有するオキシアパタイトで効率的に金属色を遮蔽します。

MAKE IT EASY.

あらゆるフレームに対応



アナログからデジタルまで、あらゆる金属材料に対応します。

CTE値
 $13.8-15.2 \times 10^{-6}/K (25-500^{\circ}C)$

合わせやすいシェードシステム



IPS スタイルのシェードコンセプトは、IPS e.max システムと同じです。口腔内で2つのシステムの修復物が混在しても統一感のある結果が得られます。

築盛のしやすさ



IPS スタイルの陶材を練和する練和液はIPS e.max セラムと同じIPS ビルドアップリキッドを使用します。操作性が非常に良いところが、IPS ビルドアップリキッドの特長のひとつになります。

使用量の多い方向けに大容量リキッドが新発売！

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 673377 | IPS ビルドアップリキッド オールラウンド (250mL) |
| 673378 | IPS ビルドアップリキッド ソフト (250mL) |

*IPS ビルドアップリキッド各種は、上記サイズ以外に、60mLのご用意もあります。

IPS スタイル 組合わせ表

IPS スタイル セラム									
A-D	BL1	BL2	BL3	BL4	A1	A2	A3	A3.5	A4
IPS スタイル セラム Powder オペカー	 O BL1/BL2		 O BL3/BL4		 O A1	 O A2	 O A3	 O A3.5	 O A4
IPS スタイル セラム インテンシブ Powder オペカー							 IO ホワイト	 IO バイオレット	
IPS スタイル セラム マージン	 M BL				 M 1	 M 2	 M 3	 M 4	 M 7
IPS スタイル セラム インテンシブ マージン							 IM イエロー	 IM オレンジ・ピンク	
IPS スタイル セラム ディープ デンチン	 DD BL1/BL2		 DD BL3/BL4		 DD A1	 DD A2	 DD A3	 DD A3.5	 DD A4
IPS スタイル セラム デンチン	 D BL1	 D BL2	 D BL3	 D BL4	 D A1	 D A2	 D A3	 D A3.5	 D A4
IPS スタイル セラム インサイザル	 I BL				 I 1	 I 2	 I 3	 I 4	 I 5
IPS スタイル セラム アドオン	 A-O BL				 A-O 690°		 A-O インサイザル		
IPS スタイル セラム インパルス	オクルーザル デンチン	 OD オレンジ	 OD ブラウン	マメロン		 MM ライト	 MM イエロー・オレンジ	 MM サーモン	
	トランスバ	 クリア	 T ニュートラル	 T ブルー	 T ブラウン・グレイ	 T オレンジ・グレイ	スペシャル インサイザル		 SI イエロー
IPS スタイル セラム ジンジバ	ジンジバ オペカー	 ピンク	ベーシック ジンジバ		 BG34	ジンジバ		 G1	 G2
IPS イボカラー エッセンス	 E01 ホワイト	 E02 クリーム	 E03 レモン	 E04 サンセット	 E05 コッパー	 E06 ヘーゼル	 E07 オリーブ	 E08 カーキ	 E09 テラコッタ
							 E21 ベーシック レッド		
IPS イボカラー シェード	 シェード 0				 シェード 1	 シェード 2		 シェード 3	
							 シェード インサイザル 1		

IPS スタイル セラム One

A-D	BL1	BL2	BL3	BL4	A1	A2	A3	A3.5	A4
IPS スタイル セラム Powder/Paste オペカー	 IO white	 O BL1/BL2	 O BL3/BL4		 O A1	 O A2	 O A3	 O A3.5	 O A4
IPS スタイル セラム One	 One BL				 One 1	 One 2	 One 3	 One 4	 One 7

B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
O B1	O B2	O B3	O B4	O C1	O C2	O C3	O C4	O D2	O D3	O D4

IO ブラウン

IO インサイザル

M 1	M 2	M 4	M 4	M 5	M 6	M 6	M 7	M 5	M 3	M 6

IM オレンジ

IM オベーク

DD B1	DD B2	DD B3	DD B4	DD C1	DD C2	DD C3	DD C4	DD D2	DD D3	DD D4

D B1	D B2	D B3	D B4	D C1	D C2	D C3	D C4	D D2	D D3	D D4

I 1	I 2	I 3	I 4	I 2	I 3	I 4	I 5	I 2	I 3	I 4

A-O デンチン

A-O マージン

オパール
エフェクト

OE 1

OE 2

OE 3

OE 4

OE 5

OE バイオレット

インサイザル
エッジ

インサイザル エッジ

インター
インサイザル

II ホワイト・ブルー

サービカル
トランスパ

CT イエロー

CT オレンジ・ピンク

CT カーキ

CT オレンジ

G3

G4

G5

インテンシブ
ジンジバ

IG1

IG2

IG3

IG4

IG5

E10 マホガニー

E11 カプチーノ

E12 エスプレッソ

E13 テラ

E14 プロファンド

E15 オーシャン

E16 サファイア

E17 アンズラサイト

E18 ブラック

E19 ローズ

E20 コーラル

E22 ベーシック イエロー

E23 ベーシック ブルー

シェード 4

シェード 5

シェード 6

シェード 7

シェード 6


シェード インサイザル 2

シェード インサイザル 3

B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
One 1	One 2	One 4	One 4	One 5	One 6	One 6	One 7	One 5	One 3	One 6

MAKE IT NATURAL.


焼成しても安定したシェードと透過性

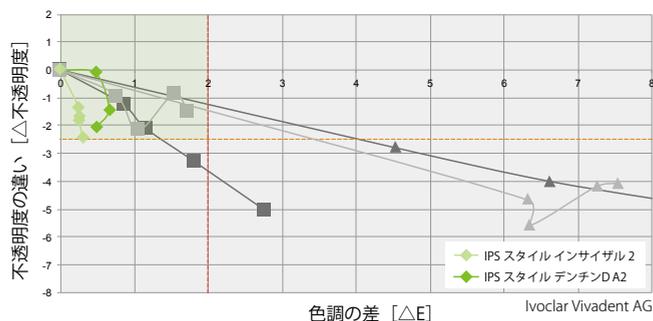

一般的に、焼成を繰り返すことで透過性が上がり、色調変化が大きくなります。

オキシアパタイトを含むIPS スタイルの場合、焼成後の色調、透過性の変化はわずかなのがわかります(図)。

深部からの輝き オキシアパタイト

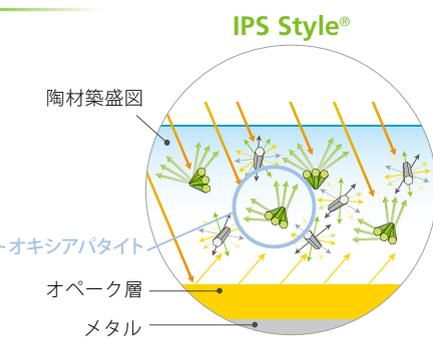

新開発されたオキシアパタイトは、光の反射で不透過性をコントロールします。オペーク層に多く配合されたこのオキシアパタイトにより、修復物に深部から輝きを与えます。

“ハツ” とする “鮮やかさ” が生まれます。

MAKE IT UNIQUE.

IPS スタイルを完成させる Ivoclar Vivadent 製品

IPS イボカラー



710°Cで焼成できるステイン材。低温焼成だから表面性状を保ちながらあらゆる修復物にステイン可能です。ガラスを含むイボカラーの輝きがIPSスタイルにさらなる鮮やかさを与えます。

プログラマツ P G2シリーズ



40年以上の歴史を持つポーセレンファーンエスです。陶材をより良い状態で焼き上げるために開発されたこのファーンエスは、IPSスタイルの焼成をさらに時短へと導きます。

IPS スタイル セラム	焼成温度 T [°C]	スタンバイ温度 B [°C]	乾燥時間 S [min]	温度上昇率 t [°C / min]	係留時間 H [min]	バキューム 開始温度 V ₁ [°C]	バキューム 解除温度 V ₂ [°C]
1次 / 2次ベストオペーカー焼成	870	403	6:00	100	2:00	450	869
1次 / 2次マージン焼成	840	403	6:00	60	1:30	450	839
1次デンチン / インサイズル焼成 / One焼成	790	403	6:00	60	1:00	450	789
2次デンチン / インサイズル焼成 / One焼成	780	403	6:00	60	1:00	450	779
ステイン焼成*	750	403	6:00	60	1:00	450	749
グレース焼成 / グレース焼成と同時のアドオン焼成	750	403	6:00	60	1:00	450	749
グレース焼成後のアドオン	690	403	6:00	60	1:00	450	689

* ステイン焼成には、IPS イボカラー シェード / エッセンスを使用します。特に、広範囲な特徴づけに有効です (e.g. 一層築盛テクニック)。

製品内容

IPS スタイル セラム Paste オペカー 各 5g × 1

701564	BL1/BL2	701565	BL3/BL4	701566	A1	701567	A2	701568	A3
701570	A3.5	701571	A4	701572	B1	701573	B2	701574	B3
701575	B4	701576	C1	701577	C2	701578	C3	701579	C4
701580	D2	701581	D3	701582	D4	701583	ピンク		

IPS スタイル セラム インテンシブ Paste オペカー 各 5g × 1

701584	ホワイト	701585	バイオレット	701586	ブラウン	701587	インサイザル
--------	------	--------	--------	--------	------	--------	--------

IPS スタイル セラム Powder オペカー 各 18g × 1

673146	BL1/BL2	673147	BL3/BL4	673148	A1	673149	A2	673150	A3
673151	A3.5	673152	A4	673153	B1	673154	B2	673155	B3
673156	B4	673157	C1	673158	C2	673159	C3	673160	C4
673161	D2	673162	D3	673163	D4	673164	ピンク		

IPS スタイル セラム インテンシブ Powder オペカー 各 18g × 1

673184	ホワイト	673185	バイオレット	673186	ブラウン	673187	インサイザル
--------	------	--------	--------	--------	------	--------	--------

IPS スタイル セラム マージン 各 20g × 1

673230	BL	673232	1	673233	2	673234	3	673235	4
673236	5	673237	6	673238	7				

IPS スタイル セラム インテンシブ マージン * 各 20g × 1

673239	イエロー	673240	オレンジ・ピンク	673241	オレンジ	673242	オペカー
--------	------	--------	----------	--------	------	--------	------

*在庫限りで販売終了

IPS スタイル セラム ディープ デンチン 各 20g × 1

673235	BL1/BL2	673236	BL3/BL4	673243	A1	673244	A2	673245	A3
673246	A3.5	673247	A4	673248	B1	673249	B2	673250	B3
673251	B4	673252	C1	673253	C2	673254	C3	673255	C4
673256	D2	673257	D3	673258	D4				

IPS スタイル セラム デンチン 各 20g × 1

673331	BL1	673332	BL2	673333	BL3	673334	BL4	673259	A1
673260	A2	673261	A3	673262	A3.5	673263	A4	673264	B1
673265	B2	673266	B3	673267	B4	673268	C1	673269	C2
673270	C3	673271	C4	673272	D2	673273	D3	673274	D4

IPS スタイル セラム デンチン 各 100g × 1

673339	BL1	673340	BL2	673341	BL3	673342	BL4	673275	A1
673276	A2	673277	A3	673278	A3.5	673279	A4	673280	B1
673281	B2	673282	B3	673283	B4	673284	C1	673285	C2
673286	C3	673287	C4	673288	D2	673289	D3	673290	D4

IPS スタイル セラム インサイザル 各 20g × 1

673337	IBL	673291	I1	673292	I2	673293	I3	673294	I4	673295	I5
--------	-----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----

IPS スタイル セラム インサイザル 各 100g × 1

673343	IBL	673296	I1	673297	I2	673298	I3	673299	I4	673300	I5
--------	-----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----

IPS スタイル セラム トランスバ 各 20g × 1

NEW 673301	クリア	673302	ニュートラル	673303	ブルー
673304	ブラウン・グレイ	673305	オレンジ・グレイ		

IPS スタイル セラム トランスバ 各 100g × 1

NEW 673306	クリア	673307	ニュートラル
-------------------	-----	--------	--------

IPS スタイル セラム マメロン 各 20g × 1

673308	ライト	673309	イエロー・オレンジ	673310	サーモン
--------	-----	--------	-----------	--------	------

IPS スタイル セラム オクルーザル デンチン 各 20g × 1

673311	オレンジ	673312	ブラウン
--------	------	--------	------

IPS スタイル セラム インサイザル エッジ 20g × 1

673313

IPS スタイル セラム オパール エフェクト 各 20g × 1

673314	1	673315	2	673316	3	673317	4	673318	5	673319	バイオレット
--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	--------

IPS スタイル セラム スペシャル インサイザル 各 20g × 1

673320	イエロー	673321	グレイ
--------	------	--------	-----

IPS スタイル セラム インター インサイザル ホワイト・ブルー 20g × 1

673322

IPS スタイル セラム サービカル トランスバ 各 20g × 1

673323	イエロー	673324	オレンジ・ピンク	673325	カーキ	673326	オレンジ
--------	------	--------	----------	--------	-----	--------	------

IPS スタイル セラム アドオン 各 20g × 1

673327	マージン	673328	デンチン	673329	690℃	674603	インサイザル	673338	BL
--------	------	--------	------	--------	------	--------	--------	--------	----

IPS スタイル セラム ジンジバ 各 20g × 1

673344	(G) 1	673345	(G) 2	673346	(G) 3	673347	(G) 4	673348	(G) 5
--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

IPS スタイル セラム インテンシブ ジンジバ 各 20g × 1

673349	(IG) 1	673350	(IG) 2	673351	(IG) 3	673352	(IG) 4	673353	(IG) 5
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

IPS スタイル セラム ベーシック ジンジバ 20g × 1

673354

IPS スタイル セラム One 各 20g × 1

673355	BL	673356	1	673357	2	673358	3	673359	4
673360	5	673361	6	673362	7				

IPS スタイル セラム One 各 100g × 1

673363	BL	673364	1	673365	2	673366	3	673367	4
673368	5	673369	6	673370	7				

IPS スタイル セラム シェードガイド 各 1 セット

674208	インサイザル/トランスバ	674210	インパルス
--------	--------------	--------	-------

IPS スタイル Paste オペカー リキッド

701588	15mL × 1
--------	----------

IPS スタイル Powder オペカー リキッド

673371	60mL × 1
--------	----------

IPS スタイル セラム スターターキット A-D

679925EN	1 セット
----------	-------

セラム (24 種類)	Powder オペカー 870	シェード : A1, A2, A3, A3.5	各 18g × 1
	ディープ デンチン	シェード : A1, A2, A3, A3.5	各 20g × 1
	デンチン	シェード : A1, A2, A3, A3.5	各 20g × 1
	インサイザル	シェード : I1, I2, I3, I4	各 20g × 1
	トランスバ	シェード : ニュートラル	5g × 1
	マメロン	シェード : ライト	5g × 1
	オクルーザル デンチン	シェード : オレンジ	5g × 1
	オパール エフェクト	シェード : 1	5g × 1
	One	シェード : 1, 2, 3, 4	各 20g × 1
IPS イボカラー (8種類)	シェード デンチン	シェード : SD1, SD2	各 3g × 1
	シェード インサイザル	シェード : SI1	3g × 1
	エッセンス		各 1.8g × 1
	シェード : 01 ホワイト, 04 サンセット, 10 マホガニー, 16 サファイア		
	グレースペースト		9g × 1
IPS イボカラー ミキシングリキッド オールラウンド			15mL × 1
IPS スタイル Powder オペカー リキッド			60mL × 1
IPS ビルドアップリキッド オールラウンド			60mL × 1
シェードガイド (インサイザル/トランスバ・インパルス)			各 1

一般の名称 : 歯科メタルセラミック修復用陶材 / 販売名 : IPS スタイル / 認証番号 : 229AGBZX00072000 / 管理医療機器
 一般の名称 : 歯科セラミックス用着色材料 / 販売名 : IPS イボカラー / 認証番号 : 228AGBZX00117000 / 管理医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社
 〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24
 TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657
 www.ivoclarvivadent.jp
 info.japan@ivoclarvivadent.com

PR0034B04

