

YOSHIDA

菌はその場で見る時代「菌未来[®]」を創造する

菌や汚れをスマホでチェックする時代へ。

モバイル顕微鏡で
YOSHIDA
の見える化



※画像はイメージです



Bacteria Self-checker

mil-kin[®]

見る菌

C-Type



mil-kinの使い方 かんたん3ステップ

動画で使用方法をチェック



STEP 1



採る

見せたい場所から
サンプリング


STEP 2



載せる

サンプルをガラスに
載せる

STEP 3

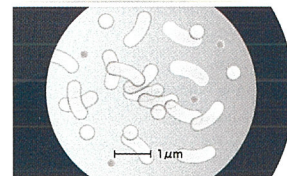

見る

みやすい大きさにスマホで
拡大してサンプルを見る

※特別なアプリは必要ありません。お持ちのスマートフォンでご使用いただけます。

見えるサイズ/白血球、運動性細菌など1μm以上

ツールとして



チェアサイドで
簡単チェック



口腔内細菌を
リアルタイムに確認



患者様のモチベーション
デンタルIQをUP



スマートフォンで
簡単チェック



コンパクト設計
訪問診療に対応

患者説明用ツールとして

患者さんの口腔内を「見える
化」することで、患者さんのモ
チベーションアップへ。



患者さんに
その場で見せる

教育ツールとして

動画や静止画でビジュアル化
でき患者教育だけではなく、
医院スタッフ間の情報共有や
教育にも



動画や静止画を
情報共有

● バクテリア・セルフチェッカー 「mil-kin(見る菌)」C-Type

倍 率 1,000倍
被写体サイズ 1μm以上
光 源 LED
電 源 単三型アルカリ乾電池(2本)
寸 法 mil-kin本体:55mm×113mm×140mm
(W×D×H) スマホスタンド含む:175mm×113mm×146mm
重 さ 約450g(本体・スマホスタンド・乾電池)
標準付属品 ピペット(2本)、マイクロチューブ(2個)、歯間ブラシ(2本)
カバーガラス15mm丸型 100枚入(1箱)、単三型アルカリ乾電池(2本)
標準価格 115,000円(税別)

○本製品の販売は日本国内のみとさせていただきます。

備 考 ※1 防水仕様ではありません。
※2 見るサンプルは液体で透明に近く、光が透過できる液体となります。
※3 スマートフォンは、含まれておりません。
※4 本仕様は2017年6月1日の仕様となり、予告なしに変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※5 「mil-kin(見る菌)」および「菌未来」は、株式会社mil-kinの登録商標です。
※6 推奨機種 iPhone 5、iPhone 5s、iPhone 6/iPhone 6S/iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 8/iPhone 8 Plus



※画像はイメージです

お問い合わせはこちら


<https://forms.office.com/r/ud2kESxurX>



カタログ取り寄せ



院内デモ希望

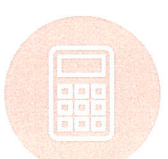


見積り



購入希望

右のQRコードから
お問合せフォームに
アクセスできます

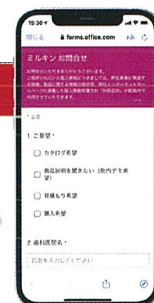

※実際の画面

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関連する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。