

a master of endo.

JIZAI [プレ] Pre 013

ガイドパス用
NiTiロータリーファイル

MANI®



“JIZAIのパフォーマンスを
もっと発揮するために”

I Features / 特徴

JIZAI Pre 013
 医療機器認証番号：301ABBZX00035000
 管理医療機器 一般名称：電動式歯科用ファイル
 販売名：マニー® NITIファイル

013 .04の先端号数とテーパーを有し、グライドパス後拡大形成用のJIZAI I (025 .04)が入りやすくなります。


JIZAI I に対する拡大体積の比較

JIZAI I の拡大体積(■)が少なくなり、拡大形成へのスムーズな移行ができます。

- 025 .04 (JIZAI I)
- 013 .04 (JIZAI Pre 013)
- 015 .02



自社固有の断面形状がファイルの急な引き込まれ、根管からの逸脱を軽減します。

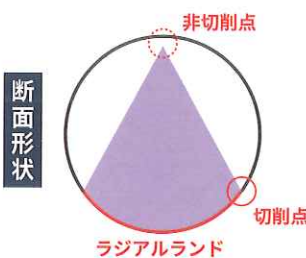

超弾性よりのR相ファイルであるため、先端が細くても切削性を発揮できます。

II Sequence / 使用手順

Straight-line Access ストレートラインアクセス

ロータリーモード 500 min⁻¹以下 / 3.0 N・cm以下

JIZAIオリフィスオープナー (025 .14)

根管上部形成を行うことで次に入るファイルの負担が軽減されます。

洗浄

Patency 穿通

Dファイnder (010 .02)

石灰化・狭窄根管に対してはより切削性を有するグライドファイnderをご使用ください。
 ※ 別カタログを参照

洗浄

Glide Path 予備拡大

ロータリーモード 300 min⁻¹以下 / 1.0 N・cm以下
 OTRモード 300 min⁻¹ / 0.6 N・cm
 (トライオート-ZX2) 180 degree

JIZAI Pre 013 (013 .04)

軽いパッキングモーションで使用してください。

※ 3~4回のパッキングごとに洗浄・リキャピチュレーション (#10) を行ってください。
 ※ 回転数・トルク値を遵守しながら適切な力で使用してください。

洗浄

Shaping 拡大

ロータリーモード 500 min⁻¹以下 / 3.0 N・cm以下
 OTRモード 500 min⁻¹ / 0.8 N・cm
 (トライオート-ZX2) 180 degree

JIZAI I (025 .04)

JIZAI II (025 .06)

JIZAI III (035 .04)

※ 3~4回のパッキング、ファイルの交換ごとに洗浄・リキャピチュレーションを行ってください。
 ※ 回転数・トルク値を遵守しながら適切な力で使用してください。

* OTRモードはトライオートZX2 (モリタ) のモードです。操作方法の詳細は製造販売元、発売元へお問合せ下さい。

III LineUp / 構成

Dファイnder
 医療機器届出番号09B1X00006011050
 一般医療機器 一般名称：歯科用ファイル
 販売名 マニー® Dファイnder

グライドファイnder
 医療機器届出番号09B1X00006011010
 一般医療機器 一般名称：歯科用ファイル
 販売名 マニー® Kファイル

カテゴリ	規格	サイズ	テーパー	モリタコード	長さ	入数	標準価格
ストレートラインアクセス	JIZAI オリフィスオープナー	025	.14	202490374	18mm	3本	5,400円
穿通	Dファイnder	010	.02	20239041010	21mm	6本	2,800円
				20239041110	25mm		
予備拡大	JIZAI Pre 013	013	.04	202490375	21mm	3本	5,400円
				202490376	25mm		
拡大	JIZAI 基本キット*	025	.04	20249036921	21mm	I・II・III 各1本	5,400円
		025	.06	20249036925	25mm		
		035	.04				

*JIZAIのカタログにて基本キット以外の単品をご紹介します。

製造販売 **マニー株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3

【国内営業】 Tel: 028-667-8591 / Fax: 028-667-8593 URL: <http://www.mani.co.jp/>

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 ■ 564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel: 06-6380-2525
 東京本社 ■ 110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel: 03-3834-6161