



Kerr™

カー創設130周年記念 セメンティング 応援キャンペーン

キャンペーン期間：2022年2月21日～5月20日

カーの創設130周年を記念し、ご好評のセメントおよび関連製品を期間限定の特別価格でご提供させていただきます。この機会にぜひ、お試し下さい。

掲載価格は全て標準価格です。キャンペーン価格につきましては、お取り引き歯科材料店様にお問い合わせ願います。

マックスセム エリート クロマ / セルフアドヒーズ型レジンセメント

ゲル化を知らせるカラーインジケーター採用

レジンセメント使用の際、余剰セメント除去のタイミングを誤ると補綴物の脱落、二次う蝕や炎症、ステイン付着など様々な弊害を誘発する恐れがあります。マックスセム エリート クロマはカラーインジケーター機能により、余剰セメント除去の適切なタイミングを視覚的に確認でき、余剰セメント除去不良によるリスクを軽減します。



マックスセム
エリート クロマの
特長を動画でチェック

濃い
ピンク色↑
補綴物セット薄い
ピンク色ゲル化開始
余剰セメント除去ごく僅かな
ピンク色ピンク色
消失

完全硬化

Ⅰマックスセム エリート クロマ リフィル

クリアー・ホワイト・イエロー

シリジン5g2本と2種類のチップを
セットにした導入向けセットです。

品目コード	シェード	標準価格
36300	クリアー	13,600円
36301	ホワイト	
36302	イエロー	



Ⅰマックスセム エリート クロマ 4本パック

クリアー

クリアー5g4本のお得なパックです。
ルートキャナルチップ付

品目コード	シェード	標準価格
36299	クリアー	18,000円



管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号：228ADBZX00053000



CAD/CAM冠などに組み合わせて使用可能



オプチボンド ユニバーサル / 1液性ボンディング材

CR充填はもちろん、マックスセム エリート クロマや
ネクスス ユニバーサル等、カーのレジンセメントの
前処理材としてもご使用いただけます。

品目コード	商品名	内容	標準価格
36517	ボトルキット	ボトル 5mL: 1本 ゲルエッチャント 3g: 1本 アプリケーションチップ、分取皿 ディスプレイチップ付	13,000円
36519	リフィル	オプチボンド ユニバーサル ボトル 5mL: 1本	10,000円

管理医療機器 歯科用象牙質接着剤 医療機器認証番号：230ADBZX00058000



保険CAD/CAM冠の接着を
動画でチェック



接着前の歯面処理

クリニーク チューブ / PMTC用ペースト

大きな粒子が仕上げに適した粒子に変化するため、
ステイン除去から仕上げまで1本で行うことができます。
特に、フッ素無しのタイプはセメンティングや矯正ブラケットの装着、
ホワイトニング前に適しています。

RDA:21



キャンペーン
対象フレーバー
ペパーミント
フッ素無し
100g入

品目コード	品名	フレーバー	フッ素 1,000ppm	標準価格
3183	ペパーミント (フッ素無し)	ペパーミント	非含有	3,900円

一般医療機器 歯面研磨材 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149103600

クリーニングブラシ / PMTC用ナイロンブラシ

少ないペーストで効率的に歯面清掃が行えます。

Ⅰ クリーニングブラシ100本入

品目コード	標準価格
835/100	6,000円



一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149102800

ジルコニアクラウン接着時の クリニーク チューブとクリーニングブラシ使用例

※セメントはネクスス ユニバーサルのクリアクロマ使用
※掲載にあたり、患者様承諾済み、写真の転用を禁じます。
写真提供: 山本 司将 先生



1 クリニーク チューブ ペパーミント
フッ素無しによる歯面清掃の準備



2 クリーニングブラシによる歯面清掃



3 ソニックフレックスの音波振動による
仕上げ清掃



4 オキシボンド ユニバーサルの塗布



5 補綴物内面のサンドブラスト



6 セット、余剰セメントはピンク色



7 ピンク色が薄くなったなら除去。
一塊で簡単に除去可能



8 光照射後、研磨して完了

山本司将先生による接着術式の無料オンラインセミナーを開催いたします。
詳細は最終ページをご覧ください。

Kerrオンライン製品説明会のご案内

WEB上で簡単に画面共有・
分かりやすく商品説明

ご施設やご自宅からPC等の通信環境でご参加いただけます

掲載商品について、もう少し詳しく知りたい方や使い方など、
弊社スタッフがオンラインで分かりやすくご説明させていただきます。



カンタンに接続!
すぐにオンライン開始!

届いたメールのURLをクリックするだけ!

お申し込みは
こちらから

QRコードより申し込み
メールアドレス登録

<https://bit.ly/2MaQxYg>




ジルコニアの研磨、除去

ジルカット ダイヤモンドバー・ジルカット ポリッシャー / ジルコニア用研磨システム


ダイヤモンドバーは研削粒子を細かく均一化、研削時の抵抗を減らし、能力低下となる粒子の脱落を防ぎ、高耐久性を発揮します。咬合調整時も深い切削痕が残らず、削り過ぎを抑えます。ポリッシャーは2ステップで効率よく研磨傷を取り除き、研磨時間を短縮します。初期導入に適したセットを3種類、ご用意しました。

均一なダイヤモンド粒子による高い研削性能と放熱性

接着層に埋め込まれたグリットダイヤモンド粒子は脱落を防ぎ、粒子が均一なため振動やマイクロクラックの発生を抑制、ジルコニアやセラミックの研削を効率よく行うことができます。また、その性状は放熱性に優れ、温度上昇を抑えます。

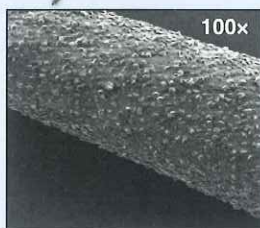

ジルカットの均一な研削粒子

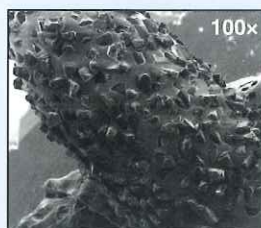

一般的なダイヤモンドバーの研削粒子

Thermodynamics of the human tooth: The rate of thermal changes in relation to bur type and dentin thickness. Milica Cindric 32108658-9 2002, Dr Eldad Sharon, Dr Daniel Ziskind, Prof Moshonov.



ジルカットの使い方、
臨床レポートをチェック



Ⅰ ダイヤモンドバー セット

ジルコニア補綴物の除去、
咬合調整に対応した
ダイヤモンドバーのベーシックセット



専用バースタンド付

セット内容



ダイヤモンドバー

Ⅱ ポリッシャー セット

プレポリッシング、ハイシャインの
全形態セット



専用バースタンド付

セット内容



ポイント カップ ディスク
プレポリッシング(中研磨) ハイシャイン(艶出し)

Ⅲ ポリッシャー ダイヤモンドバー セット

ポリッシャーとダイヤモンドバーを
組み合わせたジルコニア研磨の
トータルセット



専用バースタンド付

セット内容



プレポリッシング
カップ ハイシャイン
カップ
Z368-023 Z801-018 Z878K-021
ポリッシャー ダイヤモンドバー

品目コード	タイプ	品名	入数	標準価格	最大回転数
LS-7556	FG	ジルカット ダイヤモンドバー セット	4	6,600円	300,000 回転 / 分
LS-517	CA	ジルカット ポリッシャー セット	6	8,100円	7,000-10,000 回転 / 分
LS-7579	CA,FG	ジルカット ポリッシャー ダイヤモンドバー セット	5	7,500円	ポリッシャー: 7,000-10,000 回転 / 分 ダイヤモンドバー: 300,000 回転 / 分

オンラインセミナー

Kerr™

クラウンの 接着術式を見直そう!

歯科用合金の高騰が追い風となり、メタルフリー修復が加速しています。各種セラミック材料やCAD/CAM冠などの高分子材料は接着性レジンセメントを使用しますが、その術式は曖昧ではありませんか? 接着を確実にを行うための術式を、科学的根拠に基づいて解説します。さらにメタルフリー修復を行うにあたって押さえておきたいポイントとして、支台歯形成、接着阻害因子の除去、余剰セメントの除去、ジルコニアの研磨、ジルコニアの除去などに使用すると便利な器材も紹介します。この機会に誰でもできる補綴装置の接着を習得してください。

2022年4月7日(木)
19:30~21:00 (90分)

参加費…**無料**

Live
配信

講演の最後にチャット入力を使った質問コーナーを設けます。
その場で山本先生よりご回答いただける貴重な機会ですので、是非、ご参加ください。

※時間的制約もございますので、ご質問は限らせていただくことを予めご了承願います。

お申込みはDoctorbook academyの
会員登録後にサイトからお申込みください。



<https://academy.doctorbook.jp/movies/1002832>

会員登録が正式に完了していない場合には、
お申し込みができないことがあります。

講師



山本 司将 先生

愛知学院大学歯学部 卒業
愛知学院大学歯学部歯学研究科 修了
歯学博士
やまもと歯科醫院
【日本補綴歯科学会認定研修機関 乙(第531号)】院長
日本補綴歯科学会
専門医(第2110号) 指導医(第1210号)
愛知学院大学歯学部 非常勤講師



パソコンから検索

ドクターブックアカデミー

検索

商品のご注文は、お取引歯科材料店様までお願い致します。

Kerr製品
デジタル
カタログ



カボデンタルシステムズ株式会社

〒140-0001 <https://www.envistaco.jp/>
東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー15F
TEL: 0800-888-7480 FAX: 03-6866-7273
KKSAB2202V1 KR-0254