



CAD/CAM用高透光性セミシタージェルコニアディスク  
 松風ディスク ZR ルーセント スープラ

S-WAVE

# 新色 A4 追加発売



Plain

W2

A1

A2

A3

A3.5

New A4

B1

スープラは48種ラインアップに。

新色のA4が追加され、さらに幅広いラインアップになりました。  
 症例に合わせて適したディスクを選択いただけます。

8色



6サイズ

SHOFU INC.

# トリプルグラデーション技術



「松風ディスク ZR ルーセント スープラ」は、松風独自のトリプルグラデーション技術により、

『強度』×『透光性』×『色調』を機能的にディスク内に配置しました。

「ディスク1枚」でインレー、ラミネートベニアからロングスパンブリッジまで幅広い症例に対応可能です。

## エナメル層


前歯部にも対応可能な高い透光性

## ボディー層

層の界面が識別されにくい、  
すぐれたグラデーション機能

## サービカル層

歯頸部の遮蔽性向上と、ロングスパン  
ブリッジにも対応可能な高い強度

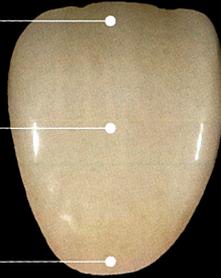


3点曲げ強さ <sup>※1</sup> (代表値)	可視光透過率 <sup>※2</sup> (代表値)	ディスク層
1034 MPa	44%	エナメル層 30%
1163 MPa	40%	ボディー層
1454 MPa	37%	サービカル層 35%

※1 / 3点曲げ強さ (ISO 6872:2015に準ずる)

※2 / 可視光透過率 (JIS R 3106:2019に準ずる、色調: A2、試験体厚さ: 0.5mm)

『5層マルチレイヤリング構造』による  
すぐれた色調再現性

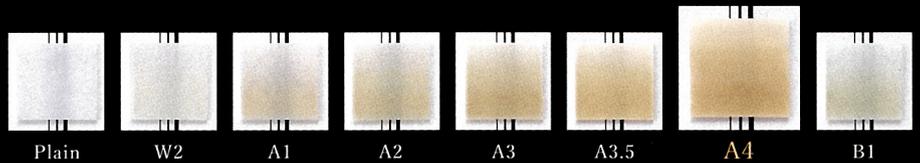

※印刷のため実際の色調とは異なる場合があります。

■ 推奨焼結スケジュール メタコネクターを使用する場合には、加工物を縦置きにして焼結してください。

	昇温速度	焼結温度・係留時間	降温速度	総焼結時間
焼結スケジュール 1 (標準)	室温~1450°C …… 5°C/分~10°C/分	1450°C・120分	炉内放冷又は5°C/分~10°C/分にて降温	約8.7時間 <sup>※3</sup>
焼結スケジュール 2 短時間	① 室温~1000°C …… 60°C/分 ② 1000°C~1450°C …… 10°C/分	1450°C・90分	① 1450°C~1000°C …… 40°C/分 ② 1000°C~250°C …… 60°C/分	約2.9時間 <sup>※4</sup>

※3 / 室温 (30°C) ~ 1450°C: 5°C/分昇温、1450°C120分係留、1450°C ~ 250°C: 10°C/分降温の場合。

※4 / 「オストロマット 674i」を用いて降温プログラムを使用した場合。

焼結スケジュール2をご使用時の注意点

- ・焼結スケジュール1と2では、焼結後の色調に差が出る場合があります。
- ・2段で焼結すると焼結が割れる可能性があるため、必ず1段で焼結してください。
- ・焼結スケジュール2の適応症例は単冠~3歯ブリッジまでです。


## 包装・価格

松風ディスク ZR ルーセント スープラ

12mm …… ¥37,000 14mm …… ¥39,000  
16mm …… ¥42,000 18mm …… ¥44,000  
22mm …… ¥48,000 26mm …… ¥55,000

【サイズ】6種類: φ98×12, φ98×14, φ98×16, φ98×18, φ98×22, φ98×26 (mm)

【色調】8色: Plain, W2, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1

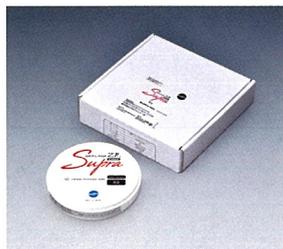

## 関連製品

管理医療機器 認証番号 229AGBZX00044A06

松風ディスク ZR ルーセント スープラ  
サービカル+

30mm …… ¥68,000

【形状】1種類: φ98×30 (mm)

【色調】3色: A1, A2, A3



## 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ディスク ZR ルーセント スープラ	歯科切削加工用セラミックス	管理医療機器 医療機器認証番号 229AGBZX00044A05

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

※ 価格は2025年1月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

※ 印刷のため実際の色調とは異なる場合があります。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口 (075) 778-5482 受付時間 8:30~12:00 12:45~17:00 (土日祝除く) [www.shofu.co.jp](http://www.shofu.co.jp)

● 支社: 東京 (03) 3832-4366 ● 営業所: 札幌 (011) 232-1114 / 仙台 (022) 713-9301 / 名古屋 (052) 709-7688 / 京都 (075) 757-6968 / 大阪 (06) 6330-4182 / 福岡 (092) 472-7595

2412BDJSi-01