

BELLEZZA LAYER ZIRCONIA VISTA

ベレッツァ レイヤー ジルコニア ビスタ

強度と透光性を高いレベルで実現した
レイヤージルコニア



2025年 3月3日 Debut

新発売記念特別価格※

20,800円～

※2025年3月3日～4月30日まで

東ソー株式会社製

新材料「Zpex Smile®.m」「Zpex®4.m」を独自ブレンド

審美性に優れた自然なグラデーション

収縮による変化が少なくロングスパンブリッジにも対応



東ソー株式会社製の新材料を独自ブレンドし 高強度・高透光性を高レベルで両立させました

高透光性


「Zpex Smile®.m」

前歯の使用に対応できる高透光性原料

高強度・高透光性

「Zpex® 4.m」

高強度と高透光性を実現した原料

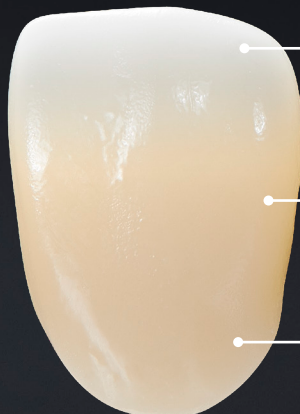

エナメル層

強度 **900MPa**
透光性 **50%**

中間層


強度 **1050MPa**
透光性 **47%**

サービカル層

強度 **1100MPa**
透光性 **43%**



カラーラインナップ

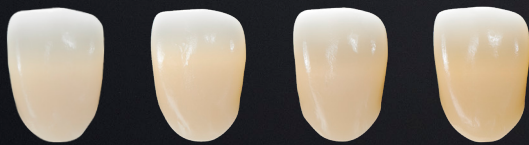

A1

A2

A3

A3.5

収縮による変化が少なく ロングスパンブリッジにも対応

異組成多層ディスクですが、使用原料の収縮率が統一されているため、焼成後の変形が少なく抑えられます。そのため、インレーはもちろん、より高い精度が求められるロングスパンブリッジにも対応可能です。

なめらかで審美性に優れたグラデーション

「クインティプルレイヤー技術」により、エナメル層からサービカル層まで、なめらかなグラデーションを実現しました。先端部は高い透光性を持ち、審美性に優れた天然歯のような色調を再現します。

チッピングのリスクを軽減

均一な粒子の原料を用い精密な温度コントロール下で半焼結しているため、辺縁部や切端などでも、チッピングのリスクを軽減します。

ディスク物性

		曲げ強度※1	透光性※2
1層	エナメル層 (20%)	900MPa	50%
2層	中間層 (35%)	1050MPa	47%
3層			
4層	サービカル層 (45%)	1100MPa	43%
5層			

※1 曲げ強度は焼結後の数値です。3点曲げ強度 (JIS T6526:2018) に基づく
※2 ニッシング調べ 試験片厚み1mmの場合

焼成スケジュール

昇温	5℃ / 分
焼成温度	1500℃
係留時間	2時間
降温	自然冷却

サイズ / 価格

シェード	直径	厚み	標準価格	新発売特別価格
A1	98mm	14mm	26,000円	20,800円
A2		18mm	31,000円	24,800円
A3		22mm	36,000円	28,800円
A3.5		26mm	39,000円	31,200円

2025年
3/3~4/30まで

**20%
OFF**

●販売名:ベレッツァ レイヤー ジルコニア ●分類:管理医療機器
●一般名称:歯科切削加工用セラミックス ●認証番号:306AFBZX00082000
(ベレッツァ レイヤー ジルコニアは、東ソー株式会社製の原料を使用しています。)

●カタログに記載の商品及び色見本などの色調は、印刷のため実物とは異なります。●仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
●価格は、2025年1月現在のものです。●ご使用に際しましては、電子添文を必ずお読みください。

製造販売元 **株式会社ニッシン** 京都府岡岡市旭町樋ノ口88

販売元 **株式会社アイキャスト**

〒601-8469 京都市南区唐橋平垣町8
TEL 0120-228582 FAX 075-681-5771

www.i-cast.jp