



Tissue Conditioner
FLECTON
ティッシュコンディショナー フレクトン

選べる
2カラー／

ピンク

ホワイト

やさしく、やわらかな
ティッシュコンディショナー



お好みの
フロー感に
調整可能

貼りかえ簡単

低アルコール
4%



義歯床用短期弾性裏装材
ティッシュコンディショナー
フレクトン

粘膜調整 / 機能印象 / 暫間裏装
標準価格 セット 6,800円

製品特長

調整可能なフロー感

粉計量容器に記された線を参考にして、粉量を調整することで
お好みのフロー感に調整いただけます。



実線 1.50g

調整しやすい
やわらかタイプ

義歯辺縁の修正や
クリアランスの狭い印象時には、
高フローのやわらかタイプ

粉計量容器



点線 1.65g

厚盛りしやすい
しっかりタイプ

訪問診療で座位のできない
患者さまや義歯との隙間(不適合)
が多いときは厚盛りできる
しっかりタイプ

“短時間で”はがしやすい

べたつかず、一体となって
はがせるため簡単に
貼りかえることができます。



低刺激でやさしい

低アルコールで苦みが少なく、ピリピリするといった
患者さまへの負担がありません。

機能印象ができる

高い印象採得能があり、機能印象を取ることができます。

使用方法

処置も操作時間も
短時間に！
※弊社従来品比べ

べたつかず、短時間で
トリミングが可能に！
※弊社従来品比べ

1 粉液計量



粉計量容器1目盛に対して
液1mLを計量します。

[目安] — やわらかタイプ 1.50 g
..... しっかりタイプ 1.65 g

2 混和と盛り上げ



粉液がなじむ程度に、約20秒混和
してください。その後、義歯床粘膜面
に盛り上げ、表面を整えて口腔内に
装着します。

3 口腔内保持



適切な咬合位で咬合させます。
約5分間口腔内で保持します。

4 トリミング



口腔内から取り出し、余分な本材を
ナイフやハサミで除去します。



●認証番号：306AFBZX00044000
●管理医療機器 ●義歯床用短期弾性裏装材

義歯床用短期弾性裏装材

ティッシュコンディショナー
フレクトン

■色調：ピンク/ホワイト		
■セット内容：粉100g、液100mL、スパチュラ 混和器、スポイト、粉計量容器 ノズルキャップ		
■単品（粉）：粉100g、粉計量容器、ノズルキャップ		
■単品（液）：液100mL、スポイト		
■標準価格		
セット（ピンク）	6,800円	204510030P
セット（ホワイト）	6,800円	204510030W
粉100g（ピンク）	4,430円	204510031P
粉100g（ホワイト）	4,430円	204510031W
液100mL	2,330円	204510032

ティッシュコンディショナーにも使える
入れ歯洗浄剤「キラリ泡タイプ」がオススメ！



口腔内装置洗浄剤

キラリ 泡タイプ

■標準価格 1,000円 204530569
希望患者価格 1,180円

●標準価格の後の9ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2024年10月現在のものです。消費税は含まれておりません。●ご使用に際しましては、製品の電子添文を入手し、必ずお読みください。

製造販売元 **株式会社ニッシン**

京都府亀岡市旭町樋ノ口88 〒621-0001
www.nissin-dental.jp

発売元 **株式会社モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL: 06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL: 03-3834-6161
お問合せ お客様相談センター＜歯科医療従事者様専用＞ TEL: 0800-222-802
www.dental-plaza.com

0（フリーコール）