

Polishing Kit

素材ごとに特化した咬合調整に

一般医療機器届出番号 30B3X00001001011



チタン冠用
標準価格：6,800 円
(税込価格：7,480 円)

- 作業時間短い
- 光沢が得られる
- 特殊な研磨剤
- 特殊ポイントが効果

一般医療機器届出番号 30B3X00001001020



義歯・レジン冠用
標準価格：9,400 円
(税込価格：10,340 円)

- 訪問診療先での義歯調整に短時間で簡単に光沢が得られます。
- 診療室でもチェアーサイドで光沢まで修正できます。
- ルージュ off を噴霧して2～3分放置して水洗します。

一般医療機器届出番号 30B3X00001001013



ジルコニア用
標準価格：15,600 円
(税込価格：17,160 円)

- 高密度のダイヤ入りコースタイプ
- 高密度のダイヤ入りシリコンタイプ
- 高密度のダイヤ入りシリコン仕上げタイプ

■特徴

- 研磨の時間短縮
- 選択された研削材
- 光沢が得られる
- 使用方法が簡単

製造
販売元



株式会社 キクタニ

〒640-8392和歌山市中之島1426番地

TEL : 073-432-7135

URL : <https://kikutani.com>

ご用命は………


義歯・レジン冠の咬合調整専用

Polishing kit

< 使用説明書 >

義歯・レジン冠の
Polishing kit

R-0 (8 種類)

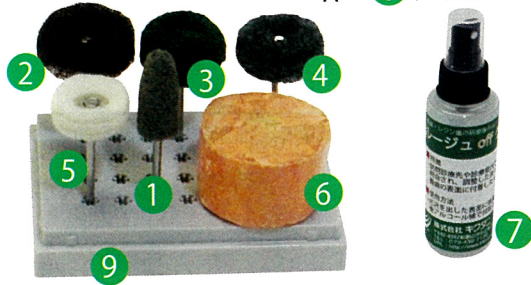

標準価格 9,400円(税込価格 10,340円)

	注文番号	商 品 名
①	R-1	ビッグバフポイント
②	R-2	アフロブラシ #1(ダークレッド)
③	R-3	アフロブラシ #2(グリーン)
④	R-4	アフロブラシ #3(オレンジ)
⑤	R-5	フェルトバフ
⑥	R-6	オレンジルージュ(小)
⑦	R-7	ルージュ off クリーナー(100ml)
⑧	R-8	オレンジルージュ(大) ※単品販売のみ
⑨	R-9	バースタンド

- ① R-1
ビッグバフポイント(1 入)

標準価格 2,100 円
(税込価格 2,310 円)



<使用方法>

- ビッグバフポイントで削合箇所を削合し調整し整える

- ② R-2 アフロブラシ #1(ダークレッド) (1 入)

標準価格 600円
(税込価格 660円)

<使用方法>

- 荒仕上げアフロブラシで削合された面を滑らかにする



- ③ R-3
アフロブラシ #2 (グリーン)(1 入)

標準価格 600 円
(税込価格 660 円)

<使用方法>

- R-2 のアフロブラシで削合された面を R-3 で滑らかにする



- ④ R-4
アフロブラシ #3(オレンジ) (1 入)
細目 (仕上げ)

標準価格 800円
(税込価格 880 円)

<使用方法>

- R-3 で滑らかになった箇所を最終仕上げとして R-4 で仕上げる



- ⑤ R-5 フェルトバフ(1 入)
⑥ R-6 オレンジルージュ(小)
⑧ R-8 オレンジルージュ(大)

⑥ R-6
オレンジルージュ(小)

標準価格 2,000 円
(税込価格 2,200 円)

⑧ R-8 オレンジルージュ(大)

標準価格 5,400 円
(税込価格 5,940 円)

⑤ R-5 フェルトバフ
標準価格 800 円
(税込価格 880 円)

<使用方法>

- オレンジルージュを使用して通常通りの使用方法で光沢が得られる

- ⑦ R-7 ルージュ off クリーナー(1 本)

<使用方法>

- 光沢面に噴霧してルージュを落とします。噴霧後 2~3 分後に水洗します。

標準価格 1,800 円
(税込価格 1,980 円)



⑨ R-9 バースタンド
標準価格 700 円
(税込価格 770 円)

※ オートクレーブ消毒可能(オレンジルージュ・バースタンド除く)



株式会社 キクタニ


〒640-8392和歌山市中之島1426番地

TEL : 073-432-7135

URL : https://kikutani.com

ジルコニア咬合調整専用 Polishing kit ＜使用説明書＞

ジルコニアPolishing kit (6種類)

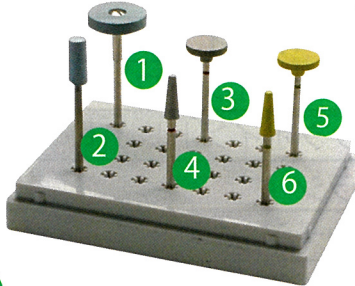

	注文番号	商 品 名	
①	G-1	ダイヤモンド C 1	コース
②	G-2	ダイヤモンド C 2	
③	G-3	ダイヤモンドシリコン M 1	ミディアム
④	G-4	ダイヤモンドシリコン M 2	
⑤	G-5	ダイヤモンドシリコン F 1	ファイン
⑥	G-6	ダイヤモンドシリコン F 2	
⑦	G-7	バースタンド	

G-0

標準価格 15,600円(税込価格 17,160円)


① G-1 ダイヤストーン(1 入) (コースタイプ)

標準価格 3,600 円
(税込価格 3,960 円)

＜使用方法＞

- 高品質のダイヤモンドを高密度に含有し、スペシャルセラミックバインダーで結合。軽いタッチで削合できます。

② G-2: ダイヤストーン (1 入) (コースタイプ)

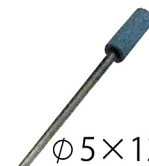標準価格 3,600円
(税込価格 3,960 円)

＜使用方法＞

- 高品質のダイヤモンドを高密度に含有し、スペシャルセラミックバインダーで結合。細部の削合に使用します。

③ G-3: ダイヤシリコン(1 入) (ミディアムタイプ)

標準価格 2,100 円
(税込価格 2,310 円)

＜使用方法＞

- 高品質ダイヤモンドを高密度に含有したシリコン状の研磨ポイントです。

④ G-4: ダイヤシリコン(1 入) (ミディアムタイプ)

標準価格 2,100円
(税込価格 2,310 円)

＜使用方法＞

- 高品質ダイヤモンドを高密度に含有したシリコン状の研磨ポイントです。

⑤ G-5: ダイヤシリコン (1 入) (ファインタイプ)

標準価格 2,100 円
(税込価格 2,310 円)


⑥ G-6: ダイヤシリコン (ファインタイプ)

標準価格 2,100 円
(税込価格 2,310 円)

＜使用方法＞

- 高品質ダイヤモンドを高密度に含有したシリコン状の仕上げ研磨ポイントです。

⑦ G-7: バースタンド(1 個)

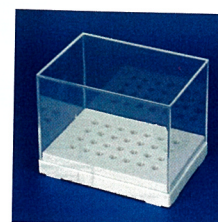標準価格 700 円
(税込価格 770 円)

※ オートクレーブ消毒可能 (バースタンド除く)



株式会社 キクタニ

〒640-8392和歌山市中之島1426番地


TEL : 073-432-7135

URL : <https://kikutani.com>

チタン鑄造冠の咬合調整専用

Titan Polishing kit

< 使用説明書 >

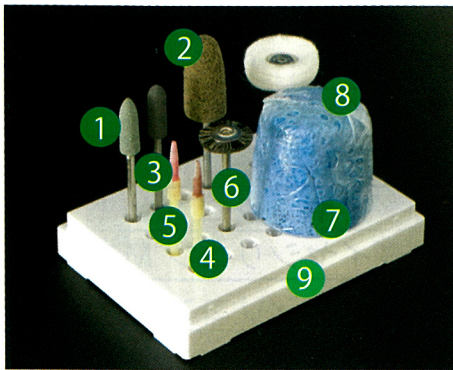

Titan Polishing kit

(9 種類)

T-0

標準価格 6,800円(税込価格 7,480円)

	注文番号	商 品 名
①	T-1	カーボランダムポイント
②	T-2	ビッグバフポイント
③	T-3	スモールバフポイント
④	T-4	スティックポイントワインミニ
⑤	T-5	スティックポイントレッドミニ
⑥	T-6	馬毛ブラシ
⑦	T-7	チタンルージュ
⑧	T-8	フェルトバフ
⑨	T-9	バースタンド

① T-1 カーボランダムポイント

② T-2 ビッグバフポイント

T-1(10 本入)

標準価格 900円
(税込価格 990円)

② T-2(1 入)

標準価格 2,100円
(税込価格 2,310円)

<使用方法>

- スプルーカットの後全体の面を①でスムーズに整える
- ビッグバフポイント②で全体の面を整える

③ T-3 スモールバフポイント

<使用方法>

- 咬合面の小窩裂溝など細部の面を整える

④ T-4 スティックポイントワインミニ (荒研磨)

⑤ T-5 スティックポイントレッドミニ (仕上げ研磨)

④ T-4/T-5(各 1 入)

標準価格 1,100円
(税込価格 1,210円)

<使用方法>

- T-4 小窩裂溝など溝部を整える(荒研磨)
- T-5 小窩裂溝など溝部を整える(仕上げ研磨)

⑥ T-6 馬毛ブラシ

⑦ T-7 チタンルージュ

T-6(1 入)

標準価格 350円
(税込価格 385円)

T-7(1 入)

標準価格 1,600円
(税込価格 1,760円)


<使用方法>

- T-6にT-7を付けて咬合面の小窩裂溝など細部の部分に光沢をだす

⑧ T-8 フェルトバフ

⑨ T-9 バースタンド

T-8(1 入)

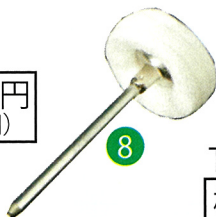標準価格 800円
(税込価格 880円)

T-9(1 個)

標準価格 700円
(税込価格 770円)

<使用方法>

- 通常通りの使用方法で光沢が得られます

<ワンポイントアドバイス>

※ 面だけの研磨であれば①②⑦⑧で光沢が得られます。

※ 咬合調整では咬合面の小窩裂溝など細部の面を整えるのに④⑤使用し、⑥⑦で溝の中まで光沢が得られます。

※ オートクレープ消毒可能(チタンルージュ・バースタンド除く)



株式会社 キクタニ

〒640-8392和歌山市中之島1426番地

TEL : 073-432-7135

URL : <https://kikutani.com>