

CAM用 集塵機

XCEL



DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.

強力な振動を自動的に発生させて
切削粉を取り除く

“バイブレーションフィルタ”



商品名 XCEL

標準価格 350,000 円 (税別)

FEATURE

Point 1



**バイブレーション
フィルタ**

便利な自動振動機能

Point 2



モニタリングシステム

空気圧・吸入レベル・内部温度などを
リアルタイムモニタリング

Point 3



コストダウン

コスト効率がよく
フィルタ交換コストを
削減します。

Point 4



**カスタマイザブル
セッティング**

使用環境に合わせた
カスタム可能な設定

BUTTON DISCRPTION



≫ 電源ON/OFF

装置の電源をオン/オフにします。
電源をONにするとLCDが表示されます。



(esc/↶)

≫ フィルタ清掃ON/OFF

フィルタ清掃ボタンを押すとフィルタクリーニング機能が起動します。

※ 吸引中にこのボタンに触れると、吸引機能が停止します。吸引機能を再開したい場合は、サクシオンボタンをタッチする必要があります。



≫ サクシオンON/OFF

サクシオンボタンをタッチすると吸引機能が作動し、吸引力の強さが表示されます。もう一度押すとアラームが2回鳴り、吸引が終了します。



≫ 下および左移動

サクシオンレベルを下げます。



≫ 設定

「設定モード」に入ります。

≫ リアルタイムモニタリングモード 3秒以上長押し

ボタンを3秒以上長押しで「リアルタイムモニタリングモード」に入ります。



(3s/⏏)

≫ 確定

タッチすると機能や設定が確定します。

≫ ロックモード 3秒以上長押し

ボタンを3秒以上長押しすることで「ロックモード」になり、LCDにはロックアイコンが表示されます。再び3秒以上長押しすると「ロックモード」が解除されます。




≫ 上および右移動

サクシオンレベルを上げます。

OPERATION PROCESS

機器内の空気の流れ

- ① 吸引した空気
- ② 吸引した物質を、フィルタでろ過する
- ③ 浄化された空気を、外に排出する
- ④ フィルタに付着した異物を、振動モータで振り落とす

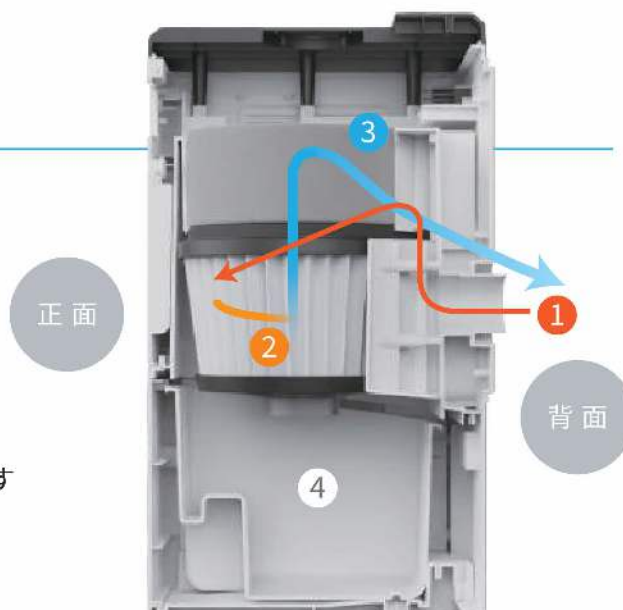

SPECIFICATION

仕様

ディスクリプション	CAMシステム用のバッグフリーユニット
材料	ABS、PP、PETG
モータ動作温度	-15℃～+40℃
保管温度	-20℃～+80℃
保管湿度	RH20%～80%
製品標準構成	メインユニット、フィルタ、 静電防止ホース（2.5M）、電源プラグ、 CAMインターフェースケーブル
装置名称	XCEL
定格電圧	AC110V
動作電圧	単相 AC100 - 140V、50/60Hz
消費電力	780W（±5%）
消費電流	8.6A
電流保護	Input：2× 12A（サーキットブレーカー） Output：3.15A（ヒューズ）
最大空気流量	3.8m ³ /min

最大空気圧	20kPa
最大空気圧（モータ仕様）	25.6kPa
モータタイプ	ブラシレスモータ
フィルタ	HEPAフィルタ
ダストボックス容量	8.71L
ノイズレベル	最大 70dB（±5%）
吸引口内径	48φ
CAMインターフェース	DIN-6P / RJ45 Socket
入力信号	低圧：0 - 2.5V 高圧：4 - 24V
出力信号	最大プルアップ電圧：24V 最大スイッチング電流：5mA 内部抵抗：150Ω
質量	13kg
外形寸法	316（幅）× 342（奥行）× 589（高さ）mm
吸引レベル	Manual：1-5 level Auto：2 level（3rd, 5th）

STANDARD COMPONENTS

標準構成

HEPAフィルタ



サクションホース
&
ブッシング



静電防止ホース
2.5M

1セット
2pcs

CAM
インターフェース
ケーブル ※1



消耗品

HEPAフィルタ 25,000円
約6ヵ月～12ヵ月に1回のフィルタ交換を推奨

CAMインターフェースケーブル対応メーカー

※1 ミリングマシン連動ケーブル

Amann-Girrbach / ARUM / CANON ELECTRONICS / Dentsply Sirona
DIPRO / imes-icore / Ivoclar Vivadent / RolandDG / vhf / Zirkonzahn /
ご不明な点がございましたら、販売元までお問い合わせください。

輸入元
株式会社フォレスト・ワン
〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目19-1 津田沼ビート4階
TEL.047-474-8105 FAX.047-474-8106

販売元
Angel 大榮歯科産業株式会社

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京 TEL.03-6806-3381 名古屋 TEL.052-731-0610 福岡 TEL.092-473-7567