

# カルフィー・ペースト

## 新規・ご愛用感謝キャンペーン

GC

Smile  
for the  
World  
Since 1921  
100 years of Quality in Dental

キャンペーン期間 2025.2/21金～3/20木

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。  
この度、「カルフィー・ペースト 新規・ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。  
是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

期間・数量限定

カルフィー・ペースト 1函と キャンペーンセット品 エンド用チップ10個入り を  
組み合わせ価格にてご提供

対象製品

### 除去性と操作性にこだわって開発された 水酸化カルシウム水性ペースト

水酸化カルシウム水性ペースト

カルフィー・ペースト

希望医院価格 ¥3,980

包装 ●1函:シリンジ3g 1本、  
エンド用チップ 10本

水酸化カルシウム系歯科根管充填材料  
ジーシー カルフィー・ペースト  
高度管理医療機器  
21500BZZ00134000




キャンペーン  
セット品

- 根管内に挿入しやすいカーブタイプのチップ!
- 細いチップでも押し出しやすい!

単回使用 エンド用チップ

希望医院価格 ¥1,050

包装 ●1袋: 10本  
歯科用充填・修復材補助器具(歯科用注入器具)  
ジーシー エンド用チップ  
一般医療機器 13B1X10160000033

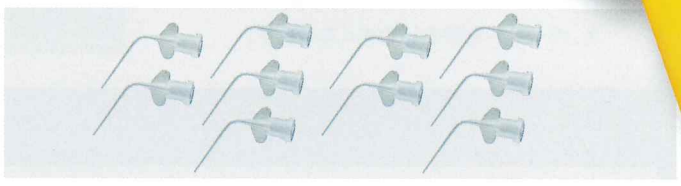

根尖孔外への  
押し出し禁止



正しい  
充填方法




ブランジャーは  
軽い力でゆっくり押す




注入と同時に  
チップを引き上げる



誤った  
充填方法

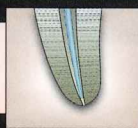

チップの先端を  
根尖部に押し込む

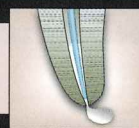

根尖孔外に向けてペーストを  
強く押し出す

キリッ

ご注文書

キャンペーン期間: 2025年2月21日(金)～3月20日(木)

|         |      |
|---------|------|
| 貴医院名    |      |
| ご住所 〒   |      |
| TEL ( ) |      |
| お取引販売店  | ご担当者 |
| 様       |      |

| 対象製品             | キャンペーンセット品         | ご注文数 |
|------------------|--------------------|------|
| カルフィー・ペースト<br>1函 | エンド用チップ10個入り<br>1袋 |      |

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。  
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

ご用命は

支店 ●東京(03)3813-5751  
●大阪(06)4790-7333  
●北海道(011)729-2130  
営業所 ●東北(022)785-8040  
●名古屋(052)757-5722  
●九州(092)441-1286



# 除去性と操作性にこだわって開発された 水酸化カルシウム水性ペースト


## カルフィー・ペースト 製品特長

### 根管からスムーズに**除去**できる

医薬品メーカーとして  
長年培った技術を応用した  
**APポリマー** 配合ペースト  
(Amphiphilic Polymer = 両親媒性高分子)

#### ▶ APポリマーとは？

水になじみやすい親水基と、なじみにくい疎水基をあわせもった成分です。これにより、ペースト性状を保ちながら、除去時にはAPポリマーが水分を吸収することでペーストの水分量が増え、ペーストを除去しやすくなります。

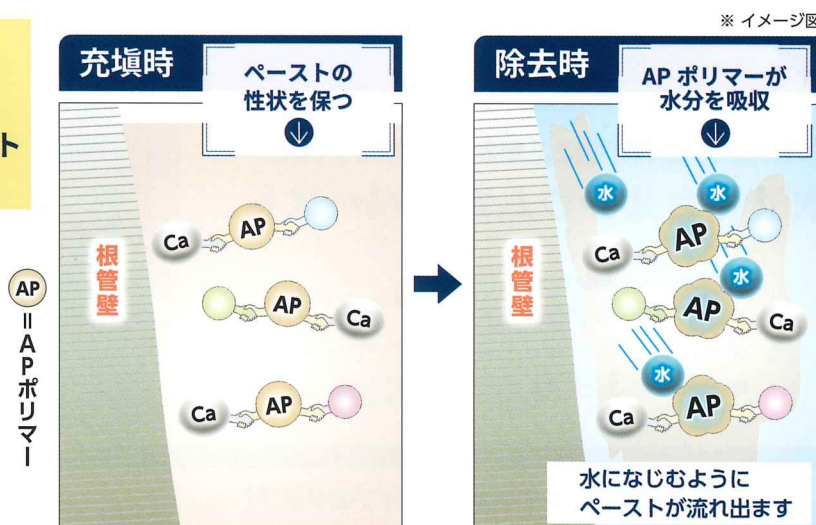

### スムーズに**充填**できる

押し出しやすい  
なめらかなペースト

根管に挿入しやすい  
カーブタイプの細いチップ

#### POINT

先端外径：約0.5mm  
(25G相当)

