

優れた
洗浄力
除菌力

使いやすい
顆粒タイプ

大容量
約70回分
顆粒 175g



原寸大

高機能性と使いやすさを追求した顆粒タイプの義歯洗浄剤


2024.10.21
改良新発売

I-RACK 義歯洗浄剤

優れた洗浄力・除菌力


活性酸素とアニオン界面活性剤の作用で、義歯に付着した**ステイン**や**タバコヤニ**を除去します。また、真菌や細菌を**しっかり除菌**します。

洗浄力がUP

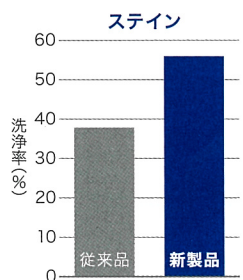

※測定条件: 水温20℃・7分
浸漬後の洗浄力を測定 (n=3)
※ステイン (タンニン鉄で評価)

優れた除菌力

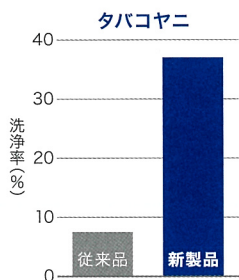

※測定条件: 水温20℃・30分
浸漬後の洗浄力を測定 (n=3)



99.9% 除菌

※測定条件: 上記の菌に対して、
15分後の菌数を測定 (n=3)

使いやすい顆粒タイプ

傾けるだけで**1回分**が出る計量キャップ付ボトル。



初めてお使いになるときは、計量キャップをはずし**赤い中栓を取り除き**、キャップをしっかりと取り付けてください。

高齢者にも持ちやすい大きなボトル。

錠剤のように、
個包装から取り出す**手間が不要**。
飲み込んでしまうリスクを低減。

清潔な義歯で快適な毎日を！

義歯清掃には義歯洗浄剤とブラッシングの併用が効果的です。


適切な義歯清掃習慣を身につけていただけるよう、
エラック義歯ケア製品を是非お役立てください。



エラックの
詳しい情報は
こちらから

理想的な義歯清掃方法は、3ステップ洗浄


Step 1

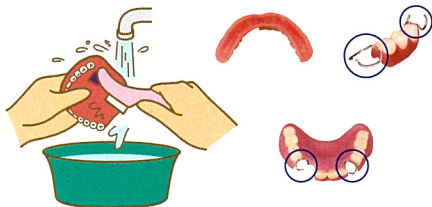

流水下で食べかすなどのおおまかな汚れを洗い流してから、義歯ブラシで義歯を清掃します。


❶ 力の入れすぎ、研磨剤配合歯磨剤の使用は禁物です。義歯を傷つける恐れがあります。

Step 2

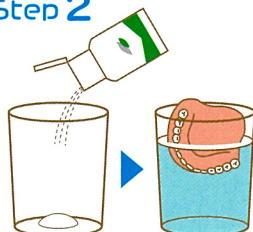

❷ コップに義歯洗浄剤1回分を入れます。❸ 15分目安に浸漬してください。
④ 水又はぬるま湯約150mlを加えて、義歯を浸します。
⑤ 液の色が変わったら洗浄終了のサインです。

●エラック義歯洗浄剤の色変化

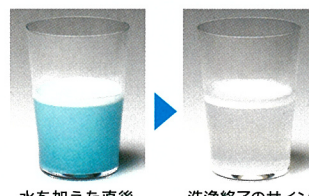

水を加えた直後

洗浄終了のサイン

Step 3



義歯を取り出し、流水下でブラッシングします。浮き上がった汚れと洗浄剤をきれいに洗い流します。

関連商品

らくらく、やさしく、清潔に

清掃性を追求した義歯ブラシ

エラック義歯ブラシ

らくらくスタイル



効率よく清掃できる
硬軟片面2ヘッド植毛。

持ちやすく安定感のある
L字型ふっくらハンドルと
操作しやすい広い指当て。

清掃性と義歯への
やさしさを両立した
適度な硬さの密毛ヘッド。

メーカー希望小売価格/個:500円

義歯を使い始めたら、口腔粘膜のケアも忘れずに！

口腔粘膜ケア用ブラシ

エラック510 S(ソフト)
ES(エクストラソフト)



やわらかい植毛で、デリケートな粘膜面をやさしくケア。

大きめヘッドで、
広い粘膜面を効率よくケア。

メーカー希望小売価格/個:320円

介護用らくらくハブラシ、自分ミガキにも

エラックハブラシ620 S(ソフト)
ES(エクストラソフト)



小さな開口でも入れやすい
薄型ヘッド・短い毛丈。

奥歯も磨きやすい
スリム&カーブネック。

歯肉にやさしい
やわらかい植毛。

メーカー希望小売価格/個:250円

らくらく **エラックハミガキ**



泡立ち少ないやさしい香味。研磨剤無配合のジェルだから、すずぎが「らく」。

薬用成分以外は、食品と同様の成分を配合。とりみ成分配合*1

口臭を予防する殺菌剤配合*2 むし歯を予防するフッ素高濃度配合(1450ppm)。

*1 キサンタンガム(粘度調整剤) *2 LSS:ラウロイルサルコシNa
●フッ化物高濃度配合品(1450ppmF)の6才未満への使用は控え、子供の手の届かない所に保管してください。

販売名:エラックハミガキa メーカー希望小売価格/個:580円

専門的ケアに適した仕上げ磨き用歯ブラシ

エラック541 S(ソフト) ES(エクストラソフト)
US(ウルトラソフト)



やわらかい植毛で、腫れや痛みがある方にもやさしくケア。

すみずみまでブラッシングできる超コンパクトヘッド。

メーカー希望小売価格/個:320円

ライオン歯科材株式会社

〒111-8644 東京都台東区蔵前 1-3-28 TEL.03(6739)9012

ライオン歯科材

<https://www.lion-dent.co.jp/>

<https://www.lion-dent.co.jp/erac/>

発売 株式会社モリタ 大阪本社:大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T.06.6380 2525 東京本社:東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T.03.3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T.0800.222 8020 (フリーコール)
www.dental-plaza.com

※価格には、消費税は含まれておりません。

PUB.NO.M7905.1.2409.67.258G.10/ZU