

プレス・ポーセレンファーンネス、ポーセレンファーンネス

DUOTRON PRO

デュオトロン PRO T-5100/T-3100

歯科技工用ポーセレン焼成炉

デュオトロン PRO T-3100

電 源	100V, 50/60Hz
消費電力	1,100W (起動時)
寸 法	W270×D380×H570mm
炉内寸法	Φ92mm×H66mm
重 量	約24kg
価 格	¥760,000

歯科技工用プレスポーセレン焼成炉

デュオトロン PRO T-5100

電 源	100V, 50/60Hz
消費電力	1,100W (起動時)
寸 法	W270×D380×H760mm
炉内寸法	Φ90mm×H85mm
重 量	約27kg
価 格	¥1,420,000



デュオトロン PRO T-3100




デュオトロン PRO T-5100

共通の仕様

- ✓ 加熱が早く、電源オンから待機温度迄の昇温が短い=素早く作業開始可能
- ✓ USBメモリーでプログラムのバックアップ可能
- ✓ 低振動昇降式焼成テーブル採用
- ✓ 7インチ LCD高画質ディスプレイ内蔵
- ① 600スケジュール登録可能 [ポーセレンモード]
- ② カスタマイズ可能な昇温・徐冷設定
- ③ 日本語表記可能

T-5100のみの機能

- ✓ 真空ポンプ内蔵 [外付けポンプ不要]
- ✓ 100スケジュール登録可能 [プレスモード]
- ✓ モーターの力でプレス [コンプレッサー不要！モーター内蔵]
- ✓ 高精度ロードセルがリアルタイムで圧力を検出=打ち損じを軽減
- ✓ 高精度圧力センサーにより常に適切なプレス圧で制御=打ち損じを軽減

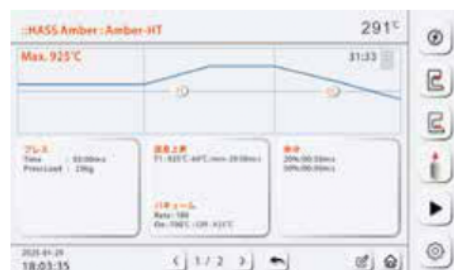

アンバー プレス用プレススケジュール

種類	サイズ	リング サイズ	焼却開始 (℃)	昇温温度 (℃/分)	最大温度 (℃)	係留時間 (分:秒)	バキューム 開始 (℃)	プレス時間 (分:秒)	初期圧 (kg)	最終圧 (Kg)	Step Load (Kg)	Step Time (秒)						
HT	R10	100g	700	60	925	20:00	925	3:00	20.0	23.0	10	15						
LT	R10	100g			930		930											
MO	R10	100g																

デュオトロン PRO T-5100 歯科技工用ポーセレン焼成炉 届出番号: 27B2X00041000272 [一般医療機器] 製造販売元: サンデンタル株式会社
デュオトロン PRO T-3100 歯科技工用ポーセレン焼成炉 届出番号: 27B2X00041000282 [一般医療機器] 製造販売元: サンデンタル株式会社

●ご注文の際は出入りの歯科商店様、もしくは弊社までお問い合わせください。●仕様及び外観は、製品改良の為予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●表示価格に消費税は含まれておりません。

SD サンデンタル株式会社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-8-9

商品に関するお問い合わせ: 月~金 9:00~17:00

大阪 06-6245-0950 東京 03-3836-9347 福岡 092-482-2318



サンデンタルホームページ
<http://www.sundental.jp>



@sundentaljapan

2501G_01