

GC

ADMENIC DVP2 Plus

映像記録&プレゼンテーションシステム



マイクロスコープ診療の必需品



ADMENIC DVP2+

映像記録&プレゼンテーションシステム

カーリーナシステム株式会社

マイクロ診療の価値を向上させる 「動画で魅せるプレゼンテーション」

マイクロスコープによる治療を映像で記録し、軽快な操作感で動画による診療説明が行える記録&プレゼンテーションシステムです。

記録

マイクロでの治療
過程をすべて記録

明確

診療内容を
明確に説明

理解

治療前後を動画で
分かりやすく理解

共有

患者さんとの質の高い
コミュニケーション

保存

万が一に備えた
映像の中長期保存



足元のフットスイッチですべての録画操作が可能です。異なる操作音によって確実に動作が分かるため、治療に集中できます。

※有線フットスイッチは製品に付属、無線フットスイッチはオプションです。



再生操作はすべてタッチパネルで行います。大型モニターを併用することで、手元で操作をして、患者さんは大画面で見えることも可能です。

タッチパネルでマルチな再生操作


「早送りは右方向、巻戻しは左方向」、「とりあえずタッチすれば再生」などの直感的、感覚的な操作性で画面にタッチする位置で、再生やスキップ、FF/REWなどの操作が行えるマルチファンクションタッチを搭載。魅せる診療をしっかりとサポートします。



録画中、診療後のプレゼンテーションで見せたい治療のポイントでフットスイッチを踏むとチャプターが設定されます。タイムラインにはチャプターポイント、サムネイルバーには静止画として表示され、即座に目的のシーンの再生が可能です。


治療前/後の過程を映像で説明

治療前後の状態を並べて再生し、比較できます。操作や描画も可能です。

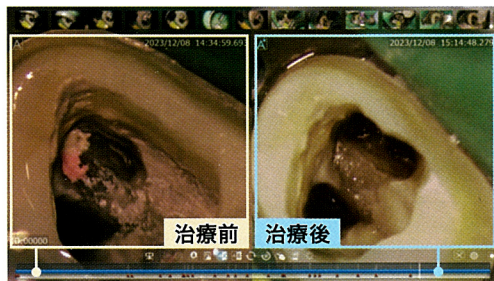


症例映像との比較

症例映像との比較、前回の治療映像との比較が行えます。

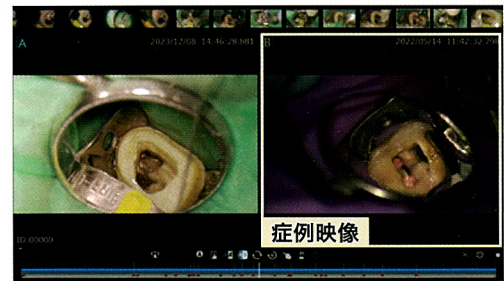


画面のズームや回転

スマートフォンの写真や動画を操作するように、指先でズームイン/ズームアウトが行えます。映像を再生しながら、移動や回転、上顎側の説明が分かりやすい反転回転も可能です。

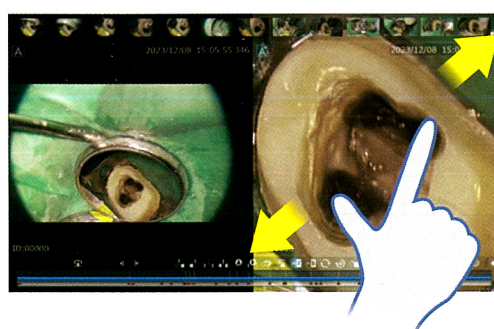

自由な描画が可能なアノテーション機能

画面上にフリーハンドの線が描画でき、治療計画や処置内容をより分かりやすく伝えられます。また、ホワイトボードを表示して使うことも可能です。書き込んだ内容は静止画として保存できます。

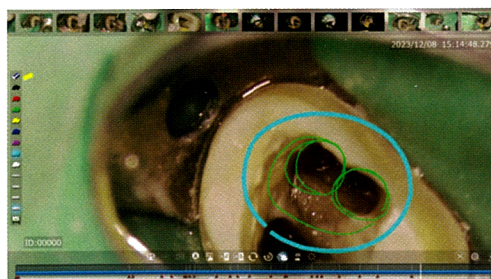

アノテーションモード

動画編集機能

学会、症例検討会の映像資料として、必要な部分だけをカット編集して出力できます。編集中の映像のトータル時間が表示されるので、適切な長さの動画が作成可能です。


会話の録音が可能

音声収録が可能な音声入力端子を搭載しています。

※マイク、マイクアンプ等が別途必要です。USB接続のマイクには対応しておりません。

記録映像を一元管理


カルテ番号で検索すると、その患者さんの診療履歴が一覧表示され、すぐに再生できます。ファイル出力やコピー、削除などの一括管理ができ、「ADMENIC DVP for Cloud」を利用する場合は、クラウド上のデータ管理も行えます。

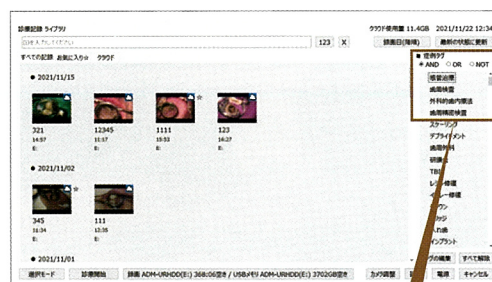

診療記録ライブラリ

症例名やキーワードで検索

記録映像に症例名などの文言をタグ付けし、ライブラリで検索ワードとして使用できます。ひとつの記録映像に複数のタグ付けも可能です。症例タグは記録時のほか、ライブラリでも自由に設定/解除できます。

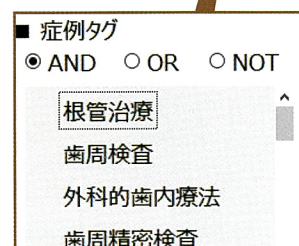

ブックマーク機能

症例映像など、頻繁に使用する映像をお気に入り登録しておけば、簡便に扱うことができます。


プライバシーフィルター機能

診療記録ライブラリの個人情報保護を目的とした待ち受け画面表示の設定が可能です。


別室や分院、学会会場などから MacやWindows PC、タブレットで自由に視聴

ADMENIC DVP for Cloudは、記録映像を共有できるクラウドストレージサービス※です。
PCのWEBブラウザで動画サービスを見るような感覚で、検索・視聴が行えます。


※本サービスをご利用になるには、サービスの契約と月々の利用料金が発生します。詳細はお問合せください。

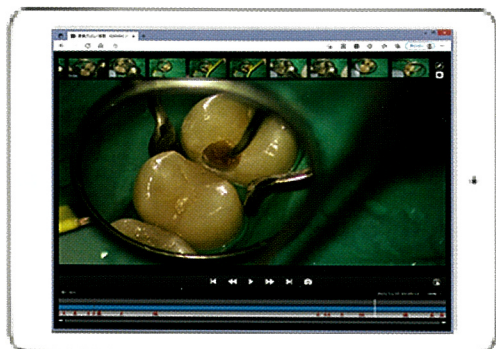

プレビュー（再生・スキップ・FF/REWのみ）

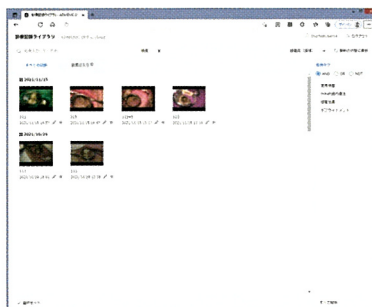

診療記録ライブラリ

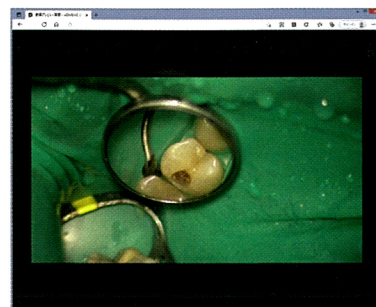

静止画表示 / 保存



契約・費用について

- ADMENIC DVP for Cloudのご利用にはクラウドサービスのご契約が必要です。
- 毎月利用した容量の分をお支払いいただく、従量課金サービスです。
- 500GBから利用可能で、約150時間分※の保存が可能です。
- 使用容量、ご利用料金はADMENIC DVP2 Plusの診療記録ライブラリや、マイページで確認できます。
- 契約方法、月額費用等、詳しくはカーリーナシステム(株)までお問合わせください。利用状況や運用目的などをヒアリングし、適切なお提案をさせていただきます。

<https://www.carinasystem.co.jp/dvpcloud/>

※録画品質を低画質で運用した場合

診療記録は即座にクラウドにアップロードされます。Webブラウザベースの専用アプリケーションでADMENIC DVP2 Plusの操作画面と同じく、直感的な操作で扱えます。

記録映像の管理

記録映像は、USB外付けハードディスク※に保存されます。耐障害性を高めた構成により、大切なデータを守ります。最大3台までの接続が可能です。また、本体側に個人情報を残さないの、万が一の際にも迅速なメンテナンスやシステム復旧が可能です。

※必ず当社指定製品をご使用ください。指定製品以外を使用した際に生じた不具合に対してはサポート対象外となります。



院内で記録映像を共有

複数のADMENIC DVP2 Plusを運用している場合、院内のネットワークを利用して大容量NASシステム※¹を構築することで、どのチェアからも記録映像の共有が可能※²です。ディスク障害に強い特性の為、大切な記録映像の長期保管にも適しています。

※¹ 必ず当社指定製品をご使用ください。指定製品以外を使用した際に生じた不具合に対してはサポート対象外となります。

※² 最大5式までサポート



マイク内蔵のカメラ、市販のビデオカメラを接続可能

映像入力用にDVI-I端子を搭載しています。フルHD映像出力が可能なカメラのHDMI端子と映像ケーブルで接続します。

長期機器保証サービス

本体の保証期間は2年間です。保守サービスにより、最長5年間に延長できます。

仕様 ※4Kカメラ、4K映像出力対応のマイクログスコープは接続できません。事前に接続するマイクログスコープの仕様についてご相談ください。

DVI映像入力端子	DVI-I×1 ※他の端子と排他利用
S-Video映像入力端子	4ピンmini DIN×1 ※他の端子と排他利用
コンポジット映像入力端子	BNC×1 ※他の端子と排他利用
アナログオーディオ入力端子	φ3.5mm ステレオミニジャック×1
アナログオーディオ出力端子	φ3.5mm ステレオミニジャック×1
ネットワークインターフェース	RJ-45コネクタ×2 (機能拡張用)
タッチパネル接続コネクタ	DVI-I×1 (下段)
サブモニター接続コネクタ	DVI-D×1 (上段)
有線フットスイッチ接続コネクタ	専用端子台×1
USB (TYPE A)	USB 5Gbps (前面×1、背面×6)
電源電圧 (ACアダプタ入力/本体入力)	AC100V(50/60Hz) / DC12V
動作温度範囲	5~40℃ (結露なきこと)
消費電力	最大83W
外形寸法 (突起物除く) / 質量	212(W)×88(H)×269(D)mm / 約3.2kg

※保守契約・クラウドストレージサービスについてはカーリナシステム株式会社までお問い合わせください。]

録画フォーマット	H.264(m2ts)、H.264(mp4)
録画品質	高画質/標準/低画質
静止画フォーマット	JPEG、BMP、PNG
オーディオ入力フォーマット	24bit/2ch

ADMENIC DVP for Cloud推奨動作環境

インターネット光回線

- ・有線LAN環境が必要です。無線LAN接続は動作対応外とさせていただきます。
- ・推奨アップロード速度：40Mbps
- ・Proxy経由でのアップロードおよび視聴には対応しておりません。

推奨視聴環境

- ・Mac OS、iOS、Microsoft Windowsを搭載したPC、ノートPC、10インチ以上のAndroidタブレットPC、iPad
- ・iPhone、スマートフォンは非対応
- ・下記のブラウザに対応しています。最新版をお使いください。
Mac OS : Safari、Google Chrome
iOS : Safari
Windows : Google Chrome、Microsoft Edge

製品構成

■本体 ■フットスイッチ(ケーブル6m) ■ACアダプタ ■ACケーブル ■マニュアル・保証書・保守契約案内

※タッチパネル、USB-HDD、NAS、キーボード・マウス、映像ケーブルは別売です。

●予告なく仕様または外装の一部を変更することがあります。●別途、設置調整費、工事費、使用済み製品の引き取り費等が必要になる場合があります。●その他の商品名は各社の商標または登録商標です。

※掲載情報は、2025年4月現在のものです。

カーリナシステム株式会社 www.carinasystem.co.jp

神戸本社

〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69
三宮第一生命ビルディング7F

078-335-7601

東京事業所

〒143-0016 東京都大田区大森北1-6-8
ウィラ大森ビル4F

03-6809-1340

【メールでのお問合せ】 sales@carinasystem.co.jp

営業時間 9:00~17:55 (土日祝祭日、当社指定休日を除く)

発売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間 9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

支店

●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)785-8040 ●九州 (092)441-1286