

この1本で
多様なシーンに対応。

MediZyme N Enzymatic Detergent 【メディコム メディザイム エヌ】

酵素が多様な汚れに効果を発揮、
高希釈倍率でランニングコスト削減が可能。

「メディコム メディザイム エヌ」は、多様な洗浄方式で多くの器材・容器に対応できる”酵素系洗浄剤”です。

多様な洗浄方式に対応

- 用手
- 浸漬
- 超音波
- ウォッシャー
ディスインフェクター

“4種類”の酵素を配合

- Protease
プロテアーゼ(サチライシン)
- Lipase
リパーゼ
- Amylase
アミラーゼ
- Mannanase
マンナーゼ



効果的な“4種類”の酵素を配合

配合されている“4種類”の酵素が、汚れの原因にそれぞれ作用し効果的に洗浄力を発揮します。

酵素名	特徴
 Protease プロテアーゼ(サチライシン)	タンパク質分解酵素。タンパク質を構成するペプチド結合を加水分解する。
 Lipase リパーゼ	脂質分解酵素。脂質を構成するエステル結合を加水分解する。
 Amylase アミラーゼ	糖質分解酵素。デンプン、グリコーゲンなどのα-1,4グリコシド結合を加水分解する。
 Mannanase マンナナーゼ	糖質分解酵素。マンナンやグルコマンナンなどのβ-1,4グリコシド結合を加水分解する。

多様な洗浄方式に対応し、洗う対象を選ばない

低泡性のため、用手、浸漬、超音波、ウォッシャー・ディスインフェクターのいずれの洗浄方法でも使用できます。
また多くの器材・容器にも対応します。

高希釈倍率でランニングコスト削減が可能

100～500倍(1%～0.2%)の高希釈倍率で使えるため、ランニングコスト削減が可能です。
※歯科用バキュームシステム洗浄は50倍希釈(2%)

使いやすい設計

5Lは専用ポンプ付き、1Lは容器に計測メジャー付きで使いやすい設計です。

環境に優しい

生分解性の高い成分を使用し、環境にも配慮した洗浄剤です。



1L：容器に計測メジャー付き

基材適合性	ステンレススチール	アルミニウム(アルマイト処理)	高密度ポリエチレン(HDPE)
	銅	ポリエチレンテレフタレート(PET)	など
	真鍮	ポリ塩化ビニル(PVC)	※ポリカーボネート樹脂は除く
	アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)	ポリメタクリル酸メチル(PMMA)	
成分	4酵素(プロテアーゼ(サチライシン)、アミラーゼ、リパーゼ、マンナナーゼ)、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、キレート剤、安定剤、溶剤、pH調整剤、防腐剤、着色剤		
pH	原液：8～9、希釈後：7～8		
使用方法	汚れの程度により100～500倍希釈(原液 20mL/水 2～10L) 歯科用バキュームシステム洗浄：50倍希釈(原液 20mL/水 1L)		

フランス製

品名：メディコム メディザイム エヌ

品番	サイズ(内容量)	入り数(ケース)	JANコード
JDE010013	1L	3本	4894476036924
JDE010015	5L	4本	4894476036870



販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
【代 表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323
【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112
【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074
【CI/EC事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323
✉ info@medicom-japan.com 地球 www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲