

35NEWTONS®

ファーストプラグ アルファ

全長 300cm(6cm×50 本入)
直径 2.0mm




スクリュー保護




生体親和性



疎水性

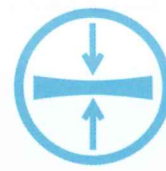

パッカブル

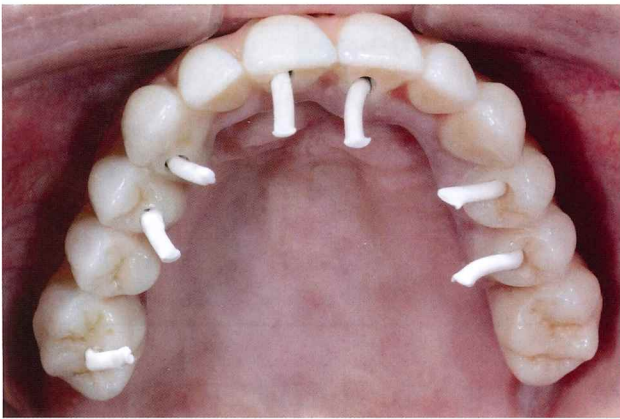

FirstPlug® は、インプラントの
アクセスホール封鎖用に
特別に設計された医療用
PTFE 材料（テフロンコード）です。

FirstPlug® ご使用例



バリアプラグはアクセスホールに
ファーストプラグをしっかりと
圧縮充填することができ、
バリアエキスカバーターで
ファーストプラグを簡単に
取り外すことができます。

写真提供：はせがわ歯科医院 長谷川幸生 院長

FirstPlug®
使用動画はこちら



製品情報



ファーストプラグ アルファ スターターパック

- ファーストプラグ アルファ 1 個
- バリアプラグー 1 本
- バリアエキスカベーター 1 本

歯科医院様参考価格 **¥28,000**



ファーストプラグ アルファ

全長 300cm 直径 2.0mm
(6cm×50 本入)

アクセスホールの 深さ	FirstPlug の 長さ
<5 mm	1 cm
5-10 mm	3 cm
10-15 mm	4 cm

歯科医院様参考価格 **¥13,500**



バリアプラグー

材質：ステンレス鋼
先端径 1.9 mmと 2.3 mm
ファーストプラグを
効率的に圧縮充填できる
ように設計されています。



歯科医院様参考価格 **¥7,800**



バリアエキスカベーター

材質：ステンレス鋼
先端径：1.5 mm
先端部のスプーン状の
くぼみと鋸歯によって、
ファーストプラグや綿球、
テフロンテープの除去に使用可能です。




歯科医院様参考価格 **¥7,800**


一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 医療機器届出番号13B1X10394280001

使用方法


① 修復物を装着し固定後、アクセスホールを清掃し、
エアーシリンジで乾燥させます。

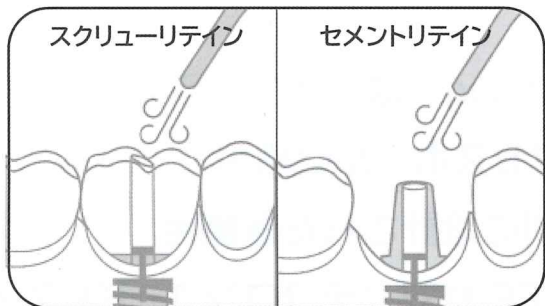


② バリアプラグーで、アクセスホールに圧縮させながら
入れ込みます。

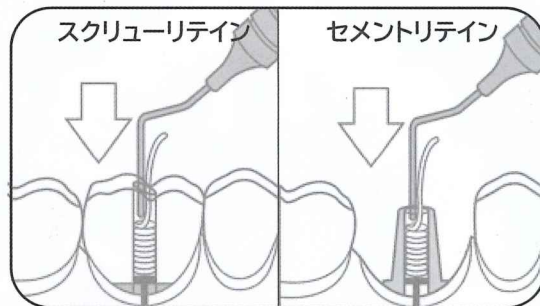

③ はさみで余剰部分を除去し、エアーでアクセス
ホールを乾燥させます。

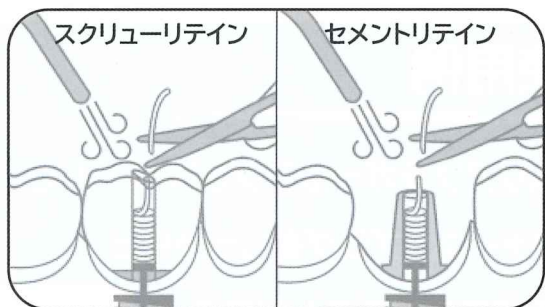

④ 通法に従って、修復充填を完成させます。

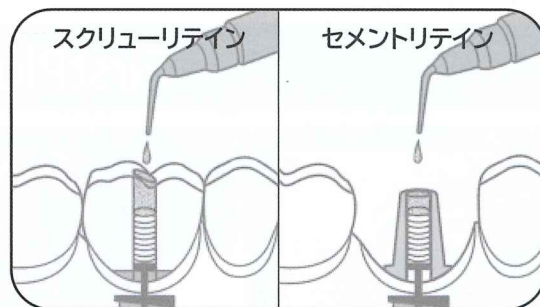

本紙に掲載されている価格は2025年4月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

MORIMURA

株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は