



リン酸エッチング材
松風エッチャント

セレクトティブエッチングに適した
ペースト性状で
すぐれた操作性を実現



垂れにくい
ペースト性状で
**ピンポイントに
エッチングが可能**

エナメル質の
粗造化により
**接着力の向上
に寄与**

大容量の
**5.0mL
(6.4g)**




SHOFU INC.

垂れにくいペースト性状



イメージ通りの塗布が可能
塗布後、垂れにくい性状のため、
必要な箇所へピンポイントに
塗布することができます。
セレクトイブエッチング
(エナメル質への塗布)に
適しています。

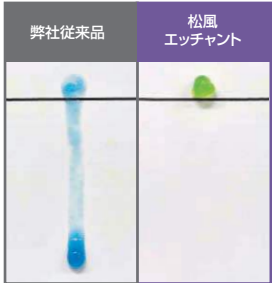

※垂直面60秒間静置後




※水平面60秒間
静置後


接着強度の向上

エナメル質に対する
初期せん断接着強さ

- 【使用材料】
●ビューティボンド Xtreme/
ビューティフィイルII使用
【条件】
●松風エッチャント塗布後、15秒処理

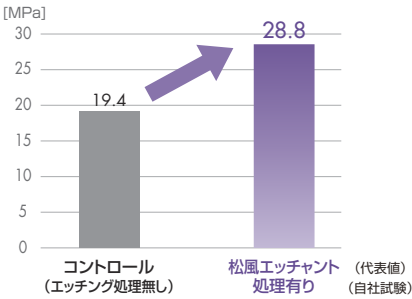

松風エッチャント使用前後のSEM画像

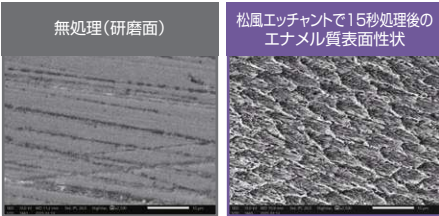

歯面の粗造化により、
ボンディング材の
エナメル質に対する
接着強度が向上します。

使用方法



製 品	酸 性 成 分	用途と対象			
		エッチング			セルフエッチング処理前の 歯面コンディショニング
		歯質(エナメル質)	歯科修復物の清掃		歯質(エナメル質)
			硬質レジン コンポジットレジン	セラミックス (シリケートガラス、リチウムシリケートガラス)	
松風エッチャント	濃リン酸 約40%	●	●	●	—
松風エナメルコンディショナー	有機酸 約40%	—	—	—	●

包装



松風エッチャント

内 容 : 5.0mL(6.4g)
付属品 : 松風エッチャント ニードルチップ 10個
松風エッチャント ニードルチップ
20個

関連製品

管理医療機器 認証番号
226AFBZX00053000



歯科用エッチング材
松風エナメルコンディショナー
3g

管理医療機器 認証番号
302AKBZX00026000



歯科用象牙質接着材
ビューティボンド Xtreme
1セット
トリプルパック

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
松風エッチャント	歯科用エッチング材	管理医療機器 医療機器認証番号 306AKBZX00039000

取扱い店

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
● 支社:東京(03)3832-4366 ● 営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595
2505CDSi-01