

エステコア ハンドタイプ



識別性が違う、施術が変わる

ブルー色のペーストで歯質との識別が容易に

+ キャンペーン +

キャンペーン期間

2025年 6月23日(月) ▶ 8月20日(水)

ブルー色のペーストをこの機会にご体験ください

※臨床での使用には「ボンドマー ライトレスII」が必要です。

A エステコア ハンドタイプ ペースト ブルー チップ&ノズル付キャンペーン



ブルー



ペーストA/B(ブルー)各2.3mL
標準医院価格

¥4,500



ミニミキシングチップ S × 5個
ミニミキシングチップ用ノズル × 5個
金属ノズル付ミニミキシングチップS × 5個

合計 ¥900 相当

B エステコア ハンドタイプ ペースト3本パック + エステコアハンドタイプ ペースト ブルー



ユニバーサル



ペーストA/B(ユニバーサル)各2.3mL×3
標準医院価格

¥12,000 (1セット)



ペーストA/B(ブルー)各2.3mL
標準医院価格

¥4,500

それぞれをセットにして特別価格にてご提供

※キャンペーン特別価格はお届け歯科商店様にお問い合わせください。

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL ()

A

[34585]

セット

B

[34576]

セット

お届け歯科商店名

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社トクヤマデンタル

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス

本 社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

☎0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日は除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

検 索

Clinical Case

医療法人一祥会
Nao歯科・矯正歯科
南野 卓也 先生



CASE 1 エステコア ペーストブルー色の臨床応用

エステコアは、高い機械的強度と操作性を備えたデュアルキュア型の支台築造用コンポジットレジンである。特に臨床で有用なのが、根管部にペースト(ブルー)、歯冠部にペースト(ユニバーサル)を使い分けるテクニックである。根管部にブルー色を使用することで、将来的な再治療時に築造材と歯質の境界が明瞭に視認でき、コアの除去が安全かつ効率的に行える。

一方、歯冠部にはユニバーサル色を使用することで、審美的要求やレジンセメントとの色調調和も確保できる。さらに、アドヒーズブとしてボンドマー ライトレスIIを併用することで、築造全体の接着信頼性が一層高まる。ボンドマー ライトレスIIは完全化学重合型のワンステップボンディング材であり、光照射の届きにくい根管深部やマージン部でも確実に重合が進行する。これにより、深部での未重合リスクを排除し、支台築造の成功率を大きく向上させる。特に根管内の支台築造では、化学重合型ボンディングの選択が臨床的に非常に理にかなっており、ボンドマー ライトレスIIの適用は極めて有効であると考えられる。エステコアとボンドマー ライトレスIIの組み合わせは、機械的強度、操作性、長期的な安定性、再治療時の視認性という4つの側面から、支台築造の質を高める戦略的な選択肢と言える。

今回はエステコア ハンドタイプを用いて支台築造を行い、エステセムIIにより補綴装置を装着した1症例を紹介する。



図1 根管治療後



図2 トクヤマFRポストに
ボンドマー ライトレスIIを塗布



図3 根管内にボンドマー ライトレスIIを塗布・エアブローを行った後、根管部に
エステコアペースト(ブルー)を使用



図4 トクヤマFRポストを挿入



図5 歯冠部にエステコアペースト(ユニバーサル)を使用、賦形性が良く垂れにくい
ため充填が容易である



図6 光照射



図7 支台築造終了



図8 口腔内被着面にボンドマー
ライトレスIIを塗布・エアブローを行う



図9 フルジルコニアクラウンの接着プロトコルに従い、
サンドブラスト、ボンドマー ライトレスII塗布・エアブローを行った後、
エステセムIIを補綴装置内面に填入した



図10 余剰セメント除去。
装着後の口腔内写真