

Multiple Great Tapered 3rd Generation

perfect

MG3^{エムジースリー ブルー}BLUE

NiTi ロータリーファイル

シンプルな操作性・高い切削力・優れた柔軟性を備えた
コストパフォーマンスに優れたマルテンサイト相 NiTi ロータリーファイル


テーパーマーキング

マーキング数によってテーパーを表示

マーキング数 1 本：3%


マーキング数 2 本：4%

マーキング数 3 本：6%

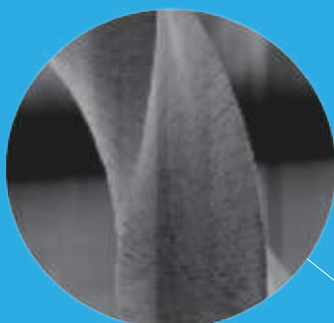

ブレード

根尖方向に押し出さない独自のピッチ構造

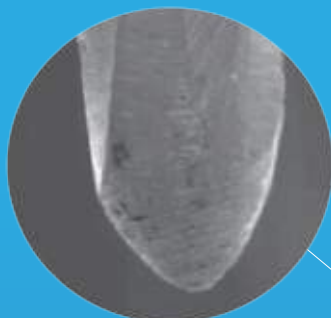

先端部

先端部は刃を持たない安全形状

ISO カラーコード

先端サイズを ISO カラー表示

レングスマーキング

先端からの長さを表示

22mm

20mm

19mm

18mm

高い柔軟性

優れた追従性と耐久性



柔軟性動画

1 本 (税別)
あたり ¥ **533** ~
(標準価格)




PENTRON JAPAN INC.

ファイル種類	断面形状	特徴
SV オープナー (オリフィスオープナー) ● #20/.10 正回転 回転数: 300 - 350rpm トルク: 3.0Ncm		根管上部 (1/3 ~ 1/2) や根管口部のストレート化 (ロート状拡大) を行うためのオリフィスオープナーです。プレカーブの付与が可能で、作業部は根管長3分の1を超えない19mmに設定され、機械的プレフレアリングを可能にします。断面形状は「凸型三角形」で、切断効率と強度に優れています。
PX ナビゲーター (グライドパス) ○ #15/.03 正回転 回転数: 300 - 350rpm トルク: 2.0Ncm		疲労耐性と TTF (破壊までの時間) を備えたグライドパス形成用ファイルです。プレカーブ付後はステップバックしないため、根管の湾曲に追従し、トランスポートを回避します。断面形状は「平行四辺形」で、根管壁との接触量が50%減少し、ファイルにかかるねじり負荷が軽減されます。
G1 シェーピング (根管拡大形成) ● #20/.04 正回転 回転数: 300 - 350rpm トルク: 2.0Ncm		柔軟性と切削力を持った根管拡大形成用ファイルです。プレカーブの付与により解剖学的形成をおこなうことが可能です。根管内挿入後はステップバックしないため、象牙質の切削量を最小限量におさえた低侵襲な根管形成が可能です。
G2X フィニッシング 4% (根管拡大形成) ● #25/.04 正回転 回転数: 300 - 350rpm トルク: 2.0Ncm		柔軟性と疲労耐性を持った根管拡大形成用ファイルです。根管のサイズによって選択できる2種類のテーパー (G2X: 4%、G2: 6%) があり、必要に応じて根管を段階的に拡大形成することが可能です。大きく湾曲した根管などの解剖学的制限がある場合の仕上げファイルとして使用可能です。
G2 フィニッシング 6% (根管拡大形成) ● #25/.06 正回転 回転数: 300 - 350rpm トルク: 2.0Ncm		



MG3 Blue
SEQUENCE 動画

SEQUENCE

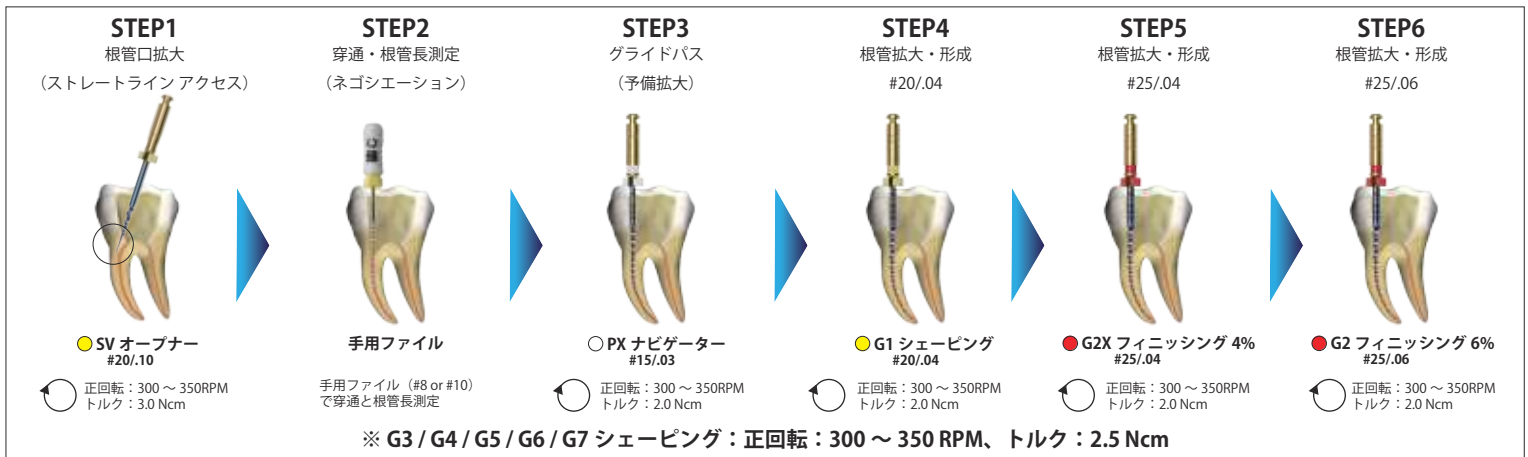

● アソートセット

製品番号	製品名	Order	内容	標準価格
DP-MG3-AS-21	MG3 BLUE アソートセット 21mm		SV ● #20/.10 PX ○ #15/.03 G1 ● #20/.04 G2X ● #25/.04 G2 ● #25/.06 各1本入	¥3,200 (税抜)
DP-MG3-AS-25	MG3 BLUE アソートセット 25mm			
DP-MG3-AS-31	MG3 BLUE アソートセット 31mm			

● SV オープナー 単品

製品番号	製品名	Order
DP-MG3-SV-19	SV オープナー 19mm ● #20/.10 (6本入)	
		¥3,200 (税抜)

● 21mm 単品

21mm (6本入)		
製品番号	製品名	Order
DP-MG3-PX-21	PX ナビゲーター 21mm ○ #15/.03	
DP-MG3-G1-21	G1 シェーピング 21mm ● #20/.04	
DP-MG3-G2X-21	G2X フィニッシング 21mm ● #25/.04	
DP-MG3-G2-21	G2 フィニッシング 21mm ● #25/.06	
DP-MG3-G3-21	G3 シェーピング 21mm ● #30/.04	
DP-MG3-G4-21	G4 シェーピング 21mm ● #35/.04	
DP-MG3-G5-21	G5 シェーピング 21mm ● #40/.04	
DP-MG3-G6-21	G6 シェーピング 21mm ● #45/.04	
DP-MG3-G7-21	G7 シェーピング 21mm ● #50/.04	
		¥3,200 (税抜)

● 25mm 単品

25mm (6本入)		
製品番号	製品名	Order
DP-MG3-PX-25	PX ナビゲーター 25mm ○ #15/.03	
DP-MG3-G1-25	G1 シェーピング 25mm ● #20/.04	
DP-MG3-G2X-25	G2X フィニッシング 25mm ● #25/.04	
DP-MG3-G2-25	G2 フィニッシング 25mm ● #25/.06	
DP-MG3-G3-25	G3 シェーピング 25mm ● #30/.04	
DP-MG3-G4-25	G4 シェーピング 25mm ● #35/.04	
DP-MG3-G5-25	G5 シェーピング 25mm ● #40/.04	
DP-MG3-G6-25	G6 シェーピング 25mm ● #45/.04	
DP-MG3-G7-25	G7 シェーピング 25mm ● #50/.04	
		¥3,200 (税抜)

● 31mm 単品

31mm (6本入)		
製品番号	製品名	Order
DP-MG3-PX-31	PX ナビゲーター 31mm ○ #15/.03	
DP-MG3-G1-31	G1 シェーピング 31mm ● #20/.04	
DP-MG3-G2X-31	G2X フィニッシング 31mm ● #25/.04	
DP-MG3-G2-31	G2 フィニッシング 31mm ● #25/.06	
DP-MG3-G3-31	G3 シェーピング 31mm ● #30/.04	
DP-MG3-G4-31	G4 シェーピング 31mm ● #35/.04	
DP-MG3-G5-31	G5 シェーピング 31mm ● #40/.04	
DP-MG3-G6-31	G6 シェーピング 31mm ● #45/.04	
DP-MG3-G7-31	G7 シェーピング 31mm ● #50/.04	
		¥3,200 (税抜)

D パーフェクト NT

管理医療機器

機械器具 (49) 医療用穿刺器、穿刺器及び穿孔器 電動式歯科用ファイル (31878022) 認証番号: 307AGBZX00018000 号