

プライムフィル

コンポの充填、20秒

唾液、滲出液、
呼気の影響 …
CR充填を早く …

不安、緊張、ストレス …
早く解放してあげるために、
ワンステップでも少なく …



操作ステップ、
充填時間短縮

ボンドは使わず、
歯面処理は、
専用のプライマー

プライマーは
1液ワンステップ。
水洗不要、光照射不要。

プライマーで接着するコンポジットレジン

プライムフィル

歯科充填用コンポジットレジン

ボンディングを使わないコンポの誕生。

PrimeFil


プライムフィルは、1液プライマーで接着するコンポジットレジンです。

CRの光硬化まで当社従来品より20秒以上短縮しました。

光照射を必要としないプライマーが、CR充填前の歯面処理を簡単にしました。

プライムフィルは、チェアタイムの短縮に貢献します。


プライムフィルは、光照射の要らないプライマーと、
光硬化型のフロアブルレジンを合わせたシステムです。

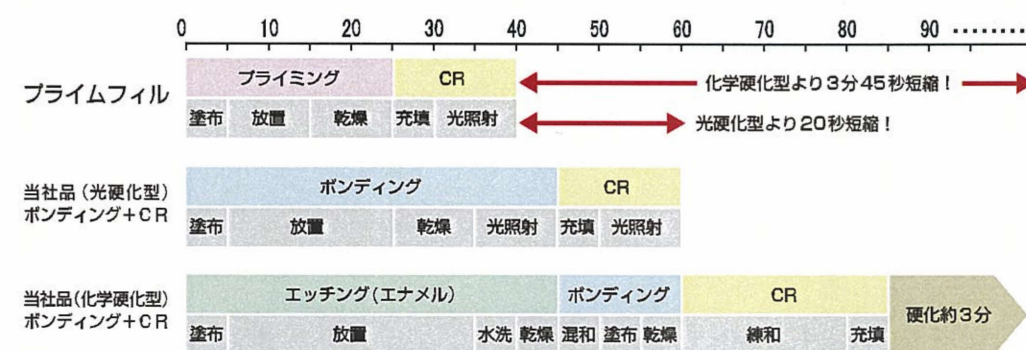

※光量1000mW/cm²以上の歯科用LED光照射器の場合。 ※ハロゲン光照射器の場合はCRの光照射20秒。



エナメル質、象牙質とも高い接着力があります。

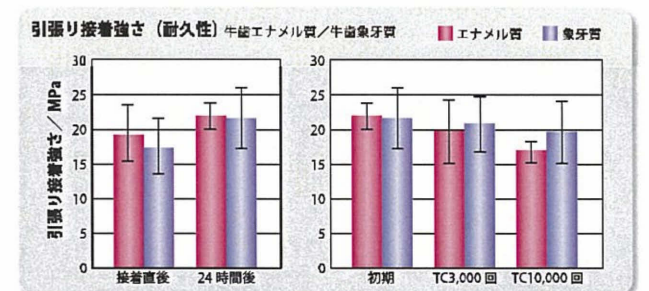


接着直後でも高い接着力があり、接着耐久性にも優れています。

短時間らくらく研磨が可能です。



球状フィラーの効果で研磨も簡単に行えます。

シェード選びも時間短縮

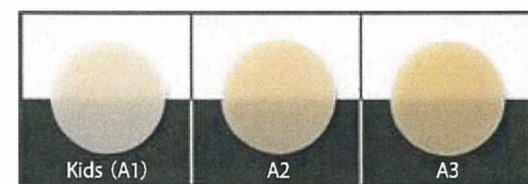

カメレオン効果により幅広いシェードにマッチします。



カメレオン効果により幅広いシェードにマッチします。

他CRの積層も可能です。



プライマーは光照射不要。

プライムフィルのプライマーとペーストは、専用で使用しなくてはなりません。しかし、硬化させたペーストの上には、他の光硬化型コンポジットレジンも積層することが可能です。


※積層する場合の注意点は裏面に記載しておりますので、製品付属の添付文書類と併せて、よくお読み下さい。

X線造影性があります。





アルミニウムと同等以上。

フッ素徐放性があります。

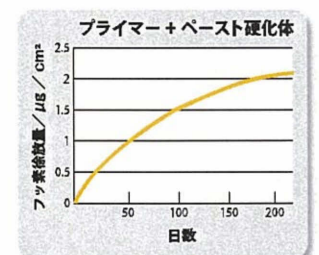

プライマー、ペーストともフッ素を徐放します。

ミディアムタイプのフロー性です。

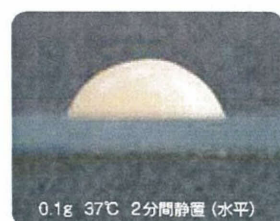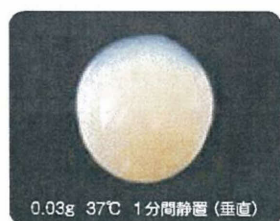

プライマーの残量が確認できます。



光硬化しないプライマーのため、薄色ボトルを採用し、液残量が確認できるようになりました。

操作手順




が助けます。

豆縮。 ※当社品比較

汚染リスク低減

プライムフィル 新しい接着のカタチ

プライムフィルのプライマーを歯質に塗布すると、歯質表面が脱灰され、脱灰した歯質の隅々まで接着材成分が浸透します。溶媒を揮発（エアブロー）させた後に、プライムフィルのペーストを塗布・充填することで、プライマー層が重合・硬化し、その後ペーストへの光照射とともに歯質とペーストを強固に接着し、一体化させます。

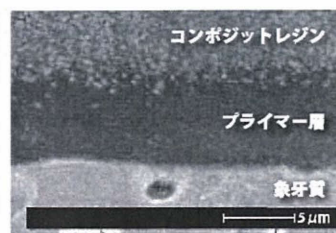

歯科充填用コンボジットレジン

プライムフィル



標準医院価格 ¥8,800 / セット 単品価格

ペースト	1本2mL (3.6g)	¥4,500
プライマー	1本2mL	¥4,500
シリンジチップ	2個	下の関連製品を ご参照下さい。
シリコンキャップ	2個	—
クリップ	1個	—

[Kids (A1), A2, A3]

（管理医療機器）認証番号 223AFBZX00145000

ご使用の際は必ず製品添付の添付書類をよくお読み下さい。

関連製品

- ・パルフィークエステライト LV シリンジチップ (50個) ¥2,000
- ・パルフィーク スポンジ片 (1箱) ¥600
- ・ミニブラシ (スーパーファイン) (100本) ¥1,300
- ・ディスペンサー + ミニブラシ (スーパーファイン) (100本) ¥2,400
- ・エステライトコア クイック ディスポ混和皿 (50個) ¥1,000
- ・採取皿 (1穴) (1個) ¥400

- ・本品のペースト及びプライマーは専用でご使用下さい。（本品プライマーと他CR。他ボンディング材と本品ペーストは使用不可。）
- ・本品のプライマーを塗布した歯面には、本品以外の CR ペースト又はボンディング材を適用しないで下さい。（プライマーが硬化しません）
- ・本品以外の光硬化型CRの積層は可能ですが、積層する場合、プライマー塗布面は必ず本品のペーストで覆い、硬化後積層して下さい。



本品で充填した窩洞に本品以外のCRを積層充填する場合は、予め本品のペーストでプライマー塗布面の全面を一層覆って硬化させた後に、CRを適用して下さい。

※印刷の都合上、シェード等、実物と異なって見える場合があります。ご了承下さい。
※パンフレットに記載のデータは、弊社つくば研究所測定によるものです。
※このパンフレットの内容は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
価格表は2012年2月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。

■ご用命は

プライミングから、
充填・硬化まで、わずか40秒

※1000mW/cm² 以上の歯科用LED光照射器の場合

プライマーと
フロアブルCR
セットで8,800円

発売元 株式会社 **トクヤマデンタル**
インフォメーションサービス

☎ **0120-54-1182** 受付時間 9:00~12:00, 13:00~17:30 (土・日祭日は除く)

札幌 TEL 011-812-5690 仙台 TEL 022-717-6444 東京 TEL 03-3835-7201
名古屋 TEL 052-932-6851 大阪 TEL 06-6386-0700 福岡 TEL 092-412-3240

ホームページ <http://www.tokuyama-dental.co.jp>