

MerSSage



メルサーージュ プロフェッショナルケア PMTCペースト

歯科医院用

プロの技術に応える
4種のPMTCペースト



SHOFU INC.

メルサーージュシシステムが 装いも新たにリニューアル



4種のPMTCPペーストはメルサージュ プロ ワンペーストを中心に
患者さまの口腔内の状態に合わせてペーストを選択いただけます。

メルサージュシステム
症例動画はコチラ▶



強固な着色除去・ヤニ取り	中・軽度の着色除去	仕上げ	トリートメント
<p>医療機器</p> <p>ポリッシングペースト</p> <p>メルサージュ プロ ステインオフ</p> 	<p>医薬部外品</p> <p>クリーニングペースト</p> <p>メルサージュ プロ ワンペースト</p> 		<p>医薬部外品</p> <p>トリートメントペースト</p> <p>メルサージュ プロ TTプラス</p>  <p>口腔化粧品</p> <p>トリートメントペースト</p> <p>メルサージュ プロ APプラス</p> 

〈イメージ図〉

クリーニングペースト

メルサーージュ プロワンペースト

医薬部外品


「ステイン除去」から「仕上げ」まで ワンステップ

メルサーージュ プロワンペーストは幅広い症例にワンステップで対応可能なため、ケアタイムの短縮に貢献します。

歯面を傷つけず、やさしくクリーニング

ケイソウ土が歯面を傷つけずにステインをからめとります。
クリーニング中に砕けるケイソウ土と小さな清掃性シリカが、ツヤのある滑らかな歯面に仕上げます。

● ステイン ● ケイソウ土(清掃剤) ● 清掃性シリカ
● ポリエチレングリコール400 ● ポリビニルピロリドン

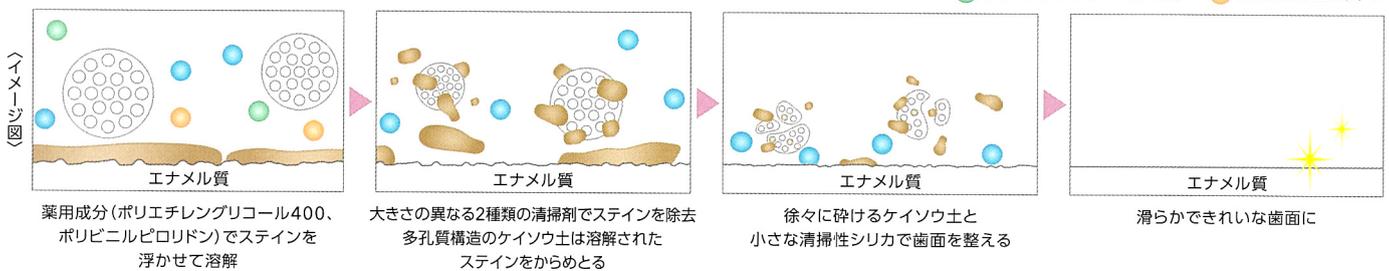

知覚過敏症状を
予防する
硝酸カリウム

フッ素1450ppm
配合



フレッシュシトラス




「ケイソウ土」とは

「ケイソウ土」は植物プランクトンの1つである珪藻が化石となった天然素材です。全体に細孔を持った多孔質構造のため、吸着性にすぐれています。

ペースト塗布後すぐに すぐれたステイン除去性能を発揮

汚れが著しい歯面にもペーストを放置・滞留させず、塗布した直後からすぐれたステインの除去性能を発揮します。

試験方法:
疑似ステインに対し、メルサーージュ
プロワンペーストを塗布後、一定
時間放置して30秒間処理(回転数:
500min⁻¹、荷重100g、メルサーージュ
ブラシソフト)した。処理後の
研磨面積を測定。

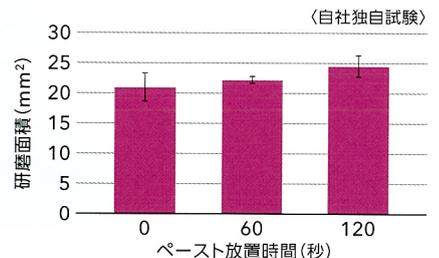

飛び散りにくい ペースト性状

施術中も適度な粘性を保ち、仕上げまで効率的なクリーニングが可能です。

その他の薬用成分

薬用成分	効能・効果
ポリエチレングリコール400	タバコのやに除去
ポリビニルピロリドン	
トコフェロール酢酸エステル	歯肉炎・歯周炎の予防
塩化セチルピリジニウム(CPC)	むし歯の発生及び進行の予防
	歯肉炎の予防
	口臭の防止

メルサージュ プロ ワンペーストは、以下のケースにもお試しください。

- チェアタイムを短縮したい方に
- ステイン除去から仕上げに
- 知覚過敏症状がある方に
- バイオフィルムの除去に
- 歯周病リスクがある方に

メルサージュ プロ ワンペーストの症例紹介はコチラ ▶



ステイン除去から仕上げに

使用するブラシやカップなどのツールの使い分けで、より幅広い症例に対応できます。

case1

ワンペースト1本でステイン除去から仕上げまで完結。



施術前



メルサージュ ブラシソフト
No.S11を使用



ワンペースト使用后

case2

2種類の清掃剤のはたらきにより表面が滑らかに仕上がるため、ワンペーストだけで処置を終えることが可能です。



施術前



メルサージュ カップ
No.12を使用



ワンペースト使用后

知覚過敏症状がある方に

硝酸カリウム配合のため、知覚過敏症状のある歯頸部にもお使いいただけます。



施術前



メルサージュ ブラシソフト
No.S11を使用



ワンペースト使用后

小児患者の方のバイオフィルム除去に

唾液量が多い小児患者の方でも適度な粘性を保ち効率的なクリーニングが可能です。



施術前 (染色後)



メルサージュ ブラシソフト
No.S11を使用



ワンペースト使用后

※フッ素1450ppm配合のため6歳未満へは使用しないでください。

トリートメントペースト

メルサーージュ プロ TTプラス

医薬部外品

天然歯・修復物・補綴装置に使用できる トリートメントペースト


微細なシリカが歯面の細かな凹凸を滑沢に仕上げることでプラークやステインの再付着を予防します。

天然歯・修復物・補綴装置にやさしくアプローチ

こんなことはありませんか？


ペーストの黒ずみは、補綴装置が削れているサインです。

※弊社従来品使用

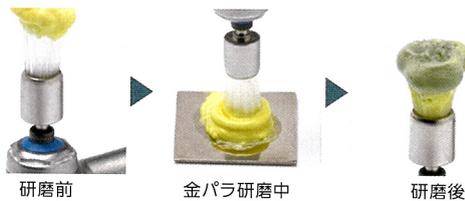

メルサーージュ プロ TTプラスは天然歯や修復物・補綴装置を傷つけずやさしく処置することができるため、さまざまな口腔状態の患者さまにお使いいただけます。

試験方法: 鏡面研磨仕上げを行なった各種対象物に対し、メルサーージュ プロ TTプラスを用いて30秒間処理した。処理前後での表面粗さを測定。

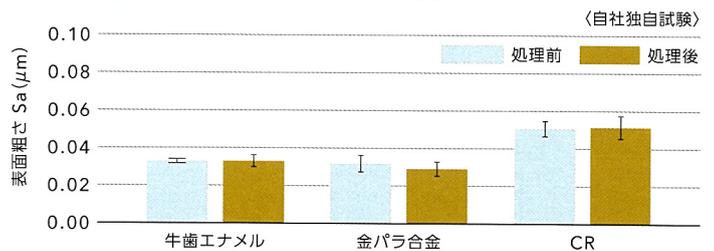

W配合で
歯周病を予防
トコフェロール酢酸エステル
β-グリチルレチン酸


フッ素1450ppm
配合



天然歯のプラーク・ステインの再付着予防

ブラッシングなどでできた歯面の細かな凹凸を整え、プラークやステインの再付着を予防します。

試験方法: 鏡面研磨仕上げを行った牛歯エナメル質に対し、メルサーージュ プロ TTプラスを用いて30秒間処理した。処理前後でのエナメル質表面の状態を観察。

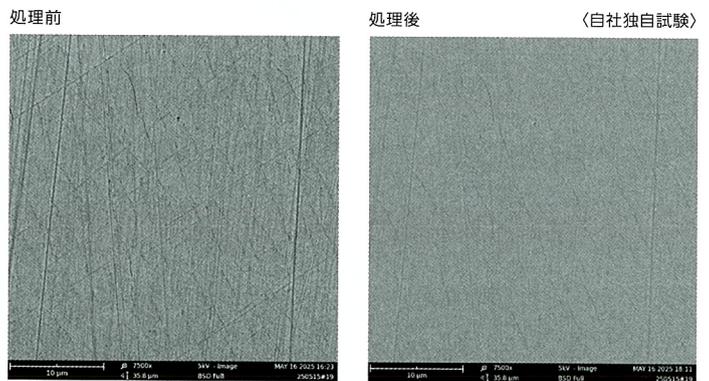

歯面が見やすいペースト

適度な粘性と良好な操作性を有します。施術中の歯面や補綴装置の状態が見やすい透明性のあるペーストです。

その他の薬用成分

薬用成分	効能・効果
ゼオライト	口臭の防止 歯石の形成及び沈着を防ぐ
塩化セチルピリジニウム (CPC)	むし歯の発生及び進行の予防 歯肉炎の予防 口臭の防止



メルサージュ プロ TTプラスは、以下のケースにもお試しください。

- クリーニング後のトリートメントに
- 天然歯・補綴装置が混在している口腔内に
- 補綴装置のプラーク除去に
- 矯正治療中の方のプラーク除去に
- 根面が露出している方に
- パウダーメンテナンス後に
- よりプラーク・ステインの再付着を予防したい方に
- 歯周病リスクが高い方に



メルサージュ プロ TTプラスの症例紹介はコチラ▲

天然歯・補綴装置が混在する口腔内に

天然歯や補綴装置が混在する口腔内でもTTプラス1本でお使いいただけます。
また、フッ素1450ppm配合でう蝕の発生と進行を予防します。



補綴装置のプラーク除去に

メタルやジルコニアなど各種補綴装置を傷つけず表面の汚れをやさしく取り除きます。

case1



case2



矯正治療中の方のプラーク除去に

歯面だけでなくブラケットやワイヤーなど矯正装置にも傷つけず処置することが可能です。



根面が露出している方に

根面露出に対しても歯面の凹凸を整えプラークの再付着を予防します。
また、フッ素1450ppmのTTプラスをすり込むことでう蝕の発生と進行を予防します。



症例写真提供: 埼玉県川口市 デンタルクリニックK
本症例はマイクロスコープで撮影しております。


トリートメントペースト

メルサーージュ プロ APプラス □ 口腔化粧品


卵殻由来

「ヒドロキシアパタイト※」配合

※清掃剤

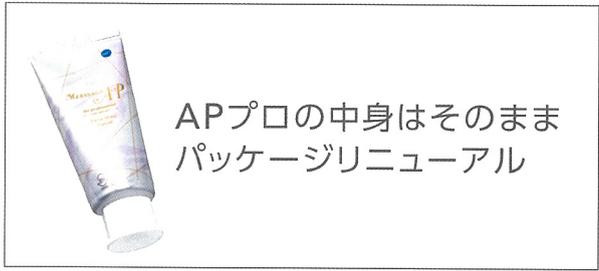

ヒドロキシアパタイトとは

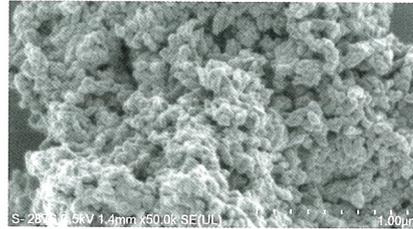

ヒドロキシアパタイト※は20～50nmの粒子が凝集し、約5μmの2次粒子を形成しています。チョコやベビーパウダーの原料に使われてきた粉体本剤より粒子は細かく滑らかです。


アレルギーを含まないヒドロキシアパタイト※

APプラスに含有されているヒドロキシアパタイトは国内の衛生管理された卵殻を原料として使用しています。約1000℃の高温で焼成・精製しているためアレルギーは含まれておりません。

■ 製造工程



↓ 電気炉焼成

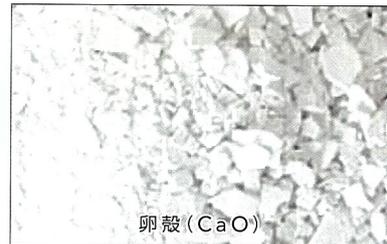

↓ 独自の湿式製法



ユズミント

メルサージュ プロ APプラスは、以下のケースにもお試しください。


- クリーニング後のトリートメントに
- ステインが付着しやすい方に
- エナメル質にクラックや白濁がみられる歯に
- 萌出中、萌出直後の脆弱な永久歯に
- ディボンディング後のエナメル質のトリートメントに
- パウダーメンテナンス後に
- ホワイトニング後のトリートメントに

メルサージュ プロ APプラスの症例紹介はコチラ▶



ステインが付着しやすい方に

クリーニング後、メルサージュ カップにAPプラスをたっぷり採取し、歯面全体にすり込むように塗布する。

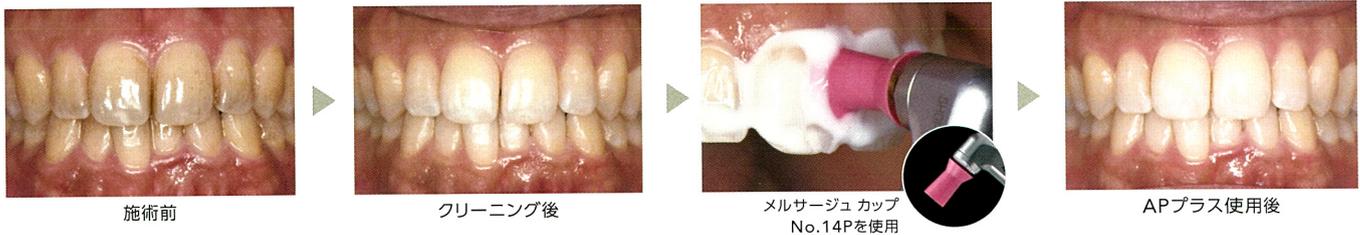

隣接面にクラックや白濁がみられる歯に

クリーニング後、APプラスをメルサージュカップと併せてデンタルフロスを使用して隣接面に塗布する。



萌出中、萌出直後の脆弱な永久歯に

萌出中や萌出直後の永久歯は石灰化が不十分で、表面には凹凸が多く着色やプラークが停滞しやすく酸に侵されやすいため、幼若な永久歯にAPプラスを使用。



アライナーのアタッチメント除去後のトリートメントに



ポリッシングペースト

メルサーージュ プロ ステインオフ

医療機器

メルサーージュ レギュラーが 生まれ変わります


メルサーージュ レギュラーの操作性と高いステイン除去力を継承。

メルサーージュ レギュラーから
操作性がアップ



独自設計のワンタッチキャップを採用

- 排出ノズルを長く設計し、ペースト排出時の視認性にすぐれます。
- キャップがしっかりと開くため、ペースト排出時にすり切りやすいです。

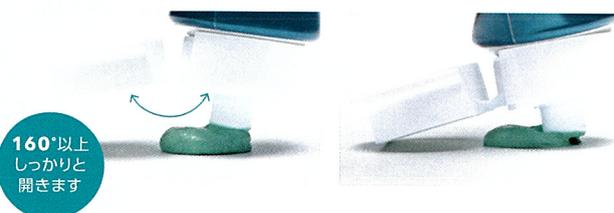

160°以上
しっかりと
開きます

メルサーージュ レギュラー

メルサーージュ プロ ステインオフ



- ノズル径が小さく、必要量のペーストをムダなく排出することができます。



歯面の強い汚れやステイン除去に

メルサーージュ レギュラーと同等の高いステイン除去力を有します。



※ステインオフ使用後はワンペーストで仕上げることを推奨します。

症例写真提供: 埼玉県川口市 デンタルクリニックK
本症例はマイクロスコープで撮影しております。

■ 関連製品



バイオフィームや歯石の染色に

メルサーージュ PCペレット

歯垢・歯石染色材

各1瓶100個入 ¥2,420

【種類・用途】

レッド(歯垢染色用)

ブルー(歯垢・歯石染色用)



やさしく効果的なケアを行えるソフトタイプ

歯科用口腔内清掃キット 一般医療機器

医療機器届出番号 26B1X00004000147

メルサーージュ (ブラシ ソフト) 歯面研磨清掃用 各1箱36本入

スクリュータイプ

CAタイプ

No.S11 ¥3,080

No.S1 ¥3,300

No.S2 ¥4,950

最高許容回転速度:2,000min⁻¹

No.S13 ¥3,080

No.S3 ¥3,300

再使用禁止



広がりにくく効率にすぐれたケアを行えるハードタイプ

歯科用口腔内清掃キット 一般医療機器

医療機器届出番号 26B1X00004000147

メルサーージュ (ブラシ) 歯面研磨清掃用 各1箱36本入

スクリュータイプ

CAタイプ

No.11 ¥3,080

No.1 ¥3,300

No.2 ¥4,950

最高許容回転速度:2,000min⁻¹

No.13 ¥3,080

No.3 ¥3,300

再使用禁止



過剰な力をかけず、隅角も包み込めるラバーカップ

歯科用口腔内清掃キット 一般医療機器

医療機器届出番号 26B1X00004000147

メルサーージュ (カップ) 歯面研磨清掃仕上げ用 各1箱36本入

スクリュータイプ

CAタイプ

No.12 ¥1,980

No.13 ¥1,980

No.1P ¥4,950

No.2 ¥3,300

最高許容回転速度:2,000min⁻¹

No.14P ¥2,090

No.15P ¥2,640

No.3 ¥3,300

No.4P ¥3,960

再使用禁止



スクリュー式ブラシ・カップ用アタッチメント

歯科用マンドレル 一般医療機器

医療機器届出番号 26B3X00014000015

PCPマンドレル

アタッチメント 1箱12本入 ¥1,920

最高許容回転速度:2,000min⁻¹



軽量で長時間でも疲れにくいコードレスハンドピース

歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器

医療機器認証番号 226ABBZX00034A01 特定保守管理医療機器

メルサーージュ プロ ソリッド

PMTTC用コードレスハンドピース

■セット内容: ¥100,500

ハンドピース(モーターキャップ付)、
スタンド、コントラングルヘッド(1/4ヘッド iFX57)、
ACアダプター、Fタイプスプレーノズル

■コントラングルヘッド:

許容入力回転速度10,000min⁻¹、
無負荷最高回転速度2,500min⁻¹、ギア比4:1減速、質量38g



各種補綴装置・修復物の着色除去やツヤ出しに

歯科用研磨器材 一般医療機器

医療機器届出番号 26B1X00004000199

ダイレクトダイヤペースト キット

■キット内容: ¥3,300

ダイレクトダイヤペースト 3g…1本
スーパースナップ バフディスク No.8…5個
松風マンドレル(ワングロス用CA)…1本
ノズル…2本

最高許容回転速度:5,000min⁻¹

■ 包装・価格



メルサーージュ プロ ワンペースト

薬用歯磨

医薬部外品

歯科医院用

販売名:メルサーージュ P ワンP
容量:65g
香味:フレッシュシトラス
標準医院価格:¥2,000
製造販売業者:日本ゼトック(株)



メルサーージュ プロ TTプラス

薬用歯磨

医薬部外品

歯科医院用

販売名:メルサーージュ P TT
容量:40g
香味:オレンジミント
標準医院価格:¥1,800
製造販売業者:日本ゼトック(株)



メルサーージュ プロ APプラス

歯みがき類

口腔化粧品

歯科医院用

販売名:メルサーージュ APプロ
容量:65g
香味:ユズミント
標準医院価格:¥2,900
製造販売業者:(株)オキナ



歯面研磨材 一般医療機器
医療機器届出番号 26B1X00004000295

メルサーージュ プロ ステインオフ

容量:40g
香味:ナチュラルミント
標準医院価格:¥1,800
製造販売業者:(株)松風

※ご使用のブラシ・カップの最高許容回転速度に従ってお使いください。

【製造販売業者】

日本ゼトック株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

【製造販売業者】

株式会社 **オキナ**

大阪府大阪市天王寺区大道5丁目7番20号

【販売元】

株式会社 **松風**

www.shofu.co.jp

- 本社:〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11
お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く)
- 支社:東京(03)3832-4366
- 営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688
京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

ご使用の際は製品に記載の注意事項および電子添文等をよく読んでお使いください。

価格は2025年7月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。
高濃度(1450ppm)フッ素配合製品は、6歳未満のお子様への使用は控え、手の届かない所に保管してください。
歯周病とは歯肉炎、歯周炎(歯槽膿漏)の総称です。

MerSage

メルサーージュは新しい口腔衛生文化の確立により、生活者の口腔を健やかにするとともに歯科医療のさらなる振興を実現します。

取扱い店