

W

リライエックス™ ユニバーサルレジンセメント スコッチボンド™ ユニバーサルプラスアドヒーシブ パックキャンペーン

期間: 2025年9月1日(月) ~ 9月30日(火)

年々増加しているCAD/CAMインレーに リライエックス™ ユニバーサルレジンセメントを 使用してみませんか?

社会医療診療行為別統計令和6年8月審査分

CAD/CAMインレー 249,873回 参考: CAD/CAM冠 415,445回

内面処理加算1 45点※

歯科用合着・接着材料I
レジン系 自動練和型 38点

CR充填用接着材としても使用できます


※ アルミナ・サンドブラスト処理及びプライマー処理を行うことが条件です

ガラスセラミックス・ジルコニア補綴物
にも使用できます



歯質(象牙質)への接着強度


24時間後

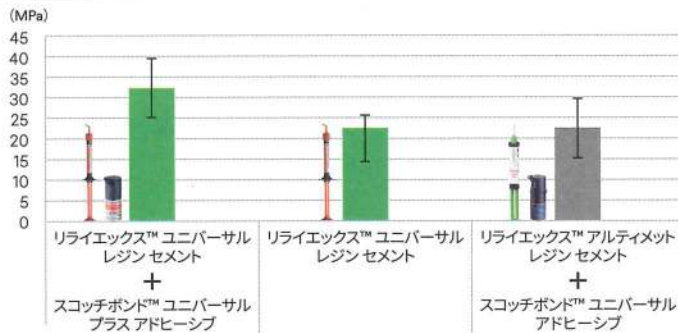

日本歯科保存学会 第153回学術大会 ソルベタム (旧スリーエムヘルスケア) 発表資料, 2020

各種材料への接着強度

24時間後

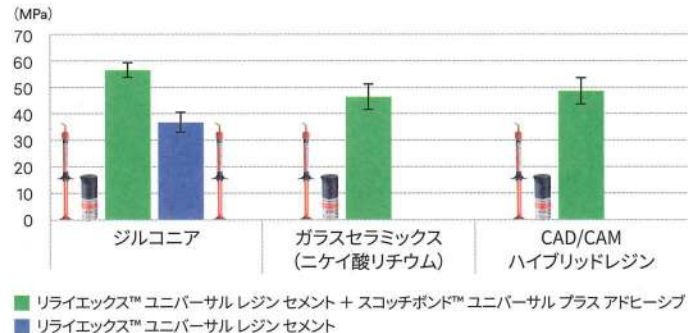

ソルベタム社内データ

キャンペーン概要

製品名	製品番号	内容	キャンペーン希望医院価格
リライエックス™ ユニバーサルレジンセメント ダブルパック	•56971W (トランスルーセント) •56972W (A1 ユニバーサル) •56973W (A3 オペーク)	・シリンジ (3.4 g) ×2本 ・マイクロミキシングチップ ×40本 ・エンド用延長チップ ×10本	各25,200円
スコッチボンド™ ユニバーサル プラスアドヒーシブ ダブルパック	41294W	ボトル (5 mL) ×2本	23,700円

期間中、対象製品ご購入の方限定

対象製品1セットご購入につき、
CAD/CAMインレー 患者様向け冊子
1束 (50部) をご提供いたします。




CAD/CAMインレーに適した3つの理由

1

マイクロミキシングチップ

窩洞にも直接注入可能

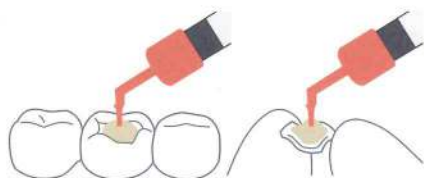

ミキシングチップに残る
ペースト量を80%削減




M. Cowen, J.M. Powers, The Dental Advisor, Number of Automix Applications and Mixing Efficiency, June 23, 2020

2


チキソトロピー性

垂れが少ない

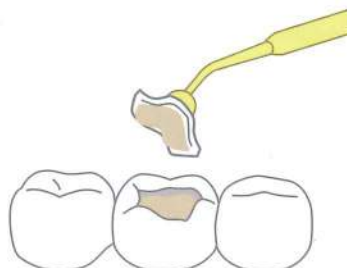

填入後は垂れずにとどまります。

圧接しやすい

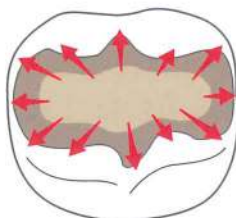


圧接時には流れが良く、セメント
スペースに回り込みます。

3

最適な硬化挙動

余剰セメント除去が容易

一塊でポロッ

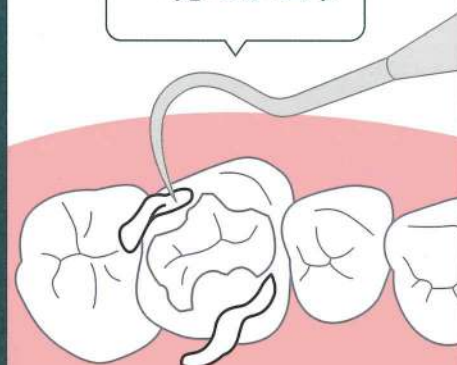

硬すぎず、
脆くない

2～3秒の光照射で除去しやすい
硬化性状になります。

※、リライエックス™ アルティメット レジン セメント

物性一覧

曲げ強度 (MPa)	100	溶解度 (μg/mm³)	-0.1
圧縮強度 (MPa)	312	被膜厚さ (μm)	21

ソルベンタム社内データ

光重合での硬化時間

余剰セメント除去	光照射2～3秒
最終硬化	光照射 各面10秒

化学重合での硬化時間

余剰セメント除去	注入3分後
最終硬化	注入6分後

※詳しくは電子添文およびテクニックガイドをご参照ください。

ご用命は

販売名:リライエックス ユニバーサル レジン セメント
販売名:スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーズ
販売名:リライエックス アルティメット レジン セメント
販売名:スコッチボンド ユニバーサル アドヒーズ

認証番号:302AKBZX00044000
認証番号:302AKBZX00043000
認証番号:225AKBZX00136000
認証番号:224AKBZX00054000

※掲載の内容およびキャンペーン希望医院価格は、2025年8月現在のものです。

キャンペーン希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。

Solventumおよびそのロゴ、その製品名等を使用される商標はSolventum及びその関連会社の商標です。
3Mおよびそのロゴは3Mおよびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。

solventum

ソルベンタム合同会社
デンタルソリューション事業部

<https://www.solventum.com/ja-jp/home/oral-care/>

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

Please Recycle. Printed in Japan.
© Solventum 2025. All Rights Reserved.
DEN-1896-AJ(0825)PN/e.

一般歯科コールセンター

0120-332-329

9:00～17:00 月～金 (土日祝年末年始を除く)