

歯科用ラバーダム 総合カタログ

HYSOLATE Dental Dam

ハイソレート デンタルダム

NEW Finish
Trusted Quality
ラバーダムの【こだわりの進化】

"We help you preserve and improve natural teeth – The Swiss Way"

ラテックスフリー
ラテックス パウダーフリー



感染防止対策



ミラー防湿・器具の誤飲防止



安全・明瞭な術野の確保

 COLTENE

症例別推奨例

デンタルダム

弊社のデンタルダムは様々な症例に対応できるよう多数の種類を取り揃えております。色・厚み・弾性の強さ・サイズ・アレルギー性の無いタイプ等、各症例・患者に合わせたデンタルダムをご選択いただけます。

推奨種類

压排

1a
ラテックス製のデンタルダムを
ご使用ください。厚めであればある
ほど歯肉圧排が容易です。

1b

薄めで柔らかいデンタルダムを
ご使用ください。圧排が少なく粘膜や
歯肉に対してもストレスが少ないです。

アレルギー患者


2a

パウダーフリータイプのデンタルダム
をご使用ください。ラテックスたんぱく
質によるアレルギー誘発を低減させる
ことができます。

アレルギー反応が既にみられる場合は、ラテックスフリータイプをご使用ください。

耐性

3 ラテックス製デンタルダムを使用してください。
一番耐性がある素材です。

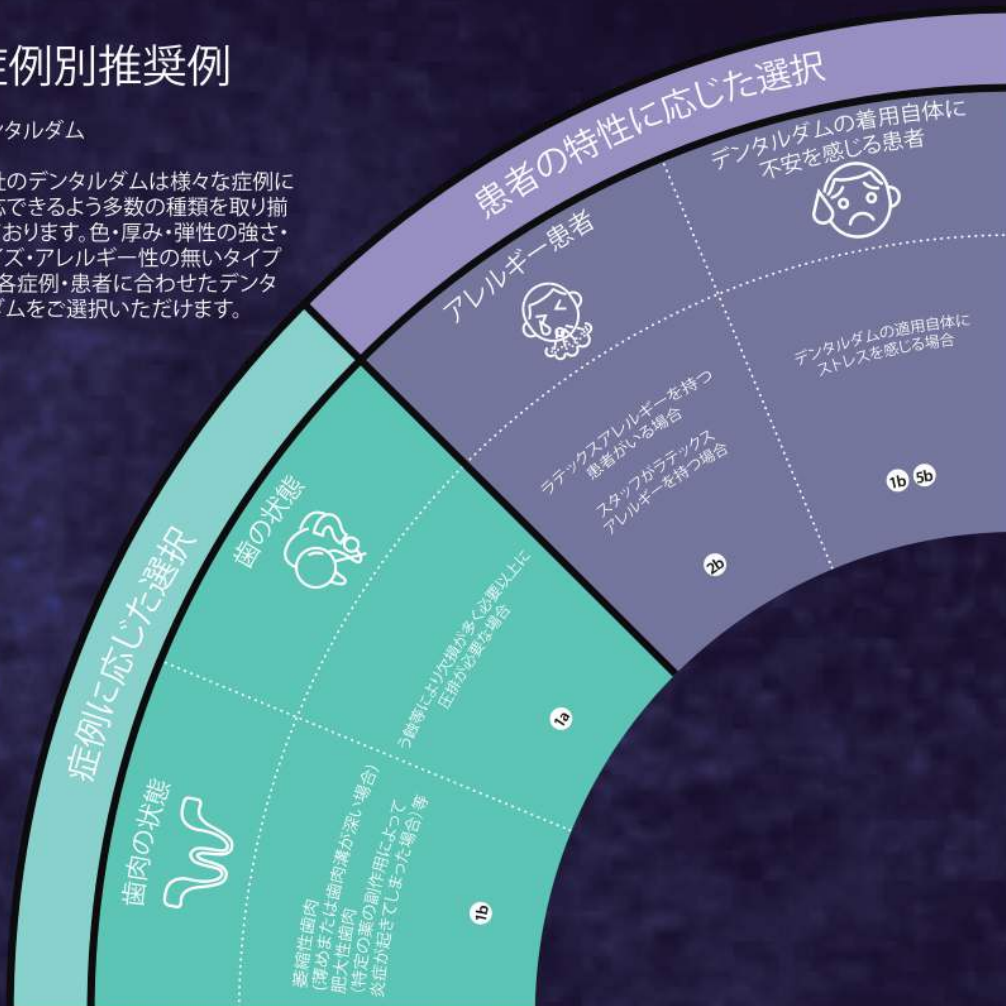

色調別選択

4a

心理学に基づき、落ち着いた効果を得るために明るく心地よい色を利用してください。

4b

黒のデンタルダムをご使用ください。
目にも優しくまた、術野の色調のコントラストがくっきりします。

サイズと適用

5a
127 × 127 mmの子供用サイズをご使用
ください。

5b

フレーム付きのフレキシダムをご使用
ください。患者様への負担軽減になります。

一般推獎

、デンタルダムを少しカットしてあげると鼻呼吸ができ患者様が楽になります。


Parotisroll(コットンロール)を上唇と
ダムにおいてあげる事でスペースを
作ってください。

・デンタルダムナプキンを敷いてあげることでダムと肌の直接の接触を防げます。



【こだわりの進化でリニューアル致しました！】

- ・引裂き強度(Tear Strength) **最大13%UP!**
- ・引張る強度(Tensile Strength)**最大36%UP!**
- ・更なるマット仕上げにより、顕微鏡下の視認性向上!
- ・色調改良でコントラストがより明確に!
- ・品質を図る下記3つのテストで品質実証済!
- Die C Test(パンチされた箇所周辺の素材強度を図るテスト)
- Tensile strength Test(引裂き強度を図るテスト)
- Elongation test(引張強度を図るテスト)

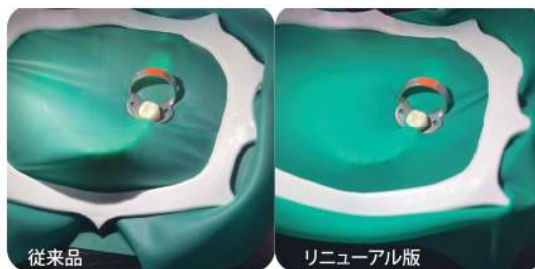

木目細かなパッケージング!! 間紙入り!!

リニューアル版よりラバーシート毎に
間紙が入っており、より衛生的・取りやすくなりました。



- ・テンプレート印字で、作業効率UP!
- ・テンプレート印字(片面)・無地(片面)と両方あるので、
症例に応じて使い分け可能!

HySolate Dental Dam Non-Latex (ラテックスフリー)

サイズ	色	厚み	枚数	価格
		ミディアム		
6 インチ 152 × 152	グリーン	H09105	15	4,500円
		☎	75	
5 インチ	グリーン	H09928	15	4,500円

加硫促進剤不使用

HySolate Latex Dental Dam (ラテックス・パウダーフリー*)

*パウダー量 <50µg/dm²
*プロテイン量 <2mg/シート

サイズ	色	厚み				枚数
		シン	ミディアム	ヘビー	エクストラヘビー	
6 インチ 152 × 152	グリーン	60034418	60034419	60034420	60034421	36
		-	☎	-	-	360
	ブラック	60031351	60031352	60031353	60031354	36
		-	☎	-	-	360
	ブルー	-	60034442	60034443	-	36
		60034427	60034428	60034429	60034430	36
5 インチ 127 × 127	グリーン	-	☎	-	-	360
		60034414	60034415	60034416	60034417	52
	ブルー	-	60034441	-	-	52
		60034424	60034425	60034426	-	52
	ライト	-	☎	-	-	364
		-	-	-	-	364

	厚み表	価格
シン	約 0.15mm	3,500円
ミディアム	約 0.20mm	3,750円
ヘビー	約 0.25mm	4,800円
エクストラヘビー	約 0.30mm	4,800円



HySolate Fiesta Latex Dental Dam (ラテックス・パウダーフリー*)

サイズ	色	厚み			枚数
		シン	ミディアム	ヘビー	
6 インチ 152 × 152	ピンク ラベンダー ライトブルー	60034433	60034436	60034438	36
		-	☎	-	360
5 インチ 127 × 127	ピンク ラベンダー ライトブルー	60034434	60034435	☎	52
		-	☎	-	364



- ・3色同梱のため診療ごとに色分けが可能
- ・Fragrance付き

Brinker Clamp Tissue Retractor Clamp

歯肉圧排用クランプ

歯肉縁下にカリエスがある場合、従来のクランプでは歯肉を傷つける可能性があります。Brinker Clamp は歯肉への圧排を容易にする事ができます。

製品番号
H01054 ブリンカークランプセット (6個入れ)
内容: #B1, #B2, #B3, #B4, #B5, #B6

セット価格 10,500円

単品
H01048
H01049
H01050
H01051
H01052
H01053

推奨
B-1 下顎 臼歯用
B-2 上顎 左側臼歯用
B-3 上顎 右側臼歯用
B-4 前歯・小白歯
B-5 歯頸部疾患の修復時におけるすべての歯に対応
B-6 歯頸部疾患の修復時におけるすべての歯に対応

単品価格 2,000円



EDUCATION
ONE STEP AHEAD
Upgrade Dentistry

圧排エフェクト



ブリンカークランプ



従来クランプ




Brinker Clamp の
症例使用動画
提供 吉松歯科医院
吉松 宏泰 先生

写真提供: 辻本デンタルオフィス 辻本真規先生
使用Brinker Clampサイズ B-4



写真提供: 宮地歯科医院 宮地秀彦先生
使用Brinker Clampサイズ B-2

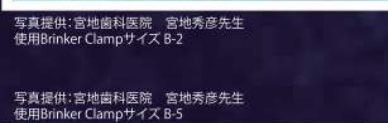

写真提供: 宮地歯科医院 宮地秀彦先生
使用Brinker Clampサイズ B-5



写真提供: 吉松歯科医院 吉松宏泰先生
使用Brinker Clampサイズ B-4



写真提供: 辻本デンタルオフィス
辻本真規先生
使用Brinker Clampサイズ B-5



ACCESSORIES

関連製品

デンタルダムテンプレート, 1枚

5インチ用
H01440

6インチ用
H01441

価格

1,380円



デンタルダムナプキン, 50枚

フレーム 6/5インチ両用
H01415

価格

3,800円



【ラテックスフリーデンタルダム・その他デンタルダム関連製品】

各種製品により販売元が異なりますので、ご希望の製品ございましたら記載の各社ご連絡先までお問合せくださいませ。

ウェジェットー かんたんクランプ（ラテックス・ラテックスフリー）

サイズ	長さ	色	商品コード
LATEX			
ラテックス S 1.5mm	2.1 m	イエロー	29701 (H06522)
ラテックス L 1.8mm		オレンジ	29702 (H06523)
NON-LATEX			
ノン・ラテックス S 1.5mm	2.1 m	グリーン	29703 (H06524)
ノン・ラテックス L 1.8mm		ブルー	29704 (H06525)



ハイソレート フレキシダム（ラテックスフリー）

サイズ	色	厚み	枚数
150 × 150		ミディアム	30
	パープル	35241 (390035)	
	ブルー	35243 (390033)	

お問い合わせ先:株式会社茂久田商会
 E-Mail: info@mokuda.co.jp




それぞれに色分けされたステンレススチール製で、無反射のマットタイプの羽付クランプです。
 歯科用ラバーダムを固定する為に使用します。

カラークランプ 羽付 マット Color Matte Finish Winged Clamps

Fiesta Color Coded Matte Finish Winged Clamps

#2	下顎小白歯（フラットタイプ）	H09957
#2A	大型の小白歯（フラットタイプ）	H09958
#4	小型の大白歯（上顎大白歯 フラットタイプ）	H09959
#7	下顎大白歯（フラットタイプ）	H09960
#8A	大白歯（湾曲の大きなタイプ） 歯肉縁下を把持できる	H09961

#9	前歯（1～3 番用）	H09962
#12A	下顎大白歯 滑り止めのギザ付き 13A とペア	H09963
#13A	下顎大白歯 滑り止めのギザ付き 12A とペア	H09964
#14A	大白歯 部分萌出や形態異常の大白歯用	H09965

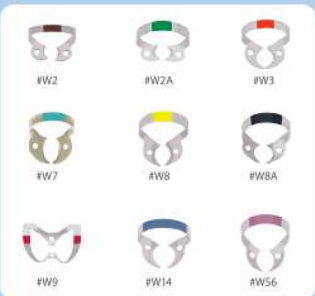


カラークランプ 羽無 マット Color Matte Finish Wingless Clamps

Fiesta Color Coded Matte Finish Wingless Clamps

#W2	下顎小白歯（フラットタイプ）	H02794
#W2A	大型の小白歯（フラットタイプ）	H02795
#W3	下顎大白歯 （小型の大白歯用のフラットタイプ）	H02796
#W7	下顎大白歯、上顎 8 番大白歯 （フラットタイプ）	H02797
#W8	上顎大白歯	H02798

#W8A	大白歯（湾曲の大きなタイプ） 歯肉縁下を把持できる	H02799
#W9	前歯（1～3 番用）	H02800
#W 14A	大白歯 部分萌出や形態異常の大白歯用	H02802
#W56	臼歯全般	H02803

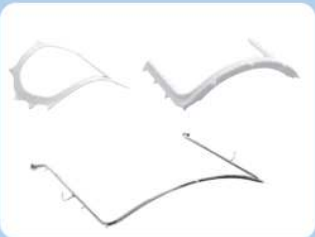

デンタルダムフレーム

タイプ	サイズ		製品番号
Ostby plastic frame – X線透過性	6インチ	152 mm	H00560
U-shaped plastic frame – X線透過性			H01414
U-shaped metal frame			H07083
U-shaped plastic frame – X線透過性	5インチ	127 mm	H01416
U-shaped metal frame			H07082



製品番号
 H01261 デンタルダムパンチ

製品番号
 H01262 クランプ鉗子

お問い合わせ先:東京歯科産業株式会社
 TEL: 03-3831-0176

ブランドについて

- 1925年 ハイジエニック社(米国) 設立
- 1940年 デンタルダム用の天然ラテックスダム製造開始
- 1997年 ハイジエニック社の歯科部門をコルテングループに傘下
- 2022年 Hygenic(ハイジエニック)からHysolate(ハイスレート)へブランド名変更と同時にパウダーフリーへ製品改良
- 2025年 デンタルダムの更なる品質改良のため、製造工場を移し、厳格な品質検査を追加し、新たな色調・マット仕上げでリニューアル販売



Brinker Clamp、Hysolateデンタルダムに関する製品動画はコチラをチェック!

販売名
デンタルダム
デンタルダム ラテックスフリー
カラークランプ
デンタルクランプ
ウェジェット ラテックス・ラテックスフリー
デンタルダムフレーム
デンタルダムパンチ
歯科用クランプ鉗子
表示価格には消費税は含まれておりません。

医療機器届出番号
13B1X10231000103
13B1X10231000145
13B1X10231000126
13B1X10231000153
13B1X10231000144
13B1X10231000127
13B1X10231000128
13B1X10231000129

販売業者

コルテージャパン合同会社
〒190-0012
東京都立川市曙町2丁目25-1-2F
TEL:042-595-6945 / FAX:042-595-6946
www.coltene.com

製造販売業者

AJMD 株式会社
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-4-5
真光ビルディング
TEL: 03-5614-0733
FAX: 03-5614-0734

 **COLTENE**