


MANI

Healthy teeth, happy smiles,
to the world.

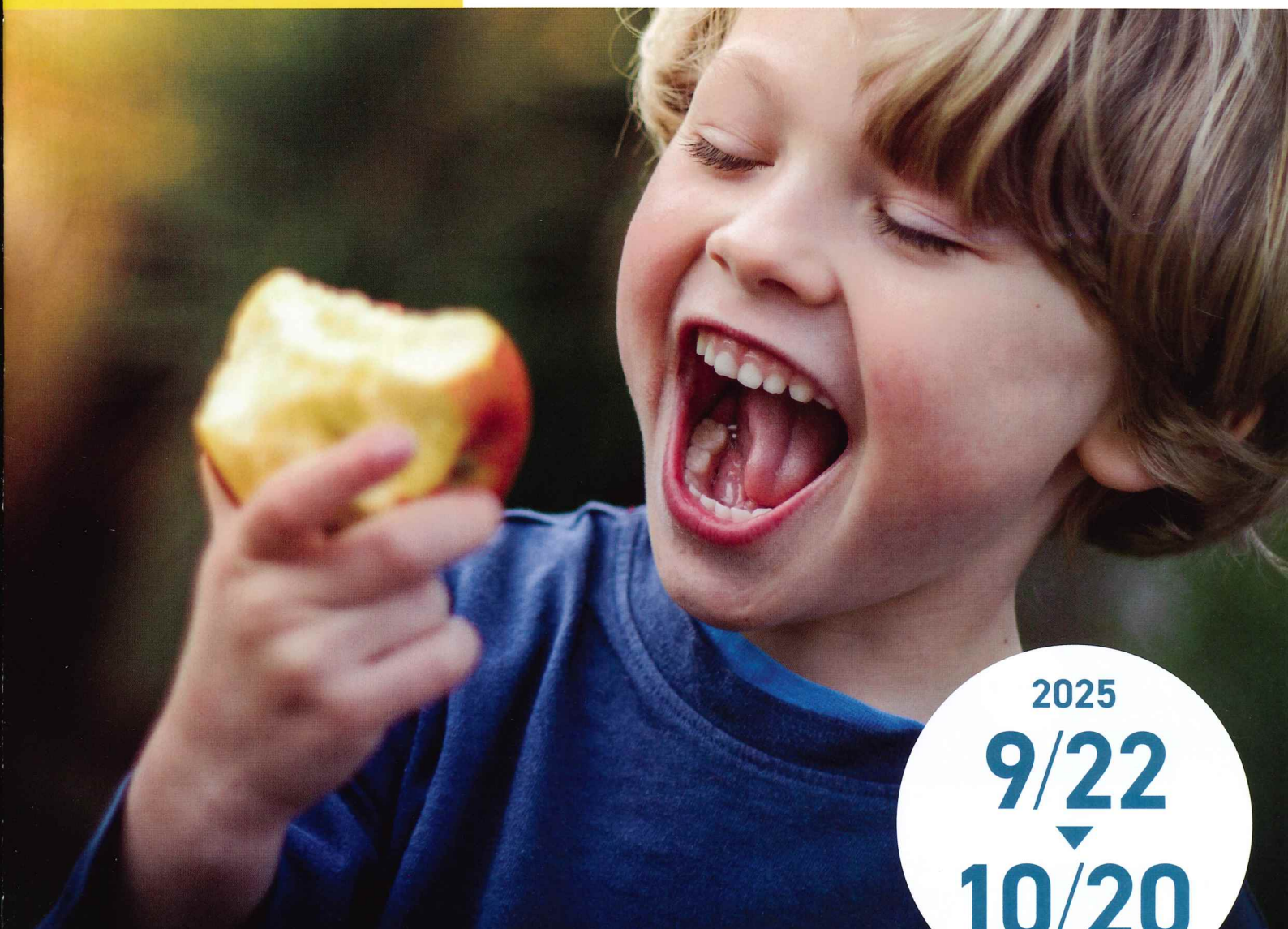

2025
9/22
▼
10/20

ご愛顧感謝キャンペーン Part 1



診断

天蓋除去

根管口
明示

穿 通

グライドパス



拡大形成

洗 浄

充 填

歯冠修復

Dファイnder

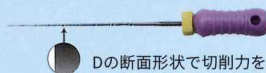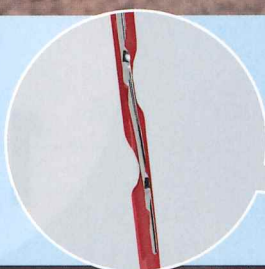


Dの断面形状で切削力をおさえる

切削力を抑えているため、刃が食い込みにくく、
レッジ・パーフォレーションを起こしにくい。

滑りながらすすむ

最初は
Dファイnder

グライド
ファイnder

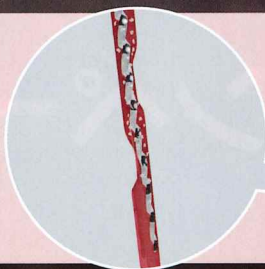

可変断面で
切削性・柔軟性をもたせる

切削力があるため、過度に石灰化・狭窄した根
管でも、削りながら穿通ができる。

削りながらすすむ

進まない時は
グライド
ファイnder

グライドパス

JIZAI Pre 013 / Pre 020


Your Endodontic Compass to find the right Path

どんな症例でも迷わずに穿通、グライドパスが出来ることを目指して

Dファイnder



特徴的なD型断面

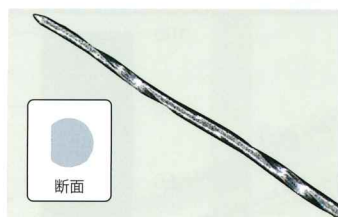

- 切削力が低い
- 食い込みやレッジ、パーフォレーションが起きにくい

グライドファイnder



穿通性 + 切削性



- 切削力が高い
- 過度に石灰化・狭窄した根管でも、削りながら穿通ができる

愛顧感謝キャンペーン
特別価格

2個以上のご購入で!



■ Dファイnder

標準価格 (6本入/1個 3,100円)

~~6,200円~~ (税別)



弊社ホームページ
穿通専用ファイル特設ページを
ぜひご覧ください。

愛顧感謝キャンペーン
特別価格

2個以上のご購入で!



■ グライドファイnder

標準価格 (6本入/1個 2,500円)

~~5,000円~~ (税別)

医療機器届出番号 09B1X00006011050
一般医療機器 一般的名称: 歯科用ファイル 販売名 マニーDファイnder

医療機器届出番号 09B1X00006011010
一般医療機器 一般的名称: 歯科用ファイル 販売名 マニーKファイler

JIZAI

— 自在 —

Pre 020


破折リスクを低減
石灰化・狭窄、湾曲した根管にも対応

破折への耐久性と根管追従性で高い評価を得ているJIZAIに、新たに『JIZAI Pre 020』をラインナップ。


難しい症例でも、これまで以上に安全に治療することを目指して。

Pre 020の使用により、JIZAI I(025 04)への切削負荷が56%軽減！

●切削範囲のイメージ

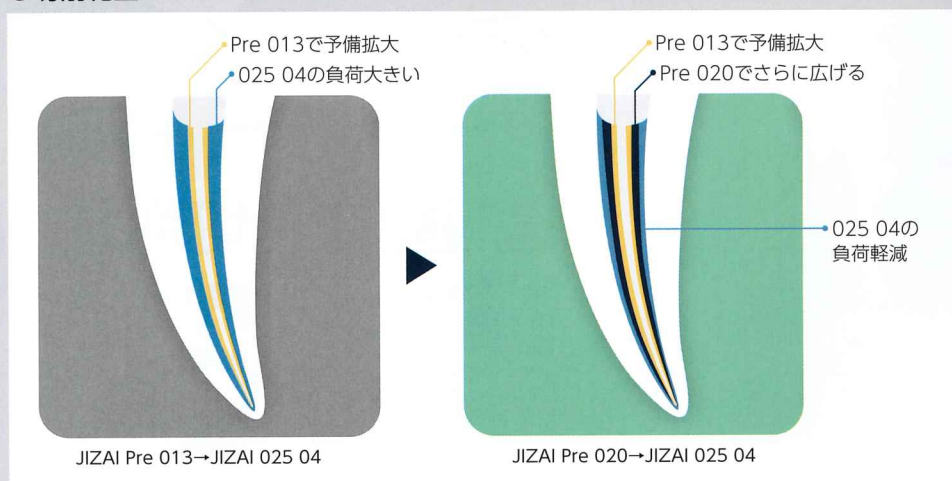

●切削抵抗試験

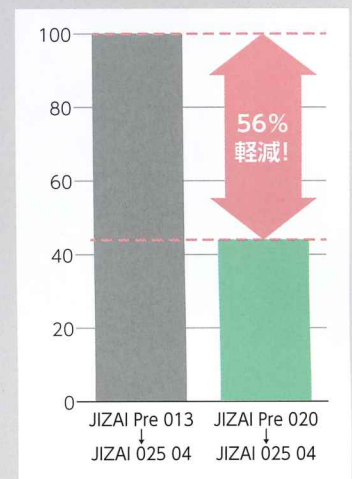

グライドパス JIZAI Pre 013 / JIZAI Pre 020

JIZAI Pre 013



正回転：許容回転数：300min⁻¹以下 トルク設定値：1.0N・cm以下
 ※OTRモード回転数：300min⁻¹以下 トルク：1.0N・cm以下

JIZAI Pre 020



石灰化・狭窄、湾曲した根管の場合

正回転：許容回転数：500min⁻¹以下 トルク設定値：3.0N・cm以下
 ※OTRモード回転数：500min⁻¹以下 トルク：1.0N・cm以下



ラジアルランド



Preシリーズ独自の断面形状により、破折リスクを低減しつつ、根管形態を維持した形成ができる。



JIZAI Pre 020 キャンペーン追加

好評のJIZAIシリーズに待望の
Pre 020 キャンペーンを追加しました！

JIZAIシリーズ

感謝キャンペーン
特別価格



JIZAI グライドパスキット

■標準価格 (3本入/1個)

~~6,000円~~ (税別)

+



JIZAI シェイピングキット

■標準価格 (3本入/1個)

~~6,000円~~ (税別)

=

キャンペーンセット価格

~~12,000円~~ (税別)

各種単品でも特別価格でご提供いたします。

規 格	サイズ	テーパー	長 さ	入 数	標準価格
グライドパスキット					
オリフィスオープナー 	025	14	18mm	各1本入	6,000円
Pre 013 	013	04	21mm		
Pre 020 	020	04	25mm		
シェイピングキット					
I 	025	04	21mm 25mm	各1本入	6,000円
II 	025	06			
III 	035	04			

規 格	サイズ	テーパー	長 さ	入 数	標準価格
単 品					
オリフィスオープナー	025	14	18mm	3 本入	6,000円
Pre 013	013	04	21mm 25mm		
Pre 020	020	04			
025 04	025	04			
030 04	030	04			
035 04	035	04			
040 04	040	04			
045 04	045	04			
050 04	050	04			
025 06	025	06			
030 06	030	06			
035 06	035	06			





下顎左側第一大臼歯の イニシャルトリートメント



小泉 翔悟 先生

小泉歯科医院（北海道札幌市）

1 患者の主訴、背景、状況など

患者は50代男性。左下の奥歯の痛みを主訴に当院を受診。視診及び術前ペリアピカルX線写真の所見から、下顎左側第一大臼歯に遠心からの二次カリエスと根尖病変の存在が認められた。（図1）

拍動性の自発痛、垂直方向に対して強い打診痛、根尖部の圧痛と歯肉の腫脹が認められた。

また、歯周ポケットは全周3mm以下。下顎左側第一大臼歯の急性根尖性歯周炎と診断し、患者に患歯の状態と根管治療の必要性を説明。同意を頂けたので、治療を開始することとした。

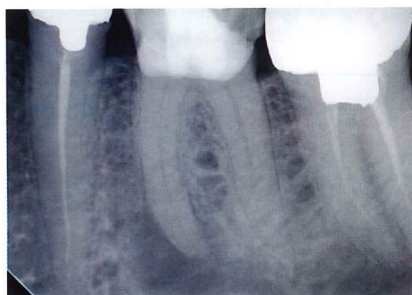


図1 術前ペリアピカルX線写真

2 このケースに対する治療方針

術前ペリアピカルX線写真の所見から、過去に生活歯髄切断法にて根部歯髄を保存したものと考えられる。そこに遠心からの二次カリエスが感染経路となり歯髄が感染。失活した後、根尖性歯周炎に至った可能性が考えられる。近心根管に狭窄が認められるので、レッジなどの人為的なエラーに十分注意した上で治療を行うこととした。

3 実際の治療

強い炎症反応が認められたことと、患歯が下顎大臼歯であることから、近位伝達法による伝達麻酔を選択。奏効後、ラバーダム防湿を行い、カーバイトバーと超音波系インスツルメントを用いて修復物を除去。更にMIステンレスバーを用いて感染歯質の除去を行った。隔壁築造後、髓腔内の充填物を除去。上部根管の石灰化が著しかったが、マイクロスコプ下で色調や質感の違いを確認しながら慎重に根管口明示を行った。

各根管共通で#10 04テーパーと#10 06テーパーのハンドインスツルメントを用いて上部根管を形成後、Kファイルを用いることで穿通を試みた。

近心頬側根管、近心舌側根管は湾曲の少ない直線的な根管ではあったが、石灰化の影響で根管が狭窄していた。Kファイル（#6、#8、#10）によるクラウンダウン法を行ったところ穿通する事ができた。穿通した瞬間、多量の排膿と出血が認められた（図2）。遠心根管はKファイル（#10）を用いて容易に穿通することができた。



図2 近心舌側根管穿通

穿通後、各根管に対して JIZAI を用いて拡大形成を行った。まず 500min^{-1} 、 $3.0\text{N}\cdot\text{cm}$ のモーター設定でオリフィスオープナー（025.14）を用いて再度上部根管を形成後、 300min^{-1} 、 $1.0\text{N}\cdot\text{cm}$ のモーター設定で JIZAI Pre 013 を用いてグライドパス形成を行った。

その後、 500min^{-1} 、 $3.0\text{N}\cdot\text{cm}$ のモーター設定で #20 04 テーパーの JIZAI Pre 020 で更にもう一段階予備拡大を行った後に、JIZAI I・II・III を用いたフルレンジ法にて #35 04 テーパーまで拡大形成を行った。（図3、図4）

JIZAI Pre 013（013.14）と JIZAI I（025.04）の間に #20 04 テーパーの JIZAI Pre 020 を一段階挟むことで、ファイルに掛かる負担が軽減され、エンドモーターのトルク値の表示も大きく上がることなく今回のような狭窄した長い根管でも無理なく拡大形成することが出来た。

17%EDTA 溶液と 3%NaClO 溶液による根管洗浄（音波洗浄）後、エンド用サクションと滅菌済みペーパーポイントによる根管乾燥の後、水酸化カルシウム製剤を貼薬、水硬性セメントを用いて仮封し、1回目の治療を終了した。

10日後、症状の消失を確認。ラバーダム防湿下で 17%EDTA 溶液、3%NaClO 溶液を用いて根管洗浄（音波洗浄）、エンド用サクションと滅菌済みペーパーポイントによる根管乾燥後、ガッタパーチャポイントとシーラーによる垂直加圧充填法で根管充填を行った。（図5）

術後9カ月経過、病変には縮小傾向が認められる。（図6）

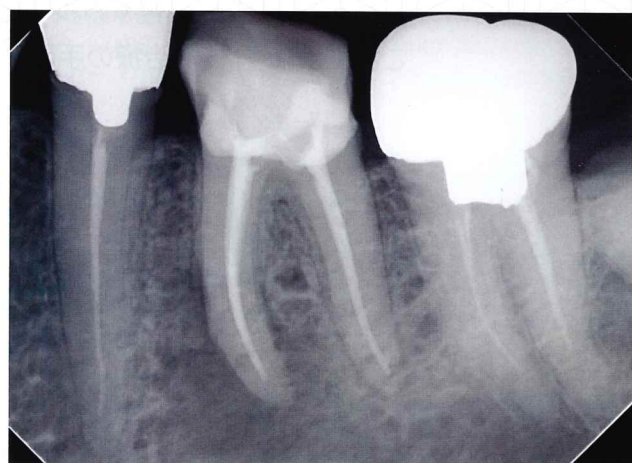


図5 術直後ペリアピカルX線写真

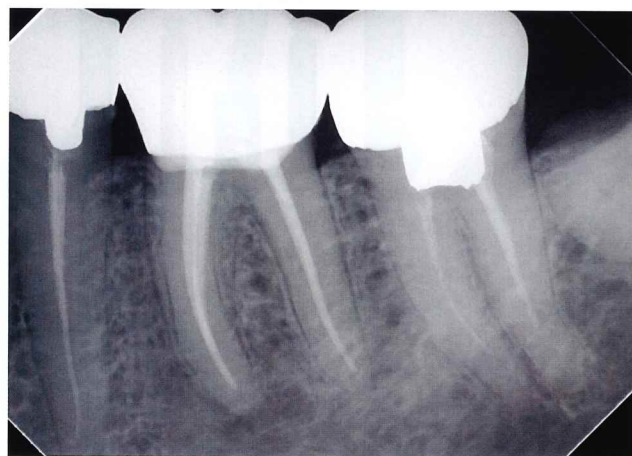


図6 術後9カ月経過ペリアピカルX線写真



図3 拡大形成



図4 拡大形成後

使用製品



JIZAI 各種 (画像はPre 013)



Kファイル



MIステンレスバー

医療機器認証番号：301ABBZX00035000 管理医療機器 一般的名称：電動式歯科用ファイル

医療機器届出番号：09B1X00006011010 一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル

医療機器届出番号：09B1X00006001010 一般医療機器 一般的名称：歯科用スチールバー

販売名：マニーNiTiファイル

販売名：マニーKファイル

販売名：マニーステンレスバー

再根管治療の常識を覆す 革新的なガッターパーチャ除去ツール

より速く、より簡単に。

面倒なガッターパーチャ除去を効率化。

従来の溶解剤を使用する方法では、時間がかかり、除去作業が煩雑でしたが、

GPRはシンプルな操作でよりスピーディーにガッターパーチャを除去します。

どんなハンドピースにも対応し、特別な設備も必要ありません。

これにより、再根管治療の手間を軽減し、チェアタイムを短縮します。

STEP 1 根管口から根管中部までの除去

※処置前にレントゲンなどにて根管長及び形状をご確認ください。
※STEP1から3N、4Nの使用は効率が悪いためおすすめしていません。

根管のサイズに合わせ
1S または **2S** のステンレス器具を選択

1S

2S

または

070

050

器具は回転させながらガッターパーチャへ軽く圧力を加えて待機


器具の1山目がガッターパーチャへ入ると、あとは軽い力で器具は根管内へ入っていく

器具が進まなくなったら、1〜2回器具を出し入れしてSTEP1終了

症例



〈症例写真提供〉日本大学松戸歯学部 歯内療法学講座 臨床教授 辻本泰久先生

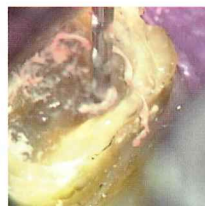

〈症例写真提供〉鳩ヶ谷いざわ歯科 伊澤真人先生



症例動画はこちら



ガッターパーチャが硬い場合



経年劣化でガッターパーチャが硬くなっている場合は、超音波機器や回転切削機器などで起点を作りGPRを使用する。

推奨回転数
1000～1500min⁻¹

トルク設定不要

注水不要

溶解剤不要

硬いガッタパーチャには高回転で
ご使用ください。

ただ許容回転数以内に回転させる
だけです。

ガッタパーチャは熱によって軟化す
る材質のため、注水は不要です。

溶解剤を併用すると目詰まりなど
を起こす可能性があります。

タイプ	先端径 (mm)	
1S	0.70	
2S	0.50	
3N	0.40	
4N	0.30	

S=ステンレススチール N=ニッケルチタン

用途

根管内の充填物を
除去するために用いる

組合せ(4通り)

1S → 3N 2S → 3N
1S → 4N 2S → 4N

■最小包装単位：4本入/ケース

■アソート (ASS) : 1S (#70)、2S (#50)、3N (#40)、4N (#30)

■テーパ：4/100

■材質：ステンレススチール、ニッケルチタン

STEP 2 根管中部から根尖1～2mm手前までの除去

根管のサイズに合わせ
3Nまたは**4N**のニッ
ケルチタン器具を選択

3N

4N

または


040

030

ラバーストッパーは根
尖から1～2mm手前
の位置へ
設定



根管中部～根尖1～
2mm手前で1～2秒
停止

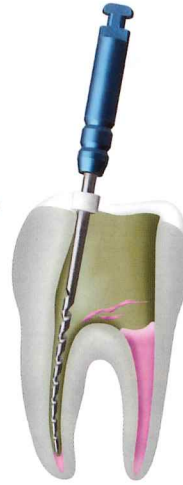

器具を2、3回上下させ
ながらガッタパーチャ
を排出
させる



根尖部については、手
用器具などを用いて慎
重に除去



破折を防ぐための工夫

- 器具を押しこみすぎない。
- 挿入したら一箇所に留めずに出し入れをする。

愛顧感謝キャンペーン
特別価格

2個以上のご購入で!

■標準価格 (4本入/1個2,600円)
#1S、2S

~~5,200円~~ (税別)

愛顧感謝キャンペーン
特別価格

2個以上のご購入で!

■標準価格 (4本入/1個5,200円)
#3N、4N

~~10,400円~~ (税別)

愛顧感謝キャンペーン
特別価格

2個以上のご購入で!

■標準価格 (4本入/1個3,900円)
アソート (ASS)

~~7,800円~~ (税別)



／エンドのスペシャリストが語る／

× 根管治療の臨床活用

いつでもどこでも視聴いただけます



講師 月星 光博 先生

Dr. 月星徹底解説 弯曲根管攻略！

失敗しない根管形成術

弯曲根管の治療の極意を学ぶ！成功へのステップアップレクチャー

弯曲根管の治療における難しさを克服したい方に向けた実践的なレクチャーです。
臨床経験をもとに、難しい症例に対するアプローチ方法や注意すべきリスクとその回避策を具体的に紹介します。



講師 岡口 守雄 先生

根管治療成功への近道！JIZAI を自在に活用するノウハウを伝授します

「はじめての NiTi ファイル」基本が学べる入門講座

「どうやって使えばいいの?」「どんなメリットがあるの?」
そんな疑問をすべて解決します。具体的な操作手順や注意点も解説しています。
実践的なヒントも満載なので、この動画で NiTi ファイルの可能性を体感してください。

教えて岡口先生！エンドの質問ぜんぶ答えます！

JIZAI の基礎・活用法と、視聴者からのエンドの質問に一問一答で解説

JIZAI を初めて使う方から、さらに効果的に活用したい方まで、すべての方に役立つ動画です！また後半では、視聴者から事前に頂いたエンドに関する質問に一問一答で解説をします。穿通の成功率を高める実践的な方法や、JIZAI に関する疑問に臨床現場での活用例を交えてお答えします。



講師 三橋 晃 先生

その根管、諦めてない？

開かない根管へのアプローチ&NiTi ファイルの活かし方

狭窄・閉塞根管の治療を成功に導く！症例を用いたテクニック解説

歯髄の石灰化や狭窄、閉塞根管の治療でお悩みの方に向け、実際の症例を用いて解説し、治療の成功を導くテクニックを紹介します。
難しい症例に直面した際のヒントやコツを学び、臨床現場で即活用できる内容です。




講師 石崎 秀隆 先生

Your Endodontic Compass to find the right Path

- 安全で効率的な穿通とグライドパスの方法 -

診断と術式選択のポイントから具体的な手技までの実践セミナー

石灰化・弯曲根管の診断から、安全な穿通とグライドパス形成までを徹底解説。
D ファインダーとグライドファインダーを駆使した 8-10 テクニック等を、実際の臨床例を交えて紹介します。

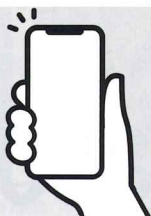

こちらから動画をご覧ください。

<https://www.mani.co.jp/product/jizai/webinar/webinar.php>

ご注文方法のご注意

2個以上のご購入で!

と、記載のある商品は**2個数以上**でご注文ください。

※表記の個数以上による販売になります。

※2個数以上の記載がない商品は、1個からご注文いただけます。

例

グライドファインダー		
コードNo.202490380、381		
No.	長さ	
	21mm	25mm
08	1	
10	1	1
12		2
15		
合 計	2	3

※2個以上からのご注文となります。

MEMO

在庫の
確認等にご利用
ください。



製造販売 **マニー株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
【国内営業G】 Tel:028-667-8591/Fax:028-667-8593 URL:<http://www.mani.co.jp>

発 売 **株式会社モリタ**

大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525
東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161

ご愛顧感謝キャンペーン Part 1

ご注文書

JIZAI キャンペーンセット			
コードNo.202490377、378			
No.	長さ	21mm	25mm
セット			
合計			

JIZAI キット					
コードNo.202490384			コードNo.202490369		
No.	長さ	21mm	25mm	No.	長さ
グライドパス キット				シェイピング キット	
合計				合計	

JIZAI							
コードNo.202490370～376、382、383							
No.	長さ	18mm	21mm	25mm	No.	長さ	21mm
オリフィスオープナー 25(.14)					40(.04)		
Pre 013(.04)					45(.04)		
Pre 020(.04)					50(.04)		
25(.04)					25(.06)		
30(.04)					30(.06)		
35(.04)					35(.06)		
合計					合計		



Dファインダー			
コードNo.202390410、411			
No.	長さ	21mm	25mm
08			
10			
12			
15			
合計			

※2個以上からのご注文となります。

グライドファインダー			
コードNo.202490380、381			
No.	長さ	21mm	25mm
08			
10			
12			
15			
合計			

※2個以上からのご注文となります。

GPR(ガッタパーチャリムーバーCA)			
コードNo.202390380～382			
No.	個数	No.	個数
1S		3N	
2S		4N	
		アソート (ASS)	
合計		合計	

※2個以上からのご注文となります。

ご愛顧感謝キャンペーン Part 2 は 2025年10月21日(火)～11月20日(木)となります!

COMING SOON

【対象製品】

リーマ、Kファイル、Hファイル、RTファイル、ピースリーマ、ゲーツドリル、滅菌済針付縫合糸、クレンザー、
角ブローチ、Mカーバイドバー+、サージカルバー、ダイヤバー、ステンレスバー、MIステンレスバー

A

ご注文 2025年 月 日 キャンペーン期間 2025年9月22日(月)→10月20日(月)

お名前	貴医院名
ご住所 〒	
	TEL ()
お出入りの歯科商店名	

Dファインダー、グライドファインダー、GPRのご注文は、セット単位にてお願いいたします。

- 本注文書に必要事項をご記入の上、お出入りの歯科商店にお渡しください。
- 特別セールにつき、お買い上げ後の返品・交換はいたしかねますので、ご注意ください。
- 商品の詳細パンフレットのご入用の方は、お出入りの歯科商店にご依頼ください。
- セールを実施していない地域がございます。予めご了承ください。
- 掲載商品の標準価格は2025年9月現在のものです。標準価格には消費税等は含まれません。
- 数量に限りがありますので、期間中でもセールの打ち切りさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- お問い合わせはお出入りの歯科商店までお願いします。
- 掲載されているコードNoは発売元(株)モリタのコードNoです。