



洗浄後
すっきり!



ミントの香り

泡の洗浄剤 歯科用

ホイップクレンズ

内容量●180ml(約240プッシュ分)

包装●1本

泡の洗浄剤

ホイップ
クレンズ
Whip
Cleanse

60秒で99.9%除菌※

使い方ガイド



ミントの
香り

※掲載内容・希望患者価格は、2025年9月現在のものです。

※印刷の都合上、実物と多少色が異なる場合がございます。

※無断転載、無断複製を禁じます。

※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

株式会社 ジーシー お客様窓口 ☎ 0120-179418

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <https://www.gc.dental/japan/education/public>

発売元
株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号

製造元
サラヤ株式会社
大阪市東住吉区満里2-2-8

詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。

PA131G2508


※すべての菌に効果があるわけではありません

3ステップで簡単お手入れ



口腔内装置（マウスピース・ナイトガード） 矯正用リテーナー・入れ歯） のお手入れをしていますか？

きちんとお手入れをしないと…

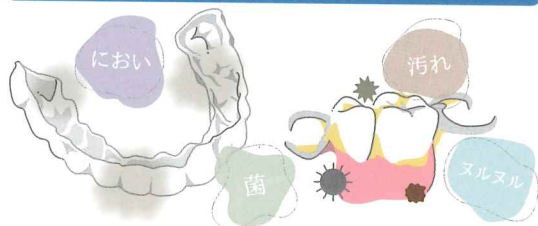

落としかねない汚れや菌が積み重なっていきます

ホイップクレンズでやさしく清潔

60秒で99.9%除菌




汚れに密着するホイップ泡



きめ細かく
垂れにくい

口腔内装置を傷つけにくい

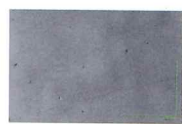

試験前

研磨剤配合
歯みがきペースト
+
入れ歯用ブラシ



細かい傷がついて
しまう

研磨剤無配合
ホイップクレンズ
+
入れ歯用ブラシ



口腔内装置に
やさしい

株式会社ジーシー試験結果

1 口腔内装置に泡をのせる。



水を張った洗面器等の上で洗いましょう
(落下時に破損したり、排水溝に流れていかないように)

使用量の目安

1
プッシュ



マウスピース



部分入れ歯

2
プッシュ



総入れ歯

※必要に応じて量を
調整してください。

2 やわらかいブラシ(大きめの歯ブラシや 入れ歯用ブラシ)で全体を磨く。



60秒間 専用のブラシを準備しましょう

3 流水ですすぐ。



泡をしっかり洗い流しましょう