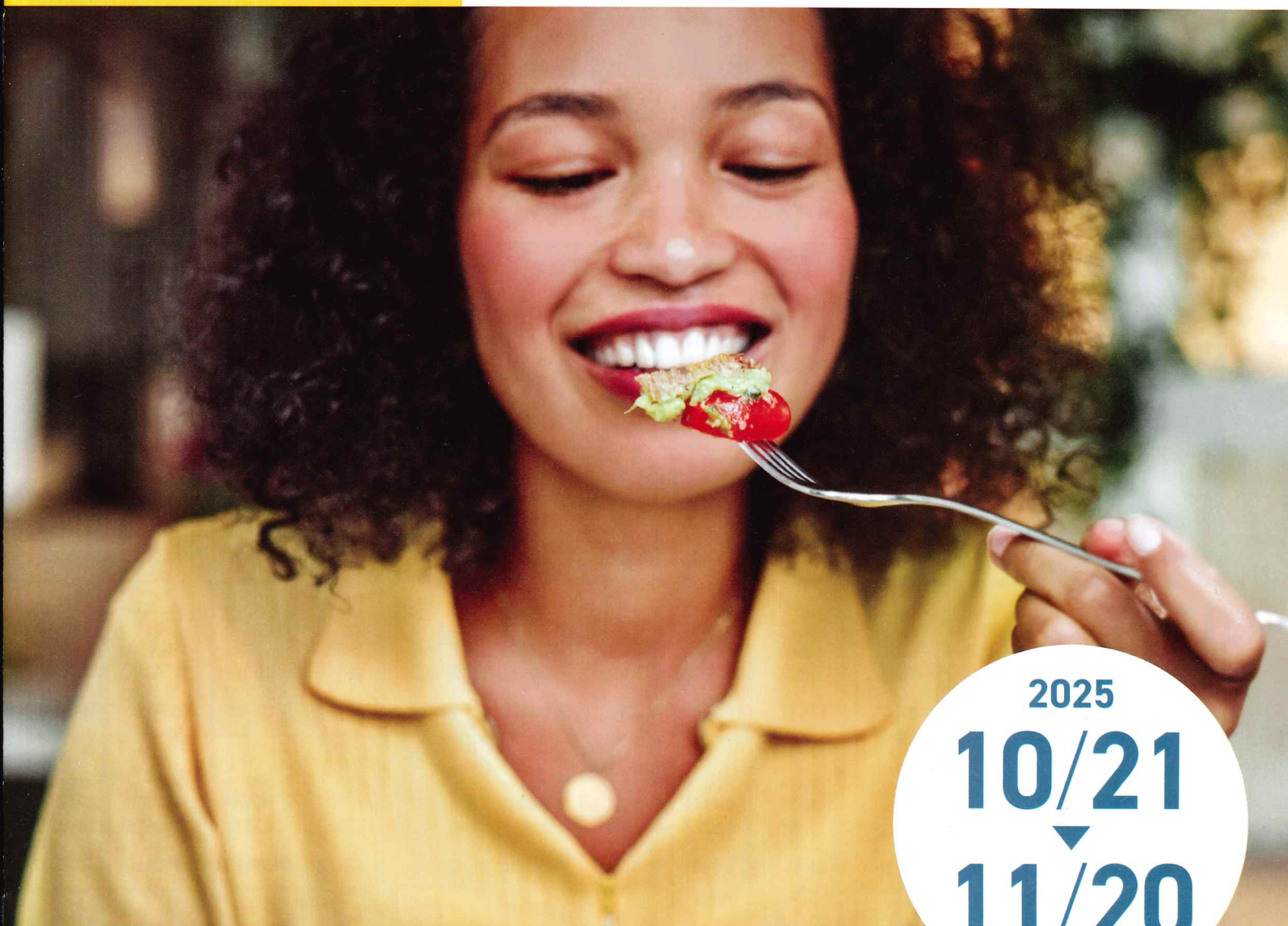


MANI

Healthy teeth, happy smiles,
to the world.



2025
10/21
▼
11/20

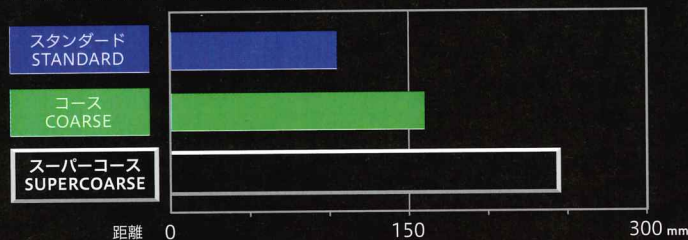
ご愛顧感謝キャンペーン Part 2



ダイヤモンドFGブリストパック

ダイヤモンド® スーパーコース

当社ダイヤモンド®での比較




●許容回転数で切削量を比較したグラフ。 ※切削対象物:エナメル質と同等の物質




スタンダードを使用するよりも、治療効率がよくなります。

〈参考写真〉栃木県宇都宮市開業 やまうち歯科 secondstage:山内聡先生

Super Coarse	ISO 039/034 5.1/19.2 EX-11SC	ISO 237/023 5.3/19.1 EX-21SC	ISO 237/034 5.1/19.1 EX-26SC	ISO 257/034 5.2/19.2 FO-27SC	ISO 141/014 8.3/22.3 SR-11SC	ISO 166/018 10.3/22.1 TC-11SC	ISO 173/018 10.3/21.9 TF-12SC	ISO 170/023 5.6/19.1 TF-22SC	ISO 170/018 4.3/19.1 TF-31SC	ISO 197/018 7.3/21.2 TR-21SC	ISO 198/020 9.3/21.9 TR-13SC

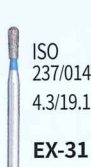Coarse	 ISO 508/019 9.6/21.0 FO-54C	 ISO 166/017 10.1/22.0 TC-11C	 ISO 173/019 10.2/21.8 TF-13C	 ISO 198/019 9.2/21.8 TR-13C	 ISO 197/018 7.2/20.0 TR-62C	 ISO 072/043 2.0/19.2 WR-13C	Standard	 ISO 002/018 2.4/19.1 BC-31	 ISO 002/016 3.6/19.1 BC-32	 ISO 002/014 2.5/19.1 BC-42	 ISO 002/012 2.6/19.1 BC-43	 ISO 001/018 1.6/19.1 BR-31	
	 ISO 001/014 1.3/19.1 BR-41	 売れ筋 No.2 ISO 001/010 0.9/19.1 BR-45	 ISO 001/012 1.1/19.1 BR-46	 売れ筋 No.4 ISO 001/008 0.7/19.0 BR-49	 ISO 032/011 2.4/19.1 DI-41	 ISO 032/014 3.3/19.1 DI-42		 ISO 039/032 5.0/19.1 EX-11	 ISO 039/035 7.2/20.1 EX-12	 ISO 553/019 10.4/23.2 EX-17	 ISO 237/018 5.2/19.1 EX-20	 ISO 237/021 5.2/19.0 EX-21	 ISO 190/017 10.1/24.0 EX-24
 ISO 545/018 7.2/21.2 EX-29	 ISO 237/014 4.3/19.1 EX-31	 ISO 544/019 4.4/19.2 EX-38	 ISO 237/011 3.1/19.1 EX-41	 ISO 299/014 10.2/24.1 FO-11	 ISO 297/014 7.2/21.1 FO-21	 ISO 288/016 7.2/21.1 FO-22	 ISO 257/028 5.0/19.1 FO-25	 ISO 257/032 5.0/19.1 FO-27	 ISO 257/018 3.9/19.7 FO-32	 ISO 111/012 8.2/22.1 SF-11	 ISO 111/014 8.2/22.0 SF-12	 ISO 111/016 8.2/22.1 SF-13	
 ISO 110/014 7.2/21.0 SF-21	 ISO 109/013 4.7/19.1 SF-31	 ISO 109/011 4.3/19.0 SF-41	 ISO 010/013 1.4/19.0 SI-46	 ISO 010/015 1.8/19.0 SI-47	 ISO 010/017 1.9/19.0 SI-48	 ISO 297/012 6.2/21.0 SO-20	 ISO 298/014 8.2/21.8 SO-21	 ISO 141/012 8.2/22.2 SR-11	 ISO 141/014 8.2/22.2 SR-12	 ISO 141/016 8.2/22.2 SR-13	 ISO 160/016 10.2/22.2 TC-11	 ISO 166/018 10.4/23.2 TC-16	
 ISO 165/014 8.2/22.0 TC-21	 ISO 164/011 6.1/21.2 TC-26	 ISO 173/014 10.2/24.0 TF-11	 ISO 173/016 10.2/21.8 TF-12	 ISO 173/018 10.2/21.8 TF-13	 ISO 172/023 9.3/21.8 TF-14	 ISO 171/014 7.2/21.0 TF-20	 ISO 171/016 7.2/21.0 TF-21	 売れ筋 No.3 ISO 170/021 5.5/19.0 TF-22	 ISO 170/018 5.2/20.1 TF-23	 ISO 170/016 4.2/19.0 TF-31	 ISO 169/011 3.7/19.1 TF-41	 ISO 170/012 4.2/19.0 TF-42	
 ISO 170/014 4.2/19.0 TF-43	 ISO 199/016 10.2/21.8 TR-11	 ISO 199/016 10.2/21.8 TR-12	 売れ筋 No.1 ISO 198/018 9.2/21.8 TR-13	 ISO 198/022 9.3/22.0 TR-14	 ISO 199/022 11.4/23.8 TR-15	 ISO 199/023 11.4/23.8 TR-19	 ISO 197/014 7.2/21.0 TR-20	 ISO 197/016 7.2/21.1 TR-21	 ISO 197/018 7.2/21.2 TR-24	 ISO 199/016 10.2/21.7 TR-25	 ISO 198/018 9.2/21.8 TR-26	 ISO 041/024 0.6/19.2 WF-30	
 ISO 072/042 1.9/19.1 WR-13	Short Shank		 ISO 002/014 2.5/16.7 BC-S42	 ISO 002/012 2.6/16.7 BC-S43	 ISO 001/010 0.9/16.7 BR-S45	 ISO 001/012 1.1/16.7 BR-S46	 ISO 032/011 2.4/17.2 DI-S41	 ISO 297/014 7.2/18.2 FO-S21	 ISO 508/019 9.6/20.0 FO-S54	 ISO 001/008 1.0/17.1 MI-S45	 ISO 277/024 4.8/17.1 Pro-S3	 ISO 109/011 3.8/16.7 SF-S41	 ISO 010/013 1.4/16.6 SI-S46

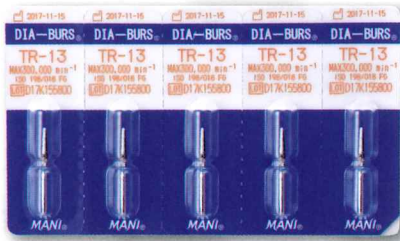

数量感謝キャンペーン
特別価格

3個以上のご購入で!

■標準価格(5本入/1シート 5,000円)
 スーパーコース

~~15,000円~~ (税別)

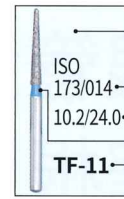
数量感謝キャンペーン
特別価格

3個以上のご購入で!

■標準価格(5本入/1シート 3,700円)
 コース、スタンダード、ファイン、エクストラファイン





















































































~~11,100円~~ (税別)

ダイヤモンド
 形態表の見方



許容回転数(背景色)
 45万回転 450,000min⁻¹
 30万回転 300,000min⁻¹
 16万回転 160,000min⁻¹
 9万回転 90,000min⁻¹

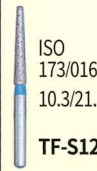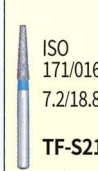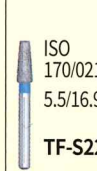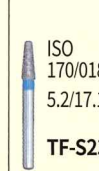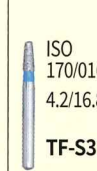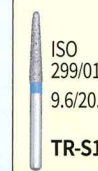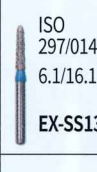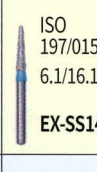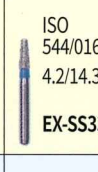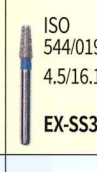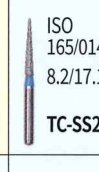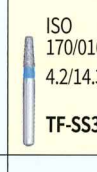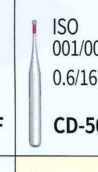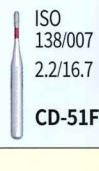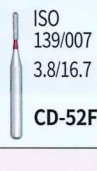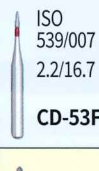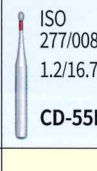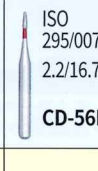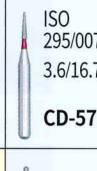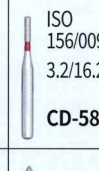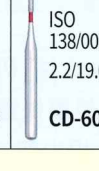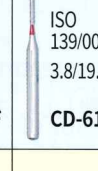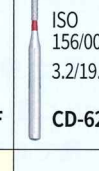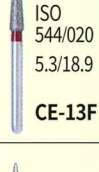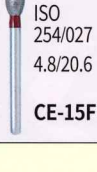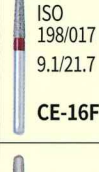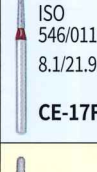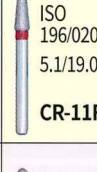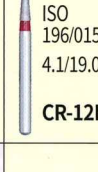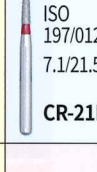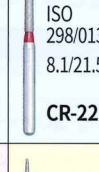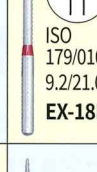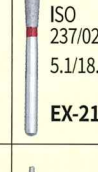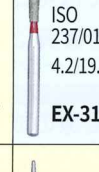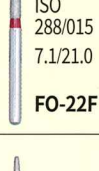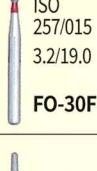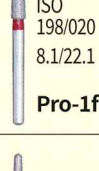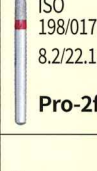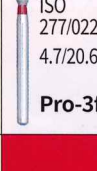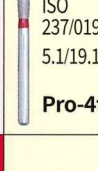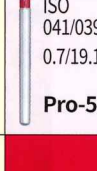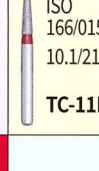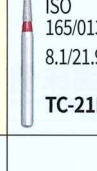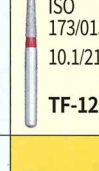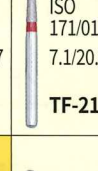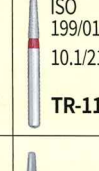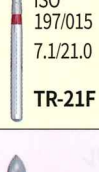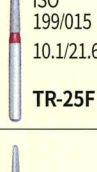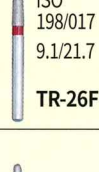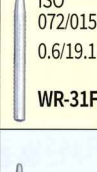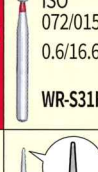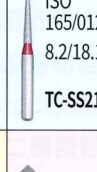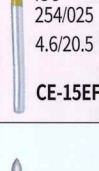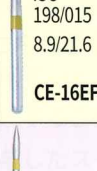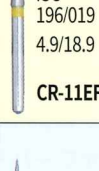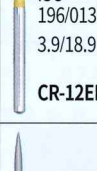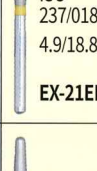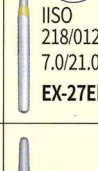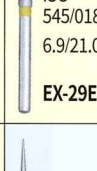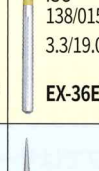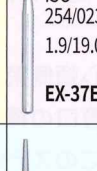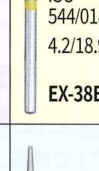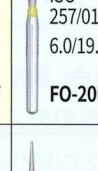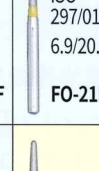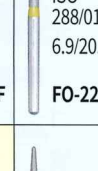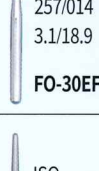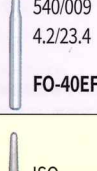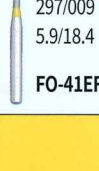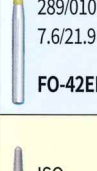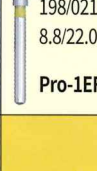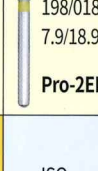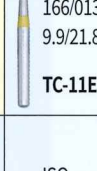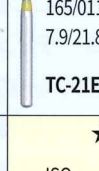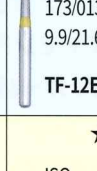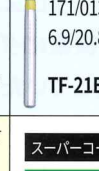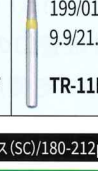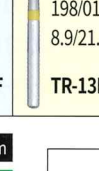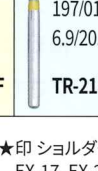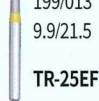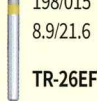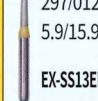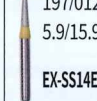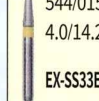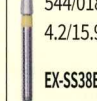ISO 173/014 — ISO/最大径
 10.2/24.0 — 作業長/全長
 カラーコード
 TF-11 — 注文番号

 ISO 010/017 1.9/16.6 SI-S48	 ISO 297/012 6.2/18.8 SO-S20	 ISO 165/014 8.2/20.0 TC-S21	 ISO 173/016 10.3/21.2 TF-S12	 ISO 171/014 7.2/18.8 TF-S20	 ISO 171/016 7.2/18.8 TF-S21	 ISO 170/021 5.5/16.9 TF-S22	 ISO 170/018 5.2/17.1 TF-S23	 ISO 170/016 4.2/16.8 TF-S31	 ISO 169/011 3.7/16.8 TF-S41	 ISO 299/018 9.6/20.9 TR-S13	 ISO 198/022 9.3/20.1 TR-S14	 ISO 197/016 7.2/18.8 TR-S21	
Super Short Shank	 ISO 138/009 2.3/16.1 CD-SS51	 ISO 032/011 2.4/14.5 DI-SS41	 ISO 297/014 6.1/16.1 EX-SS13	 ISO 197/015 6.1/16.1 EX-SS14	 ISO 544/016 4.2/14.3 EX-SS33	 ISO 544/019 4.5/16.1 EX-SS38	 ISO 165/014 8.2/17.1 TC-SS21	 ISO 170/016 4.2/14.3 TF-SS31	 ISO 197/016 7.2/17.7 TR-SS21	Fine	 ISO 001/006 0.5/19.0 BR-48F	 ISO 001/006 0.6/16.7 CD-50F	
	 ISO 138/007 2.2/16.7 CD-51F	 ISO 139/007 3.8/16.7 CD-52F	 ISO 539/007 2.2/16.7 CD-53F	 ISO 295/007 2.2/16.7 CD-54F	 ISO 277/008 1.2/16.7 CD-55F	 ISO 295/007 2.2/16.7 CD-56F	 ISO 295/007 3.6/16.7 CD-57F	 ISO 156/009 3.2/16.2 CD-58F	 ISO 197/013 6.9/16.7 CD-59F		 ISO 138/007 2.2/19.0 CD-60F	 ISO 139/007 3.8/19.0 CD-61F	 ISO 156/009 3.2/19.0 CD-62F
 ISO 544/020 5.3/18.9 CE-13F	 ISO 254/027 4.8/20.6 CE-15F	 ISO 198/017 9.1/21.7 CE-16F	 ISO 546/011 8.1/21.9 CE-17F	 ISO 196/020 5.1/19.0 CR-11F	 ISO 196/015 4.1/19.0 CR-12F	 ISO 197/012 7.1/21.5 CR-21F	 ISO 298/013 8.1/21.5 CR-22F	 ISO 179/010 9.2/21.0 EX-18F	 ISO 237/020 5.1/18.9 EX-21F	 ISO 237/013 4.2/19.0 EX-31F	 ISO 297/013 7.1/21.0 FO-21F		
 ISO 288/015 7.1/21.0 FO-22F	 ISO 257/015 3.2/19.0 FO-30F	 ISO 198/020 8.1/22.1 Pro-1f	 ISO 198/017 8.2/22.1 Pro-2f	 ISO 277/022 4.7/20.6 Pro-3f	 ISO 237/019 5.1/19.1 Pro-4f	 ISO 041/039 0.7/19.1 Pro-5f	 ISO 166/015 10.1/21.9 TC-11F	 ISO 165/013 8.1/21.9 TC-21F	 ISO 173/015 10.1/21.7 TF-12F	 ISO 171/015 7.1/20.9 TF-21F	 ISO 199/015 10.1/21.7 TR-11F	 ISO 198/017 9.1/21.7 TR-13F	
 ISO 197/015 7.1/21.0 TR-21F	 ISO 199/015 10.1/21.6 TR-25F	 ISO 198/017 9.1/21.7 TR-26F	 ISO 072/015 0.6/19.1 WR-31F	Short Shank		 ISO 072/015 0.6/16.6 WR-31F	Super Short Shank		 ISO 298/013 7.7/18.1 FO-SS21F	 ISO 165/012 8.2/18.1 TC-SS21F	Extra Fine		
 ISO 254/025 4.6/20.5 CE-15EF	 ISO 198/015 8.9/21.6 CE-16EF	 ISO 196/019 4.9/18.9 CR-11EF	 ISO 196/013 3.9/18.9 CR-12EF	 ISO 237/018 4.9/18.8 EX-21EF	 ISO 218/012 7.0/21.0 EX-27EF	 ISO 545/018 6.9/21.0 EX-29EF	 ISO 138/015 3.3/19.0 EX-36EF	 ISO 254/023 1.9/19.0 EX-37EF	 ISO 544/018 4.2/18.9 EX-38EF	 ISO 257/012 6.0/19.9 FO-20EF	 ISO 297/011 6.9/20.9 FO-21EF	 ISO 288/013 6.9/20.9 FO-22EF	
 ISO 257/014 3.1/18.9 FO-30EF	 ISO 540/009 4.2/23.4 FO-40EF	 ISO 297/009 5.9/18.4 FO-41EF	 ISO 289/010 7.6/21.9 FO-42EF	 ISO 198/021 8.8/22.0 Pro-1EF	 ISO 198/018 7.9/18.9 Pro-2EF	 ISO 166/013 9.9/21.8 TC-11EF	 ISO 165/011 7.9/21.8 TC-21EF	 ISO 173/013 9.9/21.6 TF-12EF	 ISO 171/013 6.9/20.8 TF-21EF	 ISO 199/013 9.9/21.6 TR-11EF	 ISO 198/015 8.9/21.6 TR-13EF	 ISO 197/013 6.9/20.9 TR-21EF	
 ISO 199/013 9.9/21.5 TR-25EF	 ISO 198/015 8.9/21.6 TR-26EF	Short Shank		 ISO 198/019 8.9/19.9 TR-S14EF	Super Short Shank		 ISO 297/012 5.9/15.9 EX-SS13EF	 ISO 197/012 5.9/15.9 EX-SS14EF	 ISO 544/015 4.0/14.2 EX-SS33EF	 ISO 544/018 4.2/15.9 EX-SS38EF	★印 ショルダーR EX-17、EX-29、EX-38、EX-SS33、EX-SS38、EX-SS33EF、EX-SS38EF		
★スーパーコース(SC)/180-212μm ★コース(C) /125-150μm ★スタンダード(S) /106-125μm ★ファイン(F) /53-63μm ★エクストラファイン(EF) /20-30μm													

再根管治療における 狭窄根管のネゴシエーション



澤田 則宏 先生
澤田デンタルオフィス(東京都)

1 背景

再根管治療 (retreatment) は 初回根管治療 (initial treatment) と違い難しい。未処置根管の狭窄は生体の防御反応の一種であるわけだが、根尖部に感染が及んでいる狭窄根管ではネゴシエーションを行い根尖まで穿通しないと感染源を確実に除去することができない。つまり、狭窄根管のネゴシエーションを行い穿通することができるかどうか、再根管治療の成功のカギと言っても過言ではない。本ケースレポートでは、狭窄根管のネゴシエーションからグライドパスの形成まで、そのコツを紹介する。

2 処置のポイントと実際の臨床例

①未処置の根管口の探索

上顎大臼歯の近心頬側第二根管 (mesiobuccal second canal) は元々細く湾曲も強いいため、初回根管治療においても穿通は難しい。再根管治療ではさらに難しくなるわけだが、最も難しい「再根管治療における近心頬側第二根管のネゴシエーション」ができれば、他の根管は簡単に見えてくるはずである。

再根管治療の場合、狭窄している近心頬側第二根管のネゴシエーションの最初のステップは根管口の探索および根管上部の拡大(コロナルフレア)である。このステップではサージカルバー #330を用いる(マイクロスコープ下で行うことを推奨する)。以前は根管口の探索にダイヤモンドコーティングされた超音波チップを使用していたが、カーバイドバーの方が切削面が滑沢であるため、わずかに残っている狭窄根管管内に入った削片を追うことにより根管を探ることができる(図1~4)。

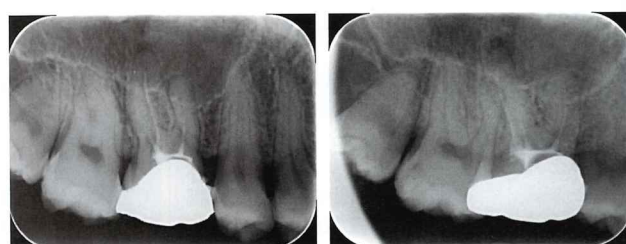


図1 右上第一大臼歯の再根管治療術前のエックス線写真(正放線投影および偏遠心投影)



図2 近心頬側第二根管(矢印)は未処置であった



図3 サージカルバー #330で根管口を探索



図4 削片が入っている近心頬側第二根管が確認できる(矢印)

削片が入っている根管を確認しファイルを挿入する。ここも以前は手用ステンレススチールファイルを使用していたが、現在ではトライオート ZX2+ に装着したスーパーファイル #10を使用している。スーパーファイル #10の先端にプレカーブを付与し、OGPモード(100rpm, 90deg)で根管のネゴシエーションを行う(図5~7)。



図5 #10スーパーファイルにプレカーブを付与し、トライオート ZX2+ の OGP モード (100rpm, 90deg) で根管のネゴシエーション



図6 近心頬側第二根管の拡大終了時



図7 根管充填後のエックス線写真(正放線投影および偏遠心投影)

②根管内レジへの対応

再根管治療の問題点として、狭窄根管のほかに根管内のレジが挙げられる。根管内が複雑に分岐している場合も同様であるが、以前の治療で根管内にレジが作られていると、本来の根管へのネゴシエーションはより一層難しくなる。このような場合に上記のプレカーブを付与したスーパーファイルを用いて根管内をネゴシエーションすると、容易に穿通することができる。



OGP モードで
スーパーファイル
を使用した時の動き

③グライドパスの形成

ニッケルチタンファイル(NiTi ファイル)を使用する前に必要な誘導路のことをグライドパスという。筆者が考えているグライドパスは「#15が無理なく根尖まで穿通している状態」である。

グライドパスの形成を行うにはまず、スーパーファイル#10で根管のネゴシエーションを行い穿通する。電氣的根管長測定器で作業長を測り、グライドパスの形成にはJIZAI Pre 013・JIZAI Pre 020(NiTi ファイル)が有効である。

一方で、#15の代わりにJIZAI Pre 013を使用するのだから、「スーパーファイル#10で穿通した時点でグライドパスは終了している」とする考え方もある。しかし、根尖部でレジが出来ているような症例では、JIZAI Pre 013でグライドパスを形成することが困難な場合もある。その際は、プレカーブを付与したスーパーファイル#15を用いた方が有効な症例もある。

④アピカルインストルメンテーション

グライドパスを形成したら、JIZAIを用いて根尖部の拡大形成を行う。根管の弯曲に追従して形成し、感染源を除去するのが目的であるが、JIZAIは根管の弯曲に追従するニッケルチタンファイルとして有効である。しかし、グライドパスまでのステップで本来の根管を逸脱してしまっていると、JIZAIであってもその逸脱した方向に誘導されてしまう。エンドドントが最も時間をかけるのは根管のネゴシエーションから穿通そしてグライドパスの形成のステップである。

3 若手歯科医師の皆さんへ

このネゴシエーションのコツはマイクロスコープやトライオートZX2+などの機器が必要です。これらの機器を使用できない環境で臨床をしている先生方は、まず手用ファイルで根管のネゴシエーションからグライドパスの形成を行いましう。お勧めは、グライドファインダーの#08および#10とRTファイル#15です。



スーパーファイル
医療機器認証番号: 22000BZX01626000 管理医療機器
一般的名称: 電動式歯科用ファイル 販売名: マニースーパーファイル

JIZAI
医療機器認証番号: 301ABBZX00035000 管理医療機器
一般的名称: 電動式歯科用ファイル 販売名: マニーNiTiファイル

グライドファインダー
医療機器届出番号: 09B1X00006011010 一般医療機器
一般的名称: 歯科用ファイル 販売名: マニーKファイル

RTファイル
医療機器届出番号: 09B1X00006011040 一般医療機器
一般的名称: 歯科用ファイル 販売名: マニーRTファイル

サージカルバー
医療機器届出番号: 09B1X00006003010 一般医療機器
一般的名称: 歯科用カーバイドバー 販売名: マニーカーバイドバー

術者を、手の痛みと
ストレスから解放する
新たな選択。

効率的

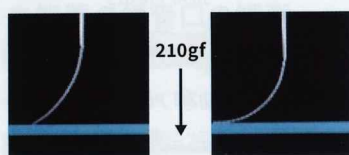
追従性

安全性

RTファイルの特徴

追従性

余計なところを削らず、
楽に根管形状の維持



Kファイル RTファイル
Kファイルよりも柔軟性があります

効率的

Kファイルと比べ、170%の切削力
効率がよく、治療の短縮に



安全性

伸びが分かることによって
交換時期の判別を



RTファイルの断面図



Kファイルの断面図

RTファイルは『レクタングル(長方形)』の断面形状を持っています。一方、Kファイルは正方形の断面をしているため、刃の形状が異なります。長方形は①切削力②柔軟性③耐破折性④排油性を向上させます。

サイズ	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80
作業部長												
21mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
31mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

愛顧感謝キャンペーン
特別価格


3個以上のご購入で!

■標準価格(6本入/1個2,000円)

#15~40

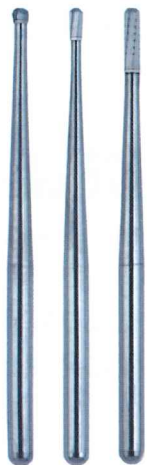~~6,000円~~ (税別)

“もう少しで届くのに” という歯痒い思いをなくします。




半チャックで使用していた悩みを解決！

ロングテーパーであるため視野の確保が可能。

埋伏歯、メタルポスト、メタルコア、ファイバーコアなどの除去に効果を発揮！

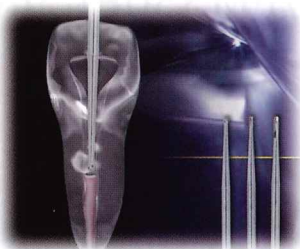※5倍速コントラを推奨します。



愛顧感謝キャンペーン
特別価格

2個以上のご購入で！

■標準価格(4本入/1ケース 2,800円)
MZB+

~~5,600円~~ (税別)

愛顧感謝キャンペーン
特別価格

2個以上のご購入で！

■標準価格(4本入/1ケース 2,300円)
#2、#330、#1557

~~4,600円~~ (税別)

CASE REPORT 掲載！

11.00 25.00	11.00 28.00
#MZB+	#MZB+
199/015	199/015
SPECIAL SHAPE	

1.00 25.00	1.00 28.00
#2	#2
001/010	001/010
ROUND(PLAIN)	

2.00 25.00	2.00 28.00
#330	#330
232/008	232/008
PEAR(PLAIN)	

4.00 25.00	4.00 28.00
#1557	#1557
137/010	137/010
CYLINDER ROUND END(PLAIN)	

サージカルバー
形態表の見方

最高許容回転数
120,000min⁻¹

作業部長
全長

注文番号

形状/最大径

形状

ピースリーマCA・ゲーツドリルCA

医療機器承認番号 22000BZX01630000
管理医療機器 一般的名称：歯科用根管口拡大ドリル
販売名 マニーピースリーマ

医療機器承認番号 22000BZX01631000
管理医療機器 一般的名称：歯科用根管口拡大ドリル
販売名 マニーゲーツドリル

根管口の拡大にはこれ！

32mmに加え、28mmは小児や臼歯部の治療に！

38mmは犬歯などに有効です。



愛顧感謝キャンペーン
特別価格

3個以上のご購入で！

■標準価格(6本入/1個 3,300円)
#1~6

~~9,900円~~ (税別)



愛顧感謝キャンペーン
特別価格

3個以上のご購入で！

■標準価格(6本入/1個 3,300円)
#1~6

~~9,900円~~ (税別)

除去用
バー特集

折れない工夫、切れる設計! タッチ感に変化。 除去効率を求めてM330がM330Pにパワーアップ!



※写真の商品は I クラス【45形態】



M330



M330P

パワー
アップ!

ご使用のポイント

- ①フェザータッチで十分な切削感が得られます。
- ②十分な注水により製品性能を最大限に発揮し

特別
価格

5個以上の
ご購入で!

特別
価格

5個以上の
ご購入で!

特別
価格

■標準価格

(10本入/1シート 2,100円)
M330P、M330、M1557、M1558
I クラス
【3形態/M330P、M330、M1557、M1558】

~~10,500円~~ (税別)

■標準価格

(10本入/1シート 2,800円)
M1931、M1957、M1958、M1970
II クラス(リムーバルバー)
【4形態/M1931、M1957、M1958、M1970】

~~14,000円~~ (税別)

■標準価格

(10本入/1シート)
MM16DB、MM14CF、MM21DC、MM23DC、MM15EZ、MM15ZB
III クラス(リムーバルバー)
【6形態/MM16DB、MM14CF、MM21DC、MM23DC、MM15EZ、MM15ZB】

~~10,600円~~ (税別)

形態表の見方

○	最高許容回転数
010/005	形状/最大径
0.50/19.30	作業長/全長
M1/4	注文番号
30万回転	300,000min ⁻¹
20万回転	200,000min ⁻¹
15万回転	150,000min ⁻¹

最小包装単位
○ I クラス
10本入/シート
△ II クラス
10本入/シート
● III クラス
10本入/シート

ROUND (PLAIN)	010/005 0.50/19.30 M1/4	001/006 0.60/19.30 M1/2	001/008 0.80/19.30 M1	001/010 1.00/19.30 M2	001/012 1.20/19.30 M3	001/014 1.40/19.30 M4	001/016 1.60/19.30 M5	001/018 1.80/19.30 M6	001/021 2.10/19.30 M7	001/023 2.30/19.30 M8	INVERTED CONE (PLAIN)
110/006 0.70/19.30 M33 1/2	010/008 0.80/19.30 M34	010/010 1.10/19.30 M35	010/012 1.20/19.30 M36	010/014 1.40/19.30 M37	CYLINDER FLAT END (PLAIN)	107/010 4.00/19.30 M57	107/012 4.00/19.30 M58	TAPER FLAT END (PLAIN)	171/009 5.00/21.00 M169L	168/010 4.00/19.30 M170	168/012 4.00/19.30 M171
168/016 4.00/19.30 M172	PEAR (PLAIN)	237/008 3.00/19.30 M245	232/008 2.00/19.30 M330P	232/008 2.00/19.30 M330	232/010 2.00/19.30 M331	232/012 2.00/19.30 M332	CYLINDER FLAT END (CROSSCUT)	107/010 4.00/19.30 M557	107/012 4.00/19.30 M558	107/014 4.00/19.30 M559	107/016 4.00/19.30 M560
TAPER FLAT END (CROSSCUT)	168/009 4.00/19.30 M699	168/010 4.00/19.30 M700	168/012 4.00/19.30 M701	171/012 7.00/21.00 M701L	168/016 4.00/19.30 M702	168/021 4.70/19.30 M703	CYLINDER ROUND END (PLAIN)	137/010 4.00/19.30 M1157	137/012 4.00/19.30 M1158	137/014 4.00/19.30 M1159	CYLINDER ROUND END (CROSSCUT)
137/010 4.00/19.30 M1557	137/012 4.00/19.30 M1558	137/014 4.00/19.30 M1559	SPECIAL SHAPE	196/016 5.50/21.00 MM16DB	164/014 6.00/21.00 MM14CF	166/014 8.90/23.40 MCE4CF	168/012 4.00/19.30 M701X	137/010 4.00/19.30 MM21DC	168/012 4.00/19.30 MM23DC	198/015 9.00/21.00 MM15EZ	199/015 11.00/23.00 MM15ZB
FINISHING (PLAIN)	277/023 4.00/20.00 M7408	469/009 4.00/19.30 M7901	496/010 4.00/19.30 M7902	496/012 4.00/19.30 M7903	REMOVAL (CROSSCUT)	237/010 2.00/19.00 M1931	137/010 4.00/19.00 M1957	137/012 4.00/19.00 M1958	194/010 4.00/19.00 M1970		

滅菌済針付縫合糸

完全復活!!

医療機器承認番号 20900BZZ00869000
高度管理医療機器 一般名称: 滅菌済絹製縫合糸
販売名 マニーシルク

医療機器承認番号 21100BZZ00049000
高度管理医療機器 一般名称: ポリアミド縫合糸
販売名 マニーナイロン

医療機器承認番号 21100BZZ00050000
高度管理医療機器 一般名称: ポリエステル縫合糸
販売名 マニーポリエステル

優れた切れ味。錆びにくく折れにくい、自社開発のマニーハードファイバーステンレススチールと、独自のレーザー微細加工技術でつくられています。



感謝キャンペーン
特別価格

2個以上のご購入で!

■標準価格(12本入/1箱 5,800円)

#1~29

~~11,600円~~ (税別)

各種縫合手順を動画でご覧いただけます。

※PC・タブレット・スマートフォンでご覧ください。(movie.dental-plaza.com) ※QRコード読み取りアプリによっては動画サイト(ビデオライブラリー)のトップ画面にアクセスされることがあります。



全品番ラインナップ

注文番号	縫合針	縫合糸
売れ筋 No.2 1	逆三角 強弯 針長 18mm 針部径 0.43mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
2	逆三角 強弯 針長 25mm 針部径 0.73mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
売れ筋 No.1 3	逆三角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
おすすめ 4	先端角 強弯 針長 18mm 針部径 0.38mm	5-0 ポリエステル ブラックブレード 45cm (18")
おすすめ 5	先端角 強弯 針長 18mm 針部径 0.53mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
6	丸直 針長 20mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
7	逆三角 弱弯 針長 13mm 針部径 0.53mm	4-0 ナイロン ブラックブレード 45cm (18")
8	逆三角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 ポリエステル ブラックブレード 45cm (18")
9	丸 強弯 針長 18mm 針部径 0.43mm	5-0 ポリエステル ブラックブレード 45cm (18")
10	丸 強弯 針長 18mm 針部径 0.53mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
11	丸 強弯 針長 16mm 針部径 0.73mm	2-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
12	丸 釣針 針長 16mm 針部径 0.53mm	4-0 ナイロン ブラックブレード 45cm (18")
13	丸 釣針 針長 16mm 針部径 0.63mm	3-0 ナイロン ブラックブレード 45cm (18")
14	丸 強弯 針長 13mm 針部径 0.53mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
15	丸 強弯 針長 16mm 針部径 0.53mm	4-0 ナイロン ブラックブレード 45cm (18")

注文番号	縫合針	縫合糸
16	丸 強弯 針長 20mm 針部径 0.63mm	3-0 ナイロン ブラックブレード 45cm (18")
17	丸 強弯 針長 20mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
18	逆三角 弱弯 針長 11mm 針部径 0.43mm	4-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm (18")
売れ筋 No.3 19	逆三角 弱弯 針長 13mm 針部径 0.38mm	5-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm (18")
20	逆三角 弱弯 針長 13mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
21	逆三角 強弯 針長 16mm 針部径 0.58mm	4-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm (18")
22	逆三角 強弯 針長 16mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
23	逆三角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm (18")
24	逆三角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
25	丸 弱弯 針長 13mm 針部径 0.43mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
26	丸 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
おすすめ 27	先端角 弱弯 針長 13mm 針部径 0.43mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
おすすめ 28	先端角 強弯 針長 16mm 針部径 0.48mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
おすすめ 29	先端角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.53mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")

※刃部先端のみに刃をつけることで切れ味を高め、組織の損傷を最小限に抑えています。

リーマ

医療機器届出番号 09B1X00006010010
一般医療機器 一般名称: 歯科用根管リーマ
販売名 マニーリーマ



- 材料にマニー独自の精線加工を加え、粘り強さ、折れにくさ、硬度をUP!
- シャープなエッジにより切れ味を高く、表面を鏡面仕上げにすることで、切削片などの排出性も向上!
- ラバーストッパーの色と形により、長さや操作方法が容易に分かります。

医療感謝キャンペーン
特別価格 5個以上のご購入で!

■標準価格(6本入/1個 2,000円)
#10~40
~~10,000円~~(税別)

医療感謝キャンペーン
特別価格 3個以上のご購入で!

■標準価格(6本入/1個 2,500円)
#06、08、45~80
~~7,500円~~(税別)

Kファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011010
一般医療機器 一般名称: 歯科用ファイル
販売名 マニーKファイル



医療感謝キャンペーン
特別価格 5個以上のご購入で!

■標準価格(6本入/1個 2,000円)
#10~40
~~10,000円~~(税別)

医療感謝キャンペーン
特別価格 3個以上のご購入で!

■標準価格(6本入/1個 2,500円)
#06、08、45~80
~~7,500円~~(税別)

Hファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011020
一般医療機器 一般名称: 歯科用ファイル
販売名 マニーHファイル



医療感謝キャンペーン
特別価格 5個以上のご購入で!

■標準価格(6本入/1個 2,000円)
#10~40
~~10,000円~~(税別)

医療感謝キャンペーン
特別価格 3個以上のご購入で!

■標準価格(6本入/1個 2,500円)
#08、45~80
~~7,500円~~(税別)

角ブローチ

医療機器届出番号 09B1X00006008010
一般医療機器 一般名称: 歯科用ブローチ
販売名 マニー角ブローチ

鋭いエッジでワッテを巻きやすく! 鏡面仕上げによりワッテを根管内に残留させやすく! 操作性を向上!



医療感謝キャンペーン
特別価格 2個以上のご購入で!

■標準価格(6ダース入/1個 4,800円)
#000~3
~~9,600円~~(税別)

クレンザー

医療機器届出番号 09B1X00006009010
一般医療機器 一般名称: 歯科用クレンザー
販売名 マニークレンザー



医療感謝キャンペーン
特別価格 2個以上のご購入で!

■標準価格(6ダース入/1個 6,700円)
#000~3
~~13,400円~~(税別)

ご注文方法のご注意

○個以上のご購入で!

と、記載のある商品は表記の個数以上でご注文ください。

※表記の個数以上による販売になります。 ※個数以上の記載がない商品は、1個からご注文いただけます。

例

グライドファインダー		
コードNo.202490380、381		
No.	長さ	25mm
08	1	
10	1	1
12		2
15		
合計	2	3

※2個以上からのご注文となります。

製造販売 マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
【国内営業G】 Tel:028-667-8591/Fax:028-667-8593 URL:http://www.mani.co.jp

発売 株式会社モリタ

大阪本社 ■〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525
東京本社 ■〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161

錆びに強く、オートクレーブ可能



医療機器届出番号 09B1X00006001010
一般医療機器 一般の名称：歯科用スチールバー
販売名 マニーステンレスバー

MI重視

- MI(ミニマルインターベーション)
- 軟化象牙質を選択的に除去



医療機器届出番号 09B1X00006001020
一般医療機器 一般の名称：歯科用スチールバー
販売名 マニーステンレスバーハード

切削性重視

- 切削性持続!
- 切れ味良好!



	全長	最高許容回転数
	22mm	1,200min ⁻¹
	28mm	1,200min ⁻¹
	34mm	800min ⁻¹

■最小包装単位:6本入/ケース ※34mmは、#2と#6のみ
■規格:22、28mm:1/2、1、2、3、4、5、6、7、8 :34mm:2、6

サイズ	刃部最大径
1/2	0.6mm
1	0.8mm
2	1.0mm
3	1.2mm
4	1.4mm
5	1.6mm
6	1.8mm
7	2.1mm
8	2.3mm

	全長	最高許容回転数
	22mm	4,000min ⁻¹
	28mm	4,000min ⁻¹

■最小包装単位:6本入/ケース
■規格:1/2、1、2、3、4、5、6、7、8
■アソート:1~6

サイズ	刃部最大径
1/2	0.6mm
1	0.8mm
2	1.0mm
3	1.2mm
4	1.4mm
5	1.6mm
6	1.8mm
7	2.1mm
8	2.3mm



3個以上の
ご購入で!

■標準価格

(6本入/1ケース 3,200円)

~~9,600円~~ (税別)



3個以上の
ご購入で!

■標準価格

(6本入/1ケース 3,200円)

~~9,600円~~ (税別)

ご愛顧感謝キャンペーン Part 2

ご注文書 ①

MIステンレスバーCA				
コードNo.202490696~698				
No.	長さ	22mm	28mm	34mm
1/2				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
1~6 (アソート)				
合計				

※3個以上からのご注文となります。

ステンレスバーハードCA		
コードNo.202490689、202490699		
No.	長さ	22mm 28mm
1/2		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
1~6 (アソート)		
合計		

※3個以上からのご注文となります。

Kファイル				
コードNo.202390052~055				
No.	長さ	21mm	25mm	28mm 31mm
10				
15				
20				
25				
30				
35				
40				
15~40 (アソート)				
合計				

※5個以上からのご注文となります。

コードNo.202390056~059				
No.	長さ	21mm	25mm	28mm 31mm
06				
08				
45				
50				
55				
60				
70				
80				
45~80 (アソート)				
合計				

※3個以上からのご注文となります。

リーマ				
コードNo.202390040~043				
No.	長さ	21mm	25mm	28mm 31mm
10				
15				
20				
25				
30				
35				
40				
15~40 (アソート)				
合計				

※5個以上からのご注文となります。

コードNo.202390044~047				
No.	長さ	21mm	25mm	28mm 31mm
06				
08				
45				
50				
55				
60				
70				
80				
45~80 (アソート)				
合計				

※3個以上からのご注文となります。

RTファイル				
コードNo.202390400、401、404、405				
No.	長さ	21mm	25mm	28mm 31mm
15				
20				
25				
30				
35				
40				
15~40 (アソート)				
合計				

※3個以上からのご注文となります。

A

お名前	貴医院名	お出入りの歯科商店名
-----	------	------------

ご愛顧感謝キャンペーン Part 2

ご注文書 ②

Mカーバイドバー+FG

<Iクラス>コードNo.202490406				<IIクラス>コードNo.202490407				<IIIクラス>コードNo.202490408			
形態番号	個数	形態番号	個数	形態番号	個数	形態番号	個数	形態番号	個数	形態番号	個数
M1/4		M34		M330P		M701L		M7408		MM16DB	
M1/2		M35		M330		M702		M7901		MM14CF	
M1		M36		M331		M703		M7902		MCE4CF	
M2		M37		M332		M1157		M7903		M701X	
M3		M57		M557		M1158		M1931		MM21DC	
M4		M58		M558		M1159		M1957		MM23DC	
M5		M169L		M559		M1557		M1958		MM15EZ	
M6		M170		M560		M1558		M1970		MM15ZB	
M7		M171		M699		M1559		合計		合計	
M8		M172		M700				※5個以上からのご注文となります。			
M33 1/2		M245		M701							
合計		合計		合計		合計					

※5個以上からのご注文となります。

Hファイル

コードNo.202390064～067					コードNo.202390068～071						
No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm	No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
10						08					
15						45					
20						50					
25						55					
30						60					
35						70					
40						80					
15～40 (アソート)						45～80 (アソート)					
合計						合計					

※5個以上からのご注文となります。

※3個以上からのご注文となります。

ピースリーマCA

コードNo.202390460～462				
No.	長さ	28mm	32mm	38mm
1				
2				
3				
4				
5				
6				
1～6 (アソート)				
合計				

※3個以上からのご注文となります。

ゲーツドリルCA

コードNo.202390143～145				
No.	長さ	28mm	32mm	38mm
1				
2				
3				
4				
5				
6				
1～6 (アソート)				
合計				

※3個以上からのご注文となります。

サージカルバーFG

コードNo.202490390～393			
No.	長さ	25mm	28mm
MZB*			
2			
330			
1557			
合計			

※2個以上からのご注文となります。

滅菌済針付縫合糸

コードNo.202390160			
番号	個数	番号	個数
合計		合計	

※2個以上からのご注文となります。

ダイヤバーFGブリスターパック

コードNo.202490639～659、662、685			
形態番号	個数	形態番号	個数
合計		合計	

※3個以上からのご注文となります。

角ブローチ

コードNo.202390167	
No.	個数
000	
00	
0	
1	
2	
3	
合計	

※2個以上からのご注文となります。

クレンザー

コードNo.202390165	
No.	個数
000	
00	
0	
1	
2	
3	
合計	

※2個以上からのご注文となります。

Aご注文 2025年 月 日

キャンペーン期間 2025年 10月21日(火) → 11月20日(木)

お名前 貴医院名

ご住所 〒

TEL ()

お出入りの歯科商店名

Mカーバイドバー+FG<IIIクラス>以外のご注文は、セット単位にてお願いいたします。

- 本注文書に必要事項をご記入の上、お出入りの歯科商店にお渡しください。

●特別セールにつき、お買い上げ後の返品・交換はいたしかねますので、ご注意ください。

●勝手ながらRTファイルの#45～80、リーマ・K・Hファイルの#90～140、18mmリーマ・ファイルは対象外とさせていただきます。

●商品の詳細パンフレットのご入用の方は、お出入りの歯科商店にご依頼ください。
- セールを実施していない地域がございます。予めご了承ください。

■掲載商品の標準価格は2025年10月現在のものです。標準価格には消費税等は含まれません。

■数量に限りがありますので、期間中でもセールを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

■お問い合わせはお出入りの歯科商店までお願いします。

■掲載されているコードNoは発売元(株)モリタのコードNoです。