

DR. OTANI SELECT

PREPARATION BUR KIT



THIS KIT CAN BE USED FOR A WIDE RANGE OF CASES.

BY Takafumi Otani DDS, Ph.D, MSD



大谷 恭史 先生


大阪大学歯学部 卒業
大阪大学大学院歯学研究科(歯科補綴学第一教室) 卒業(歯学博士取得)
米国ワシントン大学 補綴専門医プログラム卒業
米国ワシントン大学歯学修士取得
DENTAL OFFICE OTANI(大阪府)
米国歯科補綴専門医
大阪大学 臨床准教授
ワシントン大学 招聘教授




DENTAL
OFFICE
OTANI

・ クラウン形成


01

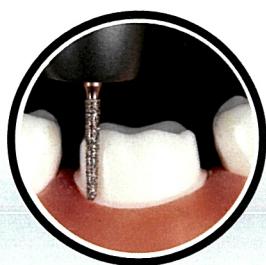


軸面形成
KP6847KR-014,016

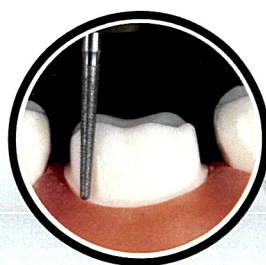


軸面仕上げ形成
8850-014

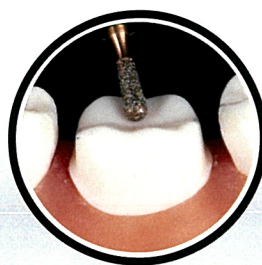

咬合面形成
KP6830RL-018

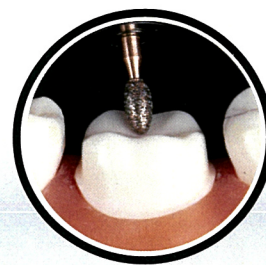

咬合面形成
KP6379-023

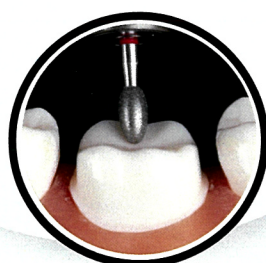

咬合面仕上げ形成
8379-023




フィニッシュライン仕上げ
10839-012




・ インレー形成

02

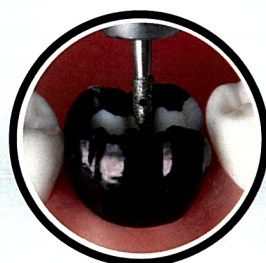


窩洞形成
959KRD-018

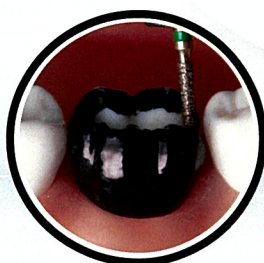


隣接面ボックス形成
KP6847KR-014




隣接面ボックス形成
SFD7-2 ※オプション

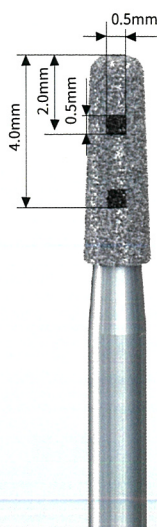

隣接面仕上げ形成
8847KR-014

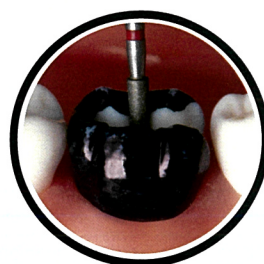


窩洞仕上げ形成
8959KR-018

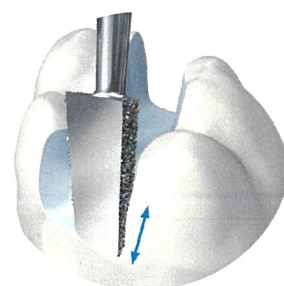


• ベニア形成

01

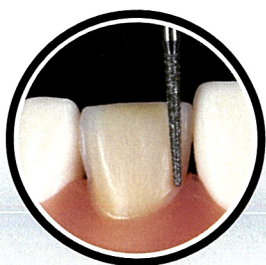

唇面形成
850-012

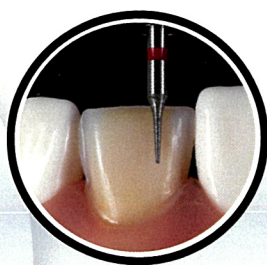

切端形成
8392-016



切端形成
8392-016




隅角形成
8392-016

• RBFDP形成

01




舌側隣接面形成
850-014

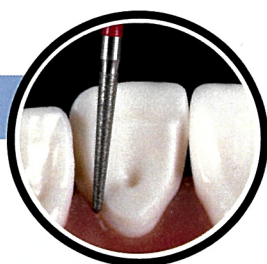

フィニッシュライン仕上げ
8850-014



舌側形成
KP6847KR-014

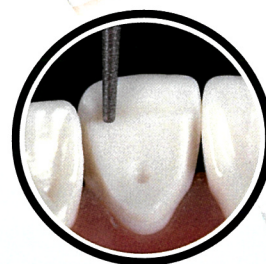

舌側仕上げ形成
8847KR-014

• オーバーレイ形成

02




ガイドグループ付与
DM10-009 ※オプション



咬合面形成
KP6379-018



ベベル付与
KP6379-018

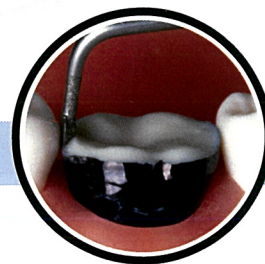

隣接面ベベル付与
SF58D-027 ※オプション



関連製品 コメット エアスケーラー用チップ

形成と仕上げを容易にする40 μ mのダイヤモンドコーティング

- 半面カット＝隣在歯&歯肉の損傷を防ぐ
- 壁面に丸みを帯びた形態付与が可能



隣接面のボックス形成



隣接面へのベベル付与

接続可能なエアスケーラー

Normal Connection

Ti Max S970 シリーズ
SonicFlex 2000, 2003 シリーズ
ルーティン、エミー
エアーソルフィー
シロエアー L



Quick Connection

SonicFlex 2008 シリーズ
※ Quick タイプをご注文の際には
SFD または SFM の後に "Q" を付
けてください
例: SFD7-1



医療機器の分類：管理医療機器 販売名：コメット ソニックチップ
一般的名称：歯科用エアスケーラ 届出番号：230AKBZX00055000
特定保守管理医療機器

関連製品 コメット ダイヤモンドバー FG ◇IAO

ダイヤモンド粒子とパールビーズの融合


パールビーズ＝切削力のカギ
ダイヤモンドエッジがしっかり**“食い込む”**

パールビーズの隙間を持たせたことで、ダイヤモンドエッジが
切削対象にしっかり食い込み効率的に**高い切削力**が得られます

パールビーズ＝長寿命のカギ
鋭いダイヤ粒子により**耐年数の長期化**

従来のコメットダイヤモンドバーに比べ平均**34%**長寿命化

※試験データ：コメット社テストラボによる機械的切削試験 2020

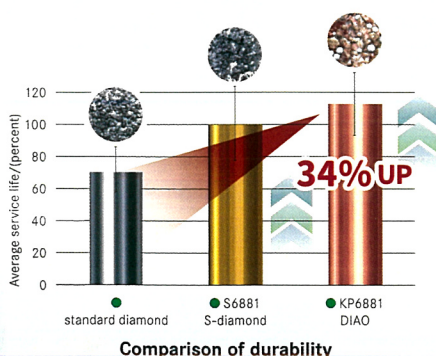

製品の詳細はこちら▶



医療機器の分類：一般医療機器
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
販売名：コメット ダイヤモンドバー
届出番号：27B2X00091000001

Crown & Veneer & RBFDP Kit #01

品番	価格
LD3111	20,600円
総入数	ケース
12本	滅菌可
ステンス製ケース(12本立)	
CA・FGバー収納可能	



Inlay & Onlay & Overlay Kit #02

品番	価格
LD3110	16,800円
総入数	ケース
10本	滅菌可
ステンス製ケース(12本立)	
CA・FGバー収納可能	



キット構成品詳細

01: Crown & Veneer & RBFDP LD3111

品番(7-1)	KP6847KR 014	8847KR 014	KP6847KR 016	8847KR 016	KP6379 023	8379 023	KP6830RL 018	850 012	850 014	8850 014	8392 016	10839 012
作業長(mm)	8.0				4.2		5.0	10.0			5.0	-
先端径(mm)	0.89		1.08		-		-	0.6	0.8		-	-
最大径(mm)	1.4		1.6		2.3		1.8	1.2	1.4		1.6	1.2
全長(mm)	21.0				19.0			23.0	24.0		19.0	21.0
価 格	7,800円	6,500円	7,800円	6,500円	7,800円	3,900円		6,500円			3,200円	

入数：5本 推奨回転数：コ-ス・ミディアム毎分16万回転, ファイン毎分2万回転

02: Inlay & Onlay & Overlay LD3110

品番(コ-ス)	959KRD 018	8959KR 018	845KRD 025	8845KR 025	KP6830RL 018	8830RL 018	KP6847KR 014	8847KR 014	KP6379 018	8379 018
作業長(mm)	5.5		4.0		5.0		8.0		3.4	
先端径(mm)	1.4		1.8		-		0.89		-	
最大径(mm)	1.8		2.5		1.8		1.4		1.8	
全長(mm)	20.0		19.0		19.0		21.0		19.0	
価格	4,500円	3,900円	4,500円	3,900円	3,900円	3,200円	7,800円	6,500円	5,200円	3,900円

入数：5本 推奨回転数：コ-ス・ミディアム毎分16万回転, ファイン毎分2万回転

関連製品詳細

ソニックチップ



▲接続可能な
エアスケーラー
はコチラから



品番	SFD7-1※	SFD7-2※	SFM7-1※	SFM7-2※
用途	小白歯遠心用	大白歯遠心用	小白歯近心用	大白歯近心用
作業長(mm)	7.3	7.3	7.3	7.3
先端幅(mm)	2.45	3.4	2.45	3.4
最大幅(mm)	3.0	3.95	3.0	3.95
価格(1入)	29,800円			


品番	SF58D-027	SF58M-027
用途	遠心形成用	近心形成用
最大径(mm)	2.7	2.7
価格(1本入)	29,800円	

※印が入っている製品には Quick タイプがございます

プレップマーカー ダイヤモンドバー

適正回転数
毎分4万回転

※CAD/CAM冠にお勧め 前歯部
切縁向け

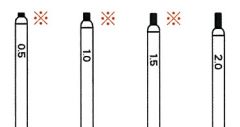

品番(ミディアム)	DM05 009	DM10 009	DM15 009	DM20 009
作業長(mm)	0.5	1.0	1.5	2.0
最大径(mm)	0.9	0.9	0.9	0.9
全長(mm)	18.0			
最高回転数 (毎分)	16万			
価格(5入)	10,400円			



Preparation Private Seminar

少人数制
プライベートハンズオンセミナー実施中

お申込み

▼お問い合わせ▼



講師 大谷 恭史 先生

- ☒ お悩みに合わせて受講内容をカスタマイズ
- ☒ 聞きたいことがその場でもれなく聞ける
- ☒ 気心の知れた仲間と小人数で受講できる

受講料 要相談

(コメントバーセット含)

※詳しくはお問い合わせください



受講内容やお申込み、日程の確認など
セミナーに関するお問い合わせは
QRコードよりお願いいたします



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL(06)6773-3333 (代)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL(03)3835-2653 (代)

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL(092)575-6060 (代)

モモセ歯科商会



<https://www.momose-dm.co.jp>

お問い合わせ