



一目でわかる 残量チェック

ガスレベルインジケータ

液体ガスは圧力計では残量がわかりにくく、
交換のタイミングを逃しがちでした。

その結果、最後まで使い切れずに交換することも…。

そこで登場したのが

「ガスレベルインジケータ」

誰でも簡単に、正確な残量確認が可能に！



処置時の安心をサポート

サイコリッチ使用前の残量確認にも最適。
交換判断がスムーズに。



初期化は簡単ワンタッチ

新しいボンベに取り付けてボタンを押す
だけで設定完了！



10段階表示で残量が見える

250gごとの残量表示で、ひと目でわかる



<寸法>

本体:(H)87.6mm (W)43mm (D)30mm

台座部:(H)16.3mm (Φ)105 コード長:約1m

<取扱店>



本社/〒174-0056 東京都板橋区志村1-28-1 ☎03(3966)7736
営業所/大阪☎06(6308)1173 福岡☎092(432)0770 札幌☎011(622)7532
E-mail:sedent@sedent.co.jp URL <http://www.sedent.co.jp>

「笑気麻醉器を使用中に笑気が無くなった」 「ボンベ交換のタイミングがわからない」 そんな悩みを解決するために！



＜ガスレベルインジケータ＞は簡単設置、シンプルな操作で
笑気ガス残量を可視化し“見える管理”を実現します。

設置方法

(1) 12年架台をご使用の場合



① 架台のポンベ設置部内にセンサを入れ込みます。



② ケーブルを側面に附属のテープで固定します。

※このテープはポンベ設置時の打当からケーブルを保護するものです。剥がれないように、しっかり押さえて貼付してください。

(2) 06年架台をご使用の場合



① 架台のポンベ設置部内の穴からケーブルを通します。




② ケーブルの余長をポンベ設置部から引き出します。



③ センサを入れ込みます。

この時、センサでケーブルの余長を踏まないように十分に引き出してください。

操作方法

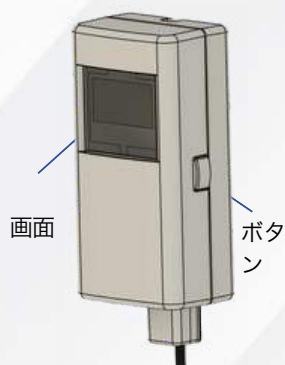

① 笑気ガスポンベを設置します。

② コントローラ側面のボタンを1回押して離します。

③ 初めてお使いの時、または新しいボンベに交換した時には確認画面が表示されますので、ボタンを一回押してください。

新しいガスポンベを
セットした場合は
ボタンを押して下さい


通常は本画面は表示されず、④の画面が表示されます。

④ 画面に残量が表示されます。

残量が減るにつれ、インジケータの表示も減ります。



⑤ 残量が50g以下になると、以下の表示となります。

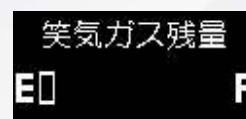

※この画面が表示されましたら
ボンベの交換を推奨いたします

取り付け例

コントローラ背面にはマグネットがあるため、金属部分に装着が可能です。
また専用のストラップが付属いたします。



【12年架台】



【06年架台】



【12年架台】
【ストラップ使用】



【06年架台】
【ストラップ使用】

さらに詳しく知りたい方
説明用動画はこちらから

