

□ 腔 内 装 置 洗 浄 剤



# アルバデント クイックムース

□ 腔 内 装 置 洗 浄 剤

**ALBADENT QUICK MOUSSE**


**酵素 + 過酸化化物 + 天然エキス**

**トリプルパワー**



**1分で“汚れ”も“菌※”も簡単きれい!  
しかもブラッシング不要!**

※ カンジダ菌に対する除菌効果(当社試験)

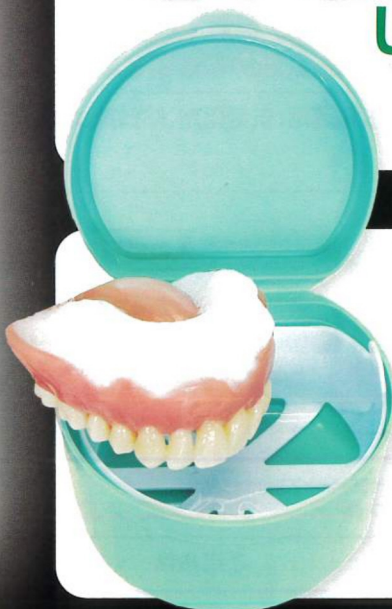

□ 腔 内 装 置 洗 浄 剤

マウスピース    矯正用リテーナー    部分床義歯    総義歯



その他の用途: ノンクラスデンチャー、ナイトガード、マウストレー

MADE IN JAPAN

**MUTSUMI**  
技術と品質で築く、信頼のコミュニケーション。



例えばこんな時に便利です

洗いたいと思ったときに“泡をかけるだけ”の短時間洗浄

食後に



旅行や外出先で



訪問診療・介護先で




## 使用方法

① 容器を軽く振る。



② 口腔内装置に泡を押し出す。※1※2

【目安】総義歯(上顎両面)  
:3~4プッシュ

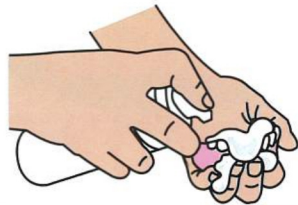

③ 手で泡を全体にひろげ1分~5分おく。



④ 流水でしっかりすすぐ。



汚れがひどい場合は、義歯(入れ歯)専用のブラシでブラッシングしてください。

※1:口腔内装置の大きさにより、洗浄剤の量を調整してください。

※2:口の中で直接使用しないでください。

## 使用上の注意

- 本製品に含まれる成分により過敏症状を起こしたことがある人は使用しないでください。
- 用途以外に使用しないでください。
- 小児や第三者の監督が必要な方の手が届かない、直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- 40℃以上の環境で保管した場合、液が黄色く色づくことがあります、品質に問題はありません。
- 本製品に触れた手で口や目を触らないでください。
- 使用後は手をよく洗ってください。
- 義歯は60℃以上のお湯で洗うと変色・変形することがありますので、ご注意ください。

### 応急処置

- 目に入った場合は、直ちに流水で15分間以上洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合は、水で口の中を洗浄し、医師の診断を受けてください。

成分:酵素、過酸化水素、除菌剤、界面活性剤、植物由来抗菌剤、湿潤剤、安定化剤、防錆剤、増粘剤、香料  
液性:中性 ■ 内容量:150ml(約210プッシュ)

MADE IN JAPAN

## ムツミ入れ歯ケース

インナーバスケット(内かご)には、フルデンチャーまで収まり、義歯洗浄の際に大変便利です。

デンチャーボックス  
インナーバスケット グリーン

- サイズ/92mm×85mm×57mm
- 色/グリーン

インナーバスケット付



デンチャーボックス  
ホワイト

- サイズ/95mm×73mm×55mm
- 色/ホワイト

入れ歯専用歯みがき

## アルバデント

研磨剤が入っていない為、入れ歯を傷つけず  
いやなニオイ、取れにくい汚れを落とし、  
清潔にします。



製造販売元 睦化学工業株式会社

ご用命は

お問い合わせホットライン ☎ 0120-11-2354 歯科材料サービス係

〒510-0804 三重県四日市市万古町8-9 ☎059-331-2354(代) ☎059-331-1044  
<http://www.mutsumikagaku.co.jp>