

YOSHIDA

治療器具運搬ロボット

カチャカ

kachaka

あんしんサポート

かんたん操作



ボタンを押せばすぐに来る
治療器具の運搬



もう行ったり来たりしない
消毒室への片付け

■使用方法(例)



① 治療が終わったら
kachakaボタンを押す。



② 運ばれてきた滅菌棚に
治療器具を片付ける。




③ もう一度ボタンを押すと
治療器具が滅菌室へ移動。

■ 使用例

基本セットの搬送・片付け

滅菌室と各ユニット間の移動の代替に

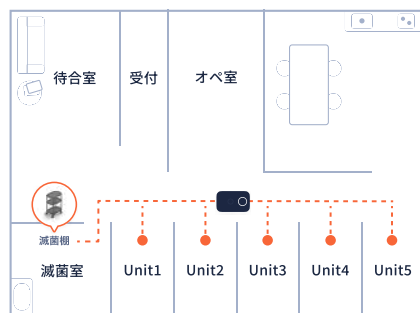


おすすめ棚割①

上段：基本セット
中段：使用済器具
下段：ゴミ箱

治療器具のオンデマンド運搬

共通で使用する器具がすぐ手元に

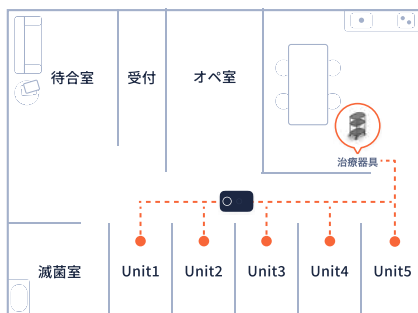


おすすめ棚割②

上段：充填材
中段：口腔内カメラ
下段：フリー

患者ファイルの運搬

受付との患者ファイルのやり取りに

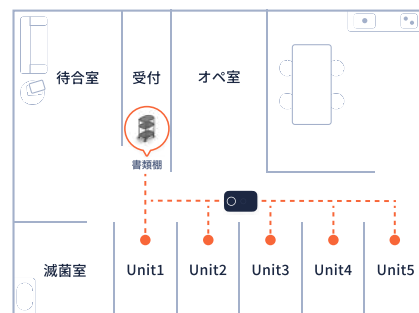

おすすめ棚割③

上段：患者ファイル
中段：タブレット
下段：ゴミ箱

■ 本体・アクセサリ



kachaka本体



kachakaワゴン



kachakaボタンハブ



kachakaボタン

■ 仕様

【本体】

[外形寸法] 幅240 mm x 奥行387 mm x 高さ124 mm

[質量] 10.0 kg

[移動速度] 最速800 mm/秒 (カチャカシェルフ搭載時：500 mm/秒)

【ワゴン】

[外形寸法] W:393mm×D:302mm×H:700mm

※旋回直径540mm、最小通路幅550mm

[素材] トッププレート：アルミニウム、フレーム：スチール、
キャスター：樹脂、スチール、エラストマー、ワゴン：スチール

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 ± 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)

●発売元：株式会社Preferred Robotics 東京都千代田区大手町一丁目6番1号大手町ビル

●販売元：株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9



(01)02747937022429

C02673/2025 年 1 月 /@20/ 新