



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

新発売




感染予防の必需品

カルプーレ[®] フィンガープロテクター

(カルプーレ[®]専用)

～医療従事者の事故防止のために～

2つのパターンの
針刺し防止を
目的としています。

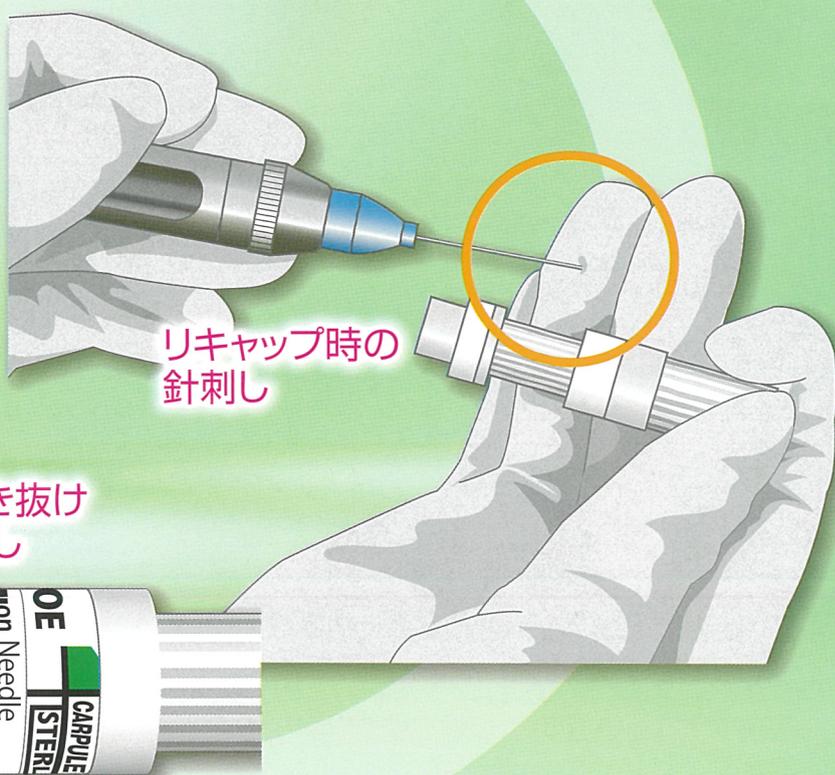

リキャップ時の
針刺し

キャップ突き抜け
による針刺し



日本赤十字社和歌山医療センター
感染症内科 小林 謙一郎 先生

【解説文】

歯科診療では針刺しが多く、報告されている事例は一部にとどまります^{*1}。歯科診療所における針刺し調査では、歯科医師の約7割が診療中の針刺しの経験がありました。麻酔用注射針による、リキャップ時の受傷が多くみられました^{*2}。また、両手でのリキャップは、片手と比べて針刺しの頻度が2倍高くなることが報告されており^{*3}、なるべく片手で行うことが推奨されています。可能な限りリキャップを避けるべきと考えられていますが、再麻酔の想定や、注射針の取り外しなど、リキャップを避けられない場合も少なくありません。

『カルプーレフィンガープロテクター』は、操作性に優れ、指先をしっかりと保護しながら、リキャップやシリンジからの取り外し作業時における針刺しを予防します。

針が曲がった場面でも、針先の逸脱を抑え、専用廃棄容器へ安全に廃棄することが可能です。

参考文献：裏面参照



カルプーレ[®]フィンガープロテクターの特徴

■ 針刺し事故による医療従事者の感染防止を目的に注射針製造元と共同開発した、針刺し防止器具です。


■ オートクレーブ滅菌可能(121℃/乾燥工程不可)で繰り返しの使用が可能です。

※変色や材質の硬化が確認された場合は、新しいものと交換してください。

カルプーレ[®]フィンガープロテクターの使い方

使用準備


※「フィンガープロテクター」は、カルプーレ専用です。

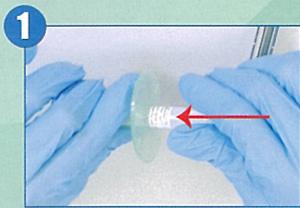


① ケースに入ったカルプーレ注射針側をフィンガープロテクターにセットします。



② “つまみ”部分を押さえないから、キャップを回し取り外します。

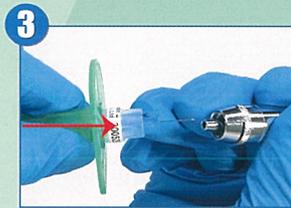

③ 注射器にカルプーレ注射針を装着します。

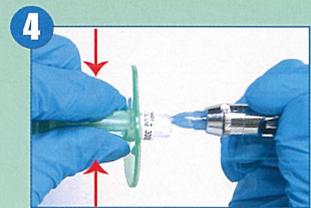


④ フィンガープロテクターの“つまみ”部分を押さえないからケースから取り外します(上下に軽く動かすと外しやすい)注射器を使用します。


注射針使用后



⑤ 使用後の注射針を、フィンガープロテクター内のケースに戻します。

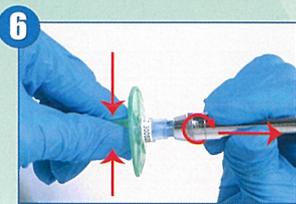

⑥ フィンガープロテクターの“つまみ”部分を押さえないから、注射針を注射器から取り外します。

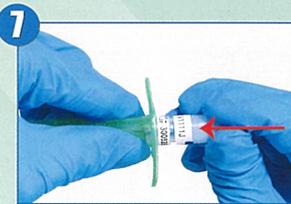


⑦ (バック針に注意しながら)キャップを元のケースに戻してください。



使用方法は、こちらからもご覧いただけます。

カルプーレ構成

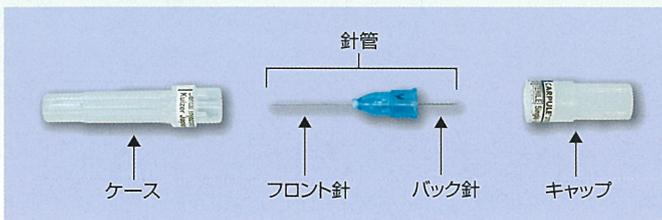

製品名 カルプーレ フィンガープロテクター
製品番号 66101272
内容量 5個入り

参考文献

- ※1. Y Iwamatsu-Kobayashi et al. A 19-year Study of dental needlestick and Sharp Injuries in Japan. Int Dent J. 2022 Jul 7;73:114-120.
- ※2. 小林謙一郎 歯科診療所における針刺し・切創とB型肝炎ワクチンの接種状況に関する調査. 環境感染誌Vol. 30 no.5, 2015
- ※3. McCarthy GM, Britton JE: A Survey of Final-Year Dental, Medical and Nursing Students: Occupational Injuries and Infection Control. J Can Dent Assoc 2000;66(10):561.

■ お問い合わせとご用命は…



■ 販売元

クルツァー ジャパン 株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷 4-8-13
TEL.03-5803-2151

www.kulzer.co.jp