

毎日の

正しいお手入れですっきり清潔

専用ブラシと

洗浄剤を使いましょう！



目に見える汚れは
専用ブラシと泡タイプ洗浄剤で
ブラッシング



着色汚れや細かい部分の汚れは
錠剤タイプ洗浄剤で浸けおき



ミントの香り
マウスピース・入れ歯用洗浄剤 **歯科用**
タブレットクレンジ
液性●弱アルカリ性
内容量●48錠
包装●1函

関連製品



ネイビー オレンジ

マウスピース・入れ歯用ブラシ **歯科用**
ブラッシュクレンジ
包装●1本



ミントの香り
泡の洗浄剤 歯科用
ホイップクレンジ
内容量●180mL(約240ブツユ分)
包装●1本
製造元
サラヤ株式会社
大阪府東住吉区深里2-2-8

※掲載内容は、2026年3月現在のものです。
※印刷の都合上、実物と多少色が異なる場合がございます。
※無断転載、無断複製を禁じます。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

株式会社 ジーシー お客様窓口 ☎ 0120-179418

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <https://www.gc.dental/japan/education/public>

詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。

発売元
株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号



Since 1921
100 years of Quality in Dental

義歯・マウスピース用錠剤タイプ洗浄剤

Tablet クレンジ
タブレット
クレンジ

5分の浸けおきで99.99%除菌※

口腔内装置のお手入れガイド



※すべての歯に効果があるわけではありません


PA144F2602

口腔内装置 (マウスピース・ナイトガード) 矯正用リテーナー・入れ歯)

のお手入れをされていますか？




きちんとお手入れをしないと...

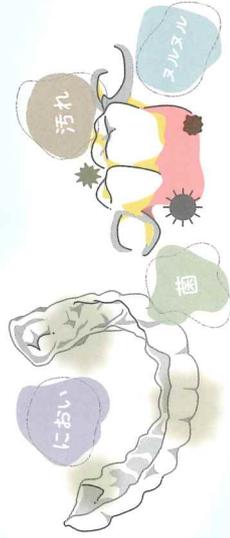

落とさきれない汚れや菌が積み重なる

誤ったお手入れをすると...

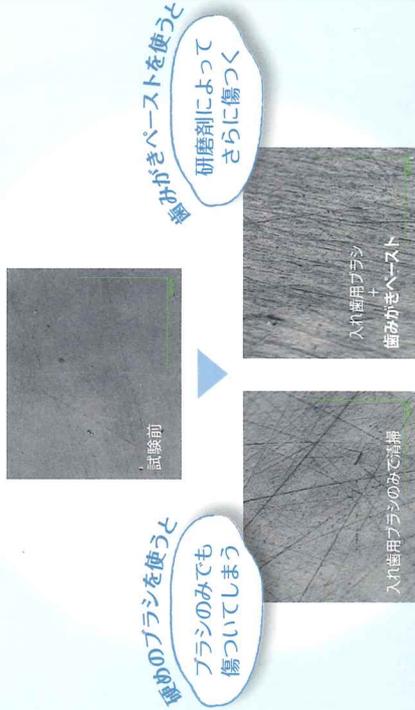

株式会社ジーシー試験結果

口腔内装置が傷つき汚れや菌がつきやすくなる

タブレットクレンジングでしっかり洗浄

5分の浸けおきで**99.99% 除菌***

口腔内装置に付着した、細菌・カビの一種・においの原因菌を除菌できます。

カンジダ菌にも対応

カンジダ菌

P.gingivalis菌

99.99% 除菌

肺炎桿菌

ペイロネラ菌

*全ての菌に効果があるわけではありません

隅々までしっかり洗浄

酵素の力でタンパク汚れを分解し、漂白洗浄成分がコーヒーやタバコのやなどの着色汚れをきれいに落とします。



マルチユース

防サビ剤配合により、幅広い口腔内装置に使用できます。



*詳しくは歯科医師、歯科衛生士にご確認下さい。

矯正用リテーナー

使い方

1 目に見える汚れをブラッシングで落とす



2 150mL~200mLのぬるま湯または水に1錠入れる



3 口腔内装置を洗浄液に5分浸す



4 流水ですすぐ

